



 **REAL® SPIDER**




**BRUKS- & VEDLIKEHOLDSMANUAL
REAL SPIDER**

Artikelnr 803436
Ändrad 111021
Giltig från 111101

REAL SPIDER er en arbeidsstol for personer med funksjonshemming.

REAL SPIDER er CE merket i henhold til:

SFS 1993:584 Swedish law of Medical Devices og LVFS 2003:11 Swedish Medical Products Agency norms for medical devices.

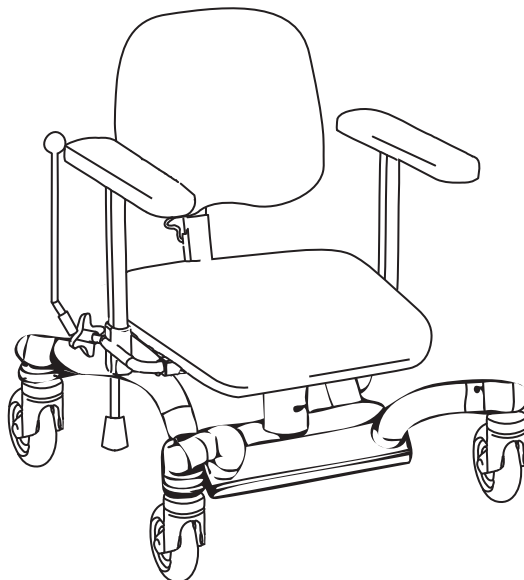

Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel +46 8 555 143 00
Fax +46 8 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se

INNHold

| | |
|-------------------------------------|--------|
| VIKTIG INFORMASJON & KLASSIFISERING | SIDE 2 |
| BLI KJENT MED DIN REAL SPIDER | SIDE 2 |
| INDIVIDUELL TILPASSING | SIDE 3 |
| BRUKERMANUAL | SIDE 4 |
| RENGJØRING, VEDLIKEHOLD OG LADING | SIDE 6 |
| GJENBRUK | SIDE 7 |

VIKTIG INFORMASJON & KLASSIFISERING

REAL-stolen har utskiftbare komponenter, tilbehør og funksjoner med innstillingsmuligheter for individuell tilpassing. Stolen skal kun brukes av den personen og til det formål den er ment for. Stolen er ment for innendørsbruk, og skal ikke utsettes for vann, andre væsker eller kjemikalier. Den skal heller ikke utsettes for høy varme, langvarig og intensiv solbelysning eller annen stråling. Stolen skal ikke utstyres med annet tilbehør eller komponenter enn det som er godkjent av Mercado Medic AB. For at CE merkingen skal være gyldig, er det ikke tillatt å gjøre spesialtilpassinger eller forandringer uten at det er godkjent av Mercado Medic AB. Reparasjoner og andre tekniske inngrep skal kun utføres av autorisert personale på NAV Hjelpemiddelsentraler eller hos Handicare AS, representant for Mercado Medic AB i Norge. Les denne bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk.

- REAL SPIDER tilhører beskyttelsesklasse II, Internt batteri.
- REAL SPIDER tilhører beskyttelsestype B.
- REAL SPIDER er EMC testet og godkjent iht. EN 60601-1-1 og EN 60601-1-2 og skal derfor håndteres iht. gjeldende bruks- og vedlikeholdsanvisning.
- Kopi av EMC sertifikat kan rekvireres hos Handicare AS.
- REAL SPIDER kan forstyrres av mobiltelefoner eller annet RF kommunikasjonsutstyr
- Maks. brukervekt: REAL SPIDER 50 kg.
- Stolen skal transporteres i original eske på pall. Lagres innendørs ved minst +10°C.
- Kun elektrisk utstyr fra Mercado Medic AB må brukes på REAL SPIDER.
- OBS! De elektriske funksjonene på REAL SPIDER-stolene må brukes maks. 10% av tiden (maks. 6 min/t). Hvis denne grensen overskrides, kan det oppstå skader på stolen.
- Dette symbolet advarer mot klemfare



GJØR DEG KJENT MED DIN REAL SPIDER

KONTROLLPUNKTER FØR BRUK

1. Juster armlener i ønsket høyde og lås rattet for høydejustering.
2. Monter ryggstolpen i ryggfestet og lås rattet for høydejustering av ryggstøtten.
3. Monter bremsespaken i festet (høyre eller venstre side). Gjelder ikke EL-brems.
4. Alle ratt og hendler må strammes før man setter seg i stolen.
5. Bremsen må alltid være på når man setter seg og reiser seg.
6. For å kunne bruke EL-funksjonene må den røde transportsikringen i ladeinngangen trekkes ut (gjelder EL-stol).
7. Lad stolen iht. vedlagte instruksjon før bruk første gang (gjelder EL-stol)

RETNINGSLINGER FOR INDIVIDUELLE TILPASSINGER AV MERCADO MEDIC AB'S PRODUKTER

Tilpassing av stolen kan foretas innenfor de intervall som finnes for justeringer på den aktuelle stolen.

Deler kan byttes iht. deleprogrammet til Mercado Medic AB.

Endringer av stolen utover dette, herunder bruk av deler fra andre leverandører enn Mercado Medic AB, er ikke tillatt uten godkjenning fra Mercado Medic AB, og vil innebære at CE merkingen ikke lenger er gyldig.

Ved spørsmål angående spesialtilpassinger kontakt Handicare AS:

Tlf.: 03250


E-post: kundesenter@handicare.no

BREMS


OBS! Stolen skal alltid ha bremsen på når man setter seg og reiser seg. Bremsen skal kontrolleres regelmessig. Ved slitasje byttes bremsefoten av gummi. Bremsefunksjonen kan være nedsatt på ujevnt underlag.

DET FINNES TRE TYPER BREMSER :


Bremsepedal (håndbrems), fotbrems og EL-brems.

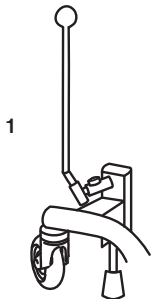


Bremsepedal (håndbrems)

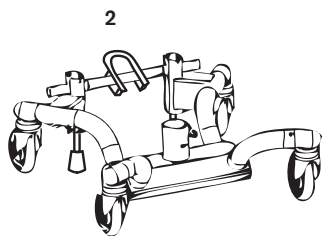


Fotbrems

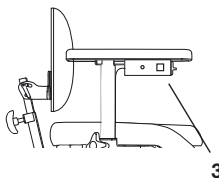

EL-brems
(tilbehør)

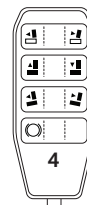

EL-brems som betjenes
med håndkontroll
(tilbehør)

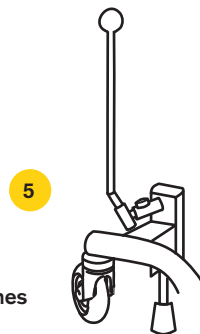

BETJENING


1. Brems, Før spaken bakover.
2. Brems, pedalen nedover
3. EL- brems, trykk på knapp
4. EL- brems, trykk på knapp
5. Bremsespakfestet - For å bremse stolen når armstøtten er breddejustert utover; løsne skruen på bremsepedalpakfestet med en 6 mm unbrako nøkkel, dra ut festet, fest skruen i neste hull og dra skruen hardt til med unbrakonøkkelen

SETEHØYDE/LØFTEENHET


DET FINNES TRE TYPER LØFTEENHETER :

Manuelt justerbar, gassfjær og EL. Det finnes standard- og lav setehøyde. Hendel for gassfjær kan plasseres under sete eller armlene. EL betjeningsboks er montert under armlenet.


OBS! Lette personer kan trenge hjelp til å heve og senke den gassfjærregulerte sitteenheten.

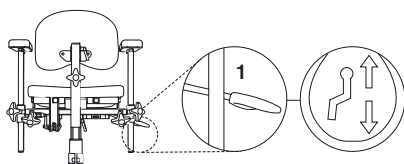


Hendel for gassfjær
plassert under sete
(tilbehør)

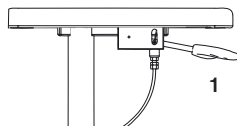


Hendel for gassfjær
plassert under armlene
(tilbehør)

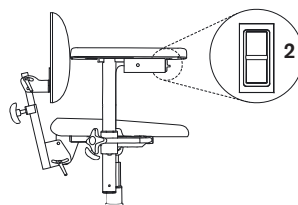

EL- betjening
(tilbehør)

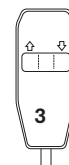

EL- betjening ved hjelp av håndkontroll
/joystick/fjernkontroll er tilbehør.
På bildet vises håndkontroll

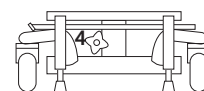

Manuelt justerbar

BETJENING

1. Setehøyde. Hendel for gassfjær – trekkes opp for å justere setehøyden, både opp og ned
2. Setehøyde. EL – trykkes henholdsvis opp/ned for å justere setehøyden opp/ned.
3. Setehøyde. EL – regulering med håndkontroll. Venstre knapp = setehøyden justeres opp. Høyre knapp = setehøyden justeres ned.
4. Åpne rattet, juster høyden, lås rattet.


SETETILT (TILVALG)

DET FINNES TRE TYPER SETETILT :


Sveiv, gassfjær og EL.

Hendel for gassfjær kan plasseres ved setets venstre bakkant eller under armstøtten. EL-reguleringen er montert under armlene.


Standard tiltintervall er +15°/-8°.

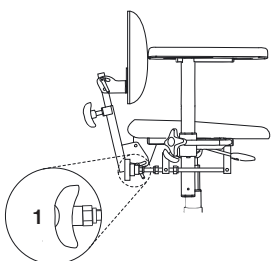


Betjening
med sveiv

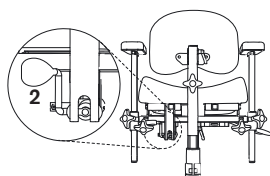


Hendel for gassfjær plassert
under sete

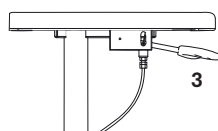

Hendel for gassfjær plassert
under armlene

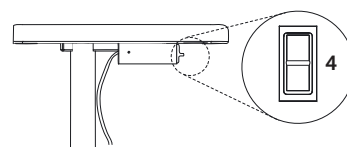

EL-betjening

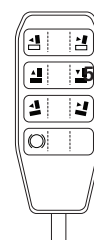


EL-betjening med
håndkontroll

BETJENING

1. Setetilt. Manuell betjening med sveiv
- 2 og 3. Setetilt. Manuell betjening med gassfjær – Hendel trekkes opp for setevinkelregulering bakover og fremover
4. Setetilt. EL – trykkes henholdsvis opp/ned for å justere setevinkelen henholdsvis fremover/bakover
5. Setetilt. EL – for regulering med håndkontroll Venstre knapp = fremover Høyre knapp = bakover.

OMVENDT VINKLING ELLER ALL VINKLING BAKOVER (TILBEHØR)

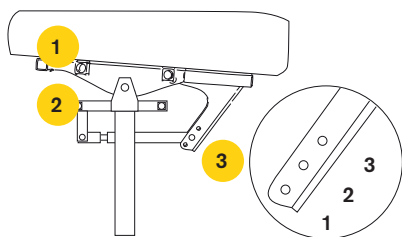

MULIGHETER

1. Når armlenet er plassert her, følger det setevinkelen
2. Når armlenet er plassert her følger det ikke setevinkelen
3. Det finnes 3 muligheter for setevinklingen.

VED VALG AV NR. 3 MÅ STOLEN UTRUSTES MED STATIVFORLENGER.


1. 15° fremover, 8° bakover - Standard setevinkling
2. 8° fremover, 15° bakover - Omvendt setevinkling
3. 0° fremover, 23° bakover - All setevinkling bakover

RYGGMEKANISME

DET FINNES TO TYPER AV RYGGMEKANISMER :

Standard og Medic.

Alle finnes til både lav og høy rygg (illustrerte stoler under har alle lav rygg). Alle ryggmekanismer har separat regulering for høyde, dybde og vinkel. Medicmodellen har et utvidet intervall for dybdejustering.

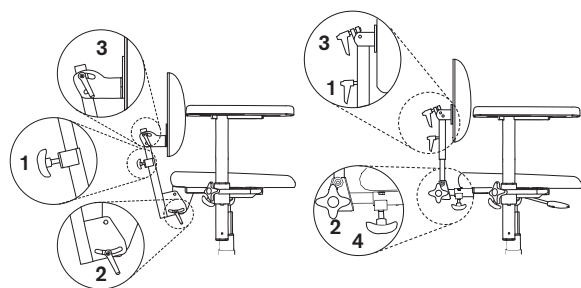

Standard

Medic (tilvalg)


JUSTERINGER

1. Høyde
2. Vinkel på ryggmekanismen
3. Vinkel på ryggstøtten
4. Dybde

ARMSTØTTE

JUSTERINGER

1. Høydejustering
2. Breddejustering

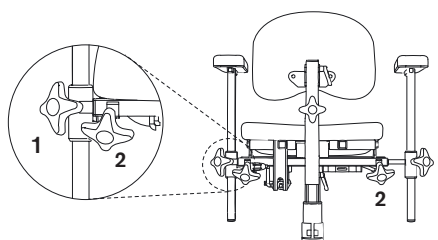

Standard

Stolen skal tørkes av og holdes ren for støv og skitt.

Plysj stoffet vaskes med skumvask.

1. Fjern løs skitt, smuler o.l..
2. Påfør et tynt lag med skum, gni skummet jevnt over stoffet med en fuktig klut.
3. Tørk over med en ren og lett fuktet klut.
4. Støvsug godt når alt er tørket.

Kunstlær vaskes med såpevann, eller tørkes over med en spritholdig væske, f.eks. et desinfeksjonsmiddel.

Sete, ryggstøtte og andre stoppede detaljer er av funksjonelle årsaker ikke produsert i et tett materiale (vanntett/vannavvisende).

Av hygieniske årsaker skal alle stoppede detaljer også byttes ut ved gjenbruk.

Den elektriske løfteenheten skal regelmessig kontrolleres i forhold til støv, skitt og stabilitet: Kjør opp setet i høyeste posisjon. Gjør rent med en klut. Man kan ikke bruke vann eller noen former for løsningsmidler. Smør deretter inn sylindere med et tynt lag med teflon- eller silikonbasert smørefett.

Vi anbefaler å bruke Batterilader REAL 9000 Type 2240-12V med art.nr 802289 for å lade stolen. Kontakt Handicare AS for å motta en skriftlig godkjenning ved ønske om å benytte en annen batterilader. Lading av batteriet bør skje regelmessig, om mulig en gang pr. døgn. Det er viktig for batteriets levetid at det aldri blir helt utladet.

LADING (GJELDER EL-STOL)

Koble ladepluggen på laderen til ladekontakten (1) på boksen der bryteren for å heve og senke setet er plassert. Koble deretter laderen til en stikkontakt. Lysdioden på laderen indikerer at lading skjer. Når lysdioden endrer farge fra oransje til grønn er batteriet ferdigladet. Det går ikke an å heve eller senke stolen mens lading pågår.



OBS!

Lading av batteriet er spesielt viktig på de stolene som har EL-brems, EL-vinkling og EL-rygg da funksjonen krever høy batterikapasitet for ikke å miste funksjonen. Sikre funksjonene ved å lade batteriet en gang i døgnet. Ved bytte av batteri (Typebetegnelse: HP7-12 12V 3.4Ah), vær nøye med at rødmerket batterikabel festes til pluss-polen på batteriet, og minus kabelen til minus-polen.

Hvis stolens elektriske funksjon opphører å fungere, er det sannsynligvis en sikring som har gått. Kontroller sikringene. De er plassert under setet, på ledningen mellom batteriet og aktuator. Erstatt gammel sikring med en ny 25 A sikring.

TENK PÅ FØLGENDE VED HÅNTERING AV BATTERIER:

Kortslutt aldri batteriet • Utsett ikke batteriet for kraftig støt eller åpen ild. • Ved kontakt med batterisyre, skyl med vann i ca. 30 min. Kontakt lege • Brukte batterier skal leveres på miljøstasjoner.

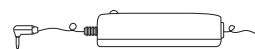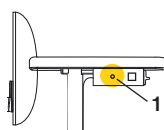

Lader art. nr. 802289

FORHANDLER I NORGE



handicare

Telefon 03250
www.handicare.no



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel +46 8 555 143 00
Fax +46 8 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se