



Pro™ Leposide

Pro™ Leposide on suunniteltu potilaan jalan tai käden sitomiseen sellaisissa tilanteissa, joissa potilaan tai hoitohenkilökunnan turvallisuus tai hoitotyö sitä edellyttää.

Pro™ Lepositeen pehmeällä hygieniakankaalla varustettu kiristysosa kiinnitetään tarralla tukevasti ranteen tai nilkan ympärille. Hihnat voidaan sitoa esimerkiksi sängyn rakenteisiin. Pro™ Leposide myydään kahden kappaleen settinä.

Käyttötarkoitus- ja ympäristö

Hoidon tukeminen psykiatrisen terveydenhuollon ja kehitysvammaisten terveydenhuollon sekä vastaavissa vaativan terveydenhuollon ja kotihoidon ympäristöissä.

Psykiatrisen terveydenhuollon ja kehitysvammaisten terveydenhuollon sekä vastaavat vaativan terveydenhuollon ja kotihoidon ympäristöt.

Käyttäjäprofiilit ja kohdepotilaat

Tuotteen käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallikko.

Kohdepotilaat edellä mainituissa ympäristöissä, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt tarpeen hoidon tuelle sekä arvioinut lääkkinnällisen laitteen potilaalle ja kyseiseen hoitotilanteeseen soveltuvaksi.

Mitat ja paino

- 8 x 30 cm, hihnat 2 m – 122 g (pari)

TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero	60PRB
Materiaali	Kangas ja sisus: PES Tarrat: PA
Takuu	Yhden (1) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat materiaalivirheistä tai valmistuksesta.

HOITO-OHJEET

Pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella sekä useimmilla desinfektioaineilla. Eritetahapuhdistuksessa käytetään happeen perustuvia desinfiointiaineita (pH 5-9). Syövyttävien aineiden käyttöä ei suositella. Vahvasti emäksisen KloraminT-liuoksen maksimipitoisuus on 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm. Spriipohjaisten liuosten tehoainepitoisuus saa olla 60-80 % (pH~10). Muista riittävä huuhtelupyyhinta ja kuivaus.

Tuote voidaan pestä pesukoneessa. Käytä pesupussia Kuumadesinfointi on mahdollinen 70 °C:ssa 10 minuutin ohjelmalla tai 95 °C:ssa. Suosittelemme esipesua 40 °C:ssa ennen kuumadesinfointia.

