

# Støtتهåndtak FLEQSI



Støtتهåndtak FleQsi gjør forflytning inn og ut av seng enkel. FleQsi glir på en aluminiumskinne og kan plasseres langs hele sengen uten å være avhengig av faste fikseringspunkter. Den vil derfor alltid være riktig plassert i forhold til brukerens behov.



# FLEQSI



Støtتهåndtak FleQsi kan plasseres vinkelrett mot sengen, for å forenkle forflytning inn og ut av sengen.

## Funksjon

Støtتهåndtak FleQsi glir på en skinne som enkelt monteres på sengen (OBS! Skinne må bestilles separat). Støtتهåndtaket kan plasseres langs nesten hele sengen uten å være avhengig av faste fikseringspunkter. Den vil derfor alltid være riktig plassert i forhold til brukerens behov. Støtتهåndtak FleQsi kan plasseres vinkelrett mot sengen, for å forenkle forflytning inn og ut av sengen. Plasseres på høyre eller venstre side og kan brukes sammen med integrerte sengegrinder.

Enkel montering uten verktøy.

## Rengjøring

Samtlige flater kan rengjøres med vanlige rengjørings- og desinfeksjonsmidler.

## Norm

Benyttet sammen med ComfortSystems senger oppfyller FleQsi relevante krav i sengenorm EN1970.

### SPESIFIKASJONER

Maks belastning	75 kg
Yttermål, BxH	25x30 cm
Vekt	2,5 kg
Materialer	Pulverlakkert stål og aluminium



handicare

Telefon 03250  
www.handicare.no