

BRUKERMANUAL

QURIR



Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen måte, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Handicare AS. Dette gjelder også for de tilhørende tegningene og skjemaene.

Denne brukerveiledningen gjelder for heisens standardmodell. Handicare AS's ansvar bortfaller dersom det gjøres endringer eller tilpasninger som ikke på forhånd er skriftlig avtalt med Handicare AS.

Vennligst kontakt Handicare AS for opplysninger vedrørende justering, vedlikehold eller reparasjoner.

INNHold

1. Introduksjon
2. Leveranse
3. Sikkerhetsinstruksjoner
4. Monteringsanvisning
5. Bruksområde
6. Bruksanvisning
7. Rengjøring
8. Tekniske spesifikasjoner

Produsent:

ComfortSystem AB
Box 4034
561 04 Husqvarna
Sverige

Leverandør:

Handicare AS
Vålerveien 159
1501 Moss
Tlf: 03250
www.handicare.no

For service; kontakt Handiacre

1. Introduksjon

Qurir benløfter tilvirkes i Sverige etter kvalitetsnormer og produsenten er sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001. Hvert eneste produkt testes på fabrikk før det leveres ut.

- NB!** Benløfteren Qurir er utprøvd på ComfortSystem sitt sengesortiment. Om montering skjer på andre senger skal det foreligge godkjenning av produsent eller leverandør.
- NB!** Før benløfteren tas i bruk må bruksanvisningen leses nøye. Benløfteren skal bare brukes i henhold til instruksjonene. Ved avvik av dette er ikke produsenten ansvarlig for feil eller skader som måtte oppstå. Det er derfor viktig at bruksanvisningen alltid oppbevares på et dertil egnet sted og at den er lett tilgjengelig.
- NB!** Benløfteren kan brukes av pasient/bruker alene eller under oppsyn/hjelp av pleiepersonell.
- OBS!** Grunnleggende opplæring skal foretas av produsent, leverandør eller annen autorisert person. Opplæringen skal bekreftes med en protokoll.

2. Leveranse

Leveransen inneholder følgende:

- Qurir Benløfter
- Mykt og vattert benseil
- Løftebånd
- Transformator og elektronikk montert med feste
- Håndkontroll med ledning

- NB!** Før benløfteren tas i bruk skal det sjekkes at forsendelsen er uskadd og at leveransen stemmer overens med pakkeseddelen. Alle uregelmessigheter skal snarest meldes og eventuelt dokumenteres. Alle mangler skal umiddelbart meldes til speditor eller leverandør.



3. Sikkerhetsinstruksjoner


- NB!** benløfteren må ikke utsettes for mer belastning utover den oppgitte maksimalbelastning.
- NB!** Benløfteren må ikke benyttes dersom det er oppdaget feil eller mangler som kan være farlige for pleier, bruker, tredjepart eller produktet selv.

- NB!** Personalet skal instruere bruker i bruken av benløfteren.
- NB!** Før benløfteren tas i bruk skal det sjekkes for eventuell feil, skader eller mangler.
- NB!** Benløfteren må bare brukes av de som er mentalt eller fysisk i stand til å bruke den.
- NB!** Benløfteren må bare repareres med originaldeler. Dersom uoriginale deler benyttes, frafaller produsenten og leverandørens ansvar.
- NB!** Vask og vedlikehold av benløfteren i henhold til instruksjonen.

4. Monteringsanvisning

Montering av benløfteren:

I alle ComfortSystem sine senger finnes det et tilbehørsfeste i alle fire hjørner av sengen. Benløfteren Qurir passer i disse hullene og monteres helt uten verktøy. Plasser fotløfteren i ett av hullene i fotenden på sengen. Siden løfteren løfter diagonalt over sengen, skal benløfteren settes på motsatt side av der brukeren setter seg ned.

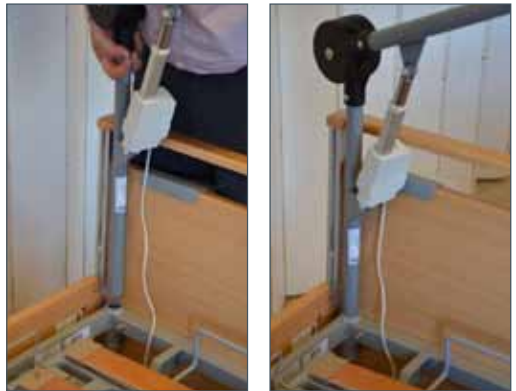

Montering av elektronikk og transformator:

Elektronikkboksen kan monteres/henges enten på sengens endegavl, i fotenden, eller på sengens metallangside.

Alternativ 1: Heng elektronikkboksen med festet på gavlen slik at den henger under gavlens overligger.

Pass på at ikke ledningen ligger i veien for daglig rengjøring. Sett den 220V kontakten i vegguttaket.

Alternativ 2: Heng elektronikkboksen med festet på sengens metallangside.

Heng boksen på samme side som benløfteren er montert for å unngå unødvendig drag på ledningen. Sett den 220V kontakten i vegguttaket.

Kontakten fra håndkontrollen settes i elektronikkboksen. Pass på slik at den monteres uten at stiften skades.

Montering av løftebåndet og benseilet:

Ta løftebåndet og tre det igjennom løkkene på benseilet. Fest så løkkene på løftebåndet i festekroken i enden av løftearmen. Pass på at ikke løftebåndet er tvinnet og sjekk en ekstra gang at løftearmen er ordentlig lukket og låst.

5. Bruksområde

Benløfter Qurir er konstruert for å underlette for brukere og pleiepersonell i hjemmemiljø og på institusjon.

NB! Produktet skal kun brukes i normal innemiljø med temperatur intervall på +10 til +40 grader.

NB! Produktet får kun benytte deler og tilbehør godkjent av produsent.

NB! Ved bruk av benløfter Qurir kan det forekomme en viss risiko for vridning i hoften. For å unngå dette anbefales å bruke en myk dreieskive, TurnTable soft, under sete ved forflytning. Bruk av silkelaken eller liknende vil også gi økt friksjonsminskning under sete og vil være med på å avlaste for denne vridningen.

6. Bruksanvisning

Senk ned benseilet til gulvet ved å trykke på håndkontrollens nedover pil. Om mulig er det lurt å plassere friksjonsminskning under rumpen for å unngå vridning i hoften under løftet. Bruker skal sitte litt på skrå på sengekanten med føttene plassert i benseilet slik at hælene kommer ca. 5cm inn på seilet. Kjør opp ryggstøtten på sengen om mulig for ekstra støtte til magen under løftet. Pass på å sitte høyt nok opp i sengen slik at ikke føttene sparker inn i endegavlen. Trykk på håndkontrollens oppover pil og hev løftearmen slik at føttene løftes hele veien opp fra gulvet og inn i sengen. Frigjør føttene fra benseilet når de har kommet ordentlig på plass.



I tillegg til løfting av tunge bein opp i sengen, kan benløfter Qurir også brukes i andre momenter.

Fotpleie: Når bruker ligger i sengen, kan benseilet plasseres lengre opp på leggen slik at foten frigjøres. Benløfteren heves til riktig høyde for både bruker og pleier slik at fotpleie kan utføres i en god posisjon.

Omlagging av sår: Plasser benseilet på passende område på beinet slik at området med sår blir frigjort og løftes opp fra underlaget.

Avlastning av heler: Benløfter Qurir kan brukes for å avlaste trykket mot helene i en kort periode

Redusere hevelse: Om bruker har hevelse i føtter, ankel eller legg, kan benløfter Qurir enkelt løfte føttene for avlastning.



7. Rengjøring

Samtlige overflater kan rengjøres med vanlig rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Benseilet og løftebåndet kan vaskes i maskin på 60 grader. Husk å ta ut støtte-skinnene i seilet før vask.

8. Tekniske spesifikasjoner

Lengde på løftearm	ca 100 cm
Lengde på løftebånd, std	ca 50 cm
Løftehøyde	ca 95 cm
Vekt	7,5 kg
Motorsystem	lavvoltage, 24V



handicare

Handicare AS
Vålerveien 159
Postboks 163
1501 Moss

Tlf: 03250
Faks: 85 02 88 22
post@handicare.no
www.handicare.no

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av brukermanualen. Den kan du finne på vår hjemmeside www.handicare.no