

BRUKERMANUAL

SPECIALTOALETT CLOS-O-MAT

PALMA LIMA & LIMA VITA



handicare

Vi gratulerer deg med valget av dusj og føntoalett. Du har bestemt deg for originalen Clos-O-Mat som vi tror du kommer til å sette pris på i mange år. Den første modellen av Clos-O-Mat ble introdusert i 1957 av den sveitsiske oppfinneren Hans Maurer. Produktet har siden blitt viden kjent og fått mange fornøyde brukere.

Clos-O-Mat har utvikles til den mest teknisk fullverdige og slitesterke dusj og føntoalettet på markedet i dag, det betyr at den kommer til å fungere akkurat som du forventer i mange, mange år fremover.


Før du tar i bruk ditt nye Clos-O-Mat dusj og føntoalett anbefaler vi at du leser denne bruksanvisningen nøye. Du vil få et godt innblikk i produktets fordeler samtidig som du forsikrer deg at du bruker den på rett måte.

Slik fungerer Clos-O-Mat

Ved bruk som vanlig toalett:

Stå (eller reis deg opp om du sitter) og trykk inn en av bryterne plassert på sidene av sisternen.


Spylningen vil da være som på et helt vanlig toalett

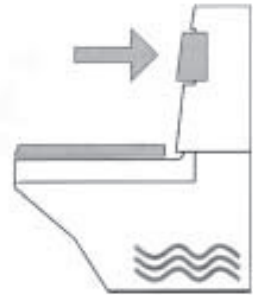

Nedspylning og varmtvannsdusj:

Bli sittende på ringen og trykk inn en av bryterne (designet for bruk av albuen) og hold den inne så lenge du ønsker å bli dusjet med temperert vann.

Dusjfunksjonen kan også forhåndsinnstilles til å aktiveres med en en-trykksfunksjon, kan da stilles inn til å dusje fra 4 til 60 sekunder.

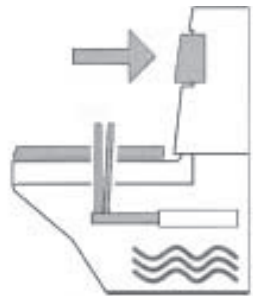


Fønfunksjonen:

Slipp bryteren og fønfunksjonen starter automatisk.

Den avsluttes automatisk ved at du reiser deg opp fra ringen eller slutter etter 3 minutter.

Varmlufttørkingen kan også forhåndsinnstilles til å aktiveres med en en-trykksfunksjon, kan da stilles inn til å tørke fra 30 til 470 sekunder.

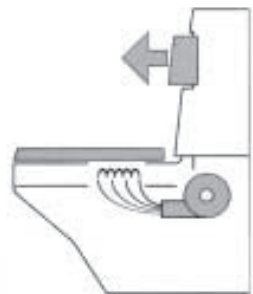

Stående

Stående, altså uten å belaste sitteringen, fungerer nedspylningen som på et helt vanlig toalett ved å trykke høyre eller venstre bryter. Det betyr at Clos-O-Mat alltid kan brukes som et vanlig toalett om det skulle ønskes, eller om det skulle bli strømstans.

Nedspylningsfunksjonen er helt mekanisk og er ikke avhengig av strøm for å fungere.

Sittende

Når man sitter på sitteringen er trykkbryterne aktivert og toalettet fungerer som et dusj og føn toalett. Når man er ferdig trykker du inn, og holder inne en av albuebryterne.


Da aktiveres nedspylingen og dusjfunksjonen starter. Dusjmunnstykket kommer automatisk ut av sin totalt beskyttede plassering og dusjer deg mykt og grundig ren med kroppstemperert vann. (Kan stilles inn etter ønske). Du skal holde bryteren inne til du kjenner vannet blir litt svalere. Det første varme vannet rengjør og åpner hudporene, og når vannet blir svalere, lukkes porene igjen og du er ren. I tillegg til den oppfriskende effekten viser det seg at denne vannmassasjen, som er anbefalt av mange leger, har god påvirkning på blodsirkulasjonen.

Dusjfunksjonen kan også forhåndsinnstilles til å aktiveres med en en-trykksfunksjon, kan da stilles inn til å dusje fra 4 til 60 sekunder.

Når du slipper albuebryteren avsluttes dusjfunksjonen og dusjmunnstykket trekkes tilbake automatisk. Samtidig starter varmlufttørringen og pågår i 3,5 – 4,5 minutter, tiden kan forhåndsinnstilles. Varmluften stopper automatisk om du reiser deg opp fra toalettet eller om man trykker inn albuebryter en gang. Varmlufttørringen kan også forhåndsinnstilles til å aktiveres med en en-trykksfunksjon, kan da stilles inn til å tørke fra 30 til 470 sekunder.

Det bør nevnes at selv om man sitter ut hele tørketiden blir man aldri helt tørr på et dusj og føn toalett. Av medisinske årsaker bør man ikke bli helt tørr i endetarm og underliv.

Innstillinger for dusj og viftefunksjon

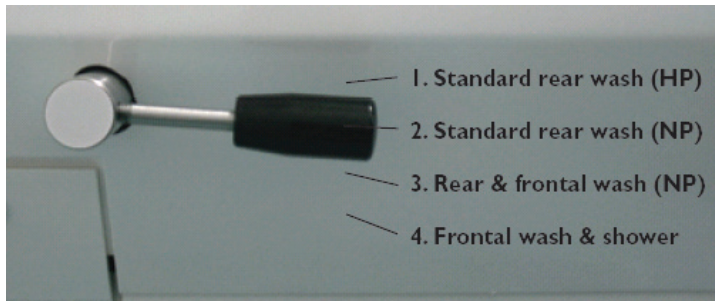

Multifunksjonsdusj for kvinner og herrer:

1. Hendel i øverste posisjon: Standard vask bak med økt vanntrykk (Menn og kvinner)
2. Hendel ett hakk ned: Standard vask bak med normalt vanntrykk (Menn og kvinner)
3. Hendel to hakk ned: Vask bak og foran med normalt vanntrykk (Kvinner)
4. Hendel tre hakk ned: Vask foran med normalt vanntrykk. (Kvinner)

Noen viktige råd

Funksjon

Dusjfunksjonen fungerer kun når strøm er tilkoblet, hovedbryteren er slått på, vannkranen er åpen og siteringen er aktivert. Dessuten må en av trykkbryterne aktiveres.

Ønsker du en annen styrke på vannet på dusjfunksjonen eller vanntemperatur, kan dette justeres etter ditt ønske av en servicetekniker.

For individuelle behov kan vi tilby et bredt utvalg av tilbehør. Bl.a pneumatisk bryter for fot/hånd, fotocellebryter eller en ryggplate i stedet for albuebrytere. Videre finnes det forhøyingssockler i flere høyder, siteringer i myk gummi, armlener og hev og senk mulighet.

Spesielt stolte er vi av sortimentet av barnetilpasset tilbehør som vi er alene om å tilby i markedet for dusj og føn toaletter.

Pass på:

- Om du behøver å inspisere dusjfunksjonen, bruk en beskyttelsesplate eller hånden mot vannstrålen.
- Stikk aldri hodet ned i toalettskålen.
- Bruk aldri Clos-O-Mat til annet bruk enn det beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Etter operative inngrep eller ved blødende sår i endetarm eller underliv skal man unngå dusj og føntoaletter til såret har grodd skikkelig. Rådfør med lege.
- Barn bør ikke forlates uten oppsikt på en dusj og føntoalett.
- Harde objekter skal ikke kastes i toalettskålen. Heller ikke sanitetsbind, bomull eller andre objekter som kan forårsake at avløpet tettes.

Vedlikehold og rengjøring

Clos-O-Mat rengjøres som et vanlig toalett. Ved lang tids opphold av bruk, som for eksempel ved lengre ferier og lignende anbefaler vi at hovedbryteren til toalettet slås av. Når du skrur den på igjen, tar det ca 4 minutter til toalettet er klart til bruk.

Ikke bruk "wc-deodoranter" ved toalettanten eller i sisternen.

Vi anbefaler alle mannlige brukere å sitte ved urinering. Det sikrer at varmluftsåpningen ikke blir utsatt for unødvendig tilgrising.

Varmluftåpningen kan imidlertid enkelt rengjøres med vann og egnet børste. Om det mot formodning skulle begynne å lukte fra varmluftsviften er det på høy tid med en rengjøring.

Sitteringen og alle plastdekslene er lakkerte med 2-komponentlakk.


Disse rengjøres enkelt med en fuktig klut eller svamp med vanlig rengjøringsmidler.

Det automatiske dusjmunestykket er designet slik at det ikke skal bli skittent, både i hvileposisjon og under bruk. Noe spesiell rengjøring av dette er derfor ikke nødvendig.

Skulle du til tross for dette ønske å rengjøre eller inspisere munnstykket, se instruksjon på neste side.

Rengjøring av dusjmunnstykke

- Ta av dekselet nede på venstre side. På lokket sitter det et spesialverktøy til dusjmunnstykket.
- Ta ut spesialverktøyet og før inn den spisse enden (Se illustrasjon 1) under dusjmunnstykket.
- Trekk ut dusjmunnstykket. (2) Trekk til du kjenner dusjmunnstykket stopper. (fjærbelastet) Hold fast dusjmunnstykket med den ledige hånden.
- Snu nå spesialverktøyet og plasser det i sporet i overkant på dusjmunnstykker (3) Munnstykket er nå låst i ytterste posisjon og det renner vann i dusjmunnstykkets åpning.
- Rengjør dusjmunnstykket.
- Hold dusjmunnstykket med en hånd og ta bort spesialverktøyet. Slipp munnstykket langsomt tilbake til opprinnelig posisjon.
- Sett spesialverktøyet tilbake og sett på dekselet nede på venstre side.

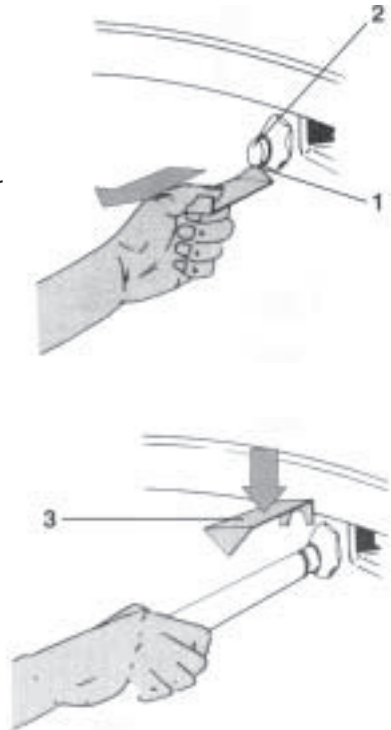

Pass på

- Bruk aldri slipende rengjøringsmidler. Hev toalettsetet om du rengjør med kalkløsningsmidler i toalettskålen.
- Damprengjøring skal ikke utføres på Clos-O-Mat.
- Andre deler enn toalettskålen skal ikke rengjøres med rennende vann.
- Toalettkåpen/hoved-dekslene skal kun fjernes av fagpersonell, under disse ligger elektronikken og spenningsforsyningen.

Feilsøking

Om dusjfunksjonen ikke virker

- Kontroller at strømbryteren er på.
- Kontroller at sikringen er hel.
- Kontroller at jordfeilbryteren ikke er utløst.
- Kontroller at det kommer vann inn i sisternen.
- Om dette ikke retter problemet, kontakt Handicare AS på tlf. 03250.

Energiforbruk

Energiforbruket på en Clos-O-Mat er ca 0,8 kWh pr. døgn ved ca 6 bruk pr. døgn.



handicare

Handicare AS
Vålerveien 159
Postboks 163
1501 Moss

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av brukermanualen. Den kan du finne på vår hjemmeside www.handicare.no

Tlf: 03250
Faks: 85 02 88 22
post@handicare.no
www.handicare.no