


BRUKERMANUAL

COMBI ALPHA

Dusj- og toalettstol



Vennligst les bruksanvisningen før produktet tas i bruk.

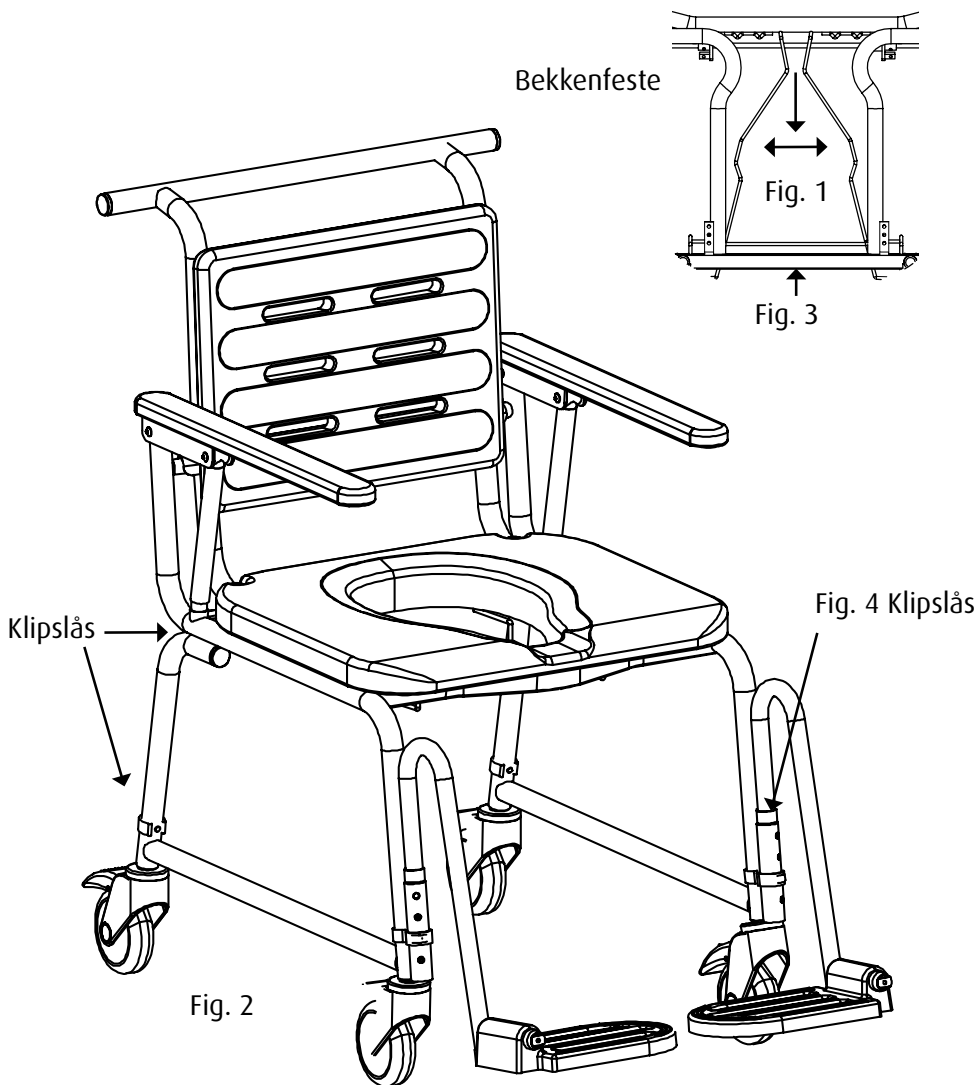

Bruksområde

Combistolen har mange bruksmuligheter. Stolen kan brukes både som toalett og dusjstol da den er laget i rustfrie materialer. Den kan også brukes til innendørs transport. Armlenet kan slås opp hvilket er en stor fordel hvis brukeren skal flyttes til eller fra annet møbel.

Combistolen egner seg godt for personer som har behov for hjelp under toalettbesøk og personlig hygiene. Sete, rygg og armlener er laget i sort polyurethan. Materialet er mykt, behagelig og reduserer risikoen for at brukeren skal gli ut av stolen.

Montering– se skisse

Klipsene som sitter i understellet tas ut og rygglenet settes i hullene på understellet bak setet. Klipsene settes tilbake, sørg for at de trykkes helt inn. Dersom stolen ikke kan kjøres helt inn over toalettet, pga. en spesiell susterne, kan rygglenet tas av. Bekkenfestets to tynne deler (fig.1) stikkes inn i hullene bak på den forreste tverrgående del av understellet (fig.2).

Deretter trykkes den motsatte ende av bekkenfestet ned på den bakerste tverrgående del av understellet (fig.3). Bekkenfestet kan sløyfes hvis det ikke skal brukes bøtte eller bekken. Hvis hjulene tas av er det viktig at de monteres korrekt igjen.

Fotstøtten: Flytt klipsen (fig.4) som utgangspunkt til det nest nederste hullet i holderen. Monter deretter fotstøtten på stolen ved å sette den ned i holderen.

Tilpasning/bruk:

Dusj- og toalettstolen kan innstilles i forskjellige høyder ved hjelp av klipslåser på hvert ben. Klipsene tas ut og ønsket posisjon velges. Vær oppmerksom på at alle fire ben innstilles i samme høyde og at alle fire klips trykkes helt inn i stålrøret igjen.

Vedlikehold

Tørkes av etter bruk for å redusere kalkavleiringer. Vaskes med vanlige rengjøringsmidler uten slipende eller etsende virkning.

Vasketemperatur maks 85°C, tåler høytrykkspyling.

Sete og rygg og bekkenfeste kan tas av og rengjøres.

Husk å løfte den bakerste delen opp før de to tynne delene tas ut av hullene.

Vær oppmerksom på at delene monteres korrekt igjen.

Viktig

- Maksimal belastning: 150 kg.
- Det anbefales å låse hjulene når stolen ikke brukes til transport, og alltid når brukeren reiser seg eller setter seg i stolen.
- Når bekkenfestet demonteres, skal man løfte opp den bakerste delen før de to tynne delene tas ut av hullene.
- Kontroller regelmessig at klipsene er i god stand og sitter riktig.
- Hvis hjulene tas av er det viktig at de monteres korrekt igjen.

Innholdet i denne brukerveiledningen er kun ment som informasjon. Denne informasjonen kan endres uten forvarsel og må derfor ikke oppfattes som forpliktelser fra Handicare AS. Handicare AS påtar seg intet ansvar, juridisk eller økonomisk, for eventuelle feil eller unøyaktigheter som kan finnes i denne brukerveiledningen. Alle produktene som er nevnt i denne brukerveiledningen, er registrerte varemerker og kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten samtykke fra Handicare AS.



handicare

Handicare AS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av brukermanualen. Den kan du finne på vår hjemmeside www.handicare.no/bolig

Tlf: 03250
Faks: 69 24 45 00
post@handicare.no
www.handicare.no