

BRUKERMANUAL

DUSJKRAKK KULAN HR/UR



Bruksanvisning Dusjkrakk Kulan HR/UR

Dusjkrakk Kulan er laget i 100% rustfri helsveiset konstruksjon i hvit, slitesterk pulverlakk. Sete i grå, formblåst PE-plast som gir en myk, varmeisolerende effekt. Setet fjernes enkelt ved rengjøring. Doppskoene er laget i TPE, en myk plast som gir god friksjon mot gulvet.

Leveres med helt sete (HR) eller intimsete (UR).




Bruksområde

Dusjkrakk Kulan HR/UR kan brukes i toalett eller baderom samt at den egner seg godt der det er liten plass.

Den kan brukes til å sitte på foran håndvasken eller inne i dusjen/dusjkabinettet.

Montering – Se skisse

Dusjkrakken kan stilles inn i setehøyde 45 – 55cm ved hjelp av klipselåser på hvert ben. Klipsene tas ut og ønsket posisjon velges. Pass på at alle fire ben stilles innstilles i samme høyde og at alle fire klips trykkes helt inn i stålørret igjen.

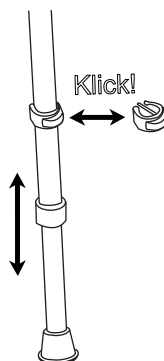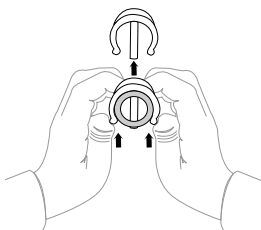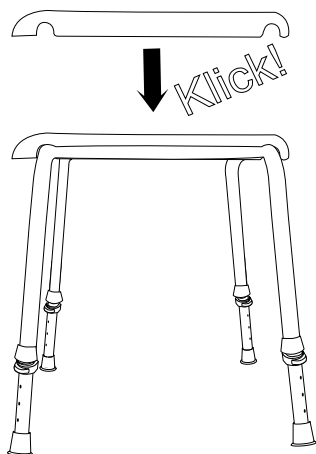

Vedlikehold

Tørkes av etter bruk. Vasketemperatur maks 85 grader celsius, kan høytrykks-pyles.

Bruk vaskemidler uten slipende virkning.

Viktig

Maksimal belastning 130 kg.

Kontroller at klipslåsene sitter korrekt før bruk.

Kontroller regelmessig at klipsene er i god stand og sitter riktig.

Når brukeren sitter på krakken, må denne ikke skyves eller dras bortover gulvet.

For optimal sikkerhet anbefales det å kontrollere doppskoene jevnlig og skifte ved behov.

Tekniske spesifikasjoner

Sete størrelse D40xB43 cm

Høyderegulerbar 45-55 cm

Vekt 3,3 kg

Maks brukervekt 130 kg

Kartong 4 stk



handicare

Handicare AS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss

Tlf: 03250
Faks: 85 02 88 22
post@handicare.no
www.handicare.no

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av brukermanualen. Den kan du finne på vår hjemmeside www.handicare.no/bolig