



Bruksanvisning

# Uni

Dusjkrakk og dusjstol

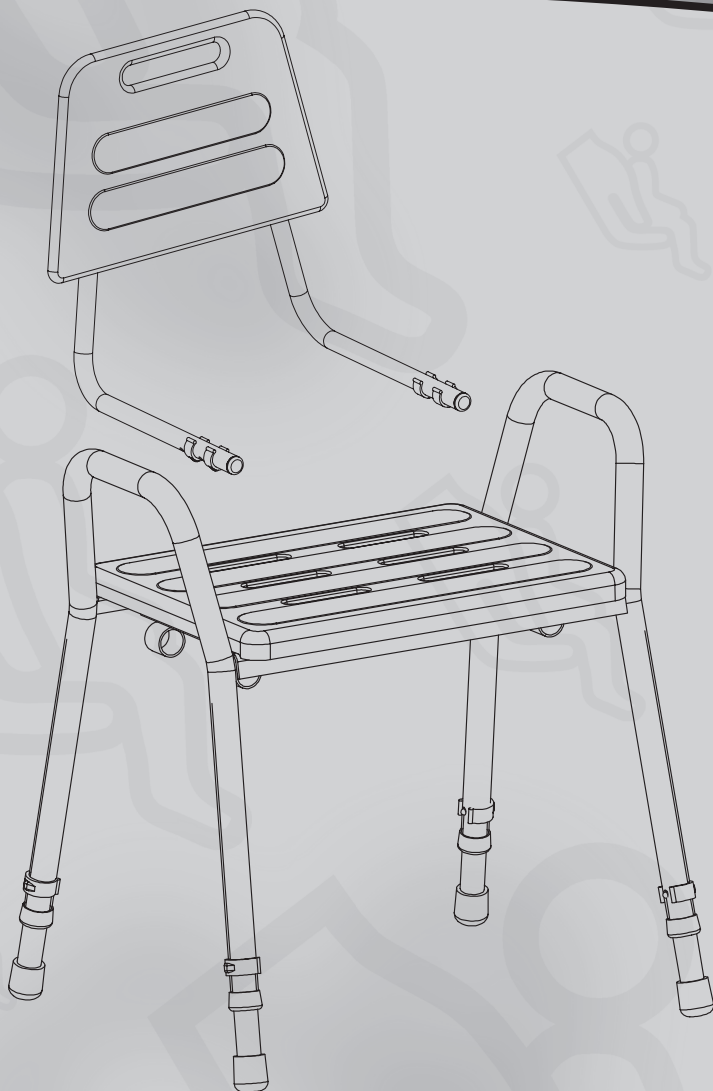

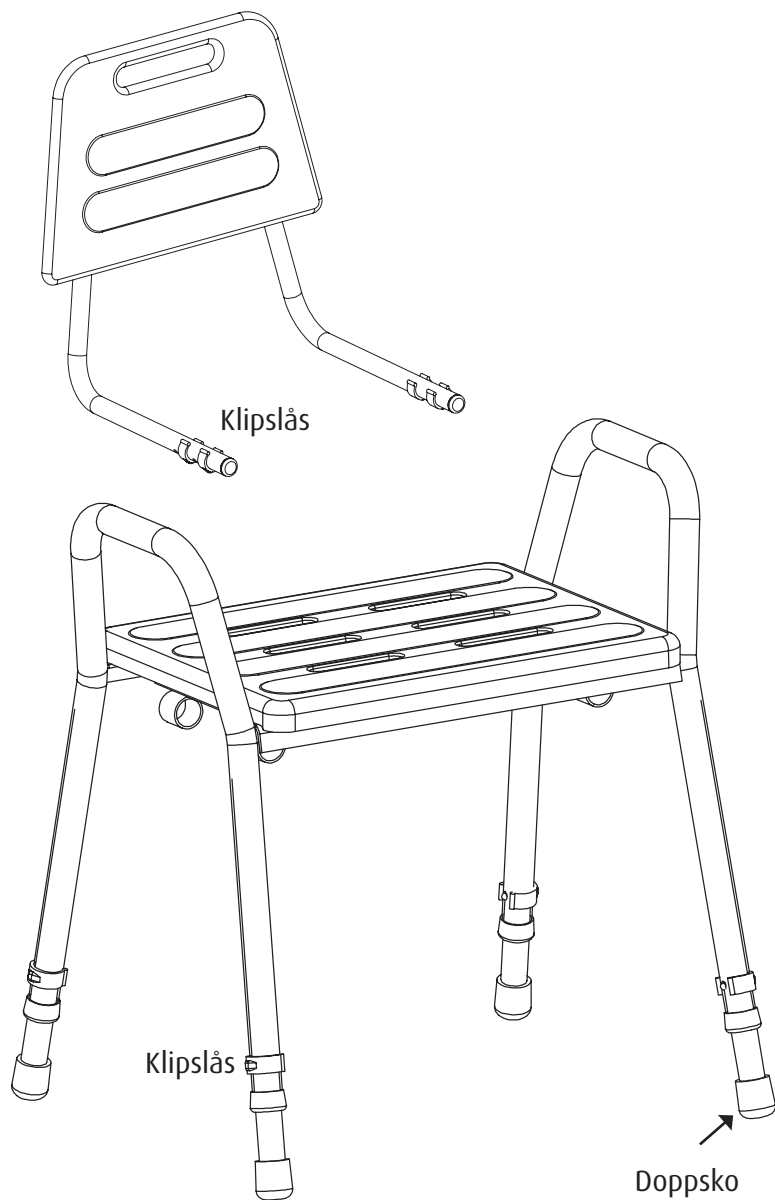

Vennligst les bruksanvisningen før produktet tas i bruk.

Denne bruksanvisningen kan brukes både til Dusjkrakk Uni og Dusjstol Uni. Dusjstol = krakk + rygglene.

## **Bruksområde**

Uni dusjkrakk og dusjstol kan brukes i toalett eller baderom. Den kan brukes til å sitte på foran håndvasken eller i dusjen og har gode støttehåndtak. Setet er laget i polyurethan og har 6 avløpshull. Setet er bløtt og behagelig å sitte på og materialet øker sikkerheten for at bruker ikke sklir ut av setet.

Rygglenet kan monteres på krakken for optimal sikkerhet. Det er laget i polyurethan.

## **Montering – se skisse**

Dusjkrakk: De løse bena til dusjkrakken festes til stålrammen ved hjelp av klips. Vær oppmerksom på at alle fire klips trykkes helt inn i stålørret igjen. Setet monteres ved at setets fire gummiknotter trykkes ned i de fire tilsvarende hullene på seterammen. Før bruk er det viktig å kontrollere at setet er korrekt montert.

Rygglenet: De fire klipsene på rygglenet tas ut. Rygglenet monteres i de fire hullene som er plassert under setet på dusjkrakken. Dybden på setet velges og klipsene settes på igjen. Vær oppmerksom på at de trykkes helt inn i stålørret igjen.

## **Tilpasning / bruk– se skisse**

Uni dusjkrakk og dusjstol kan innstilles i 7 forskjellige høyder ved hjelp av klipsene på bena. Klipsene tas ut og ønsket posisjon velges. Vær oppmerksom på at alle fire ben innstilles i samme høyde og at alle fire klips trykkes helt inn i stålørret igjen.

## **Vedlikehold**

Tørkes av etter bruk. Vaskes med vanlige rengjøringsmidler uten slipende eller etsende virkning. Vasketemperatur maks. 85°C, tåler høytrykkspyling. Setet kan tas av og rengjøres.

## Viktig

- Maksimal belastning: 150 kg
- Dusjkrakken uten rygglenet bør så langt mulig plasseres inn mot en vegg for optimal sikkerhet.
- Dusjkrakken må kun brukes som beskrevet under "Bruksområde"
- Dusjkrakken er ikke beregnet til å stå på.
- Når brukeren sitter på krakken, må denne ikke skyves eller dras bortover gulvet.
- Kontroller at klips og setet sitter korrekt før bruk.
- Kontroller regelmessig at klipsene er i god stand og sitter riktig.
- For optimal sikkerhet anbefales det å kontrollere doppskoene jevnlig og skifte disse ved behov.

© Handicare as 2005

Handicare as forbeholder seg retten til å endre produktet uten forutgående varsel. Innholdet i denne brukerveiledningen er kun ment som informasjon. Denne informasjonen kan endres uten forvarsel og må derfor ikke oppfattes som forpliktelser fra Handicare AS. Handicare AS påtar seg intet ansvar, juridisk eller økonomisk, for eventuelle feil eller unøyaktigheter som kan finnes i denne brukerveiledningen. Alle produktene som er nevnt i denne brukerveiledningen, er registrerte varemerker og kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten samtykke fra Handicare AS.



Kundtjeneste grønt nummer: 800 33 015  
www.handicare.no - post@handicare.no  
Øreveien 37 - Postboks 163 - 1501 Moss  
Telefon: 69 24 44 00 - Telefaks: 69 24 45 00