

BRUKERMANUAL

STØTTEHÅNDTAK FLEQSI



Bruksområder

Benyttes som hjelpemiddel ved stillingsforandring i seng eller ved forflytning til og fra seng.

Støttehåndtak skal bare monteres på ComfortSystems senger. Kan ikke benyttes sammen med sengegrind QV-160 og QV-161.

FleQsi-støttehåndtaket oppfyller relevante krav ihht sengenorm EN 1970:2000 og benyttes som handikaphjelpemiddel innen hjemmesykepleie og lignende.


FleQsi-støttehåndtaket er beregnet for personer eldre enn 12 år.

Monteringsanvisning


1. Montering av tilbehørskinne

Tilbehørskinnen monteres på sengebunnens langsgående metallprofil.

- Skru løs de to håndtakslignende fingerskruene fra tilbehørskinnen.
- Plasser tilbehørskinnen på sengebunnens langside slik at boltene passer med de forberede hullene (bilde 1).
- Trykk tilbehørskinnen ned på sengebunnens langside, slik at boltene når igjennom metallprofilen.
- Skru fast begge de håndtakslignende fingerskruene slik at tilbehørskinnen sitter stabilt (bilde 2).
- Skru løs en av de to endestoppene (type ”vingeskruer”) som sitter på tilbehørskinnens overside.

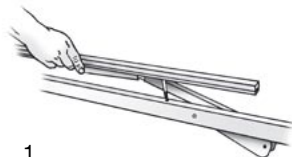

1.

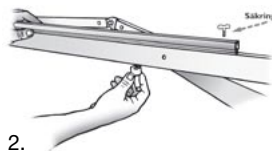


2.


2. Montering av FleQsi-støtten

FleQsi-støtten består av et bevegelig feste og et håndtak. Festet er utformet slik at det passer inn på tilbehørskinnen.

- Skru det sorte rattet mot klokken så langt det går.
- Plasser FleQsi-støtten slik som bilde 3 viser og skyv festet inn på tilbehørskinnen.
- Skyv FleQsi-støtten inn på tilbehørskinnen slik som bilde 4 viser. Skru på ende-stopperen igjen (vingeskruen).
- FleQsi-støtten skal nå være montert på tilbehørskinnen slik som bilde 5 viser. Det skal være lett å skyve FleQsi-støtten langs tilbehørskinnen!

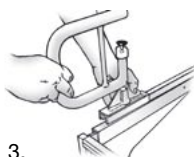

3.

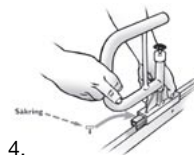


4.



5.


3. Demontering av FleQsi-støtten

- Skru det sorte rattet mot klokken så langt det som mulig.
- Skru av sikkerhetsstoppen (vingeskruen)
- Trekk FleQsi-støtten ut av tilbehørskinnen slik som bildet viser.
- Skru på sikkerhetsstoppen igjen (vingeskruen).

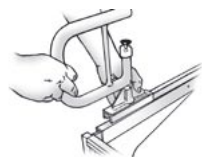

4. Demontering av tilbehørskinne

- Skru løs de to håndtakslignende fingerskruene som fester tilbehørskinnen på sengebunnens langside (bilde 1).
- Løft opp tilbehørskinnen (bilde 2).
- Skru fast begge de håndtakslignende fingerskruene på tilbehørskinnen.

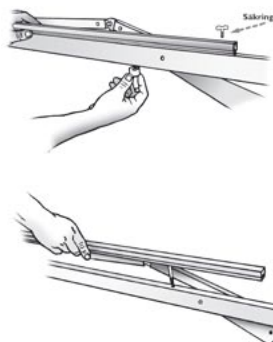


Bruksanvisning

1. Plassering av FleQsi-støtten

FleQsi-støtten kan plasseres langs hele tilbehørskinnen.


- Skru det sorte rattet mot klokken.
- Skyv FleQsi-støtten til ønsket plass.
- Fest FleQsi-støtten ved å skru med klokken på det sorte rattet (se bildet).
Kontroller at FleQsi-støtten sitter stabilt og fast på tilbehørskinnen.

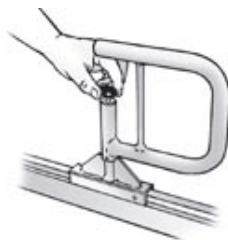

2. Rotere FleQsi-støtten

FleQsi-støtten kan dreies til en posisjon rett ut fra sengen eller langs med sengen.

- Løft FleQsi-støtten rett opp som på bildet.

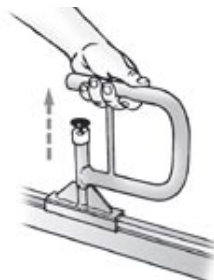

- Drei FleQsi-støtten til ønsket posisjon (se bilde).

- Slipp ned håndtaket igjen.

SKAL IKKE DREIES INN OVER SENGEN!

OBS! Om sengen har elektrisk regulerbar rygg eller fotdel, skal man kontrollere at ikke armer eller ben kan feste seg i støtten når sengebunnen manøvreres.



OBS! Når FleQsi-støtten benyttes til forflytning til og fra seng, skal alltid minst to av sengens hjul være låst!

Vedlikeholdsanvisning

FleQsi-støtتهåndtak trenger normalt ikke løpende vedlikehold.

Om FleQsi-støtتهen ikke kan festes sikkert og stabilt på tilbehørsskinnen skal den tas ut av bruk og årsaken klargjøres. Kontroller regelmessig at tilbehørsskinnen sitter fast på sengebunnen.

Støtتهåndtaket kan rengjøres med vanlig forekommende rengjørings- og desinfeksjonsmiddel. Påføres med fuktig klut.



handicare

Handicare AS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av brukermanualen. Den kan du finne på vår hjemmeside www.handicare.no/bolig

Tlf: 03250
Faks: 85 02 88 22
post@handicare.no
www.handicare.no