

## Monterings- og bruksanvisning


# TOALETTSTØTTE FLEXI 95A FOR VANLIGE TOALETTER

⚠ Kontroller at det ikke er transportskader på produktet.

⚠ Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den tilgjengelig.

### 1. Monter delen til en enhet som følger:

- 1.1 Monter de fremre føttene (A) på stolpene (B).
- 1.2 Monter tverrstangen (C) på toppen av stolpene (B).
- 1.3 Plasser den monterte enheten på toalettet slik at tverrstangen ligger over nedspylingsknotten på cisternen når knotten trekkes opp.
- 1.4 Sett gummipakningene (D) i festebøylens hull (E) og fest bøylene (F) på stolpene (B) i ønsket høyde. Høyden skal innstilles slik at toalettstøtten spenner mot porselenet.
- 1.5 Skru fast festet mot porselenet slik at toalettstøtten står stødig.
- 1.6 Juster føttene (G) dersom det er nødvendig.

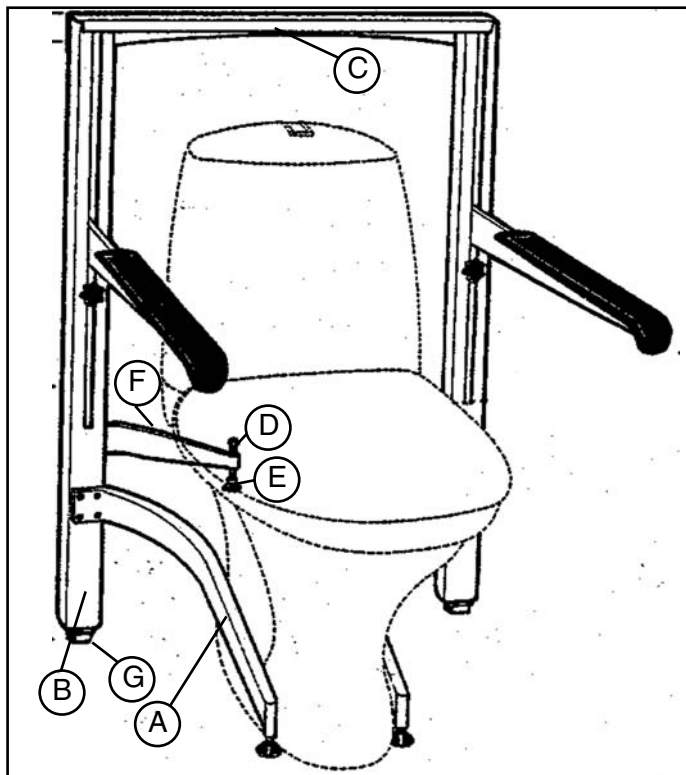

## BRUKSANVISNING

⚠ Flexi toalettstøtte er trinnløs høyderegulerbar.

### For å heve armstøtten:

- 2.1 Ta tak i armstøtten inne ved stolpen og løft opp.
- 2.2 Armstøtten holdes på plass av sin egen tyngde i den høyden som velges.

### For å senke armstøtten:

- 2.3 Løft armstøttens fremre del og trykk ned i bakkkant.

Tips: Når man sitter på toalettet kan man feks. gripe om den fremre delen med hånden og løfte noe, samtidig som man presser armstøtten ned med albuen.

### For å låse i fast høyde:

- 2.4 Bruk sperren (H).
- 2.5 Still armstøtten i ønsket høyde. Skru løs skruen (1) fest under armstøtten og skru til.



## Monterings- og bruksanvisning


# TOALETTSTØTTE FLEXI 94A FOR CLOS-O-MAT

⚠ Kontroller at det ikke er transportskader på produktet.

⚠ Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den tilgjengelig.

### 1. Monter delen til én enhet som følger:

- 1.1 Monter de fremre føttene (A) på stolpene (B).
- 1.2 Monter tverrstangen (C) på toppen av stolpene.
- 1.3 Monter beslagene (F).
- 1.4 Fjern skruene på Clos-O-Mat konsollets front.
- 1.5 Plasser den monterte enheten på Clos-O-Mat slik at beslaget (F) kan skrus inn i hullene på konsollet.
- 1.6 Skru beslaget fast til Clos-O-Mat.
- 1.7 Juster føttene (G) dersom dette er nødvendig.

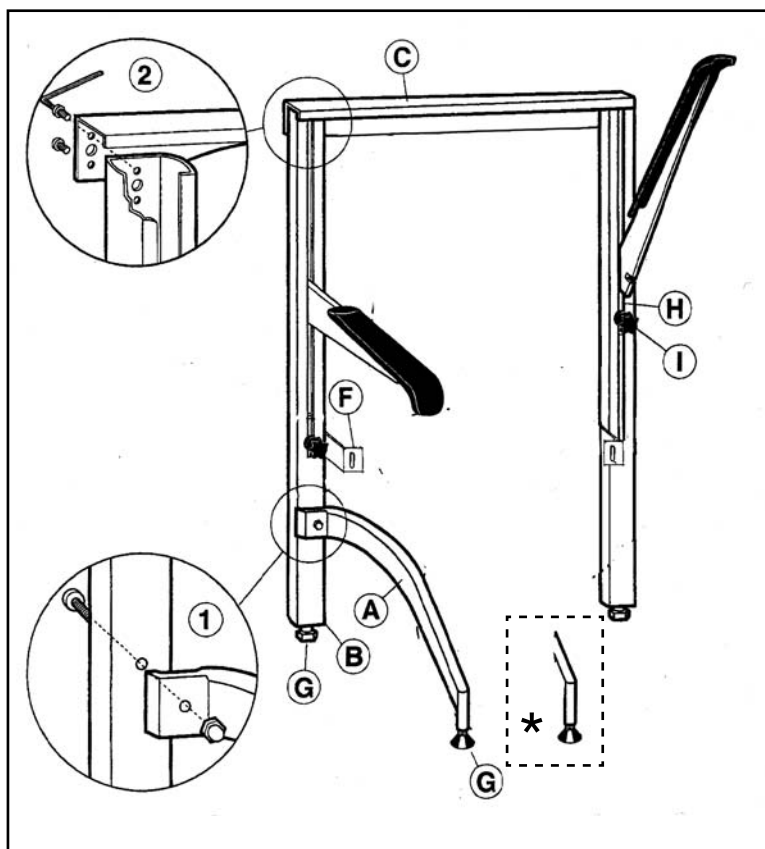

## BRUKSANVISNING

⚠ Flexi toalettstøtte er trinnløs høyderegulerbar.

### For å heve armstøtten:

- 2.1 Ta tak i armstøtten inne ved stolpen og løft opp.
- 2.2 Armstøtten holdes på plass av sin egen tyngde i den høyden som velges.

### For å senke armstøtten:

- 2.3 Løft armstøttens fremre del og trykk ned i bakkkant.

Tips: Når man sitter på toalettet kan man feks. gripe om den fremre delen med hånden og løfte noe, samtidig som man presser armstøtten ned med albuen.

### For å låse i fast høyde:

- 2.4 Bruk sperren (H).
- 2.5 Still armstøtten i ønsket høyde. Skru løs skruen (1), fest under armstøtten og skru til.



\* Både ben A og det tilsvarende på den andre stolpen er rette ben (ikke buet).