

# OS ROLLATOR ADAM GÅBORD

## Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning



Rollator OS-1410/1420



Gåbord OS-1550



Gåbord OS-1560




Gåbord OS-1590 EL

# GÅBORD ADAM OS-1550/1560

Takk for at du valgte Gåbord ADAM med hel eller delt pute.  
For at du skal få størst mulig glede av gåbordet bør du lese nøye gjennom bruksanvisningen.

## Montering

- 1 Monter mellomdelen (25), på understellet (16), med skruve skive og mutter (13, 14 og 15).
- 2 Monter låsespak (12) på mellomdelen (25). Ikke trekk til.
- 3 Skru de forkrommede stålrørene (8) inn i overdelen med håndkraft.
- 4 Dra overdelen opp til hullene i rørene blir synlige. Bruk verktøy for å stramme disse. Se bildet.
- 5 Monter håndtakene (22) med medfølgende låsespak (24) og skive (23).

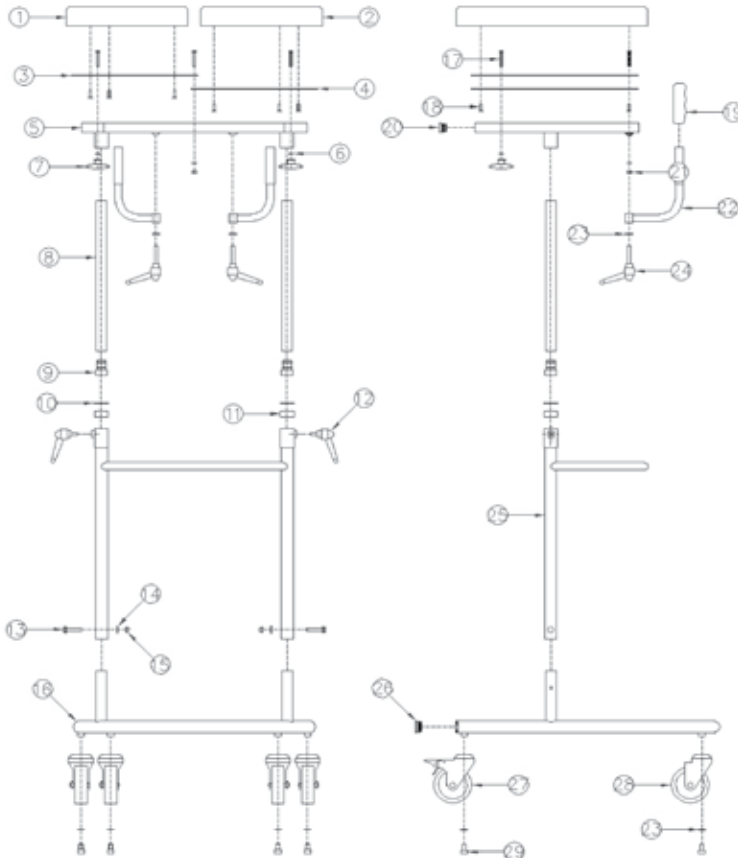

## Reservedeler Gåbord Adam

Pos	Ant.	Varenr	Betegnelse
1	1	OS-1558-1	Støttepute høyre
2	1	OS-1558-2	Støttepute venstre
3	1	OS-1564	Underdel støttepute høyre
4	1	OS-1563	Underdel støttepute venstre
5	1	OS-1552	Støttepute hel
6	3	1250641	Skive BRB 6,4x12x1,5
7	2	*090227	Rattskrue WN64 60-M6
8	2	OS-1555	Rør forkrommede Ø27x2
9	2	OS-1560-N2	Kuts
10	2	SW0351	Flensring SW stål FZB
11	2	OS-1590-N1	Hylse nylon
12	2	OS-1559	Låsespak M10x20
13	2	69218989401	Skrue M8x40
14	2	433084	Skive 8,4x16x1,6
15	2	HMJPN081	Mutter M8
16	1	OS-1557	Understell
17	3	603060401	Skrue M 6x40
18	6	965060161	Skrue M 6x16
19	2	33013219	Håndtak 22mm sort
20	2	VL50x25 SV	Plastfot 50x25 sort
21	1	9850601	Låsmutter M6
22	2	OS-1553	Håndtak
23	6	4331051	Skive10,5x8x1,6
24	2	OS-1554	Låsespak M 10x50
25	1	OS-1556	Mellomdel
26	2	GL32SV	Plastfot 32mm sort
27	2	14490	Hjul 100x30 med brems
27	2	14500	Hjul 125x30 med brems
28	2	14150	Hjul 100x30
28	2	14160	Hjul 125x30
29	4	912810061	Skrue M10x16

## Bruk

Vær oppmerksom på klemrisiko. Gåbordet skal ikke brukes til annet enn det bordet er anskaffet for.

- Største brukervekt
- Juster til riktig høyde ved hjelp av låsespakene.
- Hev aldri bordet høyere enn MAX-markeringen på rørbenet viser.
- Juster bredden mellom støtteputene ved hjelp av rattene (7).
- Juster plasseringen av håndtakene ved hjelp av låsehendel (24).

Kontroller at samtlige låsespaker og ratt er ordentlig trukket til. Vær oppmerksom på at de forkrommede rørene kan skades dersom låsespak (12) trekkes til for hardt.

## Rengjøring

- Gåbordet vaskes regelmessig med vann og vanlige rengjøringsmidler uten løsemidler. Tørk deretter med tørr eller litt fuktet klut.
- Kontroller at hjulene er frie for hår og annet smuss.
- Bruk locktite eller tilsvarende for å låse skruen ved skifte av hjul.
- De forkrommede rørene (8) bør settes inn med vannfast smørefett ved jevne mellomrom.

## Gjenbruk

1. Rengjør hjul for hår og smuss.
2. Rengjør støtteputer med desinfeksjonsmiddel. Skift evt. skadet pute.
3. Sørg for at alle skruer/låsehendler er skrudd ordentlig til.
4. Rengjør og sett inn de forkrommede rørene med vannfast fett.

## SPESIFIKASJONER OS-1550/1560

Brukervekt	100 kg
Bredde	69 cm
Dybde/lengde	70 cm
Regulerbar høyde	92-1300 cm
Arbeidsområde, største bredde	83 cm
Arbeidsområde, største lengde	75 cm
Snudiameter	97 cm
Støtteputer, innermål	34-49 cm
Støtteputer, yttermål	64-78 cm
Hjul	100x25 mm
Fargekode	RAL 5014

## Tilbehør:



Beskrivelse	Art. nr
Kurvholder	OS-1573
Kurv	OS-1411



Beskrivelse	Art. nr
Infusionsstativ	OS-1572



Beskrivelse	Art. nr
Sidestøtter (par)	OS-1571



Beskrivelse	Art. nr
Stålplate	OS-1578

# GÅBORD ADAM OS-1590 EL

**Takk for at du valgte Gåbord ADAM med elektrisk hev- og senkefunksjon. For at du skal få størst mulig glede av gåbordet bør du lese nøye gjennom bruksanvisningen.**

Gåbord ADAM OS-1590 EL er et stabilt gåbord med elektrisk hev- og senkefunksjon med hjelp av håndkontrollen som kan betjenes av både bruker og personell. Gåbordet kan komme inntil vanlige stoler og rullestoler og kan senkes slik at brukeren kan få hjelp til å reise seg ved å gripe om støttehåndtakene og støtte albueene på på puten.

**Montering:** Gåbordet leveres ferdig montert.

## Regulering av høyden

1. Kontroller at håndkontrollen er tilkopleet.
2. Trykk på ønsket knapp på håndkontrollen for OPP eller NED.
3. Slipp knappen når ønsket høyde er innstilt.

## Regulering av bredden på støtteputene

1. Løsne rattet under støtteputene.
2. Still støtteputene i ønsket bredde.
3. Skru til rattene.

## Rengjøring

1. Gåbordet bør vaskes regelmessig med vanlige rengjøringsmidler uten løsemidler. Tørk deretter med en tørr eller lett fuktet klut.
2. Hold hjulene rene for hår og annet smuss.
3. Kontroller at alle skruer er godt fastskrudd.
4. For å opprettholde lang levetid på batteriet bør dette lades når kapasiteten er 50%. Kontrollboksen er utstyrt med en summer som høres når det gjenstår 50% kapasitet. Ladetiden fra 50-100% er ca. 12 timer.

## SPESIFIKASJONER OS-1590 EL

Brukervekt	150 kg
Regulerbar høyde ( <i>Målt til overkant støttepute</i> )	80-119 cm
Arbeidsområde, største bredde/lengde	83/ 75 cm
Snudiameter	97 cm
Støtteputer, innermål	31,5-48 cm
Støtteputer, yttermål	64-78 cm
Hjul	100x25 mm
Batteri	24V

# ROLLATOR OS-1410/1420

## **Funksjon**

Rollator OS-1410 og 1420 er stabile rollatorer som er godkjent for brukervekt 100 kg.

Kan enkelt høydereguleres ved hjelp av låsehendelene på håndtaksrørene.

## **Montering**

Rollatoren er ikke montert ved levering. Montering skjer slik:

1. Grip om midtbøylen og trekk denne rett opp.
2. Før siderammen utover.
3. Legg festebrakettene på midtbøylen over skruefestene på siderammene.
4. Trekk vingemutterne godt til.
5. Still håndtakene i riktig høyde og vinkel. Skru til låsehendelene.

## **Rengjøring/vedlikehold utført av bruker**

1. Rollatoren rengjøres regelmessig med rengjøringsmidler uten løsningsmidler. Tørk med en tørr eller litt fuktet klut.
2. Påse at hjul og doppsko (fungerer som brems) er frie for hår og annet smuss.

## **Rengjøring ved gjenbruk**

1. Rollatoren kan høytrykkspyles.

**Handicare AS**

Øreveien 37

Postboks 163

1501 Moss

Telefon: 03250

Faks: 69 24 45 00

E-post: [post@handicare.no](mailto:post@handicare.no)

[www.handicare.no](http://www.handicare.no)