

Brukerveiledning

Stellebord

Mobilio med madrass



Innholdsfortegnelse

| | |
|------------------------|----------|
| Viktig å lese | side 2 |
| Tekniske data | side 3-4 |
| Madrass | side 5 |
| Bruerveiledning | side 6-7 |
| Grind til stellebord | side 8 |
| Gode råd om stellebord | side 9 |
| Feilsøkingsskjema | side 10 |
| Renhold av stelleplate | side 11 |

Viktig!

Det er viktig å lese vedlagte produktinformasjon, før produktet monteres og brukes.

Produktinformasjon



Produkt: MOBILIO stellebord,
frittstående, høydejusterbart og mobilt

Distributør: Handicare ASA, Postboks 5043, 1503 Moss Tel. 69 24 44 00

Produsent: Ropox, DK-4700 Næstved, Tel. +45 55 75 05 00

Et høydejusterbart stellebord brukes som arbeidsflate for stell av barn og voksne (opp til 120 kg.). Stellebordet kan brukes i hjemmet, i dagpleie eller i institusjoner, og sikrer gode arbeidsstillinger for hjelperne, og kan samtidig lette overflytning til andre hjelpemidler. Justeringen av høyden gjøres ved å aktivere opp ↑ eller ned ↓ knappen på håndkontrollen.

Ved plassering/montering av andre produkter i umiddelbar nærhet av stellebordet kan det oppstå risiko for klemningsfare. Vennligst se "Gode råd om stellebord," side 9.

Montasjeanvisning - se vedlagte montasjeveiledning.
 Vedlikehold- se vedlagte drift- og vedlikeholdsanvisning.
 Rengjøring - se vedlagte rengjøringsveiledning.

Tekniske data

Produkt: Mobilio Frittstående Trillbart Stellebord
 Elektrisk tilkobling: 230V, 50Hz, maks 0.8A, anvendte deler type B
 Stelleplate høyde: 68 -103 cm, med madrass, med hjul
 Lengde x bredde: Se tabell over varenummer
 Materiale: Ramme: sveisede stålrør St.37
 Stelleplate: Hvit, laminert sponplate.
 Overflatebehandling: Pulverlakkering, hvit RAL 9010 matt, forkromming
 Maks. belastning: 120 kg

Tilbehør

Grind 110 cm nedfellbar art nr. 25708
 Grind 60 cm nedfellbar art nr. 25706
 Grind 60 cm fast art nr. 25709
 Trapp 35 cm art nr. 25702
 Trapp 45 cm art nr. 25703
 Trådkurver med skinne og beslag art nr. se tabell neste side

Reservedeler

Motor IP66 art nr. 97000542
 Elektronikk IP66 art nr. 97000539
 Håndkontroll IP66 for 2 motorer art nr. 97000538
 Hjul 75mm med brems art nr. 97003010
 Nettkabel 3m for elektronikk art nr. 97000533

Varenummer

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Lengde | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Br 70 | 3040170 | 3040270 | 3040370 | 3040470 | 3040570 | 3040670 | 3040770 | 3040870 | 3040970 | 3041070 | 3041170 |
| Br 80 | 3040180 | 3040280 | 3040380 | 3040480 | 3040580 | 3040680 | 3040780 | 3040880 | 3040980 | 3041080 | 3041180 |

Tilbehør trådkurver med skinne og beslag

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lengde | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| En kurv | it | it | it | 25714 | 25714 | 25714 | 25714 | 25714 | 25714 | 25714 | 25714 |
| To kurver | it | it | it | it | it | 25715 | 25715 | 25715 | 25715 | 25715 | 25715 |

Reserveleder

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lengde | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| A 70 | 25740 | 25738 | 25741 | 25732 | 25733 | 25730 | 25734 | 25731 | 25735 | 25736 | 25737 |
| B 70 | 25767 | 25766 | 25768 | 25760 | 25761 | 25795 | 25762 | 25796 | 25763 | 25764 | 25765 |
| A 80 | 5080 | 5081 | 5082 | 5083 | 5084 | 5085 | 5086 | 5031 | 5035 | 5087 | 5034 |
| B 80 | 5130 | 5131 | 5132 | 5133 | 5134 | 5135 | 5136 | 5032 | 5036 | 5137 | 5033 |

A - stelleplate, B - madrass, A og B 80 - fire første siffer i nummer er: 1143

Alle siffer untatt varenummr er mål angitt i cm.

it - ikke tilgjengelig

Produkt: Madrass med sklisikkert underlag
 Distributør: Handicare ASA tel. 69 24 44 00
 Produsent: Ropox, DK-4700 Næstved,
 tel. +45 55 75 05 00

Brukerveiledning

Anvendes som polstring av stelleflate og liggeflate på stellebord.

Montasjeanvisning

Ingen. Plasseres på stelleflaten, med det sklisikre underlaget under.

Rengjøring

Det kan benyttes vanlig brukte rengjøringsmidler. Trekket kan tas av og vaskes separat.

Teknisk data

Produkt: Madrass med sklisikkert underlag

Høyde: 3 cm

Lengde x bredde: Se tabell

Materiale:

Madrasstrek: PVC belagt Polyester/bomullsnetting

Skumgummi: Polyesterbasert PUR skum

Maks. belastning: 120 kg

Garanti: Se salgs- og leveringsbetingelser

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lengde | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Br 70 | 25767 | 25766 | 25768 | 25760 | 25761 | 25795 | 25762 | 25796 | 25763 | 25764 | 25765 |
| Br 80 | 5130 | 5131 | 5132 | 5133 | 5134 | 5135 | 5136 | 5032 | 5036 | 5137 | 5033 |

Bredde 80: fire første siffer i nummer er: 1143
 Alle siffer untatt varenummer er mål angitt i cm.

Mobilio Stellebord leveres ferdig montert som et frittstående, trillbart stellebord med vanntett 3 cm madrass.

Stellebordet er elektrisk høyderegulerbart mellom 68-108 cm via en håndkontroll med spiralledning.

Stellebordet reguleres med to motorer som løfter parallelt.

Optimal driftssikkerhet oppnås om bordet parkeres i nederste stilling når det ikke er i bruk.

Brukerveiledning


Før bordet kan tas i bruk må nettleidingen 3m tilkobles strømuttak med 230V. Håndkontrollen skal være montert i elektronikkboksen på bordets underside. Regulering av høyden skjer ved å aktivere opp/ned knappene på håndkontrollen.

Husk å ta ledningen ut av stikkkontakten om bordet skal flyttes mer enn 190 cm.

Koblings skjema


Nedenstående koblings skjema viser hvordan motorer, strøm og håndkontroll tilkobles elektronikkenheten på undersiden av bordet.

1. Håndkontroll
2. Elektronikkboks
3. Magnetic Actuator MAX30, plugg 1 og 2 i elektronikkboksen
4. Strømkabel til 230 V.
5. Plastnøkkel til bruk ved demontering av plugger fra elektronikkboksen

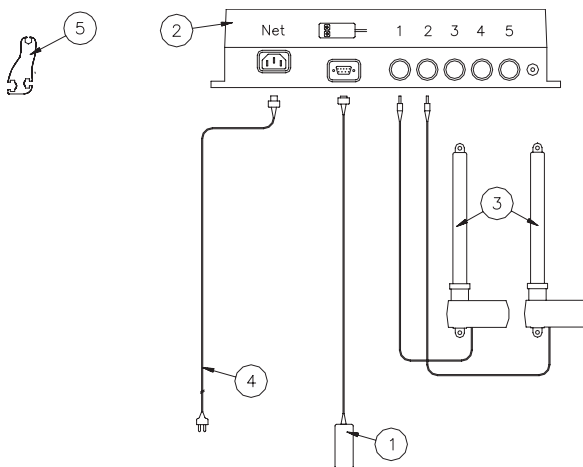

El-systemet er beregnet til periodisk bruk, med en intermittens på maks. 10%, 1min/9min.

Motor, håndkontroll og strømkabel er koblet som vist ovenfor/side 6. Da alle plugger er vanntette, kan de være vanskelige å montere/demontere. Sørg først for at de vender riktig vei og at de presses helt i bunn (til O-ringene ikke lengre er synlige).

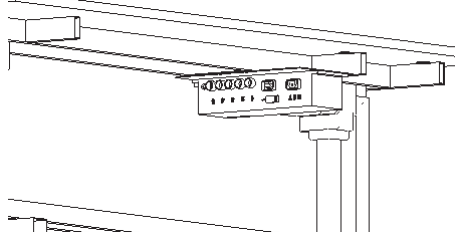


Motor, håndkontroll og elektronikk enhet: Motor, håndbetjening og styring er IP66 tette. Dette betyr at de er støv- og spyletette slik at stellebordet kan benyttes på badrom med stor fuktighet.

Stellebordet leveres med elektronikk enheten montert på stellebordrammen.

Motorplugger

Montering:

Runde jackplugger fra motorene trykkes godt inn i elektronikkboksen og låses ved å dreie pluggen mot høyre med vedlagte plastnøkkel.

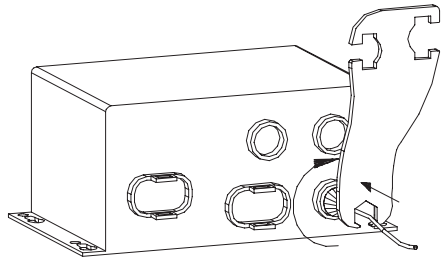

Demontering:

Før jackpluggen kan trekkes ut, skal pluggen dreies mot venstre med nøkkelen for å låse den opp. Den kan være vanskelig å trekke ut på grunn av O-rings tetningen.


Strøm og håndkontroll plugger

Montering:

Kontroller først at pluggen vender riktig vei, og press den hardt inn, helt til det "klikker".


Demontering:

Før pluggen kan trekkes ut skal låseklipsene utvides. Dette gjøres med plastnøkkelen ved at den presses ned over pluggen som så kan trekkes ut. Nøkkelen bør bli sittende mens pluggen trekkes ut.

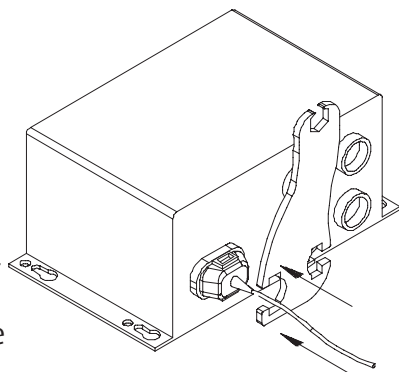

Montasje nedfellbar grind 110 og 60 cm til Mobilio stellebord

Veiledningen gjelder for montering av nedfellbar grind på stellebord Mobilio. Det anbefales å plassere grinden på midten av bordplaten. Beslagene monteres ca. 5 mm fra forkanten av bordplaten med de medfølgende sponplateskruer 5x20. Det skal dessuten plasseres en nylonskive mellom grinden og beslagene.

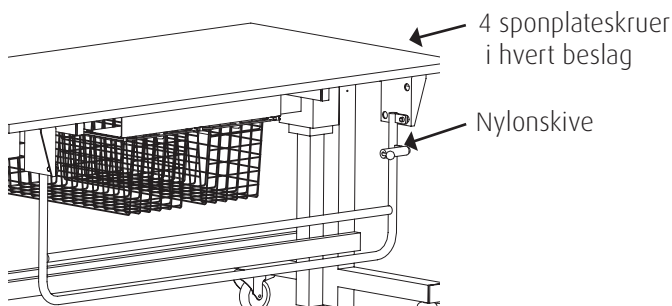

Gode råd ved bruk av høyderegulerbare stellebord

Et høyderegulerbart stellebord er med på å gi personalet et bedre arbeidsmiljø i pleie og stellesituasjoner. Høyderegleringen gir mulighet for å tilpasse arbeidshøyden til den enkelte medarbeider, og kan samtidig spare unødvendige løft ved å muliggjøre egenforflytning. Regulering av stellebordhøyden er meget enkel. Et lett trykk på håndkontrollens betjeningsknapper "opp/ned", regulerer bordet raskt til den ønskede høyden.

For å sikre optimal utnyttelse av stellebordets funksjoner og unngå ulykker, er det viktig å overholde noen enkle sikkerhetsrutiner:

- Etterlat ALDRI en person på stellebordet uten tilsyn – selv ikke for en meget kort periode.
- Stellebordet må kun betjenes av voksne. Stellebordet er et arbeidsredskap og ikke et leketøy.
- Vær særlig oppmerksom på andre personer i rommet når stellebordet brukes. Sørg for at de ikke leker under bordet eller med stellebordet. Stelleplaten er ikke en lekeplass.
- Oppbevar håndkontrollen utenfor barnas rekkevidde, slik at de ikke kan "kjøre" med stellebordet uten oppsyn. En opphengkrok for veggmontering følger med i leveransen.
- Vær oppmerksom på at gjenstander omkring stellebordet ikke kommer i konflikt når det høydejusteres. Selv om det er montert sikkerhetsstopp bør man stadig være oppmerksom på gjenstander under bordet.
- Er håndkontrollen skadet eller defekt skal den straks repareres eller byttes ut. Knappene virker som "dødmannsknapper". Motoren stopper, når man slipper knappen. Dette er et viktig sikkerhetselement.
- Hvis man setter to høydejusterbare stellebord ved siden av hverandre anbefaler vi at det monteres sideinndekninger på bordene for å unngå klemfare mellom de to bordene.
- Ved montering av andre gjenstander i nærheten av stellebordet, må det være en viss avstand mellom dem slik at det ikke oppstår klemfare.

| Feil | Mulige årsaker | Kontroller om: |
|--|---|--|
| Stellebordet går ikke opp/ned ved trykk på håndkontrollen. | Ingen strøm til elektronikken. | Strømkabelen er tilsluttet 230V, strømmen er slått på. |
| | Tilkobling til elektronikkheten. | Motor, sikkerhetsstopp, strømkabel og håndkontroll er koblet til elektronikkheten. |
| | Håndkontrollen er defekt. | Kontroller ved å koble til en annen fungerende håndkontroll. |
| | Motoren er overbelastet. | Fjern overbelastningen. Maks. 120kg, eller la motoren hvile i 9 minutter. |
| | Hvis disse punktene ikke løser problemet: kontakt nærmeste HandiCare kontor eller vårt sentralbord. | Telefon: 69 24 44 00 |

Laminatplater (Etronit M) -
Vedlikehold: Etronit-M skal ikke vedlikeholdes.

Daglig rengjøring:

Etronit-M plater rengjøres med blød klut godt oppvridd i varmt vann eventuelt tilsatt flytende oppvaskemiddel, uten sulfater, fordi dette etter hvert gir en fettete overflate. Flekker som ikke kan fjernes med vann kan ofte fjernes med like deler klorin og vann eller med aceton. Ved bruk av disse rengjøringsmidlene skal du sørge for god utluftning og være oppmerksom på at trekantene ikke tåler å komme i berøring med disse midlene.

Flekker etter spritpenner fjernes lettest ved hjelp av alminnelig husholdningssprit. Blyantskrift fjernes lettest ved hjelp av et alminnelig mykt viskelær. Ved tvil vedrørende andre flekker bør du først prøve på et ikke synlig sted fordi noen produkter kan skade laminatet, f.eks. svovelsyre etc. Visse kjemikalier, blekk og sterkt fargende fruktsafter kan gi miss-

fargning, fordi fargepigmentene binder seg til overflaten hvis de blir sittende lenger tid på platen

Bruk aldri stålull, skurepulver og lignende slipende materialer. Ikke bruk rengjøringsmidler som avsetter en hinne på overflaten, som f.eks. grønnsåpe.

Etter enhver rengjøring anbefales det å vaske av med rent vann og tørke av med en tørr klut eller lignende.

Hvis laminatbordplaten har kanter av tre (GL-design) tåler ikke disse samme behandling som laminatoverflaten.

Det anbefales at kanter av tre regelmessig opplakkes. Dette gjøres best ved å pusse kanten med fint sandpapir, uten å slipe ned overflaten, og deretter lakkere kanterne.

Bøkefinér plater

Vedlikehold:

Plater behandlet med syreherdende lakk er meget slitsterke. Oppstår det striper eller hull i lakken kan disse repareres forsiktig med fint sandpapir K. 220. Slip ned lakken i det område det dreier seg om, og påfør ny syreherdende lakk med en bløt pensel. Ved lakkering av større flater anbefales plysjkloss som utstryker.

Daglig rengjøring:

Utføres med bløt klut hardt oppvridd i varmt vann eventuelt tilsatt flytende oppvaskemiddel uten sulfater. Sulfatholdige midler uttørker og forringer på sikt lakkens holdbarhet.

Bemerk: Bruk aldri salmiakk og skurepulverholdige rengjøringsmidler.

Avdelinger:

Hovedkontor Moss

Øreveien 37
PB. 5043
1503 MOSS
Tlf: 6924 4400
Telefaks: 6924 4500

Bergen

Nordåsdaalen 13,
PB 273 Rådøl
5858 Bergen
Tlf: 5592 7400
Telefaks: 5592 7401

Drammen

Ing. Rybergsgt. 98
Postboks 1593 Bedriftsenteret
3007 Drammen
Telefon: 3280 7280
Telefaks: 3280 7281

Harstad

Samasjøveien 28
PB. 695
9404 Harstad
Tlf: 7704 2750
Telefaks: 7704 2751

Lakselv

Holmenveien
9711 Lakselv
Tlf.: 7846 2177
Telefaks: 7846 2645

Moelv

Storgt. 150, Mjøsenteret Nord
PB 209
2391 Moelv
Tlf: 6235 1950
Telefaks: 6235 1951

Oslo

Besøksadresse: Stansevn. 27 - 1001 Oslo
Postadresse: Postboks 5043 - 1503 Moss
Telefon: 6924 4400
Telefaks: 6924 4500

Stavanger

Vingveien 3
4050 Sola
Tlf: 5187 7320
Telefaks: 5187 7321

Trondheim

Lade Allé 65
7041 Trondheim
Tlf: 7390 5960
Telefaks: 7390 5961

