

BRUKERMANUAL

# MoveMaster


SystemRoMedic





### Beregnet bruk

Overflytning fra seng til rullestol/mobil toalettstol.

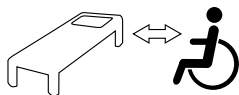

### Vedlikehold

Bruk ikke skyllemiddel.


Følg vaskeanvisningen.



### Funksjonskontroll



Skal utføres før bruk og deretter regelmessig, spesielt etter vask. Kontroller at sømmer og håndtak er hele og fri for skader. Dra i håndtak og kontroller at de tåler tung belastning. Ved tegn på slitasje skal hjelpemiddelet kasseres.

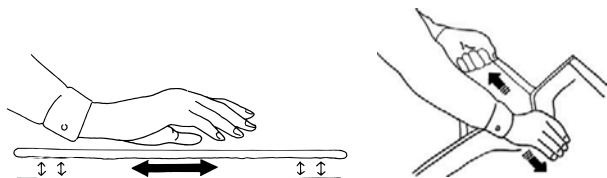

## Plassering

Brett MoveMaster slik at håndtaket ligger øverst. Plasser en hånd eller glideskive innimellom MoveMaster og før MoveMaster så langt inn som mulig under baken. Ta ut hånden/glideskiven. Glideskiven kan plasseres under MoveMaster for å gi et jevnt underlag ved sittende overflytning.



## Fjerning

MoveMaster tas bort ved å dra i den nedre delen.





handicare

Handicare AS  
Øreveien 37  
Postboks 163  
1501 Moss

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av brukermanualen. Den kan du finne på vår hjemmeside [www.handicare.no/bolig](http://www.handicare.no/bolig)

Tlf: 03250  
Faks: 69 24 45 00  
[post@handicare.no](mailto:post@handicare.no)  
[www.handicare.no](http://www.handicare.no)