

BRUKERMANUAL

# OPPREISNINGSSSTØTTE QUICK-UP



## **Bruksområde**

Oppresningsstøtte Quick-Up må kun brukes sammen med Qvintett sengesystem som hjelp ved forflytning i seng eller ved forflytning til og fra seng.

Quick-Up støtten oppfyller kravene i sengenorm EN 1970:1999 og skal brukes som handikapp hjelpemiddel til hjemmesykepleie eller lignende.

Quick-Up støtten er beregnet for personer eldre enn 12 år.




## Monteringsanvisning

**OBS!** Hvis Quick-Up støtten skal monteres på en Accordseng, hopper man over punkt 1 “montering av feste”. Festpunkter finnes allerede forberedt på denne sengetypen.


### 1. Montering av feste

Festet for Quick-Up monteres i sengens fotende. Hvis brukeren skal stå opp av sengen mot høyre skal festet monteres i sengens høyre hjørne, ellers i venstre hjørnet.

- Sengens tregavl skal IKKE være montert.
- Plasser festet som bilde 1 viser. Utfresningen på festet skal peke mot sengens midtparti.
- På hver side av sengebunnens fotgavl finnes to hull for montering av tregavl. Det hull som IKKE brukes for montering av tregavl, skal brukes til å montere den ene siden av festet ifølge bilde 2 (hvis sengen er utstyrt med sengegavl for integrert grind, brukes det indre hullet, i andre tilfeller det ytre hullet). Benytt den vedlagte bolten M6x15.
- Festet skal nå være ifølge bilde 3. Kontroller at festet er rett og at hullet på festets andre side passer midt på fotgavlens hull der tregavlens skal monteres.
- Monter tregavl. Skru tregavlens bolt rett i festet ifølge bilde 4.

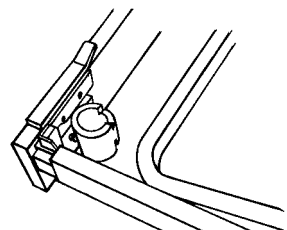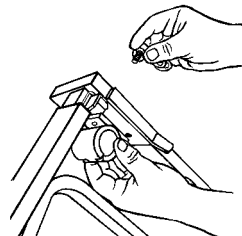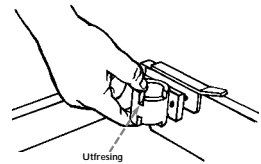


**OBS!** Kontroller at festet sitter stabilt.

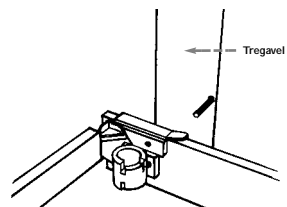

## 2. Montering av Quick-up-støtte

Sett ned Quick-Up-støtten i festet ifølge bildet. På støttens rør finns en stopper. Kontroller at støtten går i festet slik at stopperen ligger i utfresningen på festet.

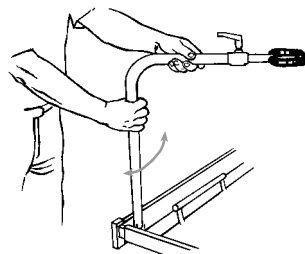

## 3. Demontering av Quick-up-støtte

Løft Quick-Up-støtten opp av festet.

## 4. Demontering av festet

- Demonter tregavlen.
- Skruv løs den lille bolten M6x15.
- Ta bort festet.
- Monter tregavlen igjen.


## Bruksanvisning

Quick-Up-støtten skal IKKE benyttes utenfor sengens langside!

### 1. Plassering av Quick-up-støtten i posisjon for bruker


Når støtten brukes skal den være plassert i festet på slik at den peker på skrå inn mot sengens midtlinje. Den lille stopperen som finnes på støttens rør skal ligge i det utfreste sporet (se bilde).

**NB!** Kontroller at Quick-Up-støtten er i riktig posisjon ved å forsøke å bevege det til en av sidene!

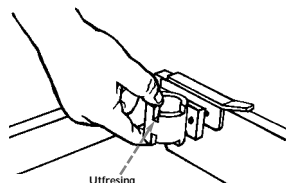

### 2. Lengdejustering

Støtten kan justeres til riktig lengde ved å løsne på låsehendelen ifølge bilde og dra ut håndtaket til ønsket lengde. **OBS!** Det finns en innebygd stopp som sikrer at håndtaket ikke kan trekkes helt ut av røret!

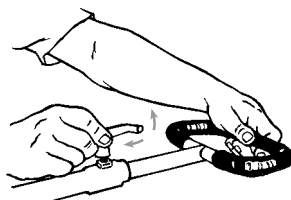


### 3. Når støtten ikke brukes

Når støtten ikke er i bruk kan den plasseres parallelt med sengens fotgavl. Løft Quick-Up-støtten og vri det til siden ifølge bildet. Når støtten igjen skal i brukerposisjon - vri den inn over sengen til den stopper.

Kontroller igjen at Quick-Up-støtten er i riktig posisjon ved å forsøke å bevege den til en av sidene.

**NB!** Når Quick-Up-støtten brukes til forflytning skal alltid minst to hjul på sengeløfteren være låst!

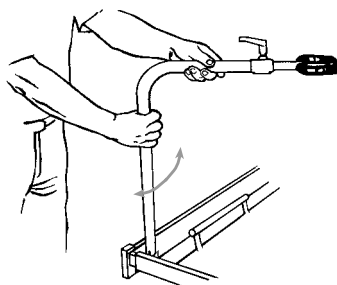

## **Vedlikeholdsanvisning**

Quick-Up-støtten krever normalt intet løpende vedlikehold.

Rengjøring kan skje med fuktig klut og normalt forekommende rengjørings- og desinfeksjonsmidler.





handicare

Handicare AS  
Øreveien 37  
Postboks 163  
1501 Moss

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av brukermanualen. Den kan du finne på vår hjemmeside [www.handicare.no/bolig](http://www.handicare.no/bolig)

Tlf: 03250  
Faks: 85 02 88 22  
[post@handicare.no](mailto:post@handicare.no)  
[www.handicare.no](http://www.handicare.no)