

BRUKERMANUAL

TOALETTFORHØYER DYNALIFE STEP





OBS!

Les brukermanualen nøye før produktet tas i bruk. Pass på at instruksjonene følges og at brukermanualen er tilgjengelig for brukere av Toalettforhøyer Dynalife Step. Dersom hjelpemidlet skal brukes av andre brukere skal de informeres om sikkerhetsforskriftene før bruk.

Toalettforhøyer med armlener gjør det enklere for mennesker med alvorlige mobilitetsproblemer å bruke toalettet. Toalettforhøyeren er forsvarlig tilpasset toalettskålen og øker høyden på toalettsetet slik at belastningen på hofter og kneledd blir minimert. Dette øker uavhengigheten og gjør toalettbesøk mye enklere. Armlenene gjør at brukeren kan sitte ned og reise seg opp fra toalettet sikkert og uten assistanse. Toalettforhøyer Dynalife Step kan brukes av personer opp til 120 kg.

Toalettforhøyer Dynalife Step anbefales for brukere med nedsatt stabilitet i overkroppen, ubalanse, alvorlig dysfunksjon av underekstremitetene, tetraplegikere, brukere med stiveheter i hofter og ryggrad, skadde eller amputerte hender og armer eller nedsatt gripefunksjon.

Toalettforhøyeren leveres ferdig montert med lokk, armlener og brukermanual.

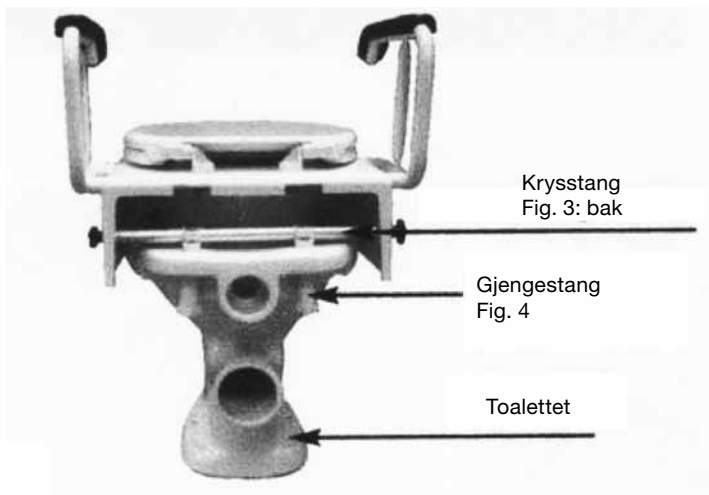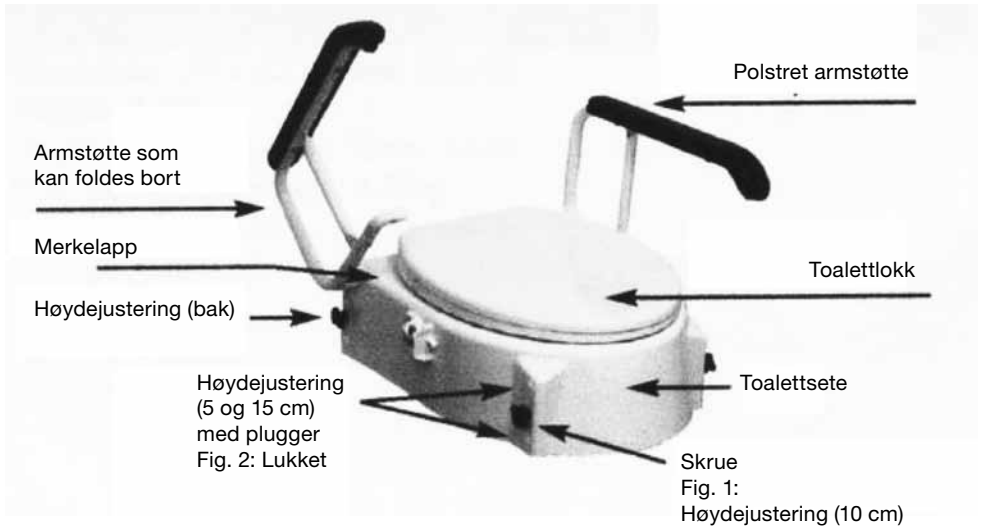

Sikkerhetsinstruksjoner

- Forsikre at toalettforhøyer Dynalife Step er komplett og uskadd.
- Hvis du har spørsmål vedrørende installasjon eller vedlikehold, kontakt Handicare AS.
- Maks brukervekt 120 kg må ikke overskrides.
- Forviss deg om at toalettforhøyeren samsvarer med dine behov. Dersom du er i tvil, vennligst kontakt din fastlege eller forhandler.
- Savnede, skadde eller slitte deler skal kun bli erstattet av forhandleren.
- Kontroller stabiliteten på toalettforhøyeren jevnlig for å forsikre at skruer sitter som de skal.
- Toalettforhøyeren skal kun brukes og oppbavares innendørs.
- Ved bruk må man ikke lene seg for langt frem eller gjøre raske bevegelser.

Montering

Toalettforhøyeren kan justeres i tre forskjellige høyder.

1. Toalettforhøyeren leveres med standard fabrikkinnstilling på 10 cm høyde. Denne kan justeres ved hjelp av skruer, to foran på toalettforhøyeren og to lenger bak. Disse er koblet sammen med en tverrligger. Skal høyden justeres (til 5 eller 15 cm), løsne de to skruene foran på høyre og venstre side av toalettforhøyeren og fjern tverrliggeren. Ta så ut pluggene og sett dem inn igjen i høydejusteringshullet du ønsker og sett tverrliggeren tilbake. Sett skruene inn igjen på høyre og venstre side av tverrliggeren og fest den forsvarlig. Det valgte høydejusteringshullet må være på samme høyde på begge sider av toalettforhøyeren.
2. For å justere høyden på den bakre tverrliggeren, gjør det samme som i punkt 2, men denne gangen bak på toalettforhøyeren. Den bakre og fremre tverrliggeren må settes til samme høyde.
3. Fjern det eksisterende toalettsetet og lokket fra toalettet og erstatt dem med toalettforhøyeren. Press begge gjengestengene (bak på toalettforhøyeren) gjennom hullene i toalettskålen. Bruk plastikfestene for å skru gjengestengene godt fast på toalettskålen.
4. Forsikre deg om at toalettforhøyeren er sikkert montert på toalettskålen.

Bruksanvisning

1. Når toalettforhøyerer har blitt montert korrekt kan toalettet brukes på normalt vis.
2. Når brukeren setter seg ned og reiser seg opp er det viktig å fordele vekten jevnt.
3. Armlenene kan foldes opp bare ved å løfte dem. Når armlenene foldes ned låses de automatisk på plass.
4. Brukere med stor ustabilitet bør bare bruke toalettforhøyerer under oppsyn.

Rengjøring

Toalettforhøyeren bør vaskes jevnlig med et mildt rengjøringsmiddel. Kan også desinfiseres med milde desinfeksjonsmidler.

Bruk ikke sterke vaskemidler, høytrykksspyler eller skuremidler.

Vedlikehold og gjenbruk

Toalettforhøyeren er vedlikeholdsfri. Men dersom toalettforhøyeren gjenbrukes, bør den først undersøkes for å forsikre at den fungerer på tilfredsstillende måte og bør desinfiseres etter rengjøringsinstruksene ovenfor.

Materialer

100% ABS-plastikk

SPESIFIKASJONER

Maks brukervekt	120 kg
Setehøyde	5, 10 eller 15 cm
Bredde x dybde x høyde	53x50x36 cm
Vekt	5,6 kg



handicare

Handicare AS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av brukermanualen. Den kan du finne på vår hjemmeside www.handicare.no/bolig

Tlf: 03250
Faks: 85 02 88 22
post@handicare.no
www.handicare.no