



Bruksanvisning

# Combi Beta Driv

Dusj- og toalettstol med drivhjul

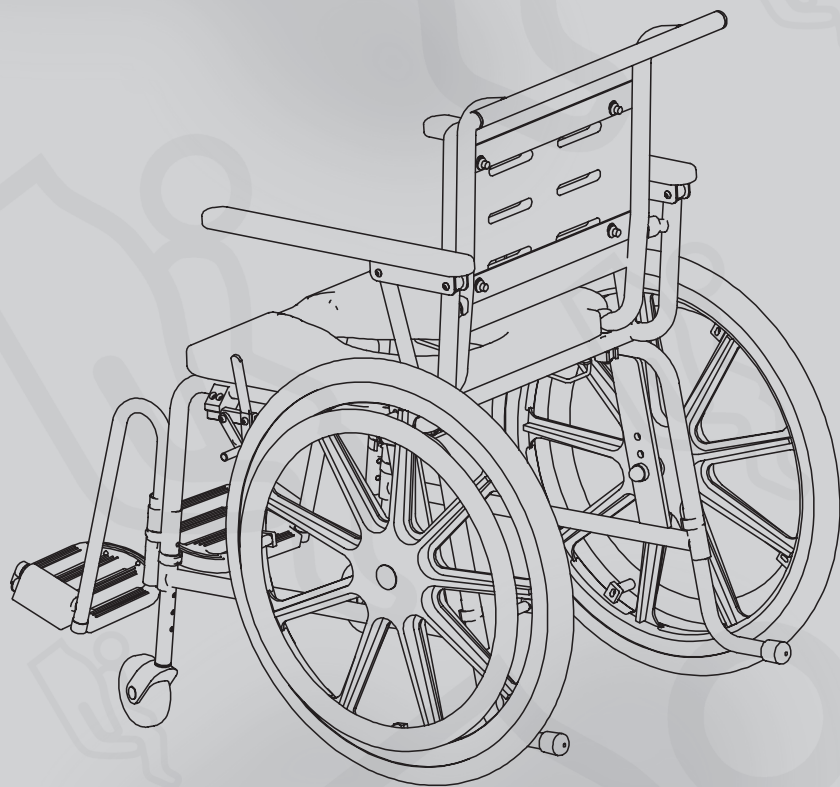

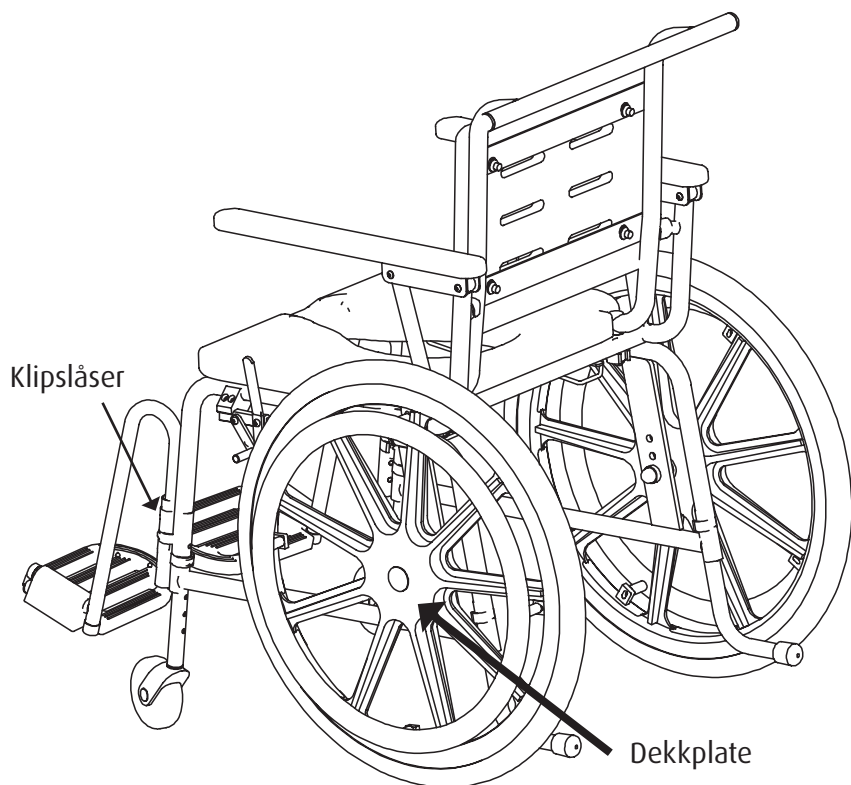

Vennligst les bruksanvisningen før produktet tas i bruk.

## Bruksområde

Combi Beta Driv har mange bruksmuligheter. Den kan brukes både som toalett- og dusjstol og som en transportstol. De store hjulene gjør at brukeren selv kan kjøre stolen, og det blir lettere for hjelperen å manøvrere stolen. Armlenet kan slås opp, hvilket er en stor fordel hvis brukeren skal flyttes til eller fra annet møbel.

Combistolen egner seg spesielt godt til personer som ikke selv kan komme seg til toalett, håndvask eller bad, og til personer som har behov for hjelp under toalettbesøk og personlig hygiene. Sete, rygg og armlener er laget i sort polyurethan. Materialet er bløtt og behagelig og øker samtidig sikkerheten for at ikke brukeren skal gli ut av stolen.

## Montering– se skisse

Klipsene som sitter i understellet tas ut og rygglenet settes i hullene på understellet bak setet. Klipsene settes tilbake, sørg for at de trykkes helt inn. Skal stolen brukes som toalettstol over et toalett, kan rygglenet tas av.

## Tilpasning/bruk– se skisse

Dusj-og toalettstolens små hjul kan innstilles i 6 forskjellige høyder og drivhjulene i 3 forskjellige høyder. Antivipp- beslagene bak på stolen har 2 mulige innstillinger. Høydejustering foran og justering av antivipp-beslagene bak, foregår ved hjelp av klipsene på henholdsvis stålrør og bøylar. Klipsene tas ut og ønsket posisjon velges. Vær oppmerksom på at bena med svinghjul foran, innstilles i samme høyde som de store drivhjulene bak. Alle fire klips trykkes helt inn i stålrøret igjen.

De store drivhjulene justeres ved at dekkplaten på yttersiden av hjulet tas av. Kontramutteren på baksiden av hjulet skrues av.

Deretter skrues hjulakselen ut. Den ønskede posisjon velges, hjulakselen skrues i og kontramutteren skrues fast. Sørg for at både skruer og mutter er strammet godt til.

## Vedlikehold

Tørkes av etter bruk. Vaskes med vanlige rengjøringsmidler uten slipende eller etsende virkning. Vasketemperatur maks. 85°C, tåler høytrykkspyling.

Sete og rygg og rygglenet kan tas av og rengjøres.

Vær oppmerksom på at delene monteres korrekt igjen.

## Viktig

Maksimal belastning: 150 kg.

Det anbefales å låse hjulene når stolen ikke brukes til transport, og alltid når brukeren reiser seg eller setter seg i stolen.

Kontroller regelmessig at klipsene er i god stand og sitter riktig.

Hjulene bør tørkes av regelmessig og de små hjulene oljes med syrefri olje.

Hvis hjulene tas av, er det viktig at de monteres korrekt igjen.

Handicare as forbeholder seg retten til å endre produktet uten forutgående varsel. Innholdet i denne brukerveiledningen er kun ment som informasjon. Denne informasjonen kan endres uten forvarsel og må derfor ikke oppfattes som forpliktelser fra Handicare AS. Handicare AS påtar seg intet ansvar, juridisk eller økonomisk, for eventuelle feil eller unøyaktigheter som kan finnes i denne brukerveiledningen. Alle produktene som er nevnt i denne brukerveiledningen, er registrerte varemerker og kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten samtykke fra Handicare AS.



Kundetjeneste grønt nummer: 800 33 015  
www.handicare.no - post@handicare.no  
Øreveien 37 - Postboks 163 - 1501 Moss  
Telefon: 69 24 44 00 - Telefaks: 69 24 45 00