

BUSCK & CO AB

MULTICLIN PRO 1 BIDETTILSATS



Bruksanvisning

MBxxxx



MULTICLIN PRO 1

Før bruk

Trykk på STOP knappen og hold den inntrykt i minst 2 sek for å slå Multiclin PÅ eller AV. Multiclin er på når WATER TEMP lyser.

WATER TEMP - Vanntemperaturen stilles inn med knappen WATER TEMP. Hvert trykk på knappen endrer innstillingen for vanntemperaturen. 3 ulike temperaturer kan velges: Lav, Middels og Høy som indikeres med respektive lysdiode. Dessuten kan oppvarming av vannet slås helt av. Alle lysdioder er da slokket.

2 I bruk

Dusjfunksjonen - Trykk på knappen SHOWER. Dusjen starter.

For kvinner - Trykk på knappen BIDEET. Dusjen i fremre stilling starter.

Endring av dusjtrykket (STRENGHT) - Still inn ønsket temperatur med knappene LOW og HIGH. Hvert trykk på LOW reduserer trykket 1 trinn og hvert trykk på HIGH øker trykket med 1 trinn. Innstilt trykk vises på lysdioden.

Vær oppmerksom på - Dersom vanntrykket i ledningen er veldig lavt, går ikke dusjmunnstykket ut dersom trykket på Multiclin er satt for lavt. Trykk på HIGH for å øke trykket slik at dusjmunnstykket går ut.

STOPP - Trykk på STOP knappen for å avbryte dusjen. Dusjen stopper automatisk etter 1 min.

Tørkefunksjon - Trykk på knappen DRY for å starte varmluftsviften. Trykk på knappen DRY igjen for å endre temperaturen på varmluften. Hvert trykk på knappen endrer temperaturen fra Høy til Medium til Lav og deretter til Høy igjen. Indikatorlampene viser innstilt temperatur. Dusjen starter alltid med Høy temperatur ved første trykk på knappen DRY.

STOPP - Trykk på STOP knappen for å stoppe varmluftsviften. Viften stopper automatisk etter 4 min.

ADVARSEL - Dersom tørkefunksjonen brukes lenge, skal temperaturen settes på Lav. Dersom dette ikke gjøres, kan det være fare for brannskader på huden. Funksjonen kan endres slik at varmluftsviften alltid starter med Lav temperatur. Dette gjøres ved å holde knappene STOP og DRY inntrykt samtidig i minst 2 sek. Endringen bekreftes ved at alle lysdiodene for vanntemperaturen blinker noen ganger.

RENGJØRING AV MULTICLIN - Bruk vanlig, nøytralt rengjøringsmiddel for å rengjøre toalettsetet. Bruk av rengjøringsmiddel med klor eller syre kan skade Multiclin.

VIKTIG: Trekk alltid ut støpslet eller steng av strømmen til Multiclin før rengjøring.

Tørk regelmessig av alle flater på Multiclin med en fuktig klut. Dersom smuss og skitt ikke tørkes av regelmessig, blir dette vanskeligere å få fjernet senere. Å tørke av Multiclin med en fuktig klut, reduserer statisk elektrisitet. Statisk elektrisitet gjør at Multiclin trekker til seg støvpartikler og at den derved blir skitten.

ADVARSEL

Hell aldri vann eller rengjøringsmiddel direkte på Multiclin eller på kontakten. Dette kan forårsake elektrisk sjokk.

VIKTIG

Bruk aldri løsningsmiddel eller rengjøringsmiddel på Multiclin som ikke er beregnet for plast.

Dette kan føre til skader på plastmaterialet.

RENGJØRING AV DUSJMUNNSTYKKE

Trekk ut dusjmunnstykket og rengjør hullet i munnstykket med en tannbørste eller lignende.

Trekk dusjmunnstykket forsiktig rett ut uten å trykke det til siden.

Advarsel: Innholdet i denne brukermanualen er kun ment som informasjon. Denne informasjonen kan endres uten forvarsel og må derfor ikke oppfattes som forpliktelser fra Handicare AS. Handicare AS påtar seg intet ansvar, juridisk eller økonomisk, for eventuelle feil eller unøyaktigheter som kan finnes i denne brukermanualen. Alle produktene som er nevnt i denne brukermanualen, er registrerte varemerker og kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten samtykke fra Handicare AS.

Forhandler:



PB 163, 1501 Moss
Tel: 6924 4400, Faks: 6924 4500
post@handicare.no
www.handicare.no

Produsert av:

closomat AG

Hardhofstrasse 21
CH-8424 Embrach
Tel +41 (0)44 866 86 00
Fax +41 (0)44 866 86 01
E-Mail: office@closomat.ch
www.closomat.ch