

BRUKERMANUAL

Sovesystem Sleepform



LECKEY°




Introduksjon

Sleepform er et sovesystem utviklet for barn med spesielle behov til bruk i hjemmet, sykehus eller behandlingsinstitusjon. Sleepform er utviklet og produsert av James Leckey Designs LTD.

Sleepforms fire størrelser passer barn fra 0 til 18 år, i sprinkelseng eller enkeltseng.

- 1) 0-1 år, sprinkelseng
- 2) 1-5 år, sprinkelseng
- 3) 1-5 år, enkeltseng
- 4) 5-18 år, enkeltseng

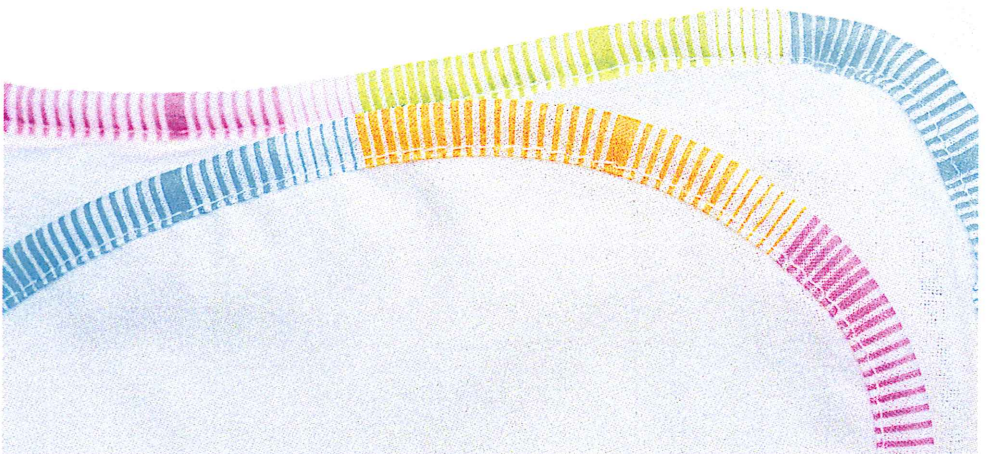

Produktopplæring

Dette produktet er et klasse 1 Medisinsk produkt. Som produsent anbefaler Leckey at foreldre, lærere og andre omsorgspersoner som skal benytte produktet gjøres spesielt oppmerksomme på Sikkerhetsinformasjonen i denne brukermanualen.

Leckey anbefaler at det føres en skriftlig oversikt over alle personer som har fått opplæring i riktig bruk av produktet.

Produkthistorikk

Dette produktet er et klasse 1 Medisinsk produkt og skal derfor leveres ut, monteres og gjenbrukes av en person med teknisk kompetanse som har fått opplæring i riktig bruk av produktet. Leckey anbefaler at det føres en skriftlig oversikt over alle utleveringer, kontroller ved gjenbruk og årlige kontroller av produktet.

Sikkerhetsinformasjon

- 1) Les alltid hele brukermanualen før produktet tas i bruk.
- 2) Påse at det er utført en grundig risikovurdering før Sleepform leveres til bruker.
- 3) Plasser alltid Air-Flow overmadrassen over Sleepform madrassen da PVC materialet ikke puster og kan utgjøre kvelningsfare.
- 4) Påse at foreldre og andre omsorgspersoner er oppmerksomme på eventuelle farer identifisert under risikovurderingen.
- 5) Bruk bare komponenter godkjent av Leckey sammen med produktet. Modifiser ikke produktet på noen måte. Dersom disse instruksjonene ikke følges kan det medføre fare for bruker eller omsorgsperson og garantien vil ikke være gyldig.
- 6) Dersom det råder tvil om produktet er trygt å bruke eller dersom en del skulle svikte må all bruk av produktet opphøre. Kontakt Handicares kundesenter, tlf. 03250.
- 7) Leckey's produkter er produsert i henhold til sikkerhetskravene i NS EN12182 og Medical Devices Regulations 2002.
- 8) Rengjør produktet jevnlig i henhold til vedlikeholdsinformasjonen i dette heftet. Bruk ikke vaskemidler med slipende effekt. Gjennomfør kontroller av produktet jevnlig for å sikre at produktet er i god stand.
- 9) Produktet er utviklet for bruk innendørs og skal lagres på et tørt sted som ikke er utsatt for ekstreme temperaturer når det ikke er i bruk. Produktet er beregnet for bruk i temperaturområdet +5 - +40°C.



Å velge sovestilling

Alle valg bør gjøres i samarbeid mellom foreldre og barnets terapeut.

Første prioritet er barnets helse og sikkerhet, barnets toleranse for nye stillinger og støtte og hvordan sovestillingen henger sammen med barnets 24 timers posisjoneringsplan.

Barnet kan ha en etablert sovestilling som han er vant til og dette kan være stillingen du velger å tilpasse sovesystemet til.


Likeledes kan terapeuten ønske å prøve en annen stilling ut fra helse- og posisjoneringshensyn.

Barnets sikkerhet er første prioritet og er spesielt viktig når det er snakk om posisjonering om natten. Selv om dette er et relativt nytt tiltak har posisjonering om natten vist seg å være veldig fordelaktig for mange, spesielt gjennom arbeidet utført av John og Liz Goldsmith. Likevel er det fundamentalt forskjelling fra posisjonering om dagen.

Ved posisjonering om natten vil bruker være uten tilsyn for lengre perioder av gangen. Derfor er kartlegging, tilpassing og vedlikehold av produktet ekstra viktig. Leckey anbefaler at det gjennomføres en grundig risikovurdering for hver eneste bruker (referer til NS EN ISO 14971 for retningslinjer for gjennomføring av risikovurdering). Foreldre og andre omsorgspersoner trenger full opplæring i trygg bruk av produktet, samt bli gjort oppmerksom på eventuelle farer identifisert i risikovurderingen.

Forbered tilpassingen av ditt sovesystem.

Sleepform fungerer på samme måte uavhengig av om bruker har en sprinkelseng eller enkeltseng.

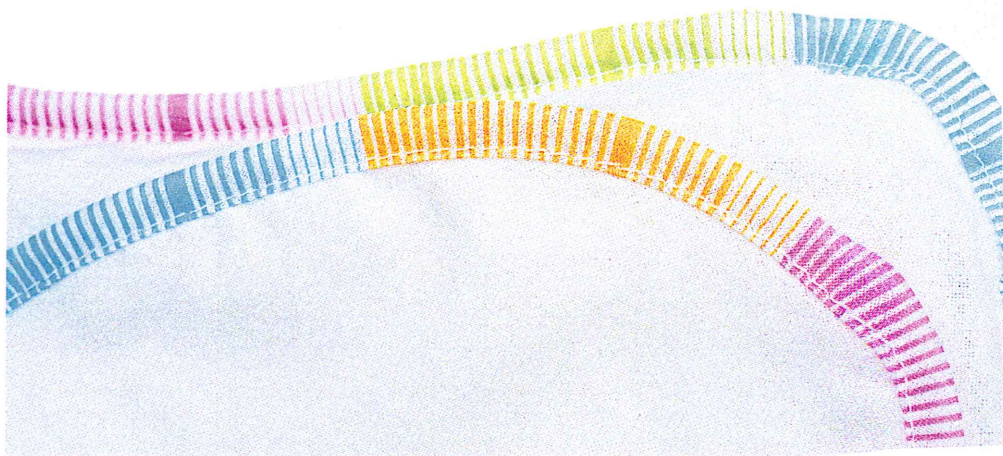

Behov for støtte og valg av komponenter

Når sovestillingen er valgt er det nødvendig å vurdere barnets behov for støtte for å opprettholde den ønskede stillingen.

Sleepform madrassen kan formes etter brukers fasong. Alternativt kan den formes slik at kroppen finner den ønskede stillingen ved hjelp av tyngdekraften når bruker slapper av i søvnen. Dette kan brukes til å korrigere asymmetri. Sleepform madrassen gir en nær støtte rundt store deler av kroppen.

Dersom bruker kun har behov for litt støtte kan du velge å bare benytte Belte for bekken/bryst eller Belte for knær/føtter. Disse er spesielt nyttige dersom bruker har tendens til å bevege seg ut av den ønskede stillingen i løpet av natten og har problemer med å komme tilbake til den optimale stillingen på egen hånd.

Disse elastiske støttene kan tillate noe bevegelse og hjelpe bruker med å vedlikeholde en behagelig og fordelaktig stilling.

Sovesystemet er enkelt å endre på og komponenter kan enkelt legges til eller fjernes.

Støtteelementene bør velges ut fra hvilke som tilbyr minimum av nødvendig støtte.

En ny opplevelse kan være utfordrende. Gjennom en rekke utprøvinger har vi funnet at noen brukere har fordeler av at produktene introduseres gradvis over et antall uker. En forelder la barnet i sovesystemet hver kveld og benyttet Belte for knær/føtter bare når de leste godnatt-historie. Etter noen uker ble barnet vant til beltet og sovnet med det på.




Tålmodighet er veldig viktig da det er nødvendig at bruker slapper av og er komfortabel før han sovner.

Rutelaken

Et rutelaken er tilgjengelig til sovesystemet. Rutelakenet legges på sengen først. Det gir deg referansepunkter i forhold til hvor de andre komponentene skal ligge.

Når du har funnet optimal plassering av de ulike elementene kan dette markeres på Sleepform Dokumentasjonskort. Dette er spesielt nyttig i forbindelse med rengjøring eller reise.

Rutelakenet legges på som et vanlig stretch-laken, med bokstavene i hodeenden av sengen.

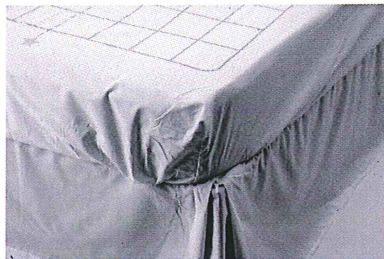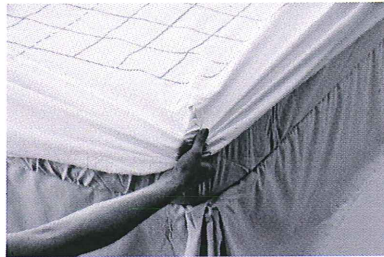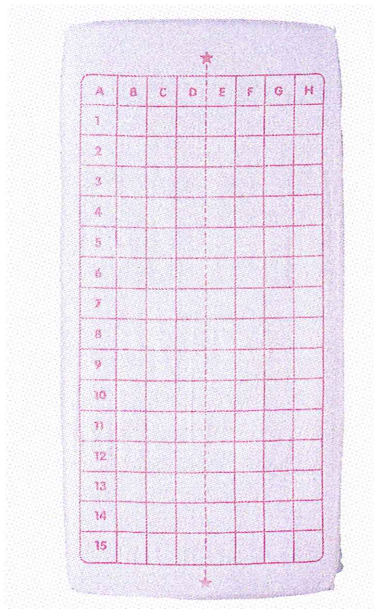

Sleepform madrassen

Sleepform madrassen har vist seg å gi veldig god støtte der brukeren trenger støtte rundt hele kroppen.

Det er en formbar madrass som lar seg raskt og enkelt forme til brukers konturer.

Madrassen kan endres og formes på ny om og om igjen.

Når du har tilpasset madrassen vil den holde formen sin i ca. 3 måneder eller inntil du velger å endre den.

Madrassen er lufttett og inneholder kuler som former og holder fasongen når du trekker luft ut av madrassen ved hjelp av pumpen som følger med.



Sikkerhet

Plasser alltid Air-Flow overmadrassen over Sleepform madrassen. PVC puster ikke og kan utgjøre kvelningsfare.



Hvordan forme Sleepform madrassen

Det kan være nyttig å bruke litt tid til øve seg på å forme Sleepform madrassen før du skal tilpasse madrassen til bruker.

Plasser madrassen på et bord eller på sengen.

Koble pumpen til munnstykket og åpne ventilen. Bruk håndpumpen til å trekke ut litt luft. Jo saktere du trekker i pumpehåndtaket, jo mer lydløs er pumpen. Mens du trekker ut luft vil du oppleve at madrassen blir mindre fleksibel. Trekk ut litt mer luft og se hvordan madrassen begynner å holde fasongen etter hvert som du trekker ut luften. Til slutt vil madrassen bli hard. For å holde formen lukker du ventilen før du fjerner pumpen.

Erfaring har vist at madrassen er enklere å forme dersom du har trukket ut litt luft før du starter. Dette vil gi kulene i madrassen mulighet til å holde fasongen etter hvert som du former den rundt brukeren.



Husk at du når som helst kan slippe inn litt luft i madrassen igjen for å gjøre den mer fleksibel og lettere å forme. For å gjøre dette lukker du ventilen, fjerner pumpen og åpner ventilen igjen et øyeblikk for å slippe luft inn i madrassen igjen.

Øv deg på dette slik at du føler deg trygg på å forme madrassen.

Når all luft er trukket ut av madrassen vil madrassen være hard. Du vil også se konturene av kulene på overflaten. Vi anbefaler at du kontrollerer madrassen hver dag og at du av og til trekker ut mer luft dersom du opplever at madrassen begynner å bli myk.



Plassere Sleepform madrassen i sengen

Plasser Sleepform madrassen i området der du trenger støtte. Madrassen er formet som en U slik at en ende har kuler for hjelpe til med posisjoneringen. Det er i denne enden ventilen sitter.

Plasser madrassen midt i sengen med området uten kuler langs midten.

Dersom du ønsker å fokusere på posisjonering av bekken og ben (eksempelvis gjennom å lage en abduksjonskloss) plasserer du madrassen slik at enden med ventilen ligger midt i sengen.

Dersom du ønsker å fokusere på posisjonering av hodet og overkropp plasserer du madrassen slik at enden med ventilen ligger øverst i sengen.

Tilpasse sovesystemet ved bruk av Sleepform madrass

Med rutelaken, Sleepformmadrassen og eventuelle belter på plass er du klar til å legge brukeren i sengen.

La Air-Flow overmadrassen ligge inntil videre.

Etter at du har øvet deg på å forme Sleepform madrassen vil du kanskje foretrekke å trekke litt luft ut av madrassen og lage en foreløpig form før du plasserer brukeren på madrassen.

Dersom du skal bruke belter fester du disse på nå. På den måten kan du lage et spor til stroppen når du former Sleepform madrassen.

Plasser brukeren i den ønskede sovestillingen.

Bruk god tid da dette kanskje er en ny stilling for bruker og bruker kan trenge tid til å finne ro i den nye stillingen.

Begynn med å forme Sleepform madrassen ved å skyve kulene til de områdene der bruker trenger støtte. Formen på madrassen kan tilpasses brukers kroppsfasong eller korrigere brukers stilling.



Trekk ut litt mer luft.

Fortsett å forme madrassen for å gi støtte. Når du har oppnådd ønsket form eller støtte, stenger du ventilen og fjerner pumpen. Flytt bruker bort fra madrassen.

Mens bruker er ute av madrassen kan du finjustere formen eller lage hulrom som bruker kan synke ned i når han slapper av. Åpne ventilen i 5 sekunder og tillat noe luft tilbake i Sleepform madrassen.

Du kan nå forme madrassen for å gi ekstra plass rundt evt. trykkpunkter eller lage støtter for å gi passiv korrigering av liggestillingen. Lag også plass til Air-Flow overmadrassen.


Når du er fornøyd med formen kopler du til pumpen igjen og trekker ut resten av luften slik at madrassen blir hard. Steng ventilen og løsne pumpen.

Plasser Air-Flow overmadrassen over Sleepform madrassen. Trykk den gjerne ned i de ulike hulrommene.

Legg et vanlig laken over madrassene og sengen. Du vil kanskje ha behov for å gå opp en størrelse i laken, avhengig av hvilke elementer du har valgt å bruke.

Plasser bruker i sengen igjen. Pass på at Sleepform madrassen ikke er formet for stramt rundt bruker. Dersom det er for trangt kan du åpne ventilen litt og tillate litt luft inn i madrassen.

Husk alltid å trekke ut luften igjen når du har funnet ønsket form. Steng ventilen og løsne pumpen.

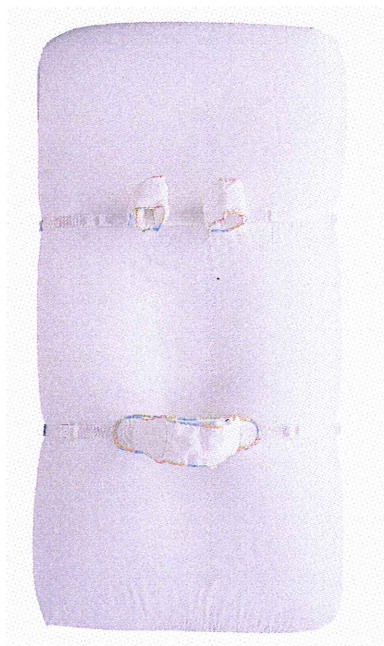

Air-Flow overmadrass

Air-Flow overmadrassen skal alltid benyttes over Sleepform madrassen. Dette fordi Sleepform madrassen er lufttett og kan utgjøre en kvelningsfare. I tillegg er madrassen veldig hard når den er ferdig tilpasset.

Air-Flow madrassen har en porøs struktur som gjør madrassen behagelig å ligge på samtidig som den forebygger trykkpunkter. Strukturen fremmer også luftsirkulasjon og bidrar derfor til å regulere temperaturen.

Plasser Air-Flow madrassen på sengen over Sleepform madrassen.

Vurder hvilke andre støtteelementer du ønsker å prøve.

Med utgangspunkt i brukerens størrelse kan du plassere festestroppen til belte for bekken/bryst og/eller knær/føtter under sengens madrass.

Spennene på festestroppene er enkle å komme til.



Montere de polstrede beltene

Du kan plassere bekken-/brystbeltet på to måter.

Dersom du monterer beltet slik at det elastiske båndet ligger over kroppen gir dette mer støtte. Dersom du monterer beltet slik at det elastiske båndet ligger under kroppen gir dette bruker mer frihet til bevegelse.

Du kan endre plassering når som helst.

Fest det polstrede bekken-/brystbeltet trygt rundt brukers kropp. Beltet inneholder samme fyll som Air-Flow overmadrassen. Det oppleves mykt og komfortabelt og vil ikke føre til varmedannelse.

Stram de elastiske båndene ved hjelp av spennene på siden av sengen til du finner riktig stramming for å kontrollere brukers bevegelser.

De polstrede beltene for knær og føtter monteres på samme måte som bekken-/brystbeltet og kan derfor gi mer eller mindre støtte/frihet til bevegelse.

Beltene for knær og føtter kan i tillegg breddereguleres for å bidra til at bruker får en optimal benplassering.

Det kan være at du ønsker å benytte mer enn ett sett med belter for å gi en komfortabel støtte.



Sikkerhet

Pass alltid på at beltene er festet ordentlig og at de ikke utgjør noen fare for bruker. Påse at nytten av belter er vurdert i den opprinnelige risikovurderingen.



Tilpasse Sleepform ved bruk av knepølle

Knepølle er tilgjengelig i to ulike lengder og to ulike høyder. Knepøllen kan plasseres under brukers knær for å oppnå en lett flektert stilling. Knepøllen kan plasseres over eller under Air-Flow overmadrassen.



Tilpasse Sleepform ved bruk av knepute

Dersom bruker sover på siden kan det være behov for en pute mellom knærne for å holde bena i en komfortabel og symmetrisk stilling.

Air Flow kneputen inneholder samme materiael som Air-Flow overmadrassen.



Tilpasse Sleepform ved bruk av Temperaturkontrollaken

Temperaturkontrollakenet er et teknisk materiale utviklet for å bidra til temperaturregulering. De unike cellene absorberer varme og holder deg kjølig. Cellene lagrer varmen de absorberer slik at denne kan frigis dersom du blir for kald.

Legg temperaturkontrollakenet over sovesystemet og dekk til med et vanlig bomullslaken. Ved bruk av inkontinenslaken bør dette ligge over temperaturkontrollakenet for å beskytte dette mot søl.

Noter nyttig informasjon

Noter de ulike elementenes plassering ved bruk av Sleepform Dokumentasjonskort. Dette er vedlagt Sleepform madrassen sammen med brukermanualen.

Vi anbefaler at du bruker et stretchlaken over sovesystemet.

Annen nyttig informasjon kan noteres i Sleepform Sovedagbok. Sovedagboken er utviklet for å kunne notere brukers sovevaner de første månedene etter at et sovesystem er introdusert. Dagboken kan benyttes til å informere kontaktpersoner rundt brukeren om sovemønster og sovevaner. Den kan også brukes for å registrere endringer i brukers sovestilling. Sovedagboken er vedlagt Sleepform madrassen sammen med brukermanualen.

Vedlikehold

Rengjøring

Belte for knær/føtter, Belte for bekken/bryst
Hele beltet kan vaskes i vaskemaskinen på 40°C.

Air-Flow knepute, Air-Flow overmadrass, knepøller
Åpne glidelåsen for å ta av det ytre trekket. Innetrekket er også avtagbart. Trekkene kan vaskes i maskin på 40°C.

Fyllmaterialet kan vaskes/skylles under vannkranen/ dusjhodet og lufttørkes. Materialet tørker veldig raskt.

Ekstra trekk er tilgjengelige.

Sleepform madrassen
Vask madrassen ved hjelp av såpe og varmt vann.

La madrassen blir ordentlig tørr før den legges til lagring.

Ved behov for desinfisering kan hele madrassen tørkes over med en løsning som inneholder 70% alkohol eller desinfeksjonsmiddelet Lysetol AF.

Dersom bruker har problemer med inkontinens, oppkast eller lignende, anbefaler vi å benytte et pustende inkontinenstrekk.

Temperaturkontrollaken

Temperaturkontrollakenet kan vaskes i maskin på 60°C.

Daglig kontroll av produktet

(Terapeuter, foresatte og andre omsorgspersoner)

Vi anbefaler at det gjennomføres en visuell kontroll av produktene daglig. Denne kontrollen skal utføres av terapeut, foresatte eller andre omsorgspersoner og har til hensikt å påse at produktet er trygt å bruke. Den daglige kontrollen skal inneholde:

- 1) Kontroller at produktet er rent og at det ikke er tegn til søl.
- 2) Kontroller at alt stoff, kantbånd, borrelås og plastspenner er i god stand og ikke viser tegn til skade eller slitasje.
- 3) Kontroller at Sleepform madrassen er lufttett. Trekk ut luft og kontroller at madrassen ikke mister formen sin når ventilen er lukket.
- 4) Se etter riper, hull og andre skader på Sleepform madrassen. Forsegl eventuelle hull ved hjelp av lappesakene i vedlikeholdssettet levert sammen med madrassen.

Hull kan oppdages ved visuell kontroll. Alternativt kan du bruke såpevann og se etter luftbobler. Dersom du finner et hull rengjør du overflaten og lar det tørke.

Velg en passende lapp. Påfør lim på lappen og på overflaten rundt hullet.

Vent 2 minutter og klem lappen over hullet. Pass på at det ikke er noe luft under lappen.

Limet er herdet etter 24 timer.

Senk ikke hele Sleepform madrassen i vann.

Årlig kontroll av produktet

(Terapeuter, teknikere, representanter fra Handicare)

Leckey anbefaler at alle produkter gjennomgår en detaljert kontroll minst en gang i året samt hver gang produktet skal gjenbrukes. Denne kontrollen skal gjennomføres av person med teknisk kompetanse som har gjennomgått en grundig produktopplæring. En slik kontroll skal minimum inneholde:

- 1) Kontroller at produktet er rent og at det ikke er tegn til søl.
- 2) Kontroller at alt stoff, kantbånd, borrelås og plastspenner er i god stand og ikke viser tegn til skade eller slitasje.
- 3) Kontroller at spennene går ordentlig i lås.
- 4) Kontroller at Sleepform madrassen er lufttett. Trekk ut luft og kontroller at madrassen ikke mister formen sin når ventilen er lukket.
- 5) Kontroller at ventilen på Sleepform madrassen fungerer som den skal.
- 6) Se etter riper, hull og andre skader på Sleepform madrassen. Forsegl hull ved hjelp av lappesakene i vedlikeholdssettet levert sammen med madrassen.

Hull kan oppdages ved visuell kontroll. Alternativt kan du bruke såpevann og se etter luftbobler. Dersom du finner et hull rengjør du overflaten og lar det tørke. Velg en passende lapp. Påfør lim på lappen og på overflaten rundt hullet. Vent 2 minutter og klem lappen over hullet. Pass på at det ikke er noe luft under lappen. Limet er herdet etter 24 timer.

Senk ikke hele Sleepform madrassen i vann.

- 7) Kontroller at Air-Flow overmadrassen er intakt og at den er jevn og flat. Påse at materialet inne i madrassen ikke har samlet seg i et hjørne.

Gjenbruk av Leckey's produkter

De fleste av Leckey's produkter er levert og tilpasset til den enkelte bruker. Før produktet gjenbrukes anbefaler vi at det gjennomføres en vurdering av produktet mot den nye brukerens behov. Påse at produktet som gjenbrukes ikke er modifisert eller har spesielle tilpasninger.

En grundig teknisk kontroll av produktet skal gjennomføres før produktet leveres ut på ny. Kontrollen skal gjennomføres av en person med teknisk kompetanse som har gjennomgått en grundig produktopplæring.

Påse at produktet er ordentlig rengjort i henhold til vask- og vedlikeholdsinstruksjonene i denne brukermanualen.

Påse at en kopi av brukermanualen blir levert sammen med produktet. En kopi av brukermanualen kan lastes ned fra www.handicare.no.

Leckey anbefaler at det føres en skriftlig oversikt over alle kontroller av produktet i forbindelse med gjenbruk.

Dersom du er i tvil om det er trygt å fortsette å bruke produktet eller dersom en del skulle svikte, må all bruk av produktet opphøre umiddelbart. Kontakt din Hjelpemiddelsentral eller Handicare, tlf: 03250, så snart som mulig.

Produktstøtte

All service på Leckey's produkter skal utføres av personer med teknisk kompetanse som har gjennomgått en grundig produktopplæring. Kontakt Handicare AS' kundesenter, tlf: 03250. De vil gladelig bistå deg.

Teknisk informasjon

Varenummer og dimensjoner

HMS art.nr.	Varenr.	Varebeskrivelse	Dimensjon
149625	110-3607	Sleepform madrass inkl. bag og pumpe	95x95cm
	110-2606	Overmadrass Air-Flow sprinkelseng	96x118cm
149624	110-3606	Overmadrass Air-Flow enkeltseng	100x200cm
	110-2605	Knepølle lav liten	14x5x50cm
149372	110-2604	Knepølle høy liten	14x10x50cm
	110-3605	Knepølle lav stor	19,5x7,5x90cm
152487	110-3604	Knepølle høy stor	19,5x12,5x90cm
	110-1601	Belte for bekken/bryst str. 1	Bredde: 11,5-16cm Omkrets: 34,5-48,5cm
	110-2601	Belte for bekken/bryst str. 2	Bredde: 16-19,6cm Omkrets: 47,8-60,1cm
	110-3601	Belte for bekken/bryst str. 3	Bredde: 16-19,6cm Omkrets: 47,8-60,1cm
	110-4601	Belte for bekken/bryst str. 4	Bredde: 17,5-32,8cm Omkrets: 55-100,7cm
	110-1602	Belte for knær/føtter str. 1	Omkrets: 13,7-27,1cm
149371	110-2602	Belte for knær/føtter str. 2	Omkrets: 18,1-32,2cm
	110-3602	Belte for knær/føtter str. 3	Omkrets: 18,1-32,2cm
	110-4602	Belte for knær/føtter str. 4	Omkrets: 23-55,3cm
	110-2603	Knepute Air-Flow liten	23x33x6cm
	110-3603	Knepute Air-Flow stor	45x65x6cm
	110-2608	Rutelaken sprinkelseng, 2stk	
	110-3608	Rutelaken enkeltseng, 2stk	
153318	110-2636	Temperaturkontrollaken sprinkelseng	81x122cm
	110-3636	Temperaturkontrollaken enkeltseng	100x200cm
	NTL27	Madrassbeskytter, vanntett	86x76cm
	NTL20	Pumpe Sleepformmadrass	Inkl. ved best. av madrass
	110-3633	Bag Sleepform	Inkl. ved best. av madrass
	110-2609	Festestropp belte sprinkelseng	Inkl. ved best. av belte, 63cm
153319	110-3609	Festestropp belte enkeltseng	Inkl. ved best. av belte, 102cm

Tekniske spesifikasjoner

Medical Devices Regulations 2002	
Komponent	Er i overensstemmelse med
Sleepform madrass	NS EN 1021-1 og 2;1994 NS EN 597-1;1995 NS EN 597-2;1995 BS 7177:1996 Er i overensstemmelse med NHS Firecode Document HTM 87
Knepølle	NS EN ISO 12952-2;1999 paragraf 3.3.4
Air-Flow overmadrass Air-Flow knepute	NS EN 597-1;1995
Innertrekk	BS 7175;1989, del 3 tennskilder 0,1,5 100% gjennomtrengelig for damp Inneholder ikke latex
Yttretrakk (100% børstet bomull)	100% gjennomtrengelig for damp Inneholder ikke latex
Skum (kneputte)	Alt skum som er benyttet er CMHR (<i>combustion modified high resilience</i>) og er i overensstemmelse med BS 5852, del 2, tennkilde 5 og CAA Spec 8 utgave 2 del 2.2b. Skummet er klasse V (BS3379).
Fiber (Air-Flow madrassen Air-Flow kneputen belte for bekken/bryst belte for knær/føtter)	Innebygget reaksjon på ulmebrann-Plan 2 del 1 Brannforskrift for møbler og inventar 1988 (basert på BS 5852:1982 Del 2) Ytelseskrav Air-Flow-BS 6595;1985; paragraf 3.3 BS 4578;1970 (91)
Max brukervekt Air-Flow overmadrass liten Air-Flow overmadrass stor	19kg 76kg
Rengjøringscykluser	Det er ingen restriksjoner på antallet rengjøringscykluser på dette produktet.
Garantiperiode	2år
Forventet levetid	Over 5 år
Merking	• CE merket Klasse 1 Medisinsk produkt (MDD 93/42 EEC) • Fabrikasjonsår • Produsentnavn • Materialsammensetning • Vedlikeholdsinstruksjoner



handicare

Handicare AS
Øreveien 37
Pb. 163
1501 Moss

Tlf: 03250
Faks: 85 02 88 22
post@handicare.no
www.handicare.no

For ytterligere informasjon kontakt Handicare på tlf. 03250. Sørg for at du alltid har siste versjon av brukermanualen. Den kan du finne på vår hjemmeside www.handicare.no/barn