


Justering av manøverboksens stilling


Manøverboksen kan justeres i dybde og sideveis. For å justere i dybde skru ut skruen (1) med 5 mm sekskant nøkkel. Flytt manøverarmen til ønsket posisjon (tre muligheter) og monter deretter skruen. Sideveis kan manøverboksen flyttes både til innsiden og utsiden av armlenet. Manøverarmen er leddet i to punkter, hvilket gjør horisontal forflytning av manøverboksen uten verktøy mulig. Skyv manøverboksen i ønsket stilling og den låser seg selv. Manøverboksen kan plasseres på valgfri side av stolen.

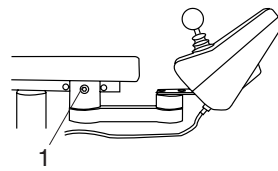


Rengjøring, vedlikehold og lading

Stolen skal tørkes av og holdes ren for støv og smuss. Setetrekket rengjøres med såpevann. Sete, rygg og det øvrige skumstoffet er av funksjonelle årsaker ikke vannrett. Av hygieniske årsaker skal ved bytte av stofftrekk også skumstoffet og seteplaten byttes ut.

El-heisen skal regelmessig kontrolleres med tanke på støv og smuss: Kjør opp seteplaten til øvre posisjon. Gjør rent med en klut. Vann eller annet løsemiddel skal ikke benyttes. Smør deretter inn sylindere med et tynt lag teflon- eller silikonbasert smørefett. Disse kladder ikke slik som mineraloljebasert fett.

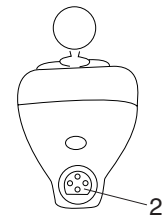

Når batteriindikatoren (4, se illustrasjon på forrige side) viser bare røde markeringer, betyr dette at stolen kjøres på reservekraft. Ladning av batteriet bør skje umiddelbart da det kun er 10% igjen av kapasiteten. Hvis du fortsetter å kjøre med stolen vil de røde lampene begynne å blinke for å minne deg på om at ladning er nødvendig. Før ladning skal stolen være avskrudd. Koble ladekontakten (1) til ladeuttaket (2) på kontrollpanelets fremside. Tilkoble deretter laderens nettkontakt til vegguttak. Lampen (4) lyser fast gult mens ladning pågår. Når lampen (4) slutter å lyse er batteriet ladet til 90% og kan brukes. Men for ladning til 100% bør man vente til lampen (5) lyser fast.

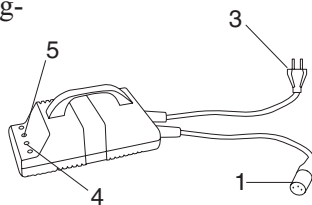

Ved bytte av batteri (anbefalt merke: Sonnenschein, typebetegnelse: Dryfit A 500 12V 25A), vær nøye med at batterikabelen som er merket med pluss festes til plusspolen på batteriet og at minuskabelen festes til minus polen.

Tenk på følgende når du håndterer batterier:


- Kortslett aldri batteriet.
- Kast ikke batteriet på åpen flamme.
- Utsett ikke batteriet for kraftige slag.
- Ved kontakt med batterisyre, skyl med store mengder vann i min. 15 minutter, kontakt deretter lege.
- Defekte batterier skal leveres på en miljøstasjon.

Nødvendig verktøy, fett mm for vedlikehold av stolen kan bestilles fra Handicare.

Feilsøking


Symtom	Årsak	Tiltak
Stolen kan ikke kjøres	Laderen tilkoblet Batteriet uladet	Koble ifra laderen Lad batteriet
Funksjonsdisplayet indikerer med en strek, stolen kan ikke kjøres	Elektronikken har hengt seg	Sku av - sku på
Stolens motorer går men drivhjulene driver ikke	Frikkoblingen i ulåst stilling	Lås frikoplingen
Stolen kan ikke heves og senkes	Feil i elektronikk/styreboks	Kontakt forhandler

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 6100/6200/6400

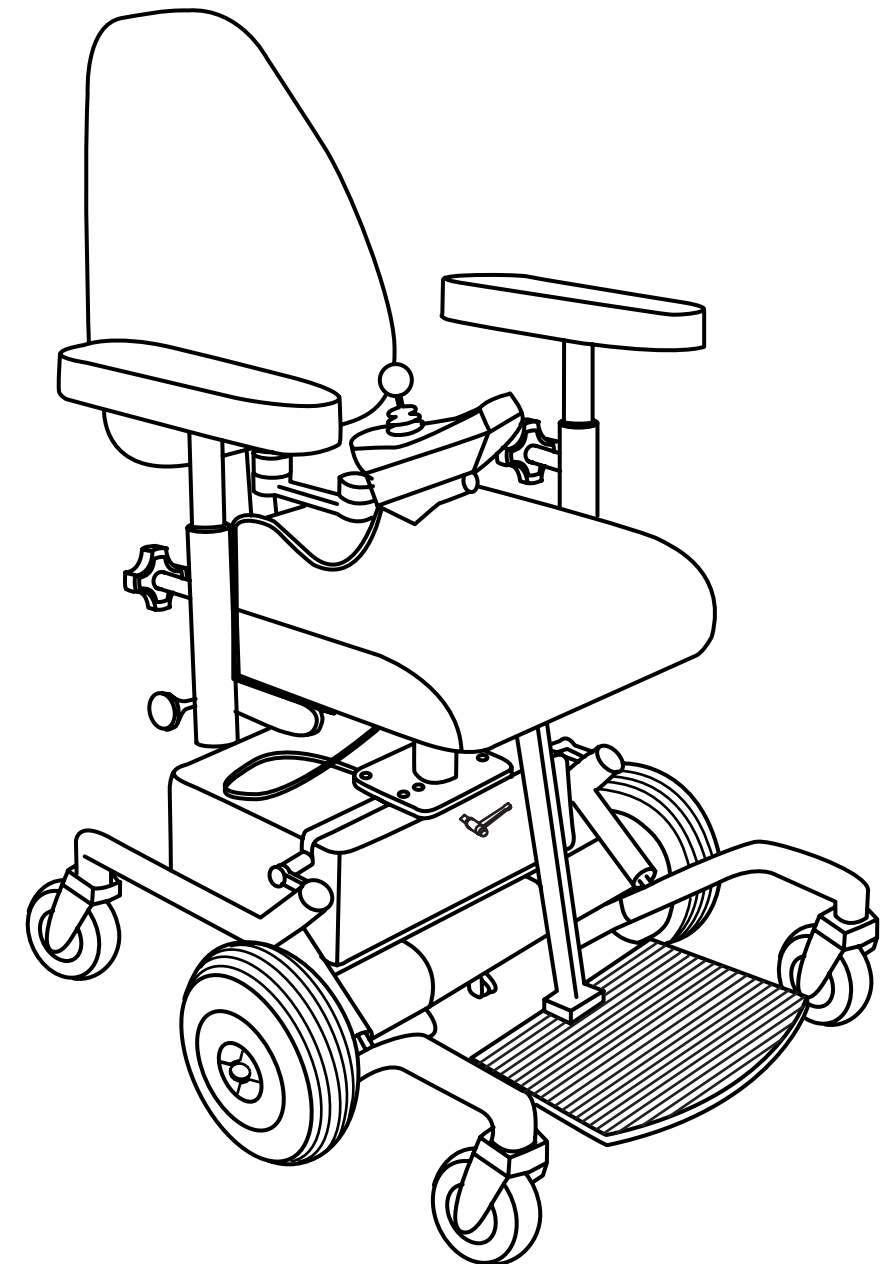






REAL MOBIL 6100/6200/6400	CE
Elektrisk rullestol for innendørsbruk beregnet på personer med nedsatt funksjon i nakke/rygg, ben og armer.	
BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING	April 2002

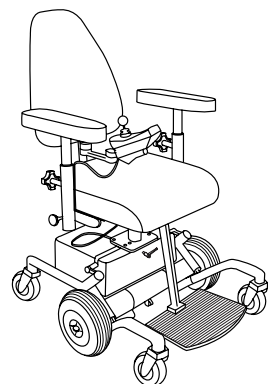

Stolen har utskiftbare komponenter, tilbehør og funksjoner med innstillingsmuligheter for individuell tilpasning. Stolen skal kun brukes av den person og til det formålet stolen er beregnet for. Stolen er beregnet for innendørsbruk og skal ikke utsettes for vann, andre væsker eller kjemikalier. Ei heller høy varme eller langvarig og intensiv sollys eller annen stråling. Stolen skal ikke styres med annet tilbehør eller komponenter enn det som godkjennes av Handicare. Reparasjoner og annet teknisk arbeid skal kun utføres av personer autorisert av Handicare. Les nøye gjennom denne bruksanvisning før stolen tas i bruk.


Ryggstøtte

Det finnes tre typer ryggmekanismer : Standard, Medic og Comfort. Ryggen finnes i lav og høy utførelse (illustrerte stoler har alle høy rygg). Alle ryggmekanismer har separate reguleringer for høyde (1) og vinkel (2). Løsne vrideren, still inn ønsket høyde/vinkel og lås deretter vrideren igjen. På Comfortmodellen med gassfjærregulering, må spaken føres forsiktig fremover for å endre vinkelen. Medicmodellen kan justeres i dybden med vrideren (3). I den høye utgaven kan også vinkelen på selve ryggen justeres med vrideren (4). Comfortmodellen har i begge utførelser en vrider (5) for å kunne justere vinkelen på ryggen. Ryggmekanismen kan som tilbehør reguleres med gassfjær eller elektrisk.

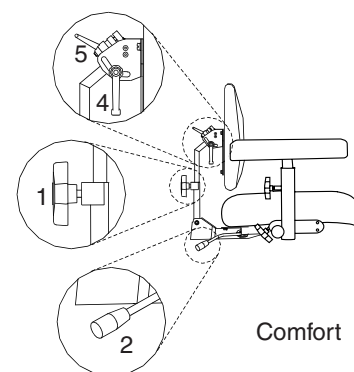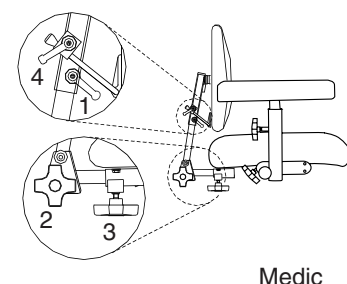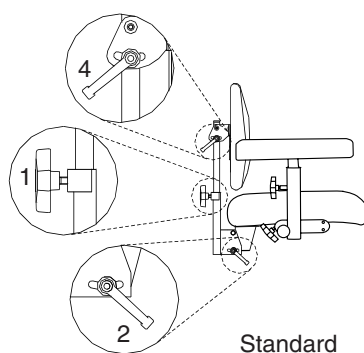


Armlen

Armlenene kan justeres i høyde og bredde samt felles bakover. Høyden justeres med rattet (1). For å senke armlenet, skru rattet utover. For å høyderegulere, løft armlenet til ønsket høyde og lås deretter rattet. Bredden låses med rattet (2). Løsne rattet, still inn og lås. Feltingen av armlenet gjøres med kula (3). Dra ut og fell bakover. Anordningen låses automatisk når armlenet felles tilbake i oppreist stilling. Den automatiske låsing kan hindres ved å vri kula (3) en kvart omdreining.

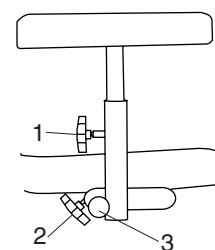


Fotplate/benstilling

Fotplaten kan justeres i høyde og i vinkel. For å justere fotplatens høyde; løsne skruen (1) med en 3 mm sekskant nøkkel. Still inn ønsket høyde, obs! Påse at skruen går inn i en av det indre rørets forsterkninger, og dra til skruen. Fotplatens vinkel justeres med skruen (3), bruk 5 mm sekskant nøkkel. For å senke; skru mot klokka. Fotstøttens vinkel kan justeres i fire stillinger; Løsne og ta bort skruen (2) med 5 mm sekskant nøkkel. Still inn ønsket vinkel, sett tilbake skruen i riktig hull og skru til.

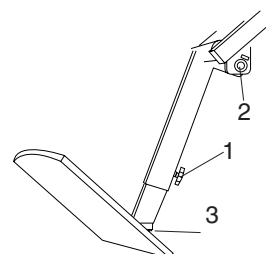

Setevinkling (tilleggsutstyr)


Setevinkling finnes i tre ulike utførelser: manuell, gassfjær og sveivergulert setevinkling. Reguleringen for gassfjærregulert vinkling sitter i setets venstre bakkant (2) og justeres ved at spaken føres forsiktig fremover. Reguleringen sitter alternativt under den ene armstøtten (3). Sveivregulert setevinkling manøvreres med sveiven (4). Vinklingsintervallet kan stilles inn med mutterne (5).

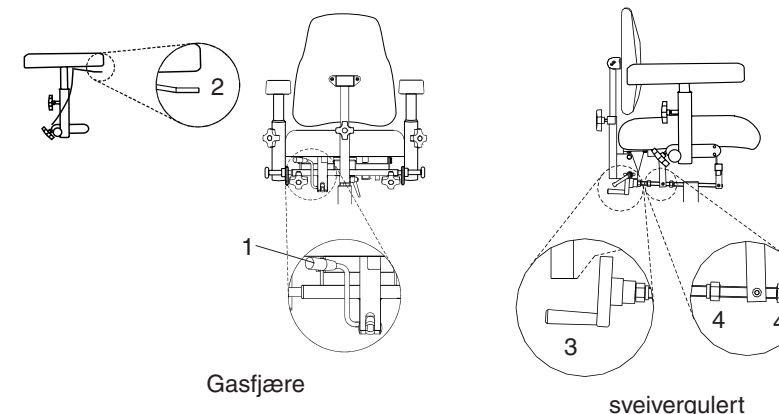

Frikobling av magnetbremser

Frikobling gir mulighet til manuell forflytting av stolen. Vri manøverplaten (1) på begge hjul en kvart omdreining mot klokken for å frikoble magnetbremsen. Hvis det er vanskelig å vri manøverplaten, prøv å skyve stolen litt frem og tilbake. For å koble bremsen inn igjen, vri manøverplaten (1) på begge hjulene en kvart omdreining med klokken og skyv stolen forsiktig inntil magnetbremsen kobles inn med ett tydelig "Klikk".

Obs! Hovedstrømbryteren må aldri være innkoblet når magnetbremsen er frikoblet. Magnetbremsen må aldri kobles inn ved hjelp av motoren. Stolen må aldri transporteres med magnetbremsen frikoblet.

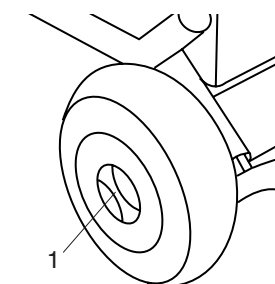

Manøverboks, manøvrering

Slå på hovedstrømbryteren (1). Kontroller batterinivået (4). Batterinivået bør ikke være nede på det røde området. (se "lading")

Kjøring: Påse at funksjonsdisplayet (3) viser sifrene 2 (normal hastighet) eller 1 (lav hastighet). Hvis ikke, trykk på funksjonsknappen (2) inntil en av disse sifrene vises. Før joystick (5) rett frem for å kjøre fremover og skrått venstre/høyre fremover for å svinge. Stolen kan svinges rundt ved å dra joystick (5) rett til venstre/høyre. For å rygge dra joystick (5) bakover.

Heving/senking av sitteplaten alternativt med elektrisk setevinkling/ryggvinkling: Trykk på funksjonsknappen (2) inntil bokstaven A vises. Før joystick sideveis for å bytte mellom A, B eller C i funksjonsdisplayet (3). A styrer hev/senk av stolen, B setevinkel og C ryggvinkel. Før joystick (5) fremover/bakover for å betjene de ulike valgene.

Når stolens elektriske funksjoner ikke benyttes innen fem minutter slår manøverboksen seg av for å spare på batteriet. For å starte opp elektronikken trykk på hovedstrømbryteren (1) alternativt rør joystick (5). Tidsintervallet for automatisk avstengning kan stilles inn.

Tute: Trykk på knapp (5).

Låsefunksjon: For å låse elektronikken brukes magnetnøkkelen (9). Elektronikken må være påslått med hovedstrømbryteren (1) ved låsing/opplåsing. Magnetnøkkelen (9) holdes mot symbolet (8) for låsing/opplåsing. Ved låsing slukkes manøvrerpanelet helt, for å låse opp må hovedstrømbryteren (1) slås på. Når stolen er låst (og påslått) blinker en lampe i symbolet (8).

Knappene (7) har ikke blitt programmert for noen funksjon.

