

Kjørerampe AeroLight Lifestyle

Art.nr. AL28



Bruksanvisning

Før bruk

- Fjern all emballasje og kontroller at ingen skader har oppstått på skinnen under transporten.
- Les nøye igjennom bruksanvisningen og merknadene før du bruker skinnene.
- Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
- På hver skinne finnes et merke som angir hvilken maksimal last rampen får belastes.

Plassering

- Bær hver halvdel av rampen separat. Bruk begge håndtakene når du bærer rampen (bilde A).
- Sørg for at underlaget er fast og stabilt (både oppe og nede).
- Kontroller at rampen er lang nok til å dekke hindringen. Rampen er designet for å håndtere stigninger mellom 1:4 og 1:20 (avhengig av sikkerhetsaspekter og brukerkrav).
- Plasser første halvdel av rampen med "leppen" hvilende stabilt på det øvre underlaget og med hengsel siden sentralt på den valgte retningen (bilde B). "Leppens" unike design holder rampen på plass.
- Åpne den andre halvdel av rampen.
- Legg denne ned ved siden av den første halvdel. Sørg for at de innvendige hengslene treffer krokene på den første halvdel (bilde C og D).
- Sørg for at rampen ikke flyttes under bruk og kontroller at rampen ligger stødig hver gang den benyttes.
- Fjerning gjøres enkelt ved å løfte opp siden uten kroker først og slå den sammen.

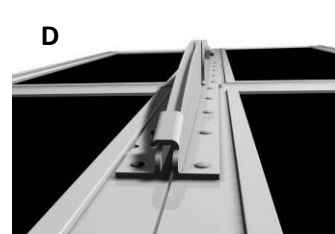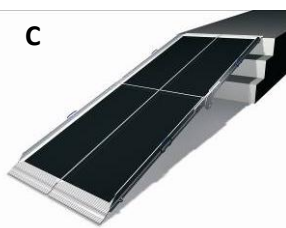

(sett fra undersiden)

Vedlikehold og rengjøring

- Dersom rampen blir skadet eller svært glatt skal den ikke benyttes (kontakt leverandøren).
- Rampene kan rengjøres med alle normalt tilgjengelige rengjøringsmiddel og lufttørkes før bruk.