



At Adaptive Star we believe in Going Out & Making A Difference
We hope you will join us on our journey.

AXIOM

INNENDØRS/UTENDØRS MOBILITETSVOGN
BRUKSANVISNING AXIOM 1,5, 2, 3 og 4





Vanlige spørsmål

Kan jeg gå på rulleskøyter når jeg er ute på tur med vognen?

Dette er ikke å anbefale da det er lett å miste kontrollen over vognen og muligens skade barnet ditt.

Hva hvis vognen går i stykker?

Kontakt din forhandler.

Kan stoffet på vognen vaskes?

Ja, setetrekk, solskjerm og kurv kan tas av og vaskes enten med hånd eller i maskinen med Milo på 30 grader. Montér alt tilbake på vognen mens det fortsatt er vått. Det er viktig å fjerne støtteplater før du vasker setetrekket og at disse blir satt på plass igjen før bruk.

HUSK å

ALLTID bruke håndleddstroppen så lenge brukeren er i vognen.

ALLTID sette på fotbremsen bak når brukeren tas inn og ut av vognen.

ALDRI forlate brukeren uten tilsyn i og rundt vognen.

ALDRI overbelaste vognen, det kan gjøre at vognen blir ustabil og tipper.

IKKE tillate brukeren å stå oppreist i vognen. Dette kan gjøre at vognen tipper og at brukeren eller andre blir skadet.

Ta AXIOM vognen ut av boksen og pakk ut alle deler.

Fold vognen ut og opp i stående stilling, ved å trekke opp håndtaket til det låses på plass.

Kontroller at vognen er foldet helt ut og låst på plass, før du plasserer passasjerer og begynner å bruke vognen.

AXIOM vognen er utstyrt med en primær og sekundær lås.

Når AXIOM vognen er foldet helt ut, vil den primære smekklåsen låses (det kan høres et "klikk" når den låses). Den sekundære låsen er plassert på siden av AXIOM vognen (venstre side bakfra) som vist på bildet. Sett inn låsepinnen for å sikre at rammen er låst. Det advares sterkt mot å bruke AXIOM vognen uten at denne sekundære låsepinnen er på plass.

Låsen åpent




Låsen lukket




Finne frem forhjulskjermen og plasser denne som vist på bildet. Merk: Festemutterne for disse boltene er skrudd på boltene, og må fjernes før skjermen monteres. Når skjermen er montert, skal mutterne på boltene strammes til med en skiftesnøkkel. Sørg for å stramme tilstrekkelig til at skjermen festes ordentlig, uten å trekke til for mye.

Bolter plasseres ved de HVITE pilene

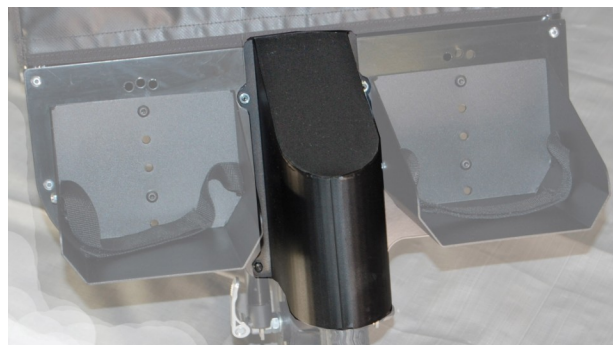

Finne frem fotkassene. Hver fotkasse har muttere og bolter for transport. Disse skrues ut og tas vare på. De skal brukes når fotkassene er montert. Hver fotkasse er universell, dvs. det er ingen høyre eller venstre fotkasse. Monter hver fotkasse ved å skru den fast til AXIOM vognen som vist på bildet. På AXIOM vognen er det et sett med hull som gjør det mulig å justere høyde og sidevinkel på hver fotkasse. La det være minst et tomt hull mellom monteringsboltene for ekstra stabilitet og sikkerhet.

Bolter plasseres ved de HVITE pilene

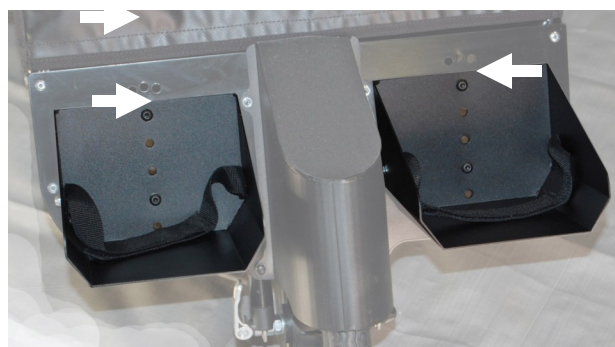

Folde sammen AXIOM vognen

For å slå sammen AXIOM vognen, fjernes låsepinnen fra den sekundære låsen.

på plass:




fjernet:




Finne frem utløser spaken på venstre side av rammen

Utløser
spak

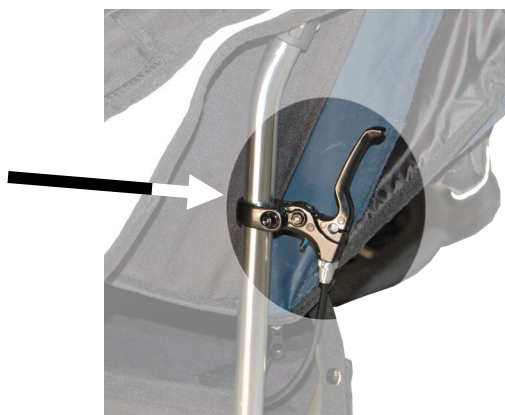

Trykk inn spaken en gang og press håndtaket ned. Vognen vil nå folde seg sammen.

AXIOM vognen foldes sammen til en størrelse som gjør det enkelt å transportere den i de fleste bagasjerom. Ved behov for en enda mer kompakt sammenfoldet størrelse, kan hjulene tas av i tillegg.

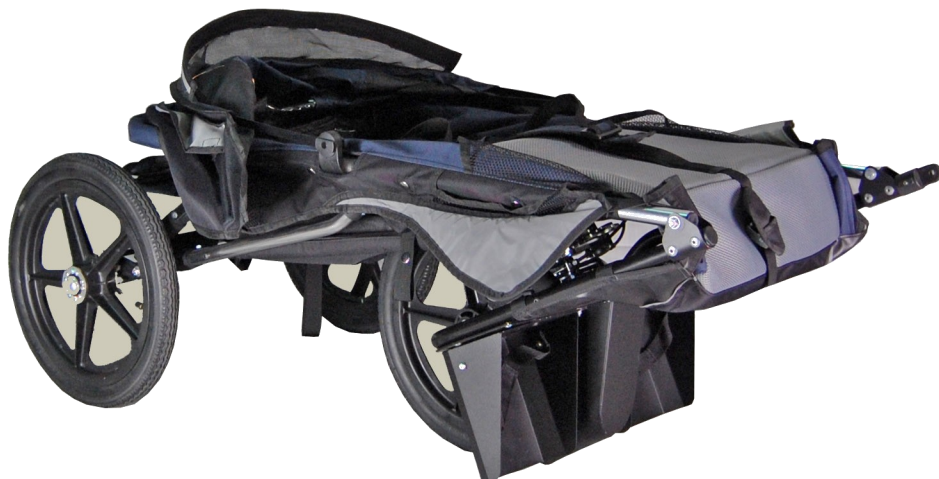



Regntrekk (Tilleggsutstyr)

Skulle det begynne å regne, vil dette regntrekket sørge for at brukeren har det tørt og godt. Brett trekket rundt vognen og fest borrelåsene bak. Klikk remmene rundt fotbrettet.

Høydejusterbart håndtak

Vognen har høydejusterbart håndtak.

Press inn knappene på innsiden på begge sider av håndtaket for å justere høyden.

Plasser håndtaket i ønsket høyde mens knappene holdes inne.



Bremse system

Vognen er utstyrt med brems på forhjulet og på bakhjulene.

Bremsen på forhjulet fungerer kun med standard forhjulet og vil ikke fungere

med Axis svingbart hjulsett (tilleggsutstyr).



Bremsen på bakhjulene betjenes ved å trykke ned bøylene på den sorte stangen som går mellom hjulene.



Advarsel

Bruk alltid bakre hjulbrems når noen settes i vognen, eller tas ut. Bruk alltid bakre hjulbrems når noen sitter i vognen og den er utenfor rekkevidde.

Håndleddstropp


AXIOM vognen er utstyrt med en håndleddstropp for ekstra sikkerhet.

Den bør alltid brukes når noen sitter i vognen. Håndleddstroppen er bindeleddet mellom vognen og den som triller den, og forhindrer at vognen triller ut av kontroll ved et uhell. Forlat aldri noen i vognen uten tilsyn.



Montering av bakhjul

Lås opp den bakre bremsen ved å trekke opp den svarte stangen.

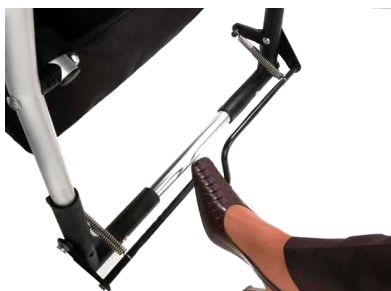

Trykk så på knappen på utsiden av bakhjulet, dytt bakhjuls akselen inn i vognens bakaksel, slipp så knappen. Gjenta det samme for det andre hjulet.



Advarsel

Kontroller alltid at hjulene er låst i rammen før vognen benyttes.


Montering av forhjul

Start med å vippe vognen bakover slik at gaffelen peker oppover. Dette vil gjøre det enklere å montere forhjulet. Forhjulet monteres på samme måte som på sykler.



Sørg for at hendelen for å utløse bremsen peker bort fra vognen.

Plasser dekket mellom bremseklossene, juster hjulet slik at de flate delene av hjulakselen er på linje med slissene i gaffelen, og skyv hjulet helt inn.

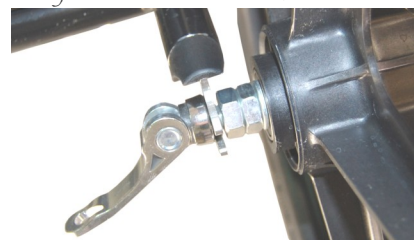

Plasser låsespaken rett ut fra rammen som vist på bildet. Deretter strammes den sorte mutteren på



motsatt side av spaken, til den sitter inntil.

Deretter lukkes spaken som vist her. Hvis spaken ikke kan svinges helt inn i låst stilling, åpnes den igjen, den svarte mutteren løsnes litt, og så lukkes spaken igjen. Dra litt i hjulet for å sjekke at det sitter på plass.



Justeringer

Legge ned setet

For å legge ned setet og reise det opp igjen, justeres de to stroppene bak setet.



Fotkasse

AXIOM vognen har fotkasser som kan justeres slik at de passer til brukeren.

Det er best å tilpasse fotkassene, når brukeren sitter i vognen

Sett boltene i et av hullsettene som vist. Boltene settes i det av hullsettene som passer best for brukeren.

Fotkassen kan justeres opp eller ned med 2,5 cm utslag.

Dersom det skulle være nødvendig, kan fotkassen justeres fra venstre til høyre 1,3 cm.

I tillegg kan hver fotkasse vinkles 10 grader til høyre eller venstre, eller monteres opp ned for brukere med korte ben.

Når fotkassene er riktig posisjon, festes de til rammen med de fire 3 cm x 0,6 cm boltene.



Justering av bremsen på forhjulene

Bremsen på AXIOM vognen kan kreve periodisk justering. Ved å skru sølv ringen utover, (indikert ved den røde pilen), flytter bremseklossene seg nærmere forhjulet. Det er et lignende justeringspunkt under vognen, nær forhjulet. Dette bremsesystemet er det samme som brukes på en sykkel.



Sølv justering ring

Justering hvis vognen ikke kjører rett

Dersom vognen trekker til venstre eller høyre:

Sjekk om alle 3 dekk er korrekt fylt med luft.

Sjekk at forhjulet ikke er montert for stramt. Slipp 'quick release' spaken for bremsen, skyv forhjulet helt tilbake inn i gafflenes endestykker og sørg å lukke spaken passe stramt. Hvis spaken er for stram, løsnes mutteren på den andre siden og spaken lukkes på nytt. Det kan være behov for flere finjusteringer før spaken lukkes korrekt.



Kontroller at hjulene eller akslene ikke er bøyd.

Sikkerhets sele


Åpne begge spennene på den polstrede midtdelen.

Trykk ned knappen mellom brukers knær og trekk beltet ut til enden.


Plasser brukeren i setet.

Juster den polstrede midtdelen forover eller bakover slik at den passer for brukeren.

Juster den polstrede skulderselen opp eller ned på borrelåsremmene .

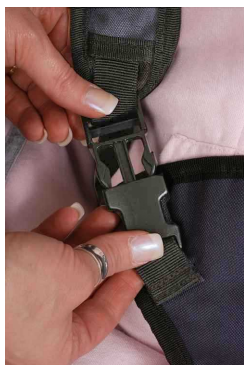

Lukk begge spennene til den polstrede midtdelen.

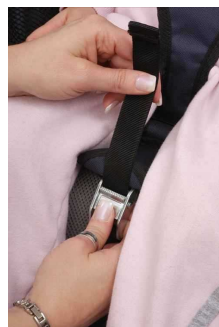

Dra i justeringsremmen, til den polstrede midtdelen og den polstrede skulderselen sitter godt.

Advarsel

Bruk alltid sikkerhetsbelte for å unngå at brukeren faller ut og skader seg.

Sikkerhetstropp for setet



Husk!

Sjekk alltid at sikkerhetstroppene for setet er festet riktig før hver bruk.

Oppbevaring

Vognen har flere muligheter for oppbevaring. Det er en lomme bak på seteryggen, samt en lomme for nøkler eller mobiltelefon på begge sider.

Et annet sted for oppbevaring er nettingkurven under setet. NB! Ikke oppbevar mer enn 2 kg totalt i lommene og nettingkurven. Overbelastning kan gjøre at vognen blir ustabil og tipper.

Vedlikehold

Det anbefales å sjekke AXIOM vognen en gang i året.

Smøring av følgende deler er nødvendig:

1. Senterskruen på håndbrems og håndbremskabel
2. Kabel nede ved bremse kalipter
3. Forhjuls akslingen
4. Utløserarmen (på forhjulet)
5. Åpninger i bakakselen for bakhjulet
6. Bakhjuls akselen, navet og lagrene
7. Alle sammenleggbare ledd

Skift ut bremseklossene når disse begynner å bli slitte.

Sjekk at alle bolter er skrudd godt fast og at fjærene ikke kommer bort i fotbremsen bak.

Sjekk stoffsømmer og remmer for slitasje.

Når vognen ikke er i bruk, oppbevares den på et mørkt og tørt sted. Dette for å forhindre bleking og jordslag. Impregnerings spray vil også gi ekstra beskyttelse mot flekker og bleking.

Sjekk rammen for løse nagler, sprekker og slitasje.

Rustforebyggende vedlikehold

Før vognen tas i bruk, anbefales det at ståldelene sprayes med silikonspray eller en annen type rust forebyggende belegg (f.eks. møbelpolish som finnes i mange dagligvarebutikker). Gjenta med jevne mellomrom. Dette er spesielt viktig når vognen benyttes i sjøluft, snø, slaps og på saltede veier.

Delene som er utsatt er:

- Hjulene
- Bremsfjærene bak
- Bremsesystemet foran inkl. bremsekalipere
- Senterskruen på håndbremsen
- Pop-naglene (hvis ønskelig)

Forebyggende smøring vil forlenge levetiden og holde vognen pen. Vognen kan også vedlikeholdes ved å rengjøre med en fuktig klut.

Manglende vedlikehold kan føre til oksidering, noe som resulterer i rust og ødelagte deler.

Adaptive Star og forhandlere stiller ingen garanti for ødelagte deler som følge av manglende vedlikehold.

Dekk

Dekkene på vognen har luftslanger og er en standard sykkel størrelse. Hvis et av dekkene ikke holder på luften, kan den indre tuben byttes.

Forhjuls bremsen bruker standard bremsekalipter og bremsekloss for sykkel, og kan byttes.



Garanti

Følgende garanti gjelder for alle vogner, når det gjelder fabrikkasjons- og materialfeil.

- 5 års garanti på ramme
- 1 års garanti på setetrekk, solskjerm, nettingkurv og andre vognedeler.

Dekkes ikke av garantien:

- Deler som slites ved normal bruk
- Skader på rammen og deler samt at vognen ikke fungerer tilfredsstillende, som følge av manglende vedlikehold, misbruk og skjødesløshet.
- Skumgummi håndtak, slanger, dekk og bremseklosser.