

PERFOLIGHT - Teleskopskinner


Art. nr. U 2, U 2/3, U 3

Bruksanvisning

- Kontroller at ingen skader har oppstått på skinnen under transporten. Skinnen skal enkelt kunne trekkes ut/skyves inn.
- Les nøye igjennom bruksanvisningen og merkelappene som er påklisset før du bruker skinnene. Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
- På hver skinne finnes et merke som angir hvilken maksimal last skinnene får belastes. Maksimumslasten er angitt per stykk. Et par med skinner kan altså belastes med den doble vekten, under forutsetning at vekten er jevnt fordelt. **Maksimumslasten angis med dette tegnet:**



- Merket angir også hvilken høyeste nivåforskjell skinnene passer for. Vær forsiktig og bruk skinnene med omtanke. **Maksimumshøyden angis med dette tegnet:**

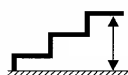

- Plasser skinnen på bakken med transportsikringen oppover. Lukk opp transportsikringen (bilde 1) og dra ut skinnen til ønsket lengde. Plasser skinnene med "leppene" hvilende stabilt på det øvre underlaget (se bilde). På undersiden av leppene er det påsatt sklisikring slik at skinnene ikke sklir på underlaget. Vær likevel forsiktig ved anvendelse så ingen del av rullestolen hekter seg fast og drar med seg skinnene. Avstanden mellom skinnene bør tilpasses slik at rullestolens hjul kjør midt på skinnens bredde.
- Ved forflytning skal skinnen skyves sammen og transportsikringen låses. Flytt deretter skinnen ved å bruke transporthåndtaket (bilde 2).
- Skulle en skade oppstå på skinnene skal de ikke benyttes før skaden er reparert av en fagmann.

Vedlikehold og rengjøring

Skinnene kan rengjøres med alle normalt tilgjengelige rengjøringsmiddel. Høytrykksvask anbefales.

Demontering og kildesortering

Alt materialet på skinnene er 100% resirkulerbart. Demonter alle plastdetaljer fra skinnene og lever disse til gjenvinning av hardt plastmateriale. Aluminiumsdelene leveres som metallskrot.

1. Øvre del av rampe / Leppe
2. Kjøreflate / overflate
3. Rampekant. (Innerkant / ytterkant av rampen.)

