

**LECKEY**°

# Freestander

BRUKERMANUAL





Leckey Freestander er utformet til å fremme vektbæring og midtlinje symmetri. Denne håndboken viser deg hvordan du raskt og enkelt kan gjøre bruk av alle funksjoner. Instruksjonene på sikkerhet og vedlikehold av produktet vil sikre at du vil nyte bruken av dette produktet i lang tid.

## Innhold

1. Bruksområde
2. Erklæringer
3. Garantibetingelser
4. Historisk produktlogg
5. Opplærings produktlogg
6. Sikkerhetsinformasjon
7. Hvordan pakke ut og montere
8. Oppsett for postural management
9. Hyppige justeringer for daglig bruk
10. Rengjøring og vedlikehold
11. Daglig produktinspeksjon
12. Årlig produktinspeksjon
13. Gjenbruk
14. Betjening av produktet
15. Teknisk informasjon

## **1 Bruksområde**

Leckey Freestander er utformet for bruk hjemme eller på skolen for stående stilling. Freestanderen er tilgjengelig i tre størrelser for å dekke behovene til barn med funksjonshemninger i alderen 1-17. Størrelse 1 som har en maksimal brukervekt på 30 kg, størrelse 2 på 60 kg og størrelse 3 som har 100 kg. Stående stilling kan bidra til normal utvikling av hoftene, til å danne muskel formasjon, og kan hjelpe til å gi psykologisk velvære.

## **2 Samsvarserklæring**

James Leckey Design Ltd som produsent med eneansvar erklærer at Leckey Freestander oppfyller kravene i 93 / 42 / EEC retningslinjer og EN12182 "Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede personer". Generelle krav og testmetoder.

## **3 Vilkår for garanti**

Garantien gjelder bare når produktet brukes i henhold til de angitte betingelsene og for de tiltenkte formål, følger alle anbefalinger fra produsenter (se også generelle vilkår for salg, levering og betaling). En to års garanti gis på alle Leckey ferdigprodukter og komponenter

## **4 Produkthistorie logg**

Ditt Leckey produkt er klassifisert som et klasse 1 medisinsk utstyr og som sådan bør bare forskrives, settes opp eller utstedes på nytt for bruk, av en teknisk kompetent person som har fått opplæring i bruk av dette produktet. Leckey anbefaler at en logg utarbeides for å gi detaljer om alle oppsett, utstede inspeksjoner og årlige inspeksjoner av dette produktet.

## **5 Produktopplæringlogg (foreldre, lærere og foresatte)**

Ditt Leckey produkt er en foreskrevet klasse 1 medisinsk utstyr og som sådan anbefaler Leckey at foreldre, lærere og omsorgspersoner som bruker utstyret bør gjøres oppmerksom på følgende deler av denne brukermanual av en teknisk kompetent person:

### **Seksjon 6**

Sikkerhetsinformasjon

### **Seksjon 9**

Hvppige justeringer for daglig bruk

### **Seksjon 11**

Daglig produkt inspeksjon

Leckey anbefaler at en skriftlig logg opprettholdes av alle dem som har vært opplært i riktig bruk av dette produktet.

## 6 Sikkerhetsinformasjon:



6.1 Les alltid bruksanvisningen godt før bruk.



6.2 For å forbedre sikkerheten anbefaler vi at brukere aldri bør forlates uten tilsyn



6.3 Bruk bare Leckey godkjente komponenter med produktet. Aldri modifier produktet på noen måte. Unnlatelse av å følge instruksjonene kan sette brukeren eller omsorgsperson i fare, og vil gjøre garantien på produktet ugyldig.



6.4 Hvis du er i tvil til fortsatt trygg bruk av produktet, eller hvis noen av delene skulle svikte, vennligst slutte å bruke produktet og ta kontakt med vår kundeservice avdeling eller forhandler snarest mulig.



6.5 Vi vil anbefale at brukerne aldri overføres rett fra sittende til stående uten forberedelse og strekking. Dette gjøres best liggende på en matre, men kan også utføres i en rullestol eller setesystem om nødvendig.



6.6 Gjennomføre alle posisjonelle justeringer og sikre at de er festet før du setter brukeren i dette produkt.



6.7 Når du plasserer brukeren inn i en stående ramme, sikre alltid bekken båndet først. Deretter festes bryst og knestroppene. Dette av sikkerhetsmessige grunner.



6.8 Når produktet er stasjonært, sikre at alle hjul er låst og vender vekk fra basen da dette vil bedre produktets stabilitet.



6.9 Juster aldri ramme høyden på Free-stander mens produktet er i bruk. Andre finere posisjonelle justeringer kan utføres sikkert når brukeren er i rammen.



6.10 Forlat aldri produktet på en hellende overflate, større enn 5 grader. Husk alltid å låse alle hjul.



6.11 Produktet inneholder komponenter som kan utgjøre en kvelningsfare for små barn. Sjekk alltid at låsknotter og bolter innenfor barnets rekkevidde er tilstrammet og sikre til enhver tid.



6.12 Leckey produktene overholder brann sikkerhetsforskrifter i samsvar med EN12182. Produktet inneholder plastkomponenter og bør derfor holdes borte fra alle direkte kilder av varme, inkludert åpen ild, sigaretter, elektriske og gass ovner.

6.13 Ikke plasser varme gjenstander på bordet mer enn 40 grader



6.14 Rengjør produktet regelmessig. Ikke bruk slipemidler. Utfør vedlikeholds sjekker med jevne mellomrom for å sikre at produktet ditt er i god stand.



6.15 Produktet er beregnet for innendørs bruk og når det ikke er i bruk bør det oppbevares på et tørt sted som ikke utsettes for ekstreme temperaturer. Temperaturen bør være fra 5-40 pluss grader Celsius.



# Hvordan pakke ut og montere

# 7

## 7.1 Montering av Freestander

### Sjekk deler

Gratulerer med din Leckey Freestander. Når du mottar din Freestander vil den komme i eske og pakket i flere pakker. Din Freestander kommer som standard med brystplate inkludert fleksible sidestøtter, kne plate, bekken reim, aktivitetsbrett og aktivitetsbolle, base med hjul, indre stag og sandaler.

Fjern forsiktig alle pakkene fra esken og sjekk at du har alle delene du har bestilt.






### Sikkerhet først:

Hold plastposer borte fra barn.

For å montere Freestanderen, løsne først høydejusteringsboltene (a) på ytre stående stag og fjerne de indre stavene.

Sett de indre stavene på plass i mottaksrørene på basens hjul ramme. Unbrakonøkelen som følger med strammer de to småskruene på hver mottaker sikkert (b).


Skyv så den viktigste ytre rammen over de indre stavene og stram de to høydejusteringsboltene (c) ved ønsket høyde.

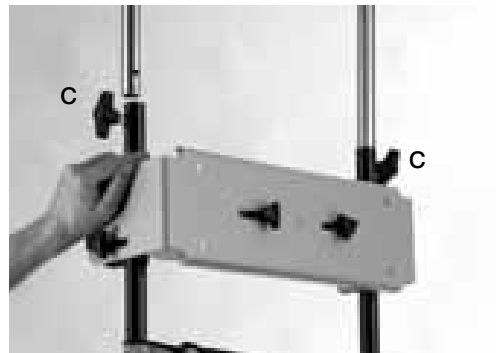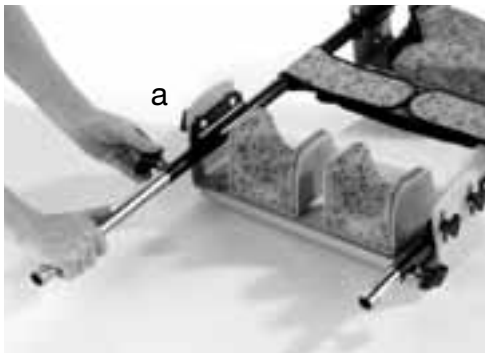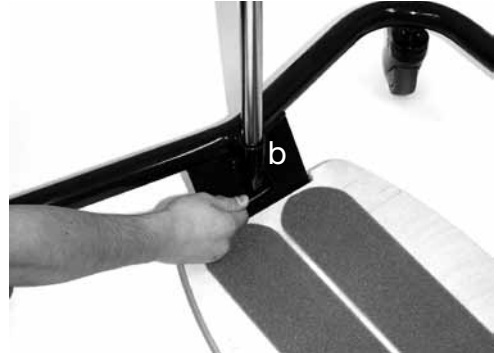



## 7.2 Feste av bord

Bordet til Freestander festes ved å skyve de ytre stavene som allerede er festet til bordet over de indre stavene som allerede er festet til basen og deretter stramme boltene (a). Bordet er da sikret med en pin inn i ett av hullene på siden av rammen.

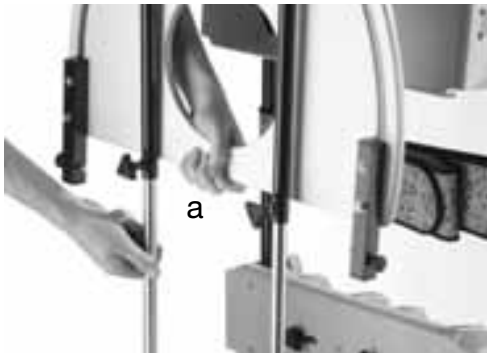

## 7.3 Montering av sandalene


For å feste sandalene, løsne plastknotten (A) fra undersiden av sandalene og fjerne metall og gummi skiven sammen med knotten. Juster skruen med sporet i fotplaten, skift ut gummipakningen og deretter metallskiven før du strammer plastknotten. Pass på at sandalen ikke beveger seg når knotten har blitt strammet.





# Oppsett for postural management

Det kliniske oppsettet av produktet skal være gjennomført av en teknisk og klinisk kompetent person som har fått opplæring i bruken av produktet. Leckey anbefaler at en utskrifts logg opprettholdes av alle kliniske oppsett for dette produktet.

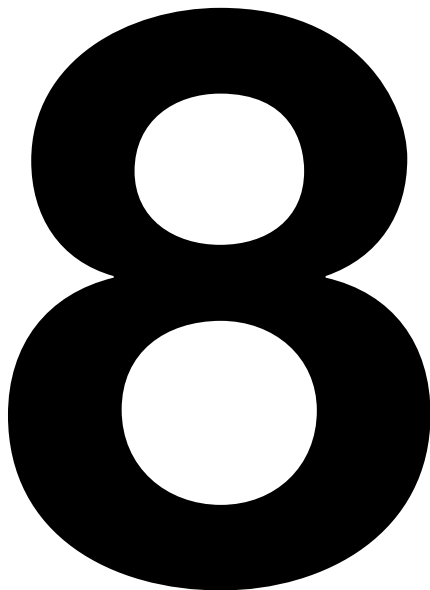

## 8.1 Justering av brystplate

Du bør først måle avstanden fra brukers føtter til rett under armene. Dette gjøres praktisk best i liggende stilling på en matte. Høyden mellom toppen av brystplate og sandaler bør settes til tilsvarende denne avstanden. Dette vil alltid være den første justeringen du trenger for å utføre.

For å justere høyden på brystet platen, løsne boltene (b), justere til ønsket posisjon, og deretter skru bolt (a) fast.

Brystplaten har en rekke andre justeringer som utføres ved å løsne boltene (a) på siden av brystet platen. Ved å løsne disse boltene kan brystplaten flyttes:

1. Forover og bakover for kroppens profilering.
2. Opp og ned for finere, siste minutt justeringer av høyden til brystet platen.
3. Å vinkle forover/ned eller bakover/litt opp for å bistå.




**Forsøk aldri å justere høyden på hovedrammen når Freestanderen er i bruk**

## 8.2 Justering av kneplate

Kneplaten justeres på akkurat samme måte som brystplaten ved hjelp boltene (a).



**Vær alltid forsiktig for å sikre at fingrene ikke blir klemt når du justerer kneplaten.**

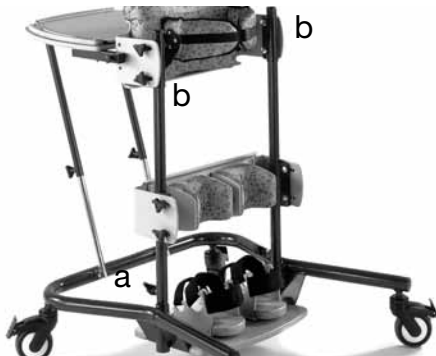

## 8.3 Justering av knestøtte

Knestøttene festes med bolter (a) foran. Når denne bolten er løsnet, kan knestøttene flyttes fra venstre til høyre og roteres. Når ønsket stilling er innhentet (a) skal bolten strammes ordentlig.



**Vær alltid forsiktig for å sikre at fingrene ikke blir klemt når du justerer knestøttene.**

## 8.4 Justering av sandaler

For å plasserer sandalene, bare løsne knotten under fotplaten, velg posisjon du trenger og stram til. For å plassere brukerens føtter i sandalene, bruk ankel og tå stroppene med borrelås, som følger med.



## 8.5 Plassering av brystbånd

Brystbåndet skal settes på brukeren, om mulig liggende på en matte.

De korte båndene skal festes rundt rammen og holder brukeren på plass i stativet ved at de trekkes rundt brukeren og festes omhyggelig mot velcroen i beltet– disse korte stroppene er merket med Leckey merket.

De lange båndene skal strammes rundt kroppen til brukeren – og helst før brukeren



# Hyppig justering for daglig bruk

Foreldre og foresatte bør vises hvordan de foretar hyppige justeringer og gjort oppmerksom på sikkerhetssjekker i § 6 av en teknisk og klinisk kompetent person som har fått opplæring i bruk av produktet. Leckey anbefaler at en skriftlig logg er opprettholdes av alle foreldre og pleiere som er opplært i bruk av dette produktet.



## 9.1 Forflytning av brukeren inn og ut av Freestander

Før du overfører barnet inn i FreeStander, utfør den daglige produkt inspeksjon skissert i § 11 i denne bruksanvisningen

Før du overfører barnet inn i Freestander, låse alle hjulene, slik at de er vendt utover å maksimere produkt stabilitet. Sørg for at stropper på brystet, hoftestøtten seletøy og sandaler frigjøres ut av veien for å lette overføringen.



**Fest alltid bekken og sikkerhetsbåndet først, så brystbelte og brukers føtter.**

## 9.2 Justering av de fleksible sidene

De fleksible side støttene på Standeren kan justeres inn og ut ved å løsne boltene (a) på baksiden av brystet platen. Når disse skruene er løsnet, kan den fleksible side støtten justeres til ønsket posisjon og med en gang den er i posisjon, bør boltene strammes til skikkelig. De fleksible sidestøttene har også rom for en liten høydejustering. For å endre høyde, løsne boltene (b), posisjonere sidestøttene etter behov og skru deretter til boltene (b) igjen. Den fleksible sidestøtten sikres rundt brukeren ved å stramme sikkerhetsstroppen på plass. Fest sikkerhetsstroppen umiddelbart



**Vær alltid forsiktig for å sikre at fingrene ikke blir klemt når du justerer sidestøttene.**





## 9.3 Justering av kneputer

Kneputene festes med bolter (a) foran på kneplaten. Når denne bolten er løsnet, kan kneputen flyttes fra venstre til høyre og roteres. Når ønsket stilling er ok, strammes bolten (a) sikkert.



**Vær alltid forsiktig for å sikre at fingrene ikke blir klemt når du justerer kneputene.**


## 9.4 Justering av sandalene

For å plassere sandalene, bare løsne knotten under fotplaten, velg posisjon du trenger og stram til. For å plassere brukerens føtter i sandalene, bruk ankel og tå stroppene med borrelås, som følger med.



## 9.5 Justering av bord

Bordet kan høyde og vinkel justeres ved å løsne bolten (a) på bord stengene, justere til ønsket posisjon og deretter stramme til boltene (a) en sikker måte. Plasseringen av bordet kan også endres i forhold til bryst-platen. En av tre posisjoner (b) kan velges for å bidra til god håndfunksjon. Bordet leveres komplett med et bord deksel og en bolle noe som betyr at du kan bruke brettet med et flatt dekke og bruke bollen for leke-aktiviteter.

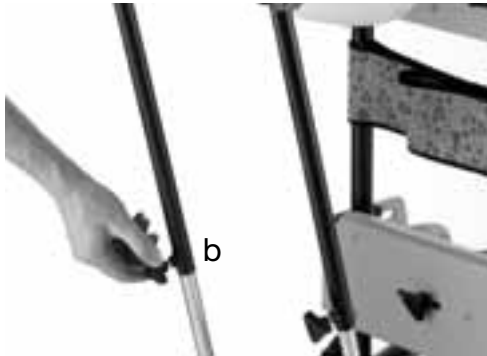

## 9.6 Feste av bekken bånd

Bekken belte bør festes til brukeren først, igjen mest praktisk på en matte. Bekken stroppene festes rundt brukerens bekken, de lengste stroppene skal så tres gjennom de ytre polene på rammen og sikres fast bak brukeren med borrelåsen på beltet. For å sikre at du enkelt kan identifisere stroppen som går rundt brukeren og den som festes til rammen, er en Leckey etikett sydd på til den som går rundt rammen.



# 10 Rengjøring og vedlikehold

## Hvordan opprettholde

Når du rengjør produktet anbefaler vi at du bare bruker varmt vann og et ikke-slipende vaskemiddel. Bruk aldri organiske løsemidler eller tørre rengjøringsmidler.

### Setetrekk og tekstiler

1. Trekket og tekstiler kan rengjøres for hånd mens de er på plass. Til rengjøring anbefaler vi at du bruker bare varmt vann og et ikke-slipende rengjøringsmiddel.

2. Den beste rensemetoden er en 'tørk & tørk' teknikk

3. Flekker bør fjernes så raskt som mulig med absorberende klut, håndklær eller en svamp. Rutinemessig såpe og varmt vann med svamp er effektivt for ordinær tilsmussing og mindre søl. Vær forsiktig så du ikke væter stoffet for mye, da dette vil føre til at flekken sprer seg.

4. Antiseptisk rengjøringsmidler kan brukes på mer gjenstridige flekker. Disse kan kreve et trygt løsemiddel som Isopropyl Alkohol eller Mineral Spirit. En halv kopp av husholdningsblekemiddel til 5 liter vann kan også brukes som et nyttig desinfeksjonsmiddel.

5. Pass alltid på at produktet er tørt før bruk.

## Metall og plast og tre komponenter

1. Såpe og vann eller antibakteriell spray kan brukes til daglig rengjøring.

2. Til dyprens kan en lavtrykksdamper benyttes.

3. Ikke bruk løsemidler for å rengjøre plast, tre eller metall komponenter.

4. Kontroller at produktet er tørt før bruk.

5. Sjekk alle tre-komponentene regelmessig for å sikre at det ikke er noen sprekker eller flis.

## 11 Daglig produkt kontroll

### **(Terapeuter, foreldre og omsorgspersoner)**

Vi anbefaler at daglig visuell kontroll av utstyret utføres av terapeuter, pleiere eller foreldre for å sjekke at produktet er sikkert for bruk. De anbefalte daglige kontroller er beskrevet nedenfor.

1. Forsikre at alle justeringsknapper og bolter er på plass og sikret.
2. Sjekk alle møbeltrekk for tegn på slitasje
3. Sjekk at alle hjulene beveger seg fritt og låses sikkert.
4. Sjekk at alle borrelåser og stropper festes sikkert



**Hvis du er i tvil til fortsatt trygg bruk av Leckey produktet eller hvis noen deler skulle svikte, vennligst slutte å bruke produktet og kontakte vår kundeservice avdeling eller din lokale forhandler så snart som mulig. (Terapeut, tekniker, Leckey Product Rådgiver, forhandler)**

## 12 Årlig produkt kontroll

### **Terapeut, tekniker, Leckey produkt rådgiver, forhandler**

Leckey anbefaler at hvert produkt bør være gjenstand for en detaljert inspeksjon minst en gang i året og hver gang produktet er utstedt på nytt for bruk. Denne inspeksjonen bør utføres av en teknisk kompetent person som har fått opplæring i bruk av produktet og skal inneholde følgende sjekker som et minstekrav.

1. Sjekk at alle knotter, muttere, bolter og plast spennene er på plass, erstatte eventuelle manglende elementer. Med særlig oppmerksomhet på følgende elementer;
  - Bryst og hoft høyde og vinkel justeringer
  - Justeringsknottet til kne putene
2. Løft understellet for å sjekke hvert hjul individuelt. Sørg for at de kan beveges fritt og fjern skitt fra gummi hjul. Kontroller at bremsene låser hjulene sikkert.
3. Sjekk visuelt strukturen av produktet med spesiell oppmerksomhet på sveisingen av rammen. Forsikre at det ikke er tegn til slitasje eller sprekker rundt sveisingen.
4. Leckey anbefaler at en utskrift opprettholdes av alle årlige produkt inspeksjoner.



**Hvis du er i tvil til fortsatt trygg bruk av Leckey produktet eller hvis noen deler skulle svikte, vennligst slutte å bruke produktet og kontakte vår kundeservice avdeling eller din lokale forhandler så snart som mulig.**

## 13 Gjenbruk

De fleste Leckey produktene er vurdert til å møte behovene til en individuell bruker. Før ny re-utsendelse av et produkt anbefaler vi å gjøre en kompatibilitets sjekk for den nye brukeren og sikre at produktet som blir gjenbrukt ikke inneholder noen endringer eller spesialtilpassinger.

En detaljert teknisk inspeksjon bør være gjennomført på produktet før re-utstedelse. Dette bør utføres av en teknisk kompetent person som har fått opplæring i bruk og kontroll av produktet. Se kapittel 13 for ønsket kontroller som skal utføres.

Sørg for at produktet har blitt rensed grundig i samsvar med § 11 i denne håndboken.

Forsikre deg om at en kopi av bruksanvisningen følger med produktet. En kopi kan lastes ned fra vår nettside [www.handicare.no](http://www.handicare.no)

Leckey anbefaler at en utskrift blir opprettholdt av alle produkt inspeksjoner som er utført før gjenutgivelse av produktet



**Hvis du er i tvil om fortsatt trygg bruk av Leckey produktet eller hvis noen deler skulle svikte, vennligst slutte å bruke produktet og kontakte vår kundeservice avdeling eller din lokale forhandler så snart som mulig.**

## 14 Produkt service

Vedlikehold av alle Leckey produkter bør bare utføres av teknisk kompetente personer som er opplært i bruk av produktet.

Kontakt Handicare tlf: 03250. Vi er glade for å hjelpe deg med dine service krav.

Alle internasjonale service-henvendelser bør rettes til den aktuelle Leckey distributør.

For ytterligere informasjon om Leckey distributørene, vennligst besøk [www.leckey.com](http://www.leckey.com) eller [www.handicare.com](http://www.handicare.com).

# 15 Teknisk informasjon

## Koder produkt

LFS/#/	Freestander
LFS/T	Totstander (kommer som standard i Meadow stoff)

## Koder tilbehør

LFS/#/G	Grab / fjæring
LFS/#/H	Grab Innlegg

# Velg en størrelse

Freestander kommer i 2 stoffer. størrelse 1 leveres som standard i Meadow stoff og størrelse 2 og 3 i Mondeo blått stoff.

Nakkestøtte alternativer er tilgjengelige til dette produktet. Kontakt Leckey eller lokal forhandler for ytterligere informasjon.

# 15 Teknisk data

Produktstørrelse						
Størrelse	1		2		3	
Alder	1-5		4-9 1/2		9-17	
Koder	LFS/1		LFS/2		LFS/3	
	mm	inches	mm	inches	mm	inches
<b>Freestander</b>						
<b>Brystplate, høyde</b>						
Min	470	18,5	680	27	975	38
Max	680	27	975	38	1350	53
<b>Ramme</b>						
Lengde	650	26	750	30	750	30
bredde	650	26	750	30	750	30
<b>Aktivitets bord</b>						
Dybde	400	16	450	18	500	20
Bredde	525	21	575	23	625	25
<b>Brukervekt</b>						
Max	30 kg		60 kg		100 kg	
<b>Totstander</b>						
<b>Bryst band, høyde</b>						
Min	470	18,5				
Max	640	26				

# LECKEY<sup>®</sup>

Leckey  
19 Ballinderry Road  
Lisburn  
BT28 2SA  
Northern Ireland  
United Kingdom

Distributør: Handicare AS  
Vålerveien 159  
Postboks 163  
1501 Moss  
Tlf: 03250  
[www.handicare.no](http://www.handicare.no)

24 timers postural  
omsorg for babyer,  
barn og voksne.  
Sove, sittende,  
stående, turgåing,  
bevegelse, bading,  
toalettbesøk.



LS145-03