

# Totstander - Ståstativ

## Innhold

1. Bruk
2. Samsvarserklæring
3. Garantibetingelser
4. Historisk produktlogg
5. Opplæring produktlogg
6. Sikkerhetsinformasjon
7. Innstilling og bruk
8. Rengjøring og vedlikehold
9. Teknisk informasjon

## **1. Bruk**

Leckey Totstander er utformet for bruk hjemme eller på skolen for stående stilling. Totstanderen er tilgjengelig en størrelse, og dekker behovene til barn med funksjonshemninger i alderen 1-5 år med en maksimal bruker vekt på 22 kg. Stående stilling kan bidra til normal utvikling av hoftene, til å danne muskel formasjon, og kan hjelpe til å gi psykologisk velvære. Ståstativet skal brukes på plant og fast underlag slik at rammerørene står 90 grader på vaterlinjen.

## **2. Samsvarserklæring**

James Leckey Design Ltd. som produsent med eneansvar erklærer at Leckey Totstander oppfyller kravene i 93/42/EEC retningslinjer og EN12182 "Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede personer". Generelle krav og testmetoder.

## **3. Vilkår for garanti**

Garantien gjelder bare når produktet brukes i henhold til de angitte betingelsene og for de tiltenkte formål, følger alle anbefalinger fra produsenter (se også generelle vilkår for salg, levering og betaling). En to års garanti gis på alle Leckey ferdigprodukter og komponenter.

## **4. Produkt historielogg**

Ditt Leckey Produktet er klassifisert som klasse "Medisinsk teknisk utstyr".

Et medisinsk utstyr bør bare forskrives, settes opp eller utstedes for bruk av en teknisk kompetent person som har fått opplæring i bruk av dette produktet. Leckey anbefaler at en utskrift opprettholdes for å gi detaljer om alle oppsett, utstede inspeksjoner og årlige inspeksjoner av dette produktet.

## **5. Produkt opplæring logg (foreldre, lærere og foresatte)**

Ditt Leckey produkt er en foreskrevet klasse 1 medisinsk utstyr og som sådan anbefaler Leckey at foreldre, lærere og omsorgspersoner som bruker utstyret bør gjøres oppmerksom på følgende deler av denne bruker manual av en teknisk kompetent person.

## **6. Sikkerhetsinformasjon**

Se også:

- 9. Hyppige justeringer for daglig bruk
- 11. Daglig produkt inspeksjon

Leckey anbefaler at en skriftlig logg opprettholdes av alle dem som har vært opplært i riktig bruk av dette produktet.


## **Sikkerhet først:**

1. Les alltid bruksanvisningen godt før bruk.
2. For å forbedre sikkerheten anbefaler vi at brukere aldri bør forlates uten tilsyn.
3. Bruk bare Leckey godkjente komponenter med produktet. Aldri modifier produktet på noen måte. Unnlatelse av å følge instruksjonene kan sette brukeren eller omsorgsperson i fare, og vil gjøre garantien på produktet ugyldig.
4. Hvis du er i tvil til fortsatt trygg bruk av produktet, eller hvis noen av delene skulle svikte, vennligst slutte å bruke produktet og ta kontakt med vår kundeservice avdeling eller forhandler snarest mulig.
5. Vi vil anbefale at brukerne aldri overføres rett fra sittende til stående uten forberedelse og strekking. Dette gjøres best liggende på en matte, men kan også utføres i en rullestol eller setesystem om nødvendig.
6. Gjennomføre alle posisjonelle justeringer og sikre at de er festet før du setter brukeren i dette produkt.
7. Når du plasserer brukeren inn i en stående ramme, sikre alltid bekken båndet først. Deretter festes bryst og kne stroppene. Dette av sikkerhetsmessige grunner.
8. Når produktet er stasjonært, sikre at alle hjul er låst og vender vekk fra basen da dette vil bedre produktets stabilitet.
9. Juster aldri den samlede høyden på Totstander mens rammen er i bruk. Andre finere posisjonelle justeringer kan utføres sikkert når brukeren er i rammen.
10. Forlat aldri produktet på en hellende overflate, større enn 5 grader. Husk alltid å låse alle hjul.
11. Produktet inneholder komponenter som kan utgjøre en kvelningsfare for små barn. Sjekk alltid at låsknotter og bolter innenfor barnets rekkevidde er tilstrammet og sikre til enhver tid.
12. Leckey produktene overholder brannsikkerhetsforskrifter i samsvar med EN12182. Men produktet inneholder plastkomponenter og bør derfor holdes borte fra alle direkte kilder av varme, inkludert åpen ild, sigaretter, elektriske og gassovner.
13. Ikke plasser varme gjenstander på bordet (mer enn 40 grader).
14. Rengjør produktet regelmessig. Ikke bruk slipemidler. Utføre vedlikeholds sjekker med jevne mellomrom for å sikre at produktet ditt er i god stand.
15. Produktet er beregnet for innendørs bruk og når det ikke er i bruk bør det oppbevares på et tørt sted som ikke utsettes for ekstreme temperaturer. Skalaen bør være fra 5-40 grader Celsius.

## 7. Innstilling og bruk

### Justering av høyde

For å justere høyden på Totstander, løsne de nederste knottene (a) på stående rør, juster til ønsket høyde og stram til.

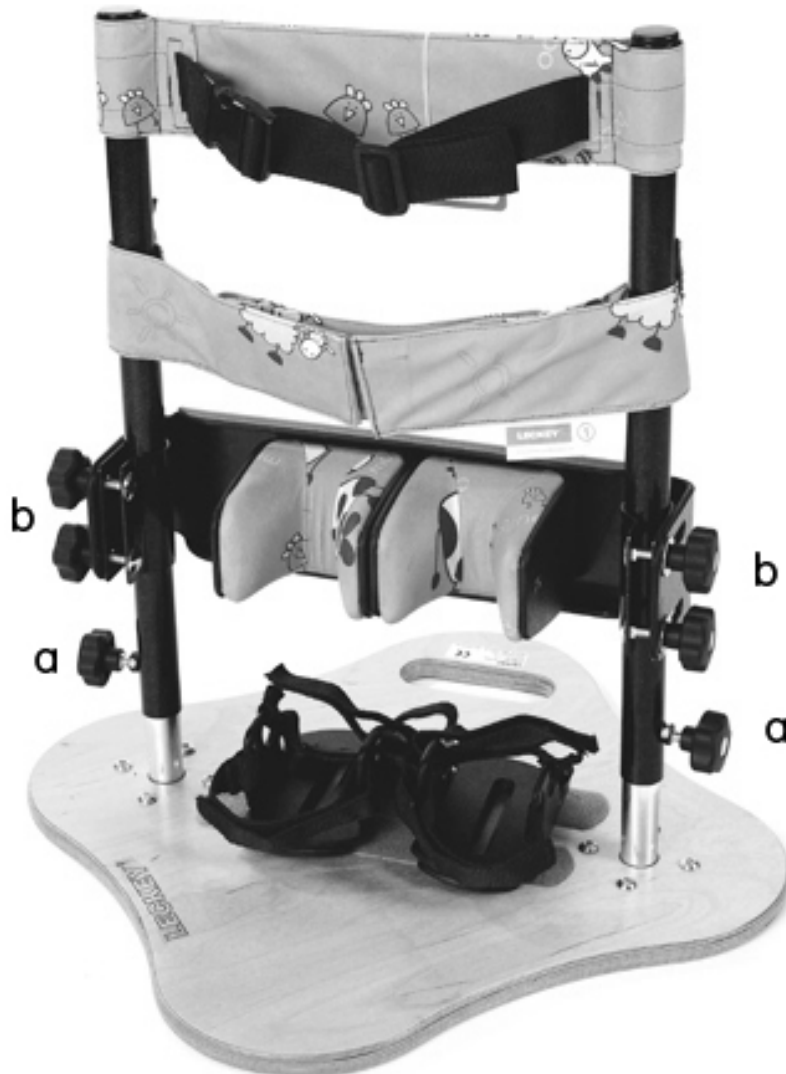

### Høydejustering av kneputer

Løsne knottene (b), se foto over, still kneputene i riktig høyde og stram til.

## Feste av bekken bånd

Bekken båndet bør festes til brukeren først, praktisk kan det gjøres på en matte. Bekken stroppene er festet rundt brukerens bekken, de lengre stroppene blir så tredd gjennom ytterpolene på rammen og sikret fast bak brukeren med borrelås på båndet. For å sikre at du enkelt kan identifisere stroppe som går rundt brukeren og den som festes til rammen, er en Leckey etikett sydd fast på den som går rundt rammen.



## Funksjoner:

- Enkel vertikalt ståstativ.
- Tilgjengelig i 1 størrelse.
- Fleksibel eller fast bryststøtte.
- Høyderegulerbar ramme.
- Justerbare fotsandaler.
- Høydejusterbart bekkenbånd.
- Høyderegulerbar knestøtte med justerbare kneputer.

## **8. Rengjøring og vedlikehold**

Når du rengjør produktet anbefaler vi at du bare bruker varmt vann og et ikke-slipendevaske-middel. Bruk aldri organiske løsemidler eller tørre rengjøringsmidler.

### **Setetrekk og tekstiler**

1. Trekket og tekstiler kan rengjøres for hånd mens de er på plass. Til rengjøring anbefaler vi at du bruker bare varmt vann og et ikke-slipende rengjøringsmiddel.
2. Den beste rensemetoden er en "tørk & tørk teknikk".
3. Flekker bør fjernes så raskt som mulig med absorberende klut, håndklær eller en svamp. Rutinemessig såpe og varmt vann med svamp er effektivt for ordinær tilsmussing og mindre søl. Vær forsiktig så du ikke væter stoffet for mye, da dette vil føre til at flekken sprer seg.
4. Antiseptisk rengjøringsmidler kan brukes på mer vanskelige flekker. Disse krever et trygt løsemiddel som Isopropyl Alkohol eller Mineral Sprit. En halv kopp av husholdningsblekemiddel til 5 liter vann kan også brukes som et nyttig desinfeksjonsmiddel.
5. Pass alltid på at produktet er tørt før bruk.

### **Metall og plast og tre komponenter**

1. Såpe og vann eller antibakteriell spray kan brukes til daglig rengjøring.
2. Til dyprens kan en lavtrykksdamper benyttes.
3. Ikke bruk løsemidler for å rengjøre plasttre eller metall komponenter.
4. Kontroller at produktet er tørt før bruk.
5. Sjekk alle tre-komponentene regelmessig for å sikre at det ikke er noen sprekker eller flis.

## 9. Teknisk informasjon

Aldersgruppe: 1-5 år.  
Maks 22 kg brukervekt.

|                 |        | <u>mm</u> | <u>Tommer</u> |
|-----------------|--------|-----------|---------------|
| Høyde brystbånd | Min    | 470       | 18.5          |
|                 | Maks   | 640       | 26            |
| Basen           | Dybde  | 450       | 18            |
|                 | Bredde | 450       | 18            |

**Distributør:**



**handicare**

Handicare AS

Vålerveien 159

Postboks 163

1501 Moss

Tlf.: 03250

[www.handicare.no](http://www.handicare.no)