



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

# Bure Double 2.0

## Bruksanvisning





# Bure Double 2.0

Nya Bure Double är utrustad med dubbel eldrift, dels med eldriven höj- och sänkning och dels med eldriven breddning av benstativen. Den nya versionen har en väsentligt lägre höjd över benstativen – för bättre åtkomst samt en högre brukarvikt (150kg) jämfört med tidigare version.

## Contents

1. Justering av höjd/bredd	04
2. Justering av handtag	04
3. Höger- och vänsterjustering av armstödsplattor	04
4. Låsning av hjul/Upplåsning av hjul	04
5. Kopplingsschema styrbox	04
6. Laddning av batteri	05
7. LED på styrbox och batteri	05
8. Underhåll	06
9. Generella skötselråd	07
10. Tekniska specifikationer	07

## 1. Höjning/Sänkning av sits

Önskad höjd justeras med Pil <UPP> eller Pil <NED>. Breddning av bottenstativen justeras genom Pil <BREDARE> eller Pil <SMALARE>.

## 2. Justering av handtag

Handtagen justeras till önskad position genom att: Ratt lossas, handtagen justeras, ratt låses.

## 3. Höger- och vänsterjustering av armstödsplattor

Handtagen justeras till önskad position genom att: Ratt lossas, handtagen justeras, ratt låses.

## 4. Låsning av hjul/Upplåsning av hjul

Bure Double är utrustad med låsningsbara/bromsade hjul (grön pedalbroms). Hjulen låses genom att fotbromsen trycks nedåt och aktiveras. Vid upplåsning pressas den uppstickande delen av bromsen ned. Låsning påverkar både rullning och svängning.

## 5. Kopplingschema styrbox

För att hantera kopplingar enligt nedan så måste styrboxens täcklock tas bort. Detta görs med hjälp av en skruvmejsel eller liknande - se särskild märkning på styrboxen.

OBS: Var noga med att kontakter ansluts till rätt uttag eftersom detta annars kan skada ställdon.

1. Uttag för ställdon - höj/sänk.
2. Uttag för ställdon - breddning.
3. Uttag för fjärrkontroll.
4. Uttag för batterikontakt.
5. Uttag för stickpropp (OBS: För att IP-klassning ska gälla så ska stickpropp ALLTID vara ansluten till styrbox).



## 6. Laddning av batteri

- Stickpropp ansluts till 230V – vägguttag. Laddning påbörjas automatiskt och LED på batteriet blinkar grönt.
- Ladda batteriet i minst 8h.
- Om produkten ställs undan pga att den ej ska användas under en längre tid (mer än en vecka) så rekommenderar vi att batterikontakt lossas från styrboxen alternativt att batteriet stängs av med on/off knapp. På detta sätt elimineras risken att batteriet förstörs då styrboxen förbrukar en liten mängd ström även då bordet inte används.

## 7. LED på styrbox och batteri

Styrbox – lyser grönt då spänning finns från batteri/nätuttag.

Batteri:

- Vid laddning lyser LED med blinkande grönt sken.
- On/Off För att använda produkten - tryck på <ON>. Grön lampa börjar lysa/ blinka. Med <OFF> knappen (håll in i 5s) kan man stänga av batteriet om produkten ej ska användas under en längre tid.
- Då batteriet är fulladdat så lyser LED med fast grönt sken
- Då batteri är i normalläge/drift så blinkar LED med grönt sken med OREGELBUNDET intervall enligt - 0,5 sek tänd, 4 sek släckt.
- Då batteri behöver laddas (kvarvarande kapacitet <25%) blinkar LED med orange/rött sken med REGELBUNDET intervall enligt - 0,5 sek tänd, 4 sek släckt.



OBS: Batteriet har en inbyggd funktion som automatiskt stänger av batteriet då kvarvarande kapacitet <20%. LED är då släckt. Batteriet måste nu laddas fullt innan elektroniken på nytt kan användas.

## 8. Underhåll

Rekommenderas minst 1 gång/år.

Kontrollera att/om	Åtgärd
<p><b>Allmänt</b> Bordet känns stumt/glappfritt. Bordet inte skramlar vid manövrering. Bordet är plant och alla hjul är i kontakt med underlaget. Bordet ej är smutsigt.</p>	Rengör med ljum såpalösning/alkolbaserat rengöringsmedel (ej petroleumprodukter)
<p><b>Armstödsplattor</b> Armstödsplattor är hela och rena. Breddning armstödsplattor fungerar.</p>	Rengör och byt om skador finns. Byt låsratt.
<p><b>Handtag</b> Grepp ej är skadade/smutsiga.</p> <p>Handtagsinställning fungerar.</p>	Rengör med ljum såpalösning (ej petroleumprodukter). Byt handtagsgrepp.
<p><b>Batteri</b> Kontrollera att laddkabel är ansluten till styrbox Kontrollera att fjärrkontrollen är ansluten till styrbox Kontrollera att kopplingar är gjorda enligt kopplingschema Kontrollera att batteri, ställdon och styrbox ej sitter/hänger löst.</p>	Kompletera med ny laddkabel, denna ska alltid vara ansluten till styrbox ( IP65klassning). Anslut ev. komplettera med ny fjärrkontroll.
<p><b>Justering höjd/bredd</b> Höjning och sänkning fungerar. Bordet känns stabilt vid maxinställning. Inget glapp finns mellan vertikalt stativ och bottenstativ.</p> <p>Klämmor för höjjustering låser. Infästning av elställdon ska vara glappfri.</p> <p>Reglering av höjd/breddning med fjärrkontroll fungerar. Elställdonet ska löpa mjukt och med konstant hastighet.</p>	Se kopplingschema i Teknisk manual.  Skruva åt, komplettera ev. med nya skruvförband. Byt ev. styrhylsa (i stativ) alt. ändpropp (i kromat rör).  Teknisk manual visar konstruktion samt vilka förband som ska kontrolleras. Kontakta distributören om glapp ej kan åtgärdas.
<p><b>Stativdelar</b> Inga mekaniska skador finns. Inga skrapmärken finns. Ändskydd/bottenstaiv sitter på.</p>	Byt klämmor Skruva åt resp. infästningsförband, komplettera med skruv/låsmutter. Kontrollera så att batteri/fjärrkontroll/ställdon är rätt kopplad enligt schema. Ladda batteriet. Kontakta kundtjänst.
<p><b>Hjul/broms</b> Hjul rullar lätt /slitbanan ej är skadad.</p> <p>Hjulen är hårt åtdragna i bottenstativ.</p> <p>Blockeringsbroms fungerar på alla hjul. Handbroms fungerar.</p>	Om skador finns - konsultera GATEs kundtjänst. Kompletera med bättringsfärg. Kompletera med nya ändskydd.
	Rengör alt. byt hjul (OBS: hjulen låses alltid i bottenstativ med kemisk låsning alt låsmutter. Hjulen är kapslade och vi rekommenderar inte att de demonteras. Byt istället ut hela hjulpaketet.
	Skruva åt hjulbult - komplettera med låsmutter alt. Kemisk låsning (modellberoende).
	Byt hjulpaket.
	Justera broms alt komplettera med nya hjul.

## 9. Generella skötselråd

- Torka av gåbord och armstödsplattor vid behov - använd tvållösning/alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.
- Produkten kan rengöras i tvättunnel eller motsvarande då elektronik är IP65-klassad. Dock, produkten är ej rostfri vilket gör att rengöring i maskin kan förkorta produktens livslängd.
- Byt ut trasiga delar omedelbart – skall göras av kunnig personal.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

## 10. Tekniska specifikationer

Mått anges för bord med 125 mm hjul.

Art. Nr.	Produkt Bredd	Max brukarvikt	Längd	Höjd	Vikt	Armstöd/ Innermått
56-303	64-95cm	150kg	87cm	90-130cm	40kg	25-50cm



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

Gate Rehab Development AB  
Industrigatan 2  
Reftele, Sverige  
S-330 21

T: 0371-318 00  
F: 0371-318 01  
E: [info@gaterd.se](mailto:info@gaterd.se)

LIT-00055 Issue 1  
Date: January 2020

GATERD.SE