



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

Bure Ortho Bure Space

Bruksanvisning



Bure Ortho

Bure Space

Ortho är speciellt framtaget för Ortopedavdelningen och situationer som kräver extra ben- och gångutrymme för brukaren. Ortho har en kraftig elmotor för eldriven höjdjustering. Den optimala höjden för gåbordet kan därmed ställas in med patienten på plats och gåbordet kan också användas som uppresningshjälp. Ortho finns också i en smal version, Ortho S (finns enbart i version GAS)- maxbredd på stativ endast 65cm.

Bure Space har förutom Orthos fördelar också ett bottenstativ med extra plats för att komma intill rullstol eller liknande. Bottenstativet har breddats och innermättet har ökats till 67 cm. Bure Space kan fås med elmanövrerad eller hydraulisk höjdjustering.

Contents

1. Höjning och sänkning av stativ	04
2. Justering av handtag	04
3. Höger- och vänsterjustering av armstödsplattor	04
4. Låsning av hjul/Upplåsning av hjul	04
5. Kopplingsschema styrbox	04
6. Laddning av batteri	05
7. LED på styrbox och batteri	05
8. Underhåll	06
9. Generella skötselråd	07
10. Tekniska specifikationer	07

1. Höjning och sänkning av stativ

Önskad höjd justeras med hjälp av fjärrkontrollen Pil <UPP> resp. Pil <NED>.



2. Justering av handtag

Handtagen justeras till önskad position genom att: Ratt lossas, handtagen justeras, ratt låses.

3. Höger- och vänsterjustering av armstödsplattor

För optimalt stöd kan armstödsplattorna justeras isidled: Ratt lossas, armstödsplattans läge justeras, ratt låses.

OBS: Bakre fästen på stativ/armstöd kan bytas (höger mot vänster och tvärtom) för att få en annan breddning. Styrpinnar på kuddens undersida/bakkant kan också flyttas. Dessa inställningsmöjligheter ger möjlighet till en individuell anpassning.



4. Låsning av hjul/Upplåsning av hjul

Hjulen låses genom att fotbromsen trycks nedåt och aktiveras.

Pressa ned den uppstickande delen av bromsen för att lossa bromsen.



5. Kopplingschema styrbox

För att hantera kopplingar enligt nedan så måste styrboxens täcklock tas bort. Detta görs med hjälp av en skruvmejsel eller liknande - se särskild märkning på styrboxen.

OBS: Var noga med att kontakter ansluts till rätt uttag eftersom detta annars kan skada ställdon.

1. Uttag för ställdon - höj/sänk.
OBS: Var noga med att kontakter ansluts till rätt uttag eftersom detta annars kan skada ställdon.
2. Uttag för fjärrkontroll.
3. Uttag för batterikontakt.
4. Uttag för stickpropp (OBS: För att IP-klassning ska gälla så ska stickpropp ALLTID vara ansluten till styrbox).



6. Laddning av batteri

- Stickpropp ansluts till 230V – vägguttag. Laddning påbörjas automatiskt och LED på batteriet blinkar grönt.
- Ladda batteriet i minst 8h.
- Om produkten ställs undan pga att den ej ska användas under en längre tid (mer än en vecka) så rekommenderar vi att batterikontakt lossas från styrboxen alternativt att batteriet stängs av med on/off knapp. På detta sätt elimineras risken att batteriet förstörs då styrboxen förbrukar en liten mängd ström även då bor det inte används.

7. LED på styrbox och batteri

Styrbox – lyser grönt då spänning finns från batteri/nätuttag.

Batteri:

- Vid laddning lyser LED med blinkande grönt sken.
- On/Off För att använda produkten - tryck på <ON>. Grön lampa börjar lysa/ blinka. Med <OFF> knappen (håll in i 5s) kan man stänga av batteriet om produkten ej ska användas under en längre tid.
- Då batteriet är fulladdat så lyser LED med fast grönt sken
- Då batteri är i normalläge/drift så blinkar LED med grönt sken med OREGELBUNDET intervall enligt - 0,5 sek tänd, 4 sek släckt.
- Då batteri behöver laddas (kvarvarande kapacitet <25%) blinkar LED med orange/rött sken med REGELBUNDET intervall enligt - 0,5 sek tänd, 4 sek släckt.



OBS: Batteriet har en inbyggd funktion som automatiskt stänger av batteriet då kvarvarande kapacitet <20%. LED är då släckt. Batteriet måste nu laddas fullt innan elektroniken på nytt kan användas.

8. Underhåll

Rekommenderas minst 1 gång/år.

Kontrollera att/om	Åtgärd
<p>Allmänt Bordet känns stumt/glappfritt. Bordet inte skramlar vid manövrering. Bordet är plant och alla hjul är i kontakt med underlaget. Bordet ej är smutsigt.</p>	Rengör med ljum såpalösning/alkolbaserat rengörningsmedel (ej petroleumprodukter)
<p>Armstödsplattor Armstödsplattor är hela och rena. Breddning armstödsplattor fungerar.</p>	Rengör och byt om skador finns. Komplettera ev. låsrattar/brickor.
<p>Handtag Grepp ej är skadade/smutsiga.</p> <p>Handtagsinställning fungerar.</p>	Rengör med ljum såpalösning (ej petroleumprodukter). Byt handtagsgrepp.
<p>Batteri Kontrollera att laddkabel är ansluten till styrbox Kontrollera att fjärrkontrollen är ansluten till styrbox Kontrollera att kopplingar är gjorda enligt kopplingschema Kontrollera att batteri, ställdon och styrbox ej sitter/hänger löst.</p>	Komplettera med ny laddkabel, denna ska alltid vara ansluten till styrbox (IP65klassning). Anslut ev. komplettera med ny fjärrkontroll. Se kopplingschema i Teknisk manual. Skruva åt, komplettera ev. med nya skruvförband.
<p>Höjjustering Höjning och sänkning fungerar. Bordet känns stabilt vid maxinställning. Inget glapp finns mellan vertikalt stativ och bottenstativ. Klämmor för höjjustering låser. Infästning av elställdon ska vara glappfri. Reglering av höjd med fjärrkontroll fungerar. Elställdonet ska löpa mjukt och med konstant hastighet.</p>	Byt ev. styrhylsa (i stativ) alt. ändpropp (i kromat rör). Skruva åt låsskruvar Byt klämmor Skruva åt resp. infästningsförband, komplettera med skruv/låsmutter. Kontrollera så att batteri/fjärrkontroll/ställdon är rätt kopplad enligt schema. Ladda batteriet. Kontakta kundtjänst.
<p>Stativdelar Inga mekaniska skador finns.</p> <p>Inga skrapmärken finns. Ändskydd/bottenstaiv sitter på.</p> <p>Hjul/broms Hjul rullar lätt /slibanan ej är skadad.</p> <p>Hjulen är hårt åtdragna i bottenstativ.</p> <p>Blockeringsbroms fungerar på alla hjul.</p> <p>Handbroms fungerar.</p>	Om skador finns - konsultera GATES kundtjänst. Komplettera med bättringsfärg. Komplettera med nya ändskydd. Rengör alt. byt hjul (OBS: hjulen låses alltid i bottenstativ med kemisk låsning alt låsmutter. Hjulen är kapslade och vi rekommenderar inte att de demonteras. Byt istället ut hela hjulpaketet. Skruva åt hjulbult - komplettera med låsmutter alt. Kemisk låsning (modellberoende) Byt hjulpaket. Justera broms alt komplettera med nya hjul.

9. Generella skötselråd

- Torka av gåbord och armstödsplattor vid behov - använd tvållösning/alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.
- Produkten kan rengöras i tvättunnel eller motsvarande då elektronik är IP65-klassad. Dock, produkten är ej rostfri vilket gör att rengöring i maskin kan förkorta produktens livslängd.
- Byt ut trasiga delar omedelbart – skall göras av kunnig personal.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

10. Tekniska specifikationer

Mått anges för bord med 125 mm hjul.

Art. Nr.	Produkt	Produkt Bredd	Max brukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/ Innermått
56-317T	Bure Ortho EL	78cm	150kg	80cm	90-130cm	25-50cm
56-304	Bure Space EL	78cm	150kg	79cm	90-130cm	25-50cm



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2
Reftele, Sverige
S-330 21

T: 0371-318 00
F: 0371-318 01
E: info@gaterd.se

LIT-00064 Issue 1
Date: January 2020

GATERD.SE