

REF

56-309
56-309-AUS
56-309-B/0-PLUS
56-309-B/0-FKNW_R-PU
56-309-B/0-FKNW_R-PU-CH
56-309-B/0-FKHW_R-PU-CH
56-309-B/0-FKHW_R-PS-PU
56-309-B/0-PS-PU
56-309-B/0-PLUS-PU-TKN_R
56-309-B/0-PU
56-309-B/1-FKNW_R-PU
56-309-B/1-PU-CH
56-309-B/1-PLUS-PU
56-309-FKHW_R-PU
56-309-FKNW_R
56-309-FKNW_R-PLUS-RS-US
56-309-FKNW_R-RS-US
56-309-FR
56-309-PLUS
56-309-PLUS-PU
56-309-PLUS-PU-RS
56-309-PLUS-PUK-RS
56-309-PLUS-PU-UK
56-309-PU
56-309-PU-CH
56-309-PU-AUS
56-309-PU-UK
56-309-TKN_R
56-309-UK
56-309/100
56-309/75
56-309/75-AUS
56-309/75-B/0
56-309/75-B/0-PLUS
56-309/75-B/0-PS-PU-R
56-309/75-B/0-PS-PU-TKN_R
56-309/75-B/0-PU
56-309/75-FKN_R
56-309/75-FKNW_R
56-309/75-FKNW_R-PU
56-309/75-FKNW_R-PU-UK
56-309/75-Plus
56-309/75-PLUS-PU
56-309/75-PLUS-PU-UK
56-309/75-PU
56-309/75-PU-AUS
56-309/75-PU-UK
56-309/75-PU-US
56-309/75-TKN_R
56-309/75-UK
56-309/75-US-TRG
56-309L-UK
56-309L-PU
56-309L-PU-UK
56-309L-B/0-AUS
56-309L-B/0-PU-AUS
56-309L/75-B/0-PU-UK
56-309L/75-PU-UK
56-309L/75
56-309L/75-UK

Bure Rise & Go DB

Bruksanvisning
Teknisk manual
Servicemanual



SWL: 150 kg/ 330 lbs

Bure Rise & Go DB

Bure Rise & Go Double är ett traditionellt elmanövrerat gåbord som förfinats med en upprensingsfunktion. Förutom att användas som ett gåbord förenklar det vardagen och alla dess förflyttningar tack vare den intelligenta upprensingsfunktionen.

Bure Rise & Go kan användas av alla dem som normalt använder ett gåbord. Brukaren kan vara aktiv då upprensingsfunktionen används.

Produkten består av ett gåbord med tillhörande sele och fastsättningsremmar. Selen finns i olika storlekar (S, M, L, XL) och är delad baktill vilket gör att man kan vara fastspänd i selen men ändå göra toalettbesök. Selen fästs i fastsättningsremmarna (2 st – en på varje sida) som i sin tur fästs i gåbordet.

Vid upprensning så utnyttjas elmotorns lyftkraft och den intelligenta infästningen i gåbordet gör att avstånd mellan brukare och gåbord minskas i takt med att gåbordet höjs – patient kommer upp till stående.

Bordet har en elektriskt manövrerad benspridning vilket underlättar att komma nära brukaren.

Gåbordet kan med fördel användas med ståplatta vilket underlättar rena förflyttningar.

Innehåll

1. Avsedd Användning	03
2. Kontraindikationer, Försiktighetsåtgärder och Varningar	03
3. Metodik vid Upprensning med Bure Rise & Go DB	05
4. Justering av Höjd/Bredd	07
5. Justering av Handtag	07
6. Höger- och Vänsterjustering av Armstödsplattor	07
7. Låsning av Hjul/Upplåsning av Hjul	07
8. Justering av Underbensstöd	07
9. Kopplingsschema Styrbox	07
10. Laddning av Batteri	08
11. LED på Styrbox och Batteri	08
12. Underhåll	09
13. Generella Skötselråd	10
14. Tekniska Specifikationer	10
15. Återvinning/Kassering	11
16. Garanti	11
17. Elsystem - Teknisk Data (T-motion och Linak)	12
18. Fjärrkontroll Plus	12
19. Reservdelar	13
20. Tillbehör	13
21. Symboler	15

1. Avsedd Användning

Gåbord ska enbart användas inomhus och på plant underlag. Gåbord är ett hjälpmedel, som tillsammans med godkända tillbehör är avsedda att användas för förflyttning från sittande till stående positioner och gångträning. Gåbord ska användas av personer med nedsatt muskelstyrka, som ska kunna stå och utföra enkla benrörelser. Gåbord ska användas för att luta sig mot när brukaren går och står under tidig mobiliseringsträning. Gåbord och tillbehör är avsedda att användas i hemsjukvårdsmiljö och professionell vårdinrättning.

2. Kontraindikationer, Försiktighetsåtgärder och Varningar

Kontraindikationer

- Produkten får inte användas av en brukare vars vikt överstiger den maximala brukarvikt som anges på produktens etikett. The device must not be lowered into water.

Försiktighetsåtgärder

- Kontrollera att produkten används på en torr och plan yta.
- Kontrollera att produkten är korrekt monterad/ihopsatt före den första användningen.
- Kontrollera produkten efter att den har varit ihopfälld /demonterad efter transport.
- Kontrollera höjdjustering och benspridningsrörelser och inspektera ställdonens eller gasfjäders fulla rörelseomfång.
- Aktivera bromsarna när produkten inte används.
- Kontrollera bromsarna före användning.
- Inspektera produkten regelbundet för att upptäcka tecken på skada. Om det finns några synliga tecken på skada, kontakta Direct Healthcare Groups kundtjänst.
- Före varje användning av en elektrisk modell av produkten, kontrollera att handkontrollen inte visar tecken på slitage.
- Kontrollera att markeringarna på handkontrollen överensstämmer med lyftfunktionerna.
- Före varje användning av en elektrisk modell av produkten, kontrollera batteristatus.
- Det är viktigt att aldrig lämna brukaren ensam under förflyttningen.
- Garantin gäller endast om reparationer eller ändringar görs av personal som är auktoriserad av Direct Healthcare Group.
- Se till att det inte finns några hinder eller människor i vägen för produkten när brukaren förflyttar sig med hjälp av produkten.
- Hantera batterier varsamt. Tappa inte.
- Använd endast batterier och kablar som är avsedda för produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att potentiella tillbehör som kan användas är korrekt anslutna till enheten före användning.
- Låg hastighet rekommenderas när du använder produkten.
- Var försiktig så att du inte kör produkten över en tröskel med hög hastighet eller kraft. Närma dig trösklar med lägre hastighet och uppmärksamma brukaren när ni närmar er en tröskel.
- Förvara bruksanvisningen tillsammans med produkten så att den kan användas som referens vid behov.


Varningar

- Vårdgivaren måste kunna läsa och förstå produktens bruksanvisning och användarinstruktioner.
- Det är viktigt att endast använda godkända tillbehör listade i bruksanvisningen för att förhindra att komponenter lossnar oavsiktligt, då detta medföra ett fall och patientskada.
- Manövrera mjukt och försiktigt när du jobbar med produkten.
- Utför underhåll/service av enheten enligt instruktionerna i bruksanvisningen, minst en gång var 12:e månad.
- Tillbehören måste vara ordentligt fastsatta. De bör testas i förhållande till användarens behov och funktionsnivå.
- Särskild försiktighet måste vidtas vid användning av starka elektriska kraftkällor som används vid till exempel diatermi och liknande så att diatermikablar inte placeras på eller i närheten av enheten. Vid tvivel, rådgör med en representant för Direct Healthcare Group. When lifting the device, only use the denoted handholds. At least two people are required for lifting the device
- När du lyfter produkten ska du endast använda de angivna handfästena. Minst två personer krävs för att lyfta produkten.
- Lämna aldrig brukaren utan uppsikt när produkten används.
- Flytta aldrig produkten genom att dra i ställdonet eller gasfjädern.
- Produkten får inte sänkas ner i vatten.
- Produkten får inte lämnas eller förvaras i miljö med hög luftfuktighet.
- Produkten får inte rengöras med ånga.
- Produkten får inte laddas i ett våtrum
- Produkten får inte användas utomhus, endast inomhus.

3. Metodik vid Uppresning med Bure Rise & Go DB

Då uppresning/förflyttning av en patient alltid medför en risk rekommenderar vi att man alltid är 2 personer som hjälper brukaren vid en uppresning/förflyttning.

1. Placera selen så långt ned som möjligt över höft och stuss. Den breda/övre delen runt höften och den smala/nedre delen runt stussen. Fäst selen med kardborren samt dra åt med det steglöst justerbara säkerhetsbandet. Notera att selens undre del som fästs runt stussen kan öppnas vid behov ex. vid toalettbesök.
2. Placera brukarens ben i 90° vinkel, fötterna i golvet eller på ståplattan. Ställ in underbensstöden mot brukarens underben, tänk på att undvika tryck mot knäskål och knäskålssena. (För justering av underbensstöd - se sidan 5). Maximera bottenstativets breddning så att man kommer nära brukaren.
3. Trä de båda fastsättningsremmarna genom gåbordets stativ och genom de gröna låsbrickorna. Var noga med att remmarna träs igenom låsbrickorna fullständigt. Kontrollera särskilt att remmar ej är slitna/trasiga och att hållaren/remmar EJ är böjd/krokig. Om hållaren/remmar är krokig (bild 3c-röd linje) så tyder detta på att produkt har överbelastats och stativ ska då bytas ut innan vidare användning.
4. Koppla ihop uppresningsselen med fastsättningsremmarna (som fästs i gåbordet), spänn dessa med dragöglan - remmarna ska var sträckta på båda sidor (se bild 4a). OBS: För tillbaka dragöglan efter att remmarna har spänts - detta förhindrar trassel (se bild 4b).

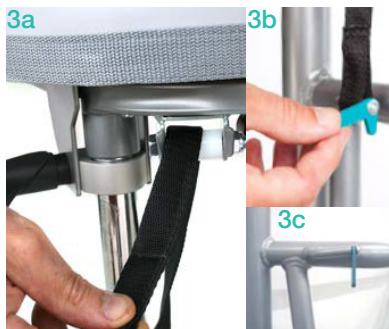

5. Fäll underarmsstöden ut åt sidan. Brukaren ska nu hålla i handtagen UTAN stöd för underarmarna.
6. Lås gåbordets hjul genom att aktivera minst två av de tre gröna bromspedalerna.
7. Utför uppresningen, kontrollera att selen drar lika mycket på båda sidor. Om inte, justera genast. Vid uppresningen skall en vårdgivare finnas framför brukaren samt hålla ögonkontakt med brukaren. En ev. andra vårdgivare kan finnas bredvid brukaren.
8. I de flesta fall kommer brukaren inte till helt upprätt stående, uppmana till självständig slutsträckning eller hjälp brukaren genom att dra i selens justerbara band så att slutsträckning uppnås.
9. Sänk gåbordet till individuellt anpassad höjd, för tillbaka underarmsstöden så att brukaren får stöd. Om inte ståplatta används, för undan underbensstöden för ökat gångutrymme (se Justering underbensstöd, sidan 6). För ökad säkerhet så kan selen behållas på - exempelvis vid förflyttning på ståplatta.



4. Justering av Höjd/Bredd


Önskad höjd justeras med Pil <UPP> eller Pil <NED>

Breddningg av bottenstativen justeras genom Pil <BREDARE> eller Pil <SMALARE>



5. Justering av Handtag

Handtagen justeras till önskad position genom att: Ratt lossas, handtagen justeras, ratt låses.

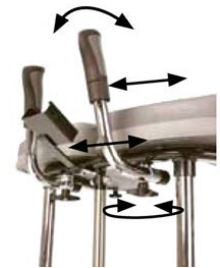

6. Höger- och Vänsterjustering av Armstödsplattor

För optimalt stöd kan armstödsplattorna justeras i sidled: Hela armen vrids utåt/ inåt och blockeras med vredet.



7. Låsning av Hjul/Upplåsning av Hjul

Bure Rise & Go är utrustad med fyra låsningsbara/bromsade hjul (grön pedalbroms). Hjulen låses genom att fotbromsen trycks nedåt och aktiveras. Vid upplåsning pressas den uppstickande delen av bromsen ned. Låsning med grön pedal: rullning och svängning ej möjlig.



8. Justering av Underbensstöd

a - ratt för justering i höjddled

b - ratt för låsning av underbensstöd i framåtsvängt läge (då det ej används).



9. Kopplingsschema Styrbox

För att hantera kopplingar enligt nedan så måste styrboxens täcklock tas bort. Detta görs med hjälp av en skruvmejsel eller liknande - se särskild märkning på styrboxen.

OBS! Var noga med att kontakter ansluts till rätt uttag eftersom detta annars kan skada ställdon.


T-motion:

1. Uttag för ställdon - höj/sänk.
OBS! Var noga med att kontakter ansluts till rätt uttag eftersom detta annars kan skada ställdon.
2. Uttag för ställdon - breddning.
3. Uttag för fjärrkontroll.
4. Uttag för batterikontakt.
5. Uttag för stickpropp (OBS! För att IP-klassning ska gälla så ska stickpropp alltid vara ansluten till styrbox).



Linak:

1. Uttag för batterikontakt.
2. Uttag för stickpropp.
(OBS! För att IP-klassning ska gälla så ska stickpropp alltid vara ansluten till styrbox)
3. Uttag för fjärrkontroll
4. Uttag för ställdon - höj/sänk

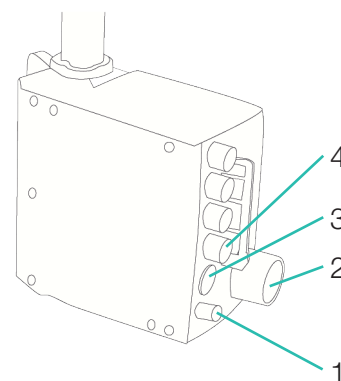**10. Laddning av Batteri**

- Stickpropp ansluts till 230V – vägguttag. Laddning påbörjas automatiskt och LED på batteriet blinkar grönt.
- Make sure the battery is fully charged before using for the first time. It takes around 25 h to fully charge the battery.
- Om produkten ställs undan pga att den ej ska användas under en längre tid (mer än en vecka) så rekommenderar vi att batterikontakt lossas från styrboxen alternativt att batteriet stängs av med on/off knapp. På detta sätt elimineras risken att batteriet förstörs då styrboxen förbrukar en liten mängd ström även då bor det inte används.

11. LED på Styrbox och Batteri

Styrbox – lyser grönt då spänning finns från batteri/nätuttag.

Batteri:

- Vid laddning lyser LED med blinkande grönt sken.
- On/Off För att använda produkten - tryck på <ON>.
- Grön lampa börjar lysa/blinka.
- Med <OFF> knappen (håll in i 5s) kan man stänga av batteriet om produkten ej ska användas under en längre tid.
- Då batteriet är fulladdat så lyser LED med fast grönt sken
- Då batteri är i normalläge/drift så blinkar LED med grönt sken med oregelbunden intervall enligt - 0,5 sek tänd, 4 sek släckt.
- Då batteri behöver laddas (kvarvarande kapacitet <25%) blinkar LED med orange/rött sken med regelbunden intervall enligt - 0,5 sek tänd, 4 sek släckt.



OBS! Batteriet har en inbyggd funktion som automatiskt stänger av batteriet då kvarvarande kapacitet <20%. LED är då släckt. Batteriet måste nu laddas fullt innan elektroniken på nytt kan användas.

12. Underhåll

Rekommenderas minst 1 gång/år.

Kontrollera att/om	Åtgärd
<p>Allmänt Bordet känns stumt/glappfritt. Bordet inte skramlar vid manövrering. Bordet är plant och alla hjul är i kontakt med underlaget. Bordet ej är smutsigt.</p>	<p>Rengör med ljum såpalösning/alkolbaserat rengöringsmedel (ej petroleumprodukter)</p>
<p>Armstödsplattor Armstödsplattor är hela och rena. Breddning armstödsplattor fungerar.</p>	<p>Rengör och byt om skador finns. Byt låsratt.</p>
<p>Handtag Grepp ej är skadade/smutsiga. Handtagsinställning fungerar.</p>	<p>Rengör med ljum såpalösning (ej petroleumprodukter). Byt handtagsgrepp. Komplettera ev. låsrattar/brickor</p>
<p>Batteri Kontrollera att laddkabel är ansluten till styrbox Kontrollera att fjärrkontrollen är ansluten till styrbox Kontrollera att kopplingar är gjorda enligt kopplingschema Kontrollera att batteri, ställdon och styrbox ej sitter/hänger löst.</p>	<p>Komplettera med ny laddkabel, denna ska alltid vara ansluten till styrbox (IP65klassning). Anslut ev. komplettera med ny fjärrkontroll. Se kopplingschema i Teknisk manual. Skruva åt, komplettera ev. med nya skruvförband.</p>
<p>Justering höjd/bredd Höjning och sänkning fungerar. Bordet känns stabilt vid maxinställning. Inget glapp finns mellan vertikalt stativ och bottenstativ. Klämmor för höjjustering låser. Infästning av elställdon ska vara glappfri. Reglering av höjd med fjärrkontrollfungerar. Elställdonet ska löpa mjukt och med konstant hastighet.</p>	<p>Byt ev. styrhylsa (i stativ) alt. ändpropp (i kromat rör). Skruva åt låsskruvar Byt klämmor Skruva åt resp. infästningsförband, komplettera med skruv/låsmutter. Kontrollera så att batteri/fjärrkontroll/ställdon är rätt kopplad enligt schema. Ladda batteriet. Kontakta kundtjänst.</p>
<p>Stativdelar Inga mekaniska skador finns. Inga skrapmärken finns. Ändskydd/bottenstaiva sitter på.</p>	<p>Om skador finns - konsultera GATEs kundtjänst. Komplettera med bättringsfärg. Komplettera med nya ändskydd.</p>
<p>Hjul/broms Hjul rullar lätt /slitbanan ej är skadad. Hjulen är hårt åtdragna i bottenstativ. Blockeringsbroms fungerar på alla hjul. Handbroms fungerar.</p>	<p>Rengör alt. byt hjul (OBS: hjulen låses alltid i bottenstativ med kemisk låsning alt låsmutter. Hjulen är kapslade och vi rekommenderar inte att de demonteras. Byt istället ut hela hjulpaketet. Skruva åt hjulbult - komplettera med låsmutter alt. Kemisk låsning (modellberoende) Byt hjulpaket. Justera broms alt komplettera med nya hjul.</p>
<p>Sele Spännen, sömmar och kardborrelåsningar (velcro) är hela/intakta. Låsbleck i bord (gröna) är hela. Hållare/remmar Hållaren/remmar ej är böjd (se bild s3). Sele och fastsättningsremmar ska bytas minst var 3:e år.</p>	<p>Byt sele. Finns i storlek XS, S, M, L, XL. Byt låsbleck. En böjd hållare tyder på att produkt har överbelastats. Stativ ska då bytas ut innan produkten används igen. Kontrollera selens märkning. Om selens produktionsdatum är äldre än 3 år så ska sele/remmar kasseras.</p>


13. Generella Skötselråd

- Kontrollera innan användning att hållare/remmar ej är böjda (se bild s3).
- Kontrollera innan användning att selen ej är äldre än 3 år (se märketikett).
- Torka av gåbord och armstödsplattor vid behov - använd tvållösning/alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.
- Produkten kan rengöras i tvättunnel eller motsvarande då elektroniken är IP65-klassad. Dock är produkten ej rostfri, vilket gör att rengöring i maskin kan förkorta produktens livslängd.
- Byt ut trasiga delar omedelbart – skall göras av kunnig personal.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Om produkten ska rengöras i tvättunnel/tvättkabinett, rekommenderas PU-dynor.

14. Tekniska Specifikationer

Mått anges för bord med 125 mm hjul.

Part No.	Produkt Bredd	Max brukarvikt	Längd	Höjd	Vikt	Armstöd/ Innermått
56-309	66-106 cm	150 kg	101 cm	95-135 cm	40 kg	34-65 cm

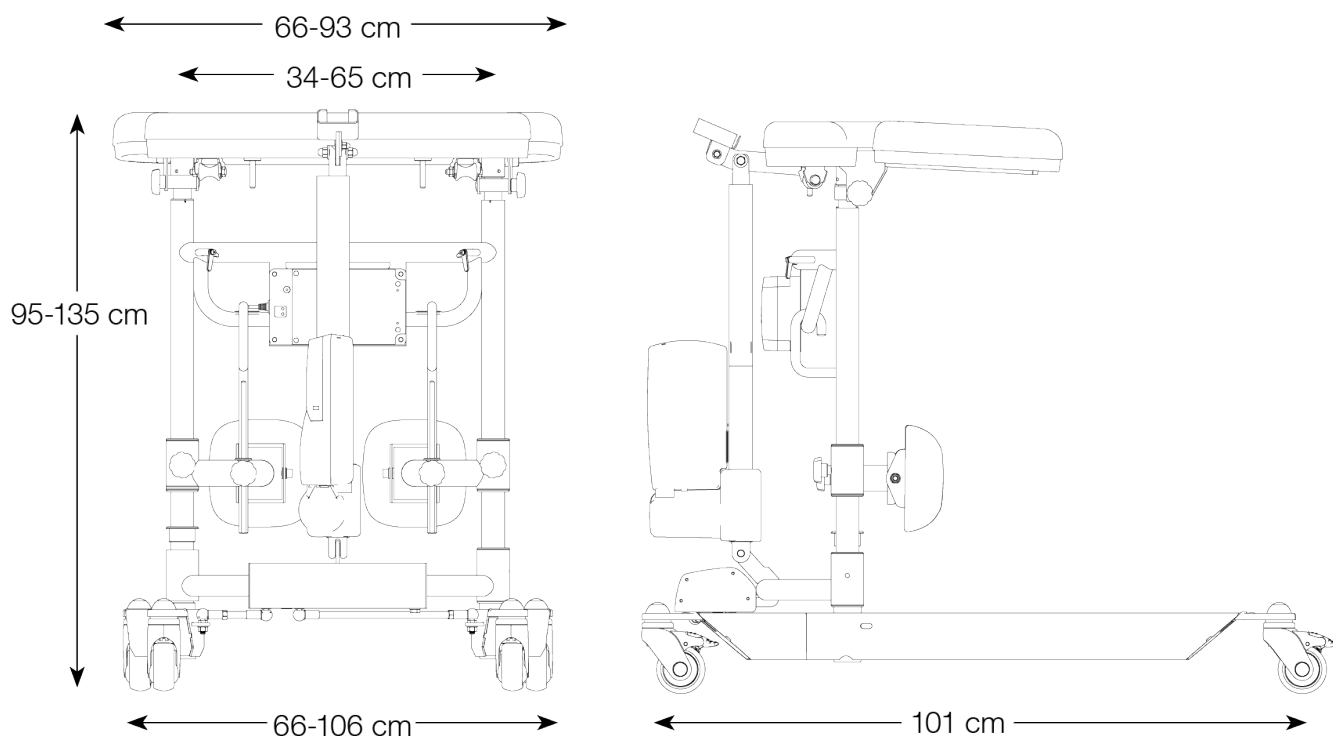

15. Återvinning/Kassering

När produkten inte längre kan användas bör den återvinnas i enlighet med lagar/föreskrifter för avfallshantering i resp. land. Alla elektriska delar inkl. batterier måste tas bort och återvinnas som elektriska komponenter. (Rådgör med er lokala återvinningsanläggning för mer information om hur de olika materialen i produkten (metall, plast, elektronik) ska återvinnas).

16. Garanti

Vi lämnar två års garanti på ev. fabrikationsfel (Gäller ej förslitningsdetaljer).
För mer information eller frågor vänligen kontakta:

Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35,
SE-164 40 Kista, Sweden

Tel: +46 (0)8-557 62 200
info.se@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com

17. Elsystem - Tekniska Data (T-motion och Linak)

Ställdon	Lyft	Breddning	Lyft	Breddning
Tillverkare	TiMotion	TiMotion	Linak	Linak
Spänning	12V	24V	24 V	24 V
Lyftkraft	2000N/1500N	1000N	1000N/1500N/2000N	1200 N
Dragkraft	2000N/1500N	1000N	1000N/1500N/2000N	1200 N
Blockering vid lyft	1000N	1000N	7A	3 A
Strömstyrka	6.6 (+/-1,0)A	2.6 (+/-0,4)A	7A ut/7 A in	3A ut/3 A in
Färg	Svart	Aluminium	Vit	Vit
Slaglängd	400mm	55mm	400 mm	55 mm
Min inbyggnadsmått	605mm	167mm	606+/-2 mm	165 +/- 2 mm
Kapslingsklass	IP66	IP66	IPX6	IPX6

IEC60601-1 3:e utgåvan

Kontrollbox + Batteri

Tillverkare	T-Motion	Linak
Spänning	24V	230V/24V
Kapacitet	2.0AH	2,25 Ah
Kapslingsklass	IP66	IPX6
Färg	Svart	Vit
Elsäkerhet	Class II	Class II (Dubbelisolerad)

IEC60601-1 3:e utgåvan

18. Fjärrkontroll Plus

**1. Serviceindikator – blinkar röd efter 11 månaders drift. Fast sken (röd) efter 12 månaders drift. Indikatorn är en påminnelse om att gå igenom anvisning Underhåll Detta bör göras minst en gång per 12månader.

Återställning: Håll in knappar <2a> + <2b> i minst 30 sekunder.

** Indikatorn slocknar ca 30 sek efter att fjärrkontroll varit aktiv (batterisparfunktion).



19. Reservdelar


1a	58-306-L	Armstödsplatta vänster	14	58-302	Lagring (x2) för tvärsektion
1b	58-305	Armstödsplatta mittendel	15	58-353	Svarvad axel, benstativ
1c	58-306-R	Armstödsplatta höger	16	57-776 57-775	Övre täcklock, hjul Planbricka, hjul
2a	58-363	Stativ för armstödsplatta, mitten	17	58-360	Täcklock, hjulplatta (PA)
2b	58-304-L/R	Stativ för armstödsplatta, (höger/vänster)	18	58-354	Hjulplatta
2c	57-352	Låsspak	19	57-051 57-319 57-049	Hjul 75mm Hjul 100mm Hjul 125mm
2d	58-301	Klämma/Alu	20	58-355-L 58-355-R	Benstativ, vänster Benstativ, höger
3	57-041-3	Fjärrkontrollhållare TH7	21		Länkarm, höger
4	58-376	Batteri, TiMotion	22		Länkarm, vänster
5	58-377	Ställdon, TiMotion	23	58-310-1	Upphångningskrok
6	58-373 58-373-1	Styrbox 220V, TiMotion Styrbox 100V, TiMotion	24	58-312	Knästödsplatta
7	58-351	Vertikalt stativ, Rise DB	25	58-385	Hållare/Knästödsplatta (endast PUR)
8	58-311	Teleskopiskt innerrör inkl. glidlager	26	58-308-1-L/R	Svängarm/Knästöd (höger/vänster)
9	58-358	Sidoplåt (2x) alu	27	57-710	Ratt/Upphångningskrok
10	58-356	Aluprofil, breddning	28	57-839	Ratt/Svängarm
11	58-378	Ställdon breddning (TiMotion)	29	58-302	Bussning PA6
12	58-364	Cirkulär platta	30	58-322	Remstopp, grön
13	58-352	Tvärsektion			

20. Tillbehör







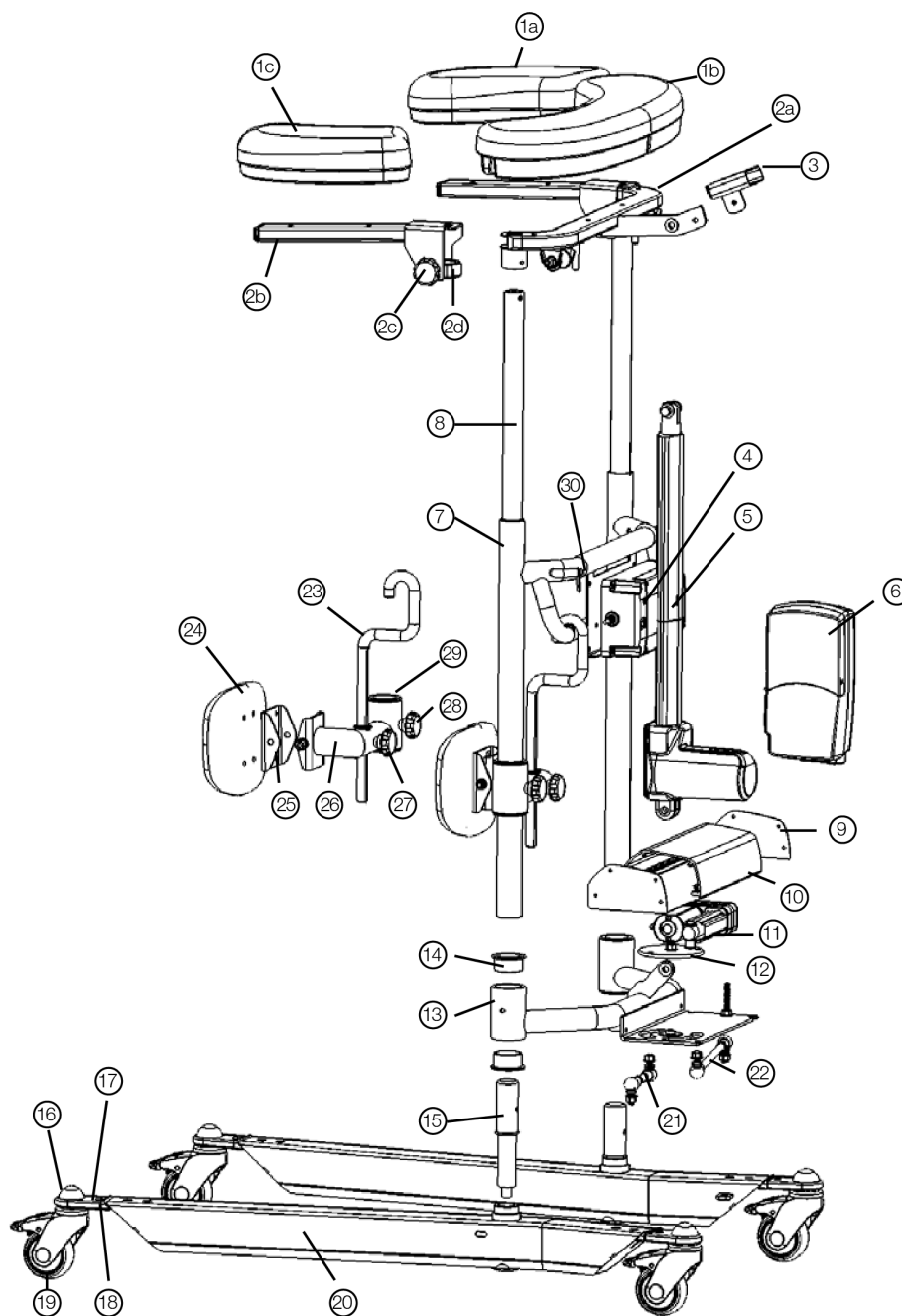




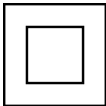

Art. Nr.	Benämning
	Handbromstillsats, 2 handtag
	Handbromstillsats, 1 handtag
56-333-DB	Ståplatta kort
56-383-DB	Ståplatta lång
56-334	Kromad droppstång
56-334	Hållare för droppstång
56-336	Syrgashållare
56-337	Sidostöd
56-338	Droppstång, komplett med hållare

BURE RISE & GO DB

56-387	Länkhjul med broms 75 mm
56-358	Länkhjul med broms 100 mm
56-361	Länkhjul med broms 125 mm
57-365	Armstödsplatta, mitten PUR
57-365-L/R	Armstödsplatta, vä/hö, PUR
57-367	Knästödsplatta, PUR
58-374-2	Handkontroll (TH7)
56-062	Handkontroll PLUS, DB (TH10)
58-320 (-1, -2, -3)	Laddningskabel/EUR (-UK,-US,-AUS)
58-326 (-1, -2, -3)	Spiralkabel/EUR (-UK,-US,-AUS)



21. Symboler

	Produkten följer krav i det medicintekniska regelverket 2017/45 (MDR)		Visuell inspektion
	Medicinteknisk produkt		Läs användarinstruktionerna
	Varning		Produktkod
	Manufacturer information		Batch-kod
	Typ BF i enlighet med nivån av skydd mot elektrisk shock		Produkten skall enbart användas inomhus
	WEEE Kan inte kasseras som hushållsavfall pga elektroniska komponenter		Klass II utrustning, elsäkerhet
 ON 2min OFF 18min	Duty cycle: 2 min i aktivt läge (ON), 18 min i viloläge (OFF)		



Medicinteknisk produkt klass I

Medicinteknisk produkt klass I. Produkten följer kraven i det medicintekniska regelverket 2017/745 (MDR)

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35,
SE-164 40 Kista, Sweden

Tel: +46 (0)8-557 62 200
info@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com