



Bure Walkers

Krachtige mobiliteit, slimme zorg

Mobiliteitsklasse:



Overzicht van de verschillende Walker

Walker

Bure Double 2.0



Walker met flexibele breedtemaat.

Bure Dubbel is voorzien van dubbele elektrische verstelling, voor elektrisch heffen en dalen en het elektrisch verbreden van het onderstel.

De flexibele breedtemaat vergemakkelijkt de toegang voor bijvoorbeeld een rolstoel en voor smallere doorgangen zoals een deurpost. Dit maakt de looptafel praktisch in zowel de thuis- als zorgomgeving.

**Maximaal
gebruikersgewicht:
150 kg**

Bure Space



Walker met extra been- en loopruimte.

Bure Space is speciaal ontworpen voor situaties waarbij extra been- en loopruimte nodig is. Met een ruime binnenafmetingen van 67 cm, wordt het opstaan mogelijk voor gebruikers met beperkte mobiliteit en stijfheid. De walker beschikt over een krachtige elektromotor voor elektrische hoogteverstelling. Hiermee kan de optimale hoogte voor de looptafel worden ingesteld.

De looptafel kan ook gebruikt worden als stahulpmiddel. Bure Space is verkrijgbaar met elektrisch bediende of hydraulische hoogteverstelling.

**Maximaal
gebruikersgewicht:
150 kg**

Bure Standard/ Bure S



Walker in drie versies: elektrisch, gas of handmatig.

Bure Standard en Bure S zijn geschikt voor gebruikers met eenvoudigere en beperkte behoeften. De looptafel is verkrijgbaar in drie versies: ELEKTRISCH, GAS en HANDMATIG. Bure S is een smallere versie van Bure Standaard en speciaal aangepast voor krappere ruimtes. Alle modellen hebben een traploze hoogteverstelling van de onderarmsteunen.

**Maximaal
gebruikersgewicht:
150 kg**

Bure Low



Walker in lager model voor kleinere gebruikers.

Bure Low is een lager model voor kleinere gebruikers.

Het model is hetzelfde als de Bure Std/S, behalve dat de min/max hoogte aanzienlijk lager is (70-95 cm met 75 mm wielen).

Bure Low is verkrijgbaar met twee verschillende onderstellen Std en S, met elektriciteit of gas.

**Maximaal gebruikersgewicht:
150 kg**

Bure XL



Walker voor grotere en zwaardere patiënten.

Bure XL is ontworpen voor grotere en zwaardere patiënten en heeft daardoor extra ruimte en stevigheid. Want bij de verzorging en verpleging van zwaardere patiënten zijn stevige hulpmiddelen belangrijk.

De Bure XL wordt altijd geleverd met elektrische bediening.

**Maximaal gebruikersgewicht:
240 kg**

Rise & Go DB™



Walker met uniek opsta-functie.

Bure Rise & Go is een kosteneffectieve looptafel met een gepatenteerde sta-functie, door de elektrische sta-op en een mobiliteitshulpmiddel in één en hetzelfde product.

Rise & Go beschikt over elektrische verbreding van het onderstel. Deze flexibele verbreding in combinatie met een lagere hoogte boven de beensteunen zorgt voor meer flexibiliteit, ongeacht de patiëntsituatie in het ziekenhuis of thuis.

**Maximaal gebruikersgewicht:
150 kg**

Bure Double 2.0



De walker op de afbeelding is voorzien van optionele PU-armleuningen en 75 mm wielen.

Walker met in breedte instelbaar onderstel.

De Bure Double 2.0 is uitgerust met dubbele elektrische verstelling voor zowel hoogte als breedte. Dankzij het verstelbare onderstel biedt deze looptafel optimale toegankelijkheid bij gebruik met bijvoorbeeld een rolstoel of in smalle doorgangen zoals deurposten. Dit maakt de Bure Double bijzonder geschikt voor gebruik in zowel de thuissituatie als professionele zorgomgevingen.

Maximaal gebruikersgewicht: 150 kg

① Ergonomische handgrepen

Traploos verstelbaar in alle richtingen voor een optimale, persoonlijke afstelling.

② Gebruiksvriendelijke handbediening

Gemakkelijk bereikbaar voor zowel de zorgverlener als de gebruiker.

③ Elektrische hoogte verstelling

Ideaal hulpmiddel bij het overnemen van de gebruiker en verlicht de fysieke belasting voor zorgpersoneel.

④ Open frameconstructie

Biedt uitstekende stabiliteit en meer bewegingsvrijheid dan een standaard walker.

⑤ Waterbestendig ontwerp

Alle elektrische componenten zijn IP65-geclassificeerd en geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.

⑥ Traploze hoogte-instelling

Snel en eenvoudig instelbaar op de juiste werkhoogte

⑦ Elektrisch verstelbaar onderstel

Flexibele breedteaanpassing maakt positionering eenvoudig, ongeacht het type rolstoel, bed of stoel.

⑧ Stabiele en anatomische ondersteuning

Arm- en schoudersteunen ontlasten de nek en verplaatsen de inspanning naar de

grotere spiergroepen.

⑨ Duurzaam ontwerp

Ontwikkeld voor langdurig en intensief gebruik in zorginstellingen.

⑩ Individueel vergrendelbare wielen

Voor extra veiligheid en stabiliteit tijdens gebruik.

Bure Space



De walker op de afbeelding is voorzien van optionele PU-armleuningen en 75 mm wielen.

Walker met extra been- en loopruimte.

De Bure Space is speciaal ontworpen voor gebruikers die meer beenruimte of bewegingsvrijheid nodig hebben, bijvoorbeeld door stijfheid of beperkte mobiliteit. Dankzij de royale binnenmaat van 67 cm is het eenvoudig om dicht bij de gebruiker te positioneren, zelfs bij een gestrekt been of gips. De walker is inzetbaar als loophulpmiddel én als ondersteuning bij het opstaan.

Maximaal gebruikersgewicht: 150 kg

① Ergonomische handgrepen

Traploos verstelbaar in alle richtingen voor een optimale, persoonlijke afstelling.

② Gebruiksvriendelijke handbediening

Gemakkelijk bereikbaar voor zowel de zorgverlener als de gebruiker.

③ Elektrische of hydraulische hoogteverstelling

Biedt ondersteuning bij het opstaan en maakt het mogelijk om de tafel op de juiste hoogte in te stellen met de gebruiker al in positie.

④ Open frameconstructie

Biedt uitstekende stabiliteit en meer bewegingsvrijheid dan een standaard walker.

⑤ Waterbestendig ontwerp

Geschikt voor gebruik in natte of vochtige omgevingen.

⑥ Vrije beenruimte aan de voorzijde

Geschikt voor gebruikers met gestrekte benen of gips, zonder in te leveren op stabiliteit.

⑦ Ruim onderstel

De binnenbreedte van 67 cm biedt extra plaats, bijvoorbeeld om een rolstoel dicht te benaderen.

⑧ Traploze, elektrische hoogte-instelling

Eenvoudig instelbaar voor elke gebruiker of situatie.

⑨ Anatomische armsteunen

Ontlasten schouders en nek, en stimuleren een actieve loophouding via de benen en borstspieren.

⑩ Rem en richtingsvergrendeling (optioneel)

Positioneerbaar zodat de gebruiker deze eenvoudig kan bedienen vanuit de looppositie.

⑪ Lage minimale hoogte

Slechts 85 cm bij gebruik van 75 mm wielen – ideaal bij beperkte opsta-ruimte.

Bure Standard/ Bure S

Beschikbare varianten:

Elektrisch (EL)

Voorzien van opsta-ondersteuning en elektrische hoogteverstelling.

Gasgeveerd (GAS)

Snel en traploos in hoogte verstelbaar, zonder opsta-ondersteuning.

Handmatig

Eenvoudig verstelbaar voor situaties waarin hoogteverstelling zelden nodig is.



De walker op de afbeelding is uitgerust met optionele PU-armleuningen en 125 mm wielen.

Walker in drie uitvoeringen: elektrisch, gasveer of handmatig.

De Bure Standard en Bure S zijn ontworpen voor gebruikers met eenvoudige of minder intensieve mobiliteitsbehoeften. Ze zijn beschikbaar in drie uitvoeringen: elektrisch, gasgeveerd of handmatig. De Bure S is een smallere variant, speciaal ontwikkeld voor gebruik in krappe ruimtes, zoals thuis of in kleinere zorgomgevingen.

Maximaal gebruikersgewicht: 150 kg

① Ergonomische handgrepen

In alle richtingen traploos verstelbaar voor een optimale, persoonlijke positionering.

② Goed bereikbare bediening

Zowel voor de gebruiker als de zorgverlener makkelijk toegankelijk.

③ Elektrische opsta-ondersteuning (bij EL-modellen)

Ondersteunt veilig en moeiteloos opstaan,

vermindert de fysieke belasting van het personeel.

④ Open frameconstructie

Voor maximale bewegingsvrijheid met behoud van stabiliteit.

⑤ Waterbestendig (IP65, bij EL-modellen)

Veilig in vochtige ruimtes zoals badkamers of sanitaire voorzieningen.

⑥ Vloeiende hoogte-instelling

Elektrische of gasgeveerde aanpassing maakt snelle en soepele hoogteafstelling mogelijk.

⑦ Compact ontwerp voor kleine ruimtes (Bure S)

Bure S past door nagenoeg alle deuropeningen van 70 cm of breder.

⑧ Anatomische armsteunen

Ontlasten schouders en nek, bevorderen natuurlijke loophouding.

⑨ Duurzaam gebouwd

Geschikt voor langdurig gebruik in zorginstellingen, ziekenhuizen of thuiszorg.

⑩ Optionele handrem en richtingsvergrendeling

Verkrijgbaar als een- of tweehandige uitvoering, met remwerking op de achterwielen en richtingvast wielen voor meer controle tijdens het lopen.

Bure Low



De walker op de afbeelding is voorzien van optionele PU-armleuningen en 75 mm wielen.

Verlaagde walker voor kleinere gebruikers.

De Bure Low is speciaal ontwikkeld voor gebruikers met een kleinere lichaamslengte. Hij biedt dezelfde functionaliteiten als de Bure Standard en Bure S, maar met een aanzienlijk lagere instelbare hoogte (72–95 cm bij gebruik van 75 mm wielen). Verkrijgbaar met twee ondersteltypes (Std en S) en met elektrische of gasgeveerde hoogteverstelling.

Maximaal gebruikersgewicht: 150 kg

① Ergonomische handgrepen

In alle richtingen traploos verstelbaar voor een optimale ergonomie.

② Gemakkelijk bereikbare bediening

Strategisch geplaatst zodat zowel gebruiker als zorgverlener er goed bij kunnen.

③ Opsta-ondersteuning (bij EL-modellen)

Ondersteunt gebruikers veilig bij het opstaan, verlaagt fysieke belasting voor zorgpersoneel.

④ Open frame

Biedt meer ruimte voor beweging zonder in te boeten op stabiliteit.

⑤ Waterbestendig ontwerp (IP65)

Geschikt voor gebruik in natte of vochtige ruimtes.

⑥ Traploze hoogte-instelling

Met elektrische of gasverstelling snel en soepel in te stellen.

⑦ Compact en wendbaar ontwerp (met S-onderstel)

Ideaal voor gebruik in kleinere ruimtes, zoals thuis of in verpleeghuizen. Past door deuropeningen vanaf 70 cm..

⑧ Anatomisch gevormde armsteunen

Ondersteunen de schouders en nek, stimuleren correcte houding en spieractiviteit.

⑨ Duurzaam gebouwd

Ontworpen voor langdurig en intensief gebruik in zorginstellingen.

⑩ Handrem en richtingsvergrendeling (optioneel)

Verkrijgbaar als een- of tweehandige uitvoering. Maakt zelfstandig gebruik veiliger en stabiel. Själv kan nå den från sin gåposition. Handbromsen verkar på bakhjulen och i bromskittet ingår också rikttnings-spärrade hjul som underlättar för brukaren att hålla rätt kurs vid gång.

Bure XL



De walker op de afbeelding is voorzien van schuimrubberen armleggers en 125 mm wielen.

Walker voor grotere en zwaardere gebruikers.

De Bure XL is speciaal ontwikkeld voor gebruikers met een hoger lichaamsgewicht en grotere lichaamsbouw. Dankzij het bredere en stevigere onderstel biedt deze walker optimale ondersteuning en veiligheid, met behoud van comfort en functionaliteit. De Bure XL wordt standaard geleverd met elektrische hoogteverstelling.

Maximaal gebruikersgewicht: 240 kg

① Ergonomische handgrepen

Traploos verstelbaar in alle richtingen voor een optimale, persoonlijke afstelling.

② Handbediening binnen handbereik

Zowel de gebruiker als de zorgverlener kan eenvoudig bij de bediening.

③ Elektrische opsta-ondersteuning

Maakt het opstaan veiliger en verlicht fysieke belasting van het zorgpersoneel.

④ Open frameconstructie

Biedt extra manoeuvreerruimte zonder in te leveren op stabiliteit.

⑤ Waterbestendig (IP65)

Geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.

⑥ Soepele hoogteverstelling

Elektrisch instelbaar voor eenvoudig en precies afstellen op de juiste werkhoogte.

⑦ Ideaal voor zorginstellingen

Door zijn formaat is de Bure XL met name geschikt voor gebruik in ziekenhuizen en

zorginstellingen.

⑧ Sterk en ruim ontworpen

Breder onderstel (40–56 cm binnenmaat) voor meer stabiliteit en comfort bij grotere gebruikers.

⑨ Anatomisch gevormde armsteunen

Verminderen druk op schouders en nek en stimuleren gebruik van grotere spiergroepen zoals benen en borst.

⑩ Duurzaam gebouwd

Ontworpen voor langdurig gebruik onder zwaardere belasting in veeleisende zorgomgevingen.

⑪ Vergrendelbare wielen

Voorzien van vier individueel blokkeerbare wielen voor maximale veiligheid.

Rise & Go DB™



De walker op de afbeelding is voorzien van optionele PU-armleuningen en 75 mm wielen.

Walker met unieke opsta- en transferfunctie.

De Bure Rise & Go combineert drie hulpmiddelen in één: een walker, een sta-op-hulp en een mobilisatie- of transferhulpmiddel. Dankzij de gepatenteerde elektrische opsta-ondersteuning en de doordachte positionering is dit hulpmiddel ideaal voor zowel thuiszorg als ziekenhuisgebruik. De flexibele, elektrisch verstelbare breedte maakt positioneren rond bedden, rolstoelen of stoelen eenvoudig en ergonomisch.

Maximaal gebruikersgewicht: 150 kg.

① Ergonomische handgrepen

In alle richtingen traploos verstelbaar voor een veilige en persoonlijke positionering.

② Eenvoudig bereikbare bediening

Geplaatst zodat zowel gebruiker als zorgverlener er goed bij kunnen.

③ Unieke elektrische opsta-functie

Ondersteunt gebruikers bij het opstaan via een natuurlijke, verticale liftbeweging. De bijbehorende opsta- en transfersling (in S,

M, L) houdt de gebruiker veilig en stabiel.

④ Elektrisch verstelbare breedte van het onderstel

Maakt het mogelijk de walker dicht bij de gebruiker te brengen, ongeacht de breedte van stoel, bed of rolstoel.

⑤ Geschikt voor vochtige omgevingen (IP65)

Veilig te gebruiken in natte ruimtes zoals badkamers.

⑥ Traploze hoogte-instelling

Snel en soepel af te stemmen op de juiste werkhoogte, met gebruiker al in positie.

⑦ Uitklapbare armsteunen

Maken het makkelijker om de handgrepen te bereiken tijdens het opstaan.

⑧ Lage vloerhoogte

Vergemakkelijkt het positioneren bij zittende gebruikers, bijvoorbeeld aan het bed.

⑨ Stabiele ondersteuning

Anatomische steunen verlichten druk op schouders en nek en stimuleren actief spiergebruik.

⑩ Robuust en duurzaam

Ontwikkeld voor intensief gebruik in professionele zorgomgevingen.

⑪ Vier individueel vergrendelbare wielen

Voor maximale veiligheid tijdens gebruik of transfer.

Rise & Go DB™

Walker met sta-functie.

Bure Rise & Go is een kosteneffectieve looptafel die is verfijnd met een gepatenteerde stafunctie. Dankzij de elektrische stafunctie is Bure Rise & Go een loophulpmiddel, een stahulpmiddel en een transferhulpmiddel in één product.


Rise & Go heeft een elektrisch aangedreven verbreding van het basisframe. De flexibele verbreding in combinatie met een lagere hoogte boven het basisframe zorgt voor meer flexibiliteit, ongeacht de patiëntsituatie in het ziekenhuis of thuis.



- 1 De MultiBelt wordt over de rug en billen geplaatst. De banden worden versteld en de onderbeensteunen worden in de juiste positie gezet.



- 2 De patiënt houdt de handgrepen vast en begint met opstaan met behulp van de elektrische ondersyeuning. Met behulp van de unieke MultiBelt en de verticale tilrichting van de walker volgt de patiënt een natuurlijk bewegingspatroon.

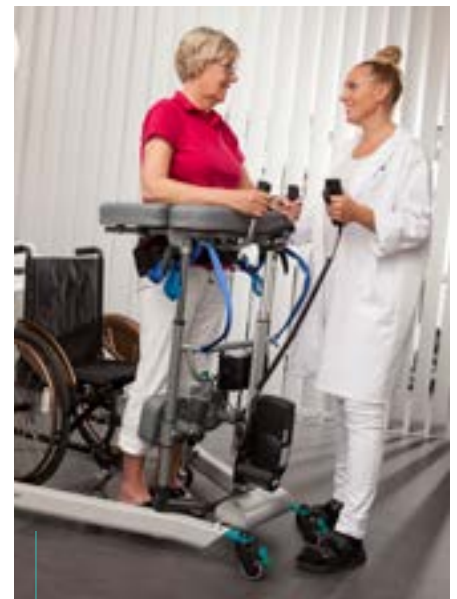

- 3 Na het opstaan worden de onderbeensteunen weggedraaid en kan de patiënt direct beginnen met lopen met de walker als ondersteuning. Als alternatief kan de patiënt zijn voeten op een voetplaat plaatsen en na het opstaan worden verplaatst.

Betere werkeronomie, veilig en zeker.

Bure Rise & Go bespaart tijd, ruimte en geld. U krijgt een loophulpmiddel, een sta-hulpmiddel en een transferhulpmiddel in één product, wat het concept zeer kosteneffectief maakt.

Bure Rise & Go creëert de mogelijkheid voor een betere werkeronomie. Met de intelligente sta-hulp wordt een veilige, zekere en natuurlijke stahouding gecreëerd zonder fysieke belasting van de zorgverlener.

Het product bestaat uit een walker met een bijbehorend MultiBelt harnas en bevestigingsbanden. Het harnas is verkrijgbaar in verschillende maten (S, M, L) en is aan de achterzijde gedeeld, wat

het bijvoorbeeld gemakkelijker maakt om naar het toilet te gaan.

Bij het opstaan wordt gebruikgemaakt van de tilkracht van de elektromotor en de bevestiging aan de walker zorgt ervoor dat de afstand tussen de gebruiker en de walker wordt verkleind doordat de walker omhoog wordt gebracht naar een staande positie.

Al met al leidt Bure Rise & Go tot een vermindering van de werklust en is het een investering in de gezondheid van het personeel en de revalidatie van de gebruiker.



Accessoires

voor loopondersteuning & opstaan.



Looptraining tuig – 4-punts

Ondersteunende tuig voor looptraining, geschikt voor handmatige, gasgeveerde én elektrische walkers.

Maximaal gebruikersgewicht: 150 kg



Kit voor looptraining – MULTI

Beveiligingsaccessoire voor gebruik met de Bure Rise & Go. De dubbele liesbanden en bevestigingshaken zorgen voor extra veiligheid bij looptraining, bijvoorbeeld bij risico op duizeligheid of verminderde balans.



Onderbeensteun

Verbeterd de ondersteuning bij mobilisatie en opstaan. Geschikt voor alle modellen behalve de Bure Rise & Go DB™ en Bure XL.

Gebruik dit accessoire alleen in combinatie met een voetplaat en/of kantelbeveiliging (tipbeugel) om kantelgevaar te voorkomen.

Accessoires



I V-houder (incl. bevestiging)



Zijsteunen / Zijsteunen PU



Transportplaat (kort/lang)



Transportplaat kort/lang zwenkwielen



Handremmen DB



Handrem (1 of 2 handen)



Wielen met remmen 75, 100, 125mm



Wielen met rijrichtinghouder 75, 100, 125mm



Onderbeensteun



Zachte mand met houder



Zuurstoffleshouder incl. beugel



PU armsteunkussens



Besturingshandgreep



Hielband (voor transportplaat)



Looptraining tuig STD

Je weet heel goed dat:



De Bure DB heeft een lage bodemvrijheid, waardoor u heel gemakkelijk de walker dicht bij de gebruiker kunt aanrijden. De Bure DB is bijzonder laag in combinatie met 75 mm wielen.



Kiest u voor een walker met elektrisch verstelbare breedte, dan kiest u ook voor meer flexibiliteit. U komt dicht bij de patiënt, ongeacht de breedte van de rolstoel of stoel. Houd er ook rekening mee dat de voetenplaat in de meeste gevallen ook tussen de voorwielen van de rolstoel past.



De voetenplaat is een uitstekende accessoire wanneer u de walker wilt gebruiken voor mobilisatie/opstaan of transfers. De voetplaat is smal genoeg voor gebruik met de meeste rolstoelen.

Accessoires

Druppelhouder met beugel

Biedt de patiënt goede bewegingsmogelijkheden in de kamer, op de afdeling of thuis. Wordt geleverd met beugel.

PU-kussens

PU-kussens kunnen bij de bestelling worden geselecteerd of nabesteld. Deze kussens hebben geen perforaties of randen waar vuil zich kan ophopen. Een goed alternatief voor wie hoge eisen stelt aan hygiëne. Houd er rekening mee dat de buitenafmetingen bij PU-kussens met +5 cm toenemen.

Zachte mand met beugel

Mandje met beugel biedt ruimte voor de belangrijkste spullen.



Handrembevestiging, één of twee remhandels

De walker kan optioneel worden voorzien van een handrem, zodat de gebruiker zelf de beweging van de tafel kan remmen tijdens de looptraining. Voor extra veiligheid/ondersteuning zijn wieljes met richtingsvergrendeling inbegrepen. Een handrem is verkrijgbaar in zowel linker- als rechteruitvoering. Wanneer de handrem is gemonteerd, neemt de breedte van het basisframe met +2 cm toe.

Handbediening/PLUS

Standaard voorzien van handbediening/ PLUS met functies als meerdere snelheden en service-/batterij-indicator in de handbediening.

Verstelbare zijsteun

Voorkomt dat de armen van de armleuningen afglijden. Traploos verstelbaar aan de zijkant van de walker, wat de loopbeweging verder stabiliseert. De zijsteun is ook verkrijgbaar in PU.

Zuurstoffleshouder met beugel

Dit betekent dat de patiënt niet langer aan bed gebonden hoeft te zijn.

Onderbeensteun

De onderbeensteun vergemakkelijkt mobilisatie/opstaan. Gebruik deze echter wel in combinatie met een sta-plaat en pedaalbuis of een kantelbeveiliging vanwege het risico op achteroverkantelen.

Wiel met rijrichtinghouder

125mm
100mm
75mm

Wiel met remmen

125mm
100mm
75mm

Transportplaat

De Transportplaat is een uitstekende aanvulling wanneer u de walker wilt gebruiken voor mobilisatie/transfer. Verkrijgbaar in een korte en lange versie.



Toepasbare accessoires per walker

Naam	Art#	Bure Std/Bure S	Bure Low	Bure Rise & Go	Bure Space	Bure DB 2.0	Bure XL
Armondersteuning PU paar, Std/Low/DB/Space/XL	57-361-PAR	x	x		x	x	x
Armsteunkussens (Std) Schuim, Std/Low/DB/Space	56-366-L+R	x				x	
Armsteunkussens/Kniesteunkussen PU, Rise & Go (DB)	57-372			x			
IV-standaard incl. houder	56-338	x	x	x	x	x	x
Gasveerset incl. htg, Laag	56-330-LOW		x				
Gasveerset incl. htg, Std.	56-330	x			x		
Besturingshandgreep	57-391			x			
Wielen met rem 75mm	57-051	x	x	x	x	x	x
Wielen met rem 100mm	56-358	x	x	x	x	x	x
Wielen met rem 125mm	56-361	x	x	x	x	x	x
Wielen met richtingsvergrendeling 75mm	57-043	x	x	x	x	x	x
Wielen met richtingsvergrendeling 100mm	56-355	x	x	x	x	x	x
Wielen met richtingsvergrendeling 125mm	56-359	x	x	x	x	x	x
Hielband/voetplaat	58-328-1	x	x	x	x	x	
Kniesteun	56-352	x	x		x	x	
Handrem, 2 handen, Std/Low/Space/XL	56-339-1-0	x	x		x		x
Handrem, 1 hand, Std/Low/Space/XL	56-339-1-1	x	x		x		x
Handrem, 2 handen, DB 2.0	56-339-2-0					x	
Handrem, 1 hand, DB 2,0	56-339-2-1					x	
Handrem, 2 handen, Rise & Go DB	56-339-4-0			x			
Handrem, 1 hand, Rise & Go DB	56-339-4-1			x			
Zachte mand incl. vestigingsbeugel	56-389	x	x			x	
Handbediening PLUS incl. houder, Std/Low/Space	58-411-X1	x	x		x		
Handbediening PLUS incl. houder, DB/Rise & Go DB	58-411-X2			x		x	
Zijsteun / vierkant (compleet met kussen)	56-337	x	x	x	x	x	x
Zijsteun / vierkant PU (compleet met kussen)	56-337-PU	x	x	x	x	x	x
Transportplaat kort, STD	56-333-STD	x	x				
Transportplaat kort, zwenkwielen, STD	56-333/SW-STD	x	x				
Transportplaat kort, DB	56-333-DB			x		x	
Transportplaat kort, zwenkwielen, DB	56-333/SW-DB			x		x	
Ståplatta kort, SPACE	56-333-SPACE				x		
Transportplaat kort, SPACE	56-333/SW-SPACE				x		
Transportplaat lang, STD	56-383-STD	x	x				
Transportplaat lang, Zwenkwielen, STD	56-383/SW-STD	x	x				
Transportplaat lang, DB	56-383-DB			x		x	
Transportplaat lang, Zwenkwielen, DB	56-383/SW-DB			x		x	
Transportplaat lang, SPACE	56-383-SPACE				x		
Transportplaat lang Zwenkwielen, SPACE	56-333/SW-SPACE				x		
Buishouder incl. beugel	56-336	x	x	x	x	x	x
Looptrainingtuig, STD	56-388	x	x	x	x	x	
Kit voor looptraining Multi, Rise & Go (DB)	56-388-KIT			x			
MultiBelt met bevestiging (S, M, L, XL), Rise & Go (DB)	56-384-MULTI-S/M/L/XL			x			

Technische specificaties

Bure Double 2.0

Art. Nr.	Product	Buitenmaat onderstel	Max. gebr. gew.	Lengte	Hoogte	Binnenmaat armst.
56-303L	Bure Double 2.0 EL, 125 mm hjul	64-95 cm	150 kg	95 cm	90-130 cm	33,5-50 cm
56-303L/75	Bure Double 2.0 EL, 75 mm hjul	64-95 cm	150 kg	93 cm	85-125 cm	33,5-50 cm

Bure Space

Art. Nr.	Product	Buitenmaat onderstel	Max. gebr. gew.	Lengte	Hoogte	Binnenmaat armst.
56-304L	Bure Space EL, 125 mm hjul	77,5 cm	150 kg	85 cm	90-130 cm	33,5-50 cm
56-304L/75	Bure Space EL, 75 mm hjul	77,5 cm	150 kg	83 cm	85-125 cm	33,5-50 cm
56-307	Bure Space Gas, 125 mm hjul	77,5 cm	150 kg	85 cm	90-130 cm	33,5-50 cm
56-307/75	Bure Space Gas, 75 mm hjul	77,5 cm	150 kg	83 cm	85-125 cm	33,5-50 cm

Bure Standard/Bure S

Art. Nr.	Product	Buitenmaat onderstel	Max. gebr. gew.	Lengte	Hoogte	Binnenmaat armst.
56-312L	Bure Standard EL, 125 mm hjul	77,5 cm	150 kg	90 cm	91-131 cm	33-50 cm
56-312L/75	Bure Standard EL, 75 mm hjul	77,5 cm	150 kg	88 cm	86-126 cm	33-50 cm
56-311	Bure Standard Gas Bure, 125 mm hjul	77,5 cm	150 kg	90 cm	91-131 cm	33-50 cm
56-311/75	Bure Standard Gas Bure, 75 mm hjul	77,5 cm	150 kg	88 cm	86-126 cm	33-50 cm
56-310	Standard Manuell, 125 mm hjul	77,5 cm	150 kg	90 cm	91-131 cm	33-50 cm
56-310/75	Standard Manuell, 75 mm hjul	77,5 cm	150 kg	88 cm	86-126 cm	33-50 cm
56-302L	Bure S EL, 125 mm hjul	65 cm	150 kg	90 cm	91-131 cm	30-38 cm
56-302L/75	Bure S EL, 75 mm hjul	65 cm	150 kg	88 cm	86-126 cm	30-38 cm
56-301	Bure S Gas, 125 mm hjul	65 cm	150 kg	90 cm	91-131 cm	30-38 cm
56-301/75	Bure S Gas, 75 mm hjul	65 cm	150 kg	88 cm	86-126 cm	30-38 cm
56-300	Bure S Manuell, 125 mm hjul	65 cm	150 kg	90 cm	91-131 cm	30-38 cm
56-300/75	Bure S Manuell, 75 mm hjul	65 cm	150 kg	88 cm	86-126 cm	30-38 cm

Bure Low

Art. Nr.	Product	Buitenmaat onderstel	Max. gebr. gew.	Lengte	Hoogte	Binnenmaat armst.
56-321L/75	Bure Low EL, 75 mm hjul	77,5 cm	150 kg	88 cm	72-95 cm	33-50 cm
56-321L-S/75	Bure Low S EL, 75 mm hjul	65 cm	150 kg	88 cm	72-95 cm	33-50 cm
56-322/75	Bure Low Gas, 75 mm hjul	77,5 cm	150 kg	88 cm	72-95 cm	33-50 cm
56-322-S/75	Bure Low S Gas, 75 mm hjul	65 cm	150 kg	88 cm	72-95 cm	33-50 cm

Bure XL

Art. Nr.	Product	Buitenmaat onderstel	Max. gebr. gew.	Lengte	Hoogte	Binnenmaat armst.
56-315	Bure XL EL, 125 mm hjul	89 cm	240 kg	80 cm	91-131 cm	40-56 cm
56-315/75	Bure XL EL, 75 mm hjul	89 cm	240 kg	78 cm	86-126 cm	40-56 cm

Bure Rise & Go

Art. Nr.	Product	Buitenmaat onderstel	Max. gebr. gew.	Lengte	Hoogte	Binnenmaat armst.
56-309L	Bure R&G DB EL, 125 mm hjul	67-106 cm	150 kg	110 cm	91-131 cm	21-56 cm
56-309L/75	Bure R&G DB EL, 75 mm hjul	67-106 cm	150 kg	108 cm	86-126 cm	21-56 cm

DHG biedt een uniek concept voor veilige en eenvoudige transfers, met het breedste en meest complete assortiment slimme, gebruiksvriendelijke, functionele en veilige hulpmiddelen voor alle soorten verplaatsingsbehoeften. De filosofie achter ons concept richt zich op het voorkomen en verminderen van fysieke overbelasting bij zorgverleners, terwijl tegelijkertijd de zelfstandigheid en waardigheid van gebruikers worden versterkt. Door een unieke combinatie van scholing, training en een compleet aanbod aan doeltreffende transferhulpmiddelen draagt DHG bij aan zowel een betere werkomgeving als hogere zorgkwaliteit, én creëert het aanzienlijke mogelijkheden voor kostenbesparing.




DHG

Moving Health Forward

Direct Healthcare Group BV

Weteringweg 5-9
2641 KM Pijnacker
Tel: +31 (0)15 369 54 40
www.directhealthcaregroup.com/nl
info.nl@directhealthcaregroup.com

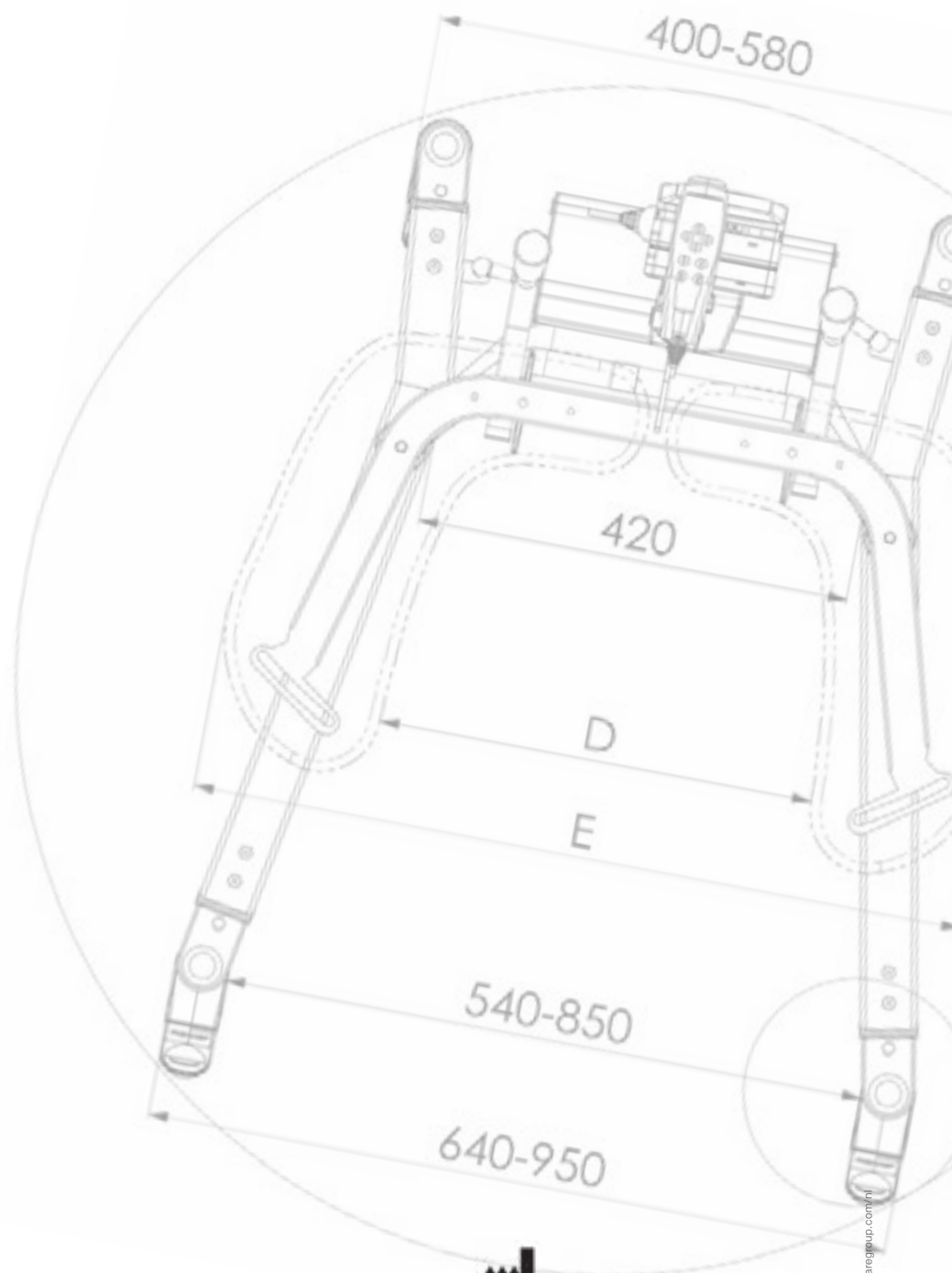

DHG

Moving Health Forward

Direct Healthcare Group Sverige AB

Torshamnsgatan 35,
SE-164 40 Kista, Sweden
Tel: +46 (0)8-557 62 200
www.directhealthcaregroup.com
info@directhealthcaregroup.com