



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

Bure XL

Bruksanvisning



BURE XL

Bure XL

Bure XL är ett gåbord framtaget för större och tyngre patienter och har därför extra plats och styrka. Eftersom det vid vård och omvårdnad av tyngre patienter är extra viktigt med kraftfulla hjälpmedel, levereras Bure XL alltid med eldrift.

Contents

1. Höjning och sänkning av stativ	04
2. Justering av handtag	04
3. Höger- och vänsterjustering av armstödsplattor	04
4. Låsning av hjul/Upplåsning av hjul	04
5. Kopplingsschema styrbox	04
6. Laddning av batteri	04
7. Underhåll	05
8. Generella skötselråd	06
9. Tekniska specifikationer	06

1. Höjning och sänkning av stativ

Önskad höjd justeras med hjälp av fjärrkontrollen Pil <UPP> resp. Pil <NED>.



2. Justering av handtag

Handtagen justeras till önskad position genom att: Ratt lossas, handtagen justeras, ratt låses.

3. Höger- och vänsterjustering av armstödsplattor

För optimalt stöd kan armstödsplattorna justeras isidled: Ratt lossas, armstödsplattans läge justeras, ratt låses.



4. Låsning av hjul/Upplåsning av hjul

Hjulen låses genom att fotbromsen trycks nedåt och aktiveras.

Pressa ned den uppstickande delen av bromsen för att lossa bromsen.



5. Kopplingschema styrbox

För att hantera kopplingar enligt nedan så måste styrboxens täcklock tas bort. Detta görs med hjälp av en skruvmejsel eller liknande - se särskild märkning på styrboxen.

OBS: Var noga med att kontakter ansluts till rätt uttag eftersom detta annars kan skada ställdon.



1. Uttag för batterikontakt.
2. Uttag för stickpropp (OBS: För att IP-klassning ska gälla så ska stickpropp ALLTID vara ansluten till styrbox).
3. Uttag för fjärrkontroll.
4. Uttag för ställdon - höj/sänk.



6. Laddning av batteri

Laddning av batteri ska ske då inte används (Batteriet kan aldrig överladdas). Laddning görs genom att stickpropp ansluts till eluttag.

 Innan första användningen så bör batteriet laddas 24 timmar.

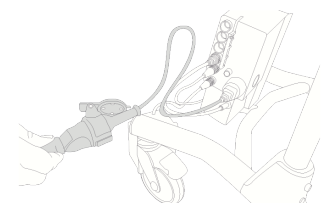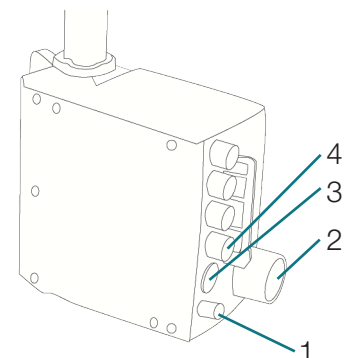

7. Underhåll

Rekommenderas minst 1 gång/år.

Kontrollera att/om	Åtgärd
<p>Allmänt Bordet känns stumt/glappfritt. Bordet inte skramlar vid manövrering. Bordet är plant och alla hjul är i kontakt med underlaget. Bordet ej är smutsigt.</p>	Rengör med ljum såpalösning/alkolbaserat rengöringsmedel (ej petroleumprodukter)
<p>Armstödsplattor Armstödsplattor är hela och rena. Breddning armstödsplattor fungerar.</p>	Rengör och byt om skador finns. Kompletera ev. låsrattar/brickor.
<p>Handtag Grepp ej är skadade/smutsiga.</p> <p>Handtagsinställning fungerar.</p>	Rengör med ljum såpalösning (ej petroleumprodukter). Byt handtagsgrepp.
<p>Höjjustering Höjning och sänkning fungerar. Bordet känns stabilt vid maxinställning. Inget glapp finns mellan vertikalt stativ och bottenstativ. Klämmor för höjjustering låser. Infästning av elställdon ska vara glappfri. Reglering av höjd med fjärrkontrollfungerar. Elställdonet ska löpa mjukt och med konstant hastighet.</p>	Byt ev. styrhylsa (i stativ) alt. ändpropp (i kromat rör). Skruva åt låsskruvar Byt klämmor Skruva åt resp. infästningsförband, komplettera med skruv/låsmutter. Kontrollera så att batteri/fjärrkontroll/ställdon är rätt kopplad enligt schema. Ladda batteriet. Kontakta kundtjänst.
<p>Stativdelar Inga mekaniska skador finns.</p> <p>Inga skrapmärken finns.</p> <p>Ändskydd/bottenstaiv sitter på.</p>	Om skador finns - konsultera GATEs kundtjänst. Kompletera med bättringsfärg. Kompletera med nya ändskydd.
<p>Hjul/broms Hjul rullar lätt /slibanan ej är skadad.</p> <p>Hjulen är hårt åtdragna i bottenstativ.</p> <p>Blockeringsbroms fungerar på alla hjul.</p> <p>Handbroms fungerar.</p>	Rengör alt. byt hjul (OBS: hjulen låses alltid i bottenstativ med kemisk låsning alt låsmutter. Hjulen är kapslade och vi rekommenderar inte att de demonteras. Byt istället ut hela hjulpaketet. Skruva åt hjulbult - komplettera med låsmutter alt. Kemisk låsning (modellberoende). Byt hjulpaket. Justera broms alt komplettera med nya hjul.

8. Generella skötselråd

- Torka av gåbord och armstödsplattor vid behov - använd tvållösning/alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.
- Produkten kan rengöras i tvättunnel eller motsvarande då elektronik är IP65-klassad. Dock, produkten är ej rostfri vilket gör att rengöring i maskin kan förkorta produktens livslängd.
- Byt ut trasiga delar omedelbart – skall göras av kunnig personal.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

9. Tekniska specifikationer

Mått anges för bord med 125 mm hjul.

Art. Nr.	Produkt	Produkt Bredd	Max brukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/ Innermått
56-315	Bure XL EL	90cm	240kg	84cm	87-127cm	45-64cm

BRUKSANVISNING



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2
Reftele, Sverige
S-330 21

T: 0371-318 00
F: 0371-318 01
E: info@gaterd.se

LIT-00076 Issue 1
Date: January 2020

GATERD.SE