

Monteringsanvisning

Tillbehör Bure gåbord

Droppställning inklusive hållare

Gångträningskit MULTI

Gåträningssele

Hälband till ståplatta

Ståplatta

Ställbart sidostöd

Syrgashållare

Underbensstöd

Monteringsanvisning tillbehör Bure gåbord

Droppställning inklusive hållare

Art nr 56-338

- Produkten ska stå på plant underlag och hjulbromsarna ska vara aktiverade före montering.
- Droppställningen monteras på valfri sida av ramens vertikala rör (ej på ställdonsröret). Placera klämfästet runt önskat rör och dra åt låsspaken tills hållaren sitter stadigt.
- För ned droppstången i hållaren och justera till önskad höjd. Kontrollera att samtliga låsningar är ordentligt åtdragna före användning.



Användning tillbehör Bure Rise & Go gåbord Gångträningskit MULTI

Art nr 56-388-KIT

- Gångträningskitet MULTI levereras med grenhylsor samt gröna band med karbinkrokar.
- De gröna banden fästs i selen till Rise & Go före användning. Kontrollera att banden är korrekt monterade och justerade.
- Efter uppresning fästs de gröna karbinkrokarna i metallfästena som förmonteras på önskad plats under gåbordets bordsskiva. Säkerställ att karbinkrokarna är ordentligt fastsatta.
- Grenhylsorna appliceras därefter genom att fästas bak först och sedan fram. Kontrollera att samtliga fästen är korrekt låsta före gångträning.
- Utrustningen är avsedd för gångträning och får inte användas som sitt- eller lyfthjälpmiddel.



Montering och användning tillbehör Bure gåbord Gåträningsssele / Gait Training Kit

Art nr 56-388

- Produkten ska stå på plant underlag och hjulbromsarna ska vara aktiverade före applicering av stödselen.
- Stödselen har fyra justerbara remmar med plastspännen och stålkarbinkrokar som fästs i metallfästena som som förmonteras på önskad plats under gåbordets bordsskiva.
- Fäst först de två främre karbinkrokarna i de främre fästena, en på vardera sida. Placera därefter patienten stående i gåbordet, för selen bakåt mellan benen och fäst de två bakre karbinkrokarna i de bakre fästena. Justera remmarnas längd för korrekt passform och stöd.
- Observera: Gåträningsselen är avsedd för gångträning och får inte användas som sitt- eller lyfthjälpmiddel.
- Monteringsanvisning för gåträningsskitet finns även i respektive manual.



Montering och användning tillbehör Bure gåbord

Hälband till ståplatta

Art nr 58-328-1

- Produkten ska stå på plant underlag och vara säkrad mot förflyttning före montering.
- Hälbandet monteras baktill på ståplattan och fästs med tryckknappar i avsedda fästpunkter. Tryck fast bandets knappar ordentligt tills de klickar på plats.
- Kontrollera att hälbandet sitter stadigt och är korrekt placerat innan användning.



Montering och användning tillbehör Bure gåbord Ståplatta

Art nr 56-333/SW-DB; 56-383/SW-DB; 56-333/SW-STD; 56-383/SW-STD; 56-333/SW-SPACE; 56-383/SW-SPACE

- Produkten ska stå på plant underlag och hjulbromsarna ska vara aktiverade före montering.
- Fäst ståplattan med krokarna på gåbordets huvudram i framkant. Säkerställ att krokarna är korrekt placerade över ramröret och att plattan ligger stabilt mot ramen innan användning.
- Kontrollera att ståplattan sitter ordentligt fast före användning.



Montering och användning tillbehör Bure gåbord

Ställbart sidostöd

Art nr 56-337; 56-337-PU

- Produkten ska stå på plant underlag och hjulbromsarna ska vara aktiverade före montering.
- Sidostödet fästs under gåbordets bordsskiva i avsedda fästpunkter. Placera fästet i önskad position och dra åt låsvreden tills stödet sitter stadigt.
- Sidostödet justeras steglöst längs med gåbordets sida för optimal position och ökad stabilitet under gång. Säkerställ att samtliga låsningar är ordentligt åtdragna före användning.
- Sidostödet förhindrar att armarna glider av armstödsdynorna och finns även i PU-utförande.



Montering och användning tillbehör Bure gåbord Syrghållare / Oxygen tubeholder inkl. fäste

Art nr 56-336-4

- Produkten ska stå på plant underlag och hjulbromsarna ska vara aktiverade före montering.
- Syrgashållaren monteras på valfri sida av ramens vertikala rör (ej på ställdonsröret). Placera klämfästena runt önskat rör och dra åt stjärnrattsvreden tills hållaren sitter stadigt och inte kan vridas eller förskjutas.
- Säkerställ att samtliga fästen är ordentligt åtdragna före användning och att syrgastuben står stabilt i hållarringen.



Montering och användning tillbehör Bure gåbord Underbensstöd

Art nr 56-352

- Produkten ska stå på plant underlag och hjulbromsarna ska vara aktiverade före montering.
- Underbensstödet monteras på gåbordets ram i anpassad höjd efter användarens behov. Haka fast stödet i ramens rör med de integrerade fästena tills det klickar i position. Säkra därefter genom att spänna gummibandet runt ramens rör. Kontrollera att stödet sitter stadigt före användning.
- Underbensstödet underlättar mobilisering och uppresning.
- Bör användas tillsammans med ståplatta.
- På modellerna Bure Standard/Bure S, Bure Low/Low S, tillsammans med trampor på grund av tipprisk bakåt.
- Stödet kan vid behov tas bort efter uppresning, exempelvis vid gångträning.

