

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Florien Elite

Bruksanvisning



Viktigt:

Läs noggrant igenom före och behåll för framtida referens.

Det är vårdgivarens / användarens ansvar att försäkra att de är helt medvetna om och har förstått alla säkerhetsinstruktionerna på dessa sidor innan de installerar eller använder stolen.

Innehåll

| | | | |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Introduktion till Florien Elite stolen | 4 | 7. Tillbehör | 15 |
| 1.1. Varför behövs den här typen utav stol?..... | 4 | 7.1. Sidostöd..... | 15 |
| 1.2. Florien Elite produktsortiment..... | 4 | 7.2. Höjdjusterbart och uppfällbart fotstöd..... | 15 |
| 2. Riktlinjer för garanti | 5 | 7.3. Nackstöd..... | 16 |
| 2.1. Garanti och ansvar | 5 | 7.4. Höftbälte och D-ringfäste | 16 |
| 2.2. När garantin inte gäller | 5 | 7.5. Bäckpositionering..... | 18 |
| 2.3. När garantin gäller | 5 | 8. Återanvända och återutfärda | 18 |
| 2.4. Statutory Rights..... | 5 | 8.1. Modularitet | 19 |
| 2.5. Varning..... | 5 | 8.1.1. Alternativ för sätets höjd..... | 19 |
| 3. Klinisk tillämpning | 6 | 8.1.2. Tiltfunktionens område | 19 |
| 3.1. Avsedd användning..... | 6 | 8.1.3. Sättesmoduler | 19 |
| 3.2. Vem lämpar sig Florien Elite för?..... | 6 | 8.1.4. Ryggmoduler | 19 |
| 3.3. Vem lämpar sig Florien Elite inte för? | 6 | 8.1.5. Armmoduler | 20 |
| 4. Produktinformation | 6 | 8.1.6. Benstöd kudde..... | 20 |
| 4.1. Produktidentifiering | 6 | 8.2. Kassering av stol..... | 20 |
| 4.2. Nyckelfunktioner | 6 | 9. Vård och underhåll | 20 |
| 4.3. Viktiga alternativ | 6 | 9.1. Livslängd | 20 |
| 4.3.1. Ryggstödsstilar | 6 | 9.2. Periodiska kontroller | 20 |
| 4.3.2. Tryckhantering..... | 7 | 9.3. Rengöring..... | 20 |
| 4.4. Tillbehör | 7 | 9.3.1. Rengöring av ram | 21 |
| 5. Riktlinjer för bästa praxis | 7 | 9.3.2. Rengöring av stoppning | 21 |
| 6. Bruksanvisningar | 8 | 10. Tekniska data | 22 |
| 6.1. Allmän drift | 8 | 10.1. Tillverkningsadress | 22 |
| 6.2. Ställa in Florien Elite för användning..... | 8 | 10.2. Maximal användarvikt | 22 |
| 6.2.1. Justering av sätets höjd | 9 | 10.3. Stolens vikt och dimensioner..... | 22 |
| 6.2.2. Justering av sätets djup | 9 | 10.4. Miljöförhållanden för användning..... | 23 |
| 6.2.3. Justering av sätets bredd | 10 | 10.5. Produktstandarder | 23 |
| 6.3. Hjul | 11 | 10.5.1. Testa flambeständighet | 23 |
| 6.4. Tiltfunktion..... | 12 | 10.5.2. Styrka, stabilitet, hållbarhet, risk och säkerhet | 23 |
| 6.5. Tillbakalutning av bakdel | 12 | 10.5.3. Kvalitet och miljö | 23 |
| 6.6. Höjbart och vridbart benstöd | 13 | 11. Kundtjänst | 23 |
| 6.7. Inbyggt nackstöd..... | 14 | | |
| 6.8. Armmoduler..... | 14 | | |

1. Introduktion till Florian Elite stolen

Tack för ditt köp av en Direct Healthcare Group Florian Elite stol.

Ändamålet med den här stolen är att tillhandahålla, via dess förmåga att konfigureras, en effektiv kroppshållning samt tryckvårdhantering för att möta flera olika och väldigt individuella användarbehov.

Florien Elite har utformats för de med moderat till komplexa säteskrav, för de som sitter ner under längre perioder och för de som går igenom rehabilitering eller behandling.

1.1. Varför behövs den här typen utav stol?

Möjligheten för en sittande person att fungera effektivt och utföra aktiviteter beror på deras förmåga att hitta den lämpliga ställningen. All aktivitet beror på kroppshållningen. Om en person inte kan röra sig eller har problem att justera sin kroppshållning, kan det vara nödvändigt att använda ett säte för att tillhandahålla hjälp externt på grund av fysiska begränsningar.

Florien Elite hjälper till att uppfylla behoven att upprätthålla en individs sittande kroppshållning samt omorientera och omfördela tryck genom att använda tiltposition, lutande bakdel och höjning av benstödsfunktioner kombinerat med integrerade trycklindrande material.

1.2. Florian Elite produktsortiment

| | |
|------------|----------------------------------------------------------|
| SEA0910001 | Florien Elite format ryggstöd höjbart benstöd |
| SEA0920001 | Florien Elite Waterfall ryggstöd höjbart benstöd |
| SEA0930001 | Florien Elite format ryggstöd vridbart benstöd |
| SEA0940001 | Florien Elite Waterfall ryggstöd vridbart benstöd |

2. Riktlinjer för garanti

2.1. Garanti och ansvar

Direct Healthcare Group ger köparen en garanti att den levererade varan kommer att vara fri från brister på grund av dåligt utförande, design eller material under en period på (12) månader från och med leveransdatum. Florian Elites stolram har tio (10) års garanti exklusive skada på hjul och stoppning. En årlig underhållsservice rekommenderas men är inte nödvändig.

Alla Direct Healthcare Groups produkter är utformade för ett specifikt användningsområde. Det är därför viktigt att köparen köper den korrekta produkten. Om köparen har för avsikt att köpa varor för icke godkänt bruk måste köparen använda sina egna färdigheter och omdöme. Ingen anställd eller agent på Direct Healthcare Group är auktoriserad att rekommendera icke godkända användningsområden, och köparen ska inte förlita sig på den typen av rekommendationer. Bruksanvisningarna ska alltid följas.

2.2. När garantin inte gäller:

- a) Användning av felaktiga rengöringsprodukter kan skada materialets yta.
- b) Felaktigt underhåll som inte godkänts av Direct Healthcare Group.
- c) Modifieringar av köparen på ursprungsvaran.
- d) Felaktigt transportsätt av varan.
- e) Normalt slitage.
- f) Felaktig användning:
 - Att sitta på stolens armstöd.
 - Att sitta på stolens ben- eller fotstöd.
 - Att slå på föremål med stolen: väggar, dörrar, sängar, bord, stolar o.s.v.
 - Att spilla mat, urin, avföring och annat i stolen och inte rengöra det snabbt efter spillning inträffat (2 minuter), orsakar ofta att stolen luktar illa och blir en hälsofara. Dessutom, stoff penetrerar överdragsmaterial, sömmar och skum.
 - Överdrivet våld som används på stolens rörliga delar, kan förstöra eller böja metall- och trädelarna.
 - Att knuffa stolarna upp och ner för trappor eller över hinder med en person sittande i stolen skadar hjul, ramverk och stoppning.

2.3. När garantin gäller:

Direct Healthcare Group kommer:

- a) Korrigera defekten eller
- b) När korrigering är omöjlig enligt Direct Healthcare Group kommer produkten att ersättas.

2.4. Lagstadgade rättigheter

Ingenting i våra villkor och bestämmelser eller i dessa riktlinjer ska påverka konsumentens lagstadgade rättigheter.

2.5. Varning

I den här manualen indikeras varningar med symboler. Varningssymbolerna kommer tillsammans med en rubrik som indikerar hur allvarlig faran är.



VARNING

Indikerar en farlig situation som skulle kunna resultera i allvarlig skada eller dödsfall om den inte undviks.



FÖRSIKTIGHET

Indikerar en farlig situation som skulle kunna resultera i en mindre eller lätt skada om den inte undviks.



VIKTIGT

Indikerar en farlig situation som skulle kunna resultera i skada på egendom om den inte undviks.

3. Kliniska tillämpningar

3.1. Avsedd användning

Florien Elite stolen har utformats för ändamålet av lindra / förhindra trycksår och hjälpa kroppshållningshantering. Är lämplig för följande användarmiljöer:

- Vårdinrättningar såsom sjukvård och vårdhem.
- Sjukhusmiljöer.
- Hospisvård.
- Kollektiva bostäder.
- Privata bostäder.

3.2. Vem lämpar sig Florian Elite för?

Florien Elite är lämplig för följande användare:

- Halvt-mobiliserade och icke-mobiliserade användare som behöver assistans med att ta sig in och ut från stolen.
- Användare som behöver moderat kroppshållningsstöd när de sitter ned.
- För användare som sidförflyttas.
- Användare med medelhög till hög risk (Waterlow skala) eller upp till en grad II tryckskada (på stolar utrustade med ett Intelli-Gel[®] säte) efter en klinisk bedömning.

- Användare med hög risk (Waterlow skala) eller upp till en grad IV tryckskada (på stolar utrustade med ett Intelligent Air säte) efter en klinisk bedömning.
- Användare med hög risk för trycksår kan även använda Dyna-Flex[®] or Dyna-Tek[®] Posture Visco sätesalternativen.
- Användare med mild till allvarlig nedsatt kognitiv förmåga.
- För användare som genomgår rehabilitering, terapi eller behandling.
- För användare som behöver kroppshållningsstöd när de förflyttas.

3.3. Vem lämpar sig Florian Elite inte för?

Florien Elite är inte lämplig för följande användare:

- Fullt mobiliserade användare om denne inte är helt övervakad av sjukvårdspersonal i en behandlingsmiljö och följer en klinisk bedömning.
- Användare med komplex kroppshållning som kräver signifikant stöd.
- Användare med våldsamt beteende, om inte en bedömning av användarrisken för den här risken är låg.

4. Produktinformation

4.1. Produktidentifiering

Varje stol har ett unikt nummer för att möjliggöra snabb identifiering. Det här numret kan hittas på undersidan av stolens sätesmodul.

4.2. Nyckelfunktioner

- Manuell tiltfunktion.
- Oberoende manuellt lutande ryggstöd med spärrkapacitet.
- Upphöjt benstöd.
- Svängbart armstöd.
- Integrerat nackstöd med flera lägen.
- Benstöd med negativ vinkel.

4.3. Viktiga alternativ

4.3.1. Ryggstödsstilar

Ryggstöden är utbytbara genom att tryckhandtaget tas bort.

Den formade bakdelen är ett skulpterat ryggstöd med inbyggt sido- och ländstöd producerat från stöttande Reflexion[™] skum som tillhandahåller bekvämlighet åt användaren.

- Framåtlutning.
- Justerbar sätesbredd och säteslängd.
- Ergonomiskt placerat tryckhandtag med 100 mm / 4 tum hjul, bromsar baktill.
- Modulära rygg-, arm-, sätes- och benstödskomponenter.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sales Order No. |  |
| Date of Manufacture..... | Direct Healthcare Group Ltd, Withey Court, Western Industrial Estate, Carrphilly, UK, CF83 1BF |
| Client's Name..... | Tel: +44 (0)800 043 0881 |
| Product | |
| Meets B.S. 5852 for cigarette and match, also crib 5 over CMHR foam. Meets 'The Furniture & Furnishing (Fire) (Safety) Amendment Regulations 1993' | |



Designad för att enkelt rengöra områden som kräver en hög grad av infektionskontroll.

Waterfall-ryggstödet erbjuder mjukt, nedsänkt, fiberfyllt ryggstöd och dämpning som passar flera kroppshållningar.



4.3.2. Tryckhantering

Tryckhantering är kritisk för de som sitter ner under långa perioder samt personer som riskerar att få vävnadsskada. Florian Elite har trycklindrande skum på stolens kontaktyta och flera alternativ finns tillgängliga för sätesmodulen och kan anpassas utifrån brukarens behov.

Om du är osäker på lämpligheten av din tryckvård, sök råd och information från en kvalificerad arbetsterapeut, sjuksköterska som är specialiserad inom vävnadsviabilitet, sjukvårdspersonal och / eller Direct Healthcare Groups representant / återförsäljare för köp.

4.4. Tillbehör

| | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| NG501 | Florien sidostöd (ett par) | DU705 | Easicare stort 4-punkt höftbälte med fästen |
| NG401 | Florien nackstöd | KB724 | Höftbälte (kräver D-ringremmar) |
| NG586 | Florien uppfällbart fotstöd (dubbel ställning) | KB705 | Stor bäckenpositionering (kräver D-ringremmar) |
| NG402 | Florien universellt nackstöd i Dartex | KB726 | Stor vadderad bäckenpositionering i vinyl (kräver D-ringremmar) |
| NG403 | Florien universellt nackstöd för stol stoppningstyg | KB719 | Stor fleecetäckt bäckenpositionering (kräver D-ringremmar) |
| NG637 | Höjdjusterat uppfällbart fotstöd | KB313 | Universell rörlig bricka |
| NG636 | Vridbart benstöd | UL706 | D-ringremmar (lång) |
| DU701 | Easicare medelstort 4-punkt höftbälte med fästen | 103000 | Hjul med riktade lås |
| DU703 | Easicare medelstort 2-punkt höftbälte med fästen | NG990E | Årligt underhållsbesök |
| DU704 | Easicare stort 2-punkt höftbälte med fästen | | |



FÖRSIKTIGHET

Använd endast tillbehör tillsammans med Florian Elite stolen, som rekommenderats av Direct Healthcare Group.

5. Riktlinjer för bästa praxis

För att försäkra bra praxis när man köper en Florian Elite stol, och effektiv användning efter köp, rekommenderar vi att man tar hänsyn till följande riktlinjer:

- Sök råd och information från en kvalificerad arbetsterapeut, sjukvårdspersonal och / eller Direct Healthcare Groups representant / återförsäljare vid beställning av stolen.
- Om man känner sig osäker vid beställning av stolen och tillbehör, kontakta antingen den involverade arbetsterapeuten, din Direct Healthcare Group representant, återförsäljare eller Direct Healthcare Groups kundtjänst på vårt avgiftsfria nummer; **0800 043 0881**.
- Alla vårdgivare som kommer att övervaka användare(n) ska utbildas i hur stolen används, för att garantera att användaren positioneras korrekt.

6. Bruksanvisningar

Ändamålet av dessa användarinstruktioner är att försäkra säker drift och underhåll av Florian Elite stolen.

Stolen är redo att användas så fort den har installerats helt i korrekt position och alla vårdgivare / användare har läst igenom och förstått instruktionerna gällande drift.

Säkerhetsvarningar inkluderas i dessa bruksanvisningar och det är operatörens ansvar att försäkra att dessa har lästs igenom och förstås fullt ut.

Om det finns några frågor eller bekymmer, kontakta Direct Healthcare Group representanten, återförsäljare eller Direct Healthcare Groups kundtjänst på vårt avgiftsfria nummer; **0800 043 0881**.

Behåll dessa instruktioner för framtida referens.

6.1. Allmän drift

Produkten ska aldrig modifieras eller förändras efter köp av andra än Direct Healthcare Groups auktoriserade personal.

Det är extremt viktigt att Florian Elite stolarna används korrekt, om det finns några tvivel gällande produktens lämplighet för en användare, ska professionella råd sökas från en kvalificerad sjukvårdspersonal såsom en arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska som är specialiserad inom vävnadsviabilitet eller rörelse- och hanteringsspecialist.

Man ska matcha stolens dimensioner till brukarens kroppsstorlek, för att garantera bra hållning, stöd, komfort och säkerhet. All tryckvård, rörelse och hantering, inkontinens eller infektionskontroll ska tas hänsyn till och lämpliga råd ska tas från kvalificerad sjukvårdspersonal.

Miljöfaktorer ska även tas hänsyn till och bedömas, dessutom ska alla potentiella risker och faror identifieras och tas hänsyn till för att garantera användarens säkerhet.

När en stol väljs ut, rekommenderar vi att en riskbedömning utförs för att garantera att den kommer vara säker och lämplig för stolens användare(na) och för alla som befinner sig i stolens omgivning.

Allmän bedömning gällande produktens lämplighet för användaren är viktigt.

Om du vill diskutera säkerhetsfrågor mer detaljerat, ring vår kundtjänst på vårt avgiftsfria nummer; **0800 043 0881**.



FÖRSIKTIGHET:

När stolen används, se alltid till att användaren kontrolleras regelbundet för säkerhet och inte lämnas ensam under långa tidsperioder.



VARNING

Knuffa inte stolen upp eller ner för trappor eller en brant lutning, då detta kan resultera i att man förlorar kontroll.



VARNING

Florien Elite är inte lämplig att användas av barn. Alla barn som finns i stolens omgivning ska övervakas hela tiden.



VARNING

Försäkra att inget hindrar stolen att röra sig fritt innan stolen används.



FÖRSIKTIGHET

Sitt aldrig på stolens armstöd.

6.2. Ställa in Florian Elite för användning

Vid leverans av stolen ska emballaget tas bort försiktigt så att stoppningen inte skadas.

Bruksanvisningen ska läsas igenom av alla som kommer använda stolen och kontrollera att stolen installeras korrekt före användning.

Det rekommenderas att stolen justeras för att anpassas till varje brukares specifika krav gällande säteslängd, fotstödet höjd och vinkel, tillbakalutning samt tiltfunktion.

Börja genom att sätta brukaren i stolen, de flesta justeringarna kan enkelt göras när brukaren är i stolen, förutom justeringar av sätets längd och höjd, som är enklare att justera när stolen är tom.



VIKTIGT

Använd inte vassa saxar eller knivar för att klippa bort plastemballaget från stolen, då detta kan skada stoppningen.

6.2.1. Justering av sätets höjd

Genom att få den korrekta säteshöjden för stolens brukare kan fötterna positioneras ordentligt på golvet eller fotstödet, så att en jämn viktistribution säkerställs, vilket kommer att hjälpa den rörliga användaren att ställa sig upp från stolen lättare. Ett för högt eller lågt säte kan leda till trycksår och obehag.

Florien Elites säteshöjd ska med fördel ställas in vid tillverkning, men kan justeras efter köpet av en av Direct Healthcare Groups utbildade ingenjörer.

Säteshöjd alternativ (från golv): 550 mm (22 tum) som standard; 575 mm (22,5 tum) eller 600 mm (23,5 tum).



VIKTIGT

Justering av säteshöjd ska endast utföras av en av Direct Healthcare Groups utbildade ingenjörer.



VARNING

Brukaren ska inte stå på fotstödet, om det är fäst, när denne tar sig ut ur stolen. Fotstödet ska antingen tas bort eller vara helt tillbakadraget under sätet och fällas upp utom räckhåll.

6.2.2. Justering av sätets djup

Sätets djup ska justeras för varje brukare. Om sätets djup, från framsidan av sätets kudde till stolens ryggstöd, är för djup kommer brukaren att glida framåt, förlora hållningen och det lokala trycket ökar, och om det inte är tillräckligt djupt, kommer trycket att koncentreras till ett mindre område av kroppen och vara dåligt distribuerat.

Om personen sitter hopsjunken i stolen när mätningarna börjar kommer det att ge ett felaktigt resultat för sätesdjup. Korrigera den här positionen före mätningen, givet att det är säkert att göra så.

Ryggstödet eller baksidan av säteskudden ska vara startpunkt vid mätning av sätesdjup. För mätning, sitt på huk vid brukarens sida för att undvika framåtlutning och håll måttbandets ände mot ryggstödet eller baksidan av sätesdynan och för bandet framåt fram tills det är i nivå med knäets baksida. Registrera mätningen.

Om benstödet vanligtvis används i en 90° vinkel så bör det finnas en minsta distans på 25 mm eller en tum mellan sätesdynans framsida och vaden när brukaren sitter lutad mot ryggstödet.

Om benstödet vanligtvis används upphöjt, så är den optimala säteslängden när vaden lätt rör vid benstödet kudde.



För att justera endast sätets längd, kontrollera att stolen är tom. Gå till baksidan av stolen och lås upp fjärlshandtaget under sätesmodulen.



Fjärlshandtaget är beläget under stolen vid sätets främre del, både på vänster och höger sida.



Håll i handtaget på baksidan av sätesmodulen och låt hela ställningen glida bakåt och / eller framåt till den önskade längden.

Spänn fjärlshandtaget och se till att sätet är helt fäst efter justering.

Placera användaren i stolen för att försäkra att sätets längd är korrekt. Om det behövs ytterligare justering, kontrollera att stolen är tom och repetera stegen för justering.



VIKTIGT

Justera endast sätets längd när stolen är tom.

6.2.3. Justering av sätets bredd

När man har korrekt sätesdjup, erhålls den interna bredden av sätet mellan armstöden, armarna sitter bekvämt på armstödet, vilket bidrar till bäckenstabilitet och brukarens säkerhet. Om det är för brett, kan det vara svårt att ha en bra kroppshållning, om det är för smalt kommer brukaren inte kunna sitta upprätt i stolen.

För att mäta sätets bedd, sätt brukaren i mitten av stolen, mät över det bredaste området av botten / höfterna och lägg till fem cm eller två tum på varje sida.

Florien Elite har en standardiserad säteskudde och när den används tillsammans med de stoppade dynamiska armmodulerna, flyter dessa över för att skapa den korrekta sätesbredden för brukaren. Armmodulerna på båda sidorna av stolen ska monteras med samma färgkod på båda stolens sidor.

Florien Elites alternativ för sätesbredd med stoppade dynamiska armmoduler: 400 mm (16 tum) till 500 mm (19 tum) i 12 mm (tum) tillägg på varje armmodul betecknas av en färgguide.

Hål 1 (röd) – 400 mm (16 tum) sätets bredd

Hål 4 – 463 mm (18 tum) sätesbredd

Hål 2 – 413 mm (16½ tum) sätesbredd

Hål 5 (blå) – 500 mm (19½ tum) sätesbredd

Hål 3 (grön) – 450 mm (17½ tum) sätesbredd



FÖRSIKTIGHET

Kontrollera alltid att knäppningen är STÄNGD när sätesbredden har justerats, före stolen används.

För att justera sätets bredd, kontrollera att stolen är i en upprätt position.

Leta upp knäppningen under armmodulernas framsida.

Dra knäppningen framåt och vrid i en 90° vinkel för att låsa den i ett öppet läge.



Stå vid sidan om stolen och håll armen på baksidan samt framsidan där armarna möter sätet. Låt armen glida mot eller bort från säteskudden för att öka sätesbredden i enlighet med färgindikatorn.



FÖRSIKTIGHET

Båda armmodulerna måste ha samma sätesbredd färgindikator för att garantera en jämn sittställning för brukaren.



Kontrollera att båda knäppningslåsen på armmodulens framsida är bakåtroterade i en 90° vinkel för att låsas i ett stängt läge.



FÖRSIKTIGHET

Efter att sätesbredden justerats, kontrollera att båda armmodulerna är fästa och att knäppningen på varje arm är i ett låst läge.



6.3. Hjul

Florien Elite är monterad som standard med fyra 100 mm (4 tum) hjul, med två svängbara hjul framtill och två låshjul baktill som inte kommer rulla eller svänga när bromsarna är aktiverade.



För att **använda** bromsarna på de bromshjulen, tryck ner den röda upphöjda främre kanten på varje hjuls upphöjda dynar.

För att **låsa upp** bromsarna på bromshjulen, tryck ner den upphöjda röda veckade dynan fram tills den är i nivå med resten av hjulhuset.



VARNING

Kontrollera att hjulens bromsar är aktiverade när brukaren tar sig in eller ut från stolen för att undvika att stolen rör på sig.



VARNING

Kontrollera att hjulens bromsar är aktiverade när brukaren tar sig in eller ut från stolen för att undvika att stolen rör på sig.



FÖRSIKTIGHET

Kontrollera alltid att hjulen är upplåsta före stolen förflyttas.



FÖRSIKTIGHET

Kontrollera att inget hindrar stolen att röra sig fritt före bromsen lossas och man försöker flytta stolen.

Hjul med riktade lås (valfritt tillbehör)

Det bakre högra hjulet är vanligtvis hjulet med riktningslås och gå att identifiera med den **gröna** fliken. Detta gör att hjulet kan låsas i en "framåtriktad" position, vilket gör det enklare att knuffa stolen i en rak linje.

- För aktivering, tryck ner den **gröna** främre kanten på den veckade dynan. Knuffa sedan stolen framåt för att aktivera riktningslåset. Ett "klick" kommer att ljuda när den är i en framåtriktad position.
- För att avaktivera riktningshjulet, tryck ner den **gröna** veckade dynans överkant fram tills den är i linje med resten av hjulets överkant.
- Kontrollera att hjulets riktningslås är inaktiverat före manövrering av stolen i trånga utrymmen.
- De andra tre hjulen kommer att ha helt låsta hjul (**röd** flik) som inte kommer rulla eller svänga när bromsen är aktiverad.



6.4. Tiltfunktion

Vad är tiltfunktionen?

Tiltfunktionen är ett svängningssystem som ger en tillbakalutad, vilande position som gör att stolens brukare kan lutas framåt eller bakåt samtidigt som kroppshållnings- och bäckenstabilitet upprätthålls.

Genom att ha en vinkel mellan stolsäte och bakdel på ungefär 110°, kommer brukaren inte glida framåt i en obekväm hopsjunken position. När stolen lutas omfördelas brukarens vikt över en större kontaktyta, vilket är ett enkelt och effektivt sätt att motverka uppbyggnaden av tryck.

Använd tiltpositionen

Det rekommenderas att tiltfunktionens vinkel ändras regelbundet så att tryck omfördelas och för att minska risken att brukaren utvecklar tryckutsatta områden som skulle kunna leda till tryckskador.

Tiltpositionens spak finns på höger sida av tryckhandtaget på stolens baksida.

- Tryck spaken mot tryckhandtaget för att släppa tiltlåset. Tryck hårt ner tryckhandtaget med båda händerna för att luta stolen bakåt, alternativt, lyft upp tryckhandtaget för att höja stolen till en upprätt position.
- När som helst under uppåt- eller nedåtlutning kan spaken släppas och stolen kommer att låsas i den valda positionen.
- Stolen kan få en framåtlutad position för att underlätta en upprätt förflyttning från stolen. Kontrollera att brukaren får hjälp under den här förflyttningen för att undvika fallrisk.
- Det rekommenderas alltid att läget på benstödet justeras så fort tiltfunktionens position har valts, för att garantera en korrekt och bekväm ställning.



FÖRSIKTIGHET

Det rekommenderas att man använder ett höftbälte eller bäckenpositionering (alternativa tillbehör) på brukare som har dålig sittställningsförmåga.



VARNING

Kontrollera att brukarens händer hålls borta från stolens ryggstöd när stolen lutas, för att undvika klämrisk i lutningsmekanismen.



FÖRSIKTIGHET

Kontrollera att alla brickor som används tillsammans med stolen tas bort före stolen lutas; i annat fall kan brickans innehåll spillas ut över brukaren.



VARNING

Lämna aldrig en brukare som har dålig sittställning utan övervakning, när denne sitter i en helt upprätt position, då de kan välta eller glida framåt i en olämplig position eller glida ut från stolen helt.



VARNING

Kontrollera att inget hindrar stolen att röra sig fritt (t.ex. barn, husdjur eller fasta föremål) före tiltfunktionen används.

6.5. Tillbakalutning av bakdel

Stolens ryggstöd kan lutas tillbaka oberoende av tiltfunktionens rörelse för att tillhandahålla komfort och underlätta lämplig position för brukaren.

Om du är osäker på brukarens position i Florian Elite stolen, sök råd och information från en kvalificerad arbetsterapeut, sjukvårdspersonal och / eller Direct Healthcare Groups representant / återförsäljare före justering.

Bakdelens spak för lutning har en säkerhetstapp inkorporerad för att undvika välmående men ospecificerad justering av ryggvinkeln. När den här säkerhetstappen är låst på plats förhindrar man att spaken för rygglutning fungerar.

Använd tillbakalutning

Spaken för tillbakalutning finns på vänster sida om tryckhandtaget på stolens baksida.

- För att justera tillbakalutningspositionen, lossa säkerhetstappen på spaken på vänster sida om tryckhandtaget, märkt "lutning" så att spaken kan tryckas ned.
- Tryck försiktigt ner spaken and tryck hårt ner tryckhandtaget med båda händerna för att luta stolen bakåt, alternativt, lyft upp tryckhandtaget för att höja bakkdelen till en upprätt position.
- När som helst under uppåt- eller nedåtlutningen kan spaken släppas och stolen kommer att låsas i den valda positionen.
- Det är viktigt att en brukares lutande position sker i enlighet med dennes kroppshållningsförmåga. Så fort den korrekta sätes- och ryggvinkeln har etablerats för brukaren kan det låsas på plats genom att man vrider tappen på lutningsspaken så att den inte längre kan tryckas ned.



VIKTIGT

Använd rygglutning tillsammans med tiltfunktionen, för att undvika att brukaren sjunker ner eller glider in i en obekvämlig eller olämplig position.



VARNING

Kontrollera att inget hindrar stolen att röra sig fritt (t.ex barn, husdjur eller fasta föremål) före tillbakalutning används.

6.6. Höjbart och vridbart benstöd

Florien Elite har antingen ett höjbart vridbart benstöd.

Det höjbara benstödet kan hjälpa det lymfatiske flödet och blodcirkulation. När knäna höjs och sträcks ut kan blodet cirkulera bättre, vilket reducerar ansträngningen som krävs av hjärta och artärsystemen. Att höja benen kan även hjälpa till att lindra benödem, en uppbyggnad av vätska i benen.

Det höjbara benstödet rörelse är -10° negativ indragning till 70° höjning från en neutral nedåtposition.

Det vridbara benstödet dras framåt när det höjs och är perfekt för stolar med fotstöd då det upprätthåller fotstödet läge och användarkomfort, i både höjda och sänkta positioner.

Rörelsens räckvidd är -10° negativ indragning till 75° höjning från en neutral nedåtposition.



Använd benstödet

Det höjbara och vridbara benstödet höjs och sänks med samma operativa system. Lokalisera benstödet utlösningsspak i botten på höger sida, mot det främre hjulet (när det ses från baksidan).

Benstödet kan höjas eller dras tillbaka genom att man drar i spaken med vänster hand samtidigt som man flyttar benstödet med höger hand och sedan släpper spaken för att låsa fast benstödet i dess position.

Detta gör det möjligt för vårdgivaren att ha ögonkontakt med brukaren.

En negativ benstödsinkel kan uppnås med benstödet för att biträda brukare med kontrakturer såväl som hjälpa dem att ta sig ut ur stolen.

Sänk benstödet före stolen återvänder till dess helt upprätta positionen så att användaren enkelt kan ställa sig upp från stolen.



! **VIKTIGT**
Sitt inte på benstödet.

! **VARNING**
När benstödet dras tillbaka, kontrollera att brukarens ben finns i mitten av benstödet för att undvika risken att brukarens ben eller fötter fastnar mellan benstödet och stolsramen.

! **VARNING**
När benstödet dras tillbaka, håll händerna borta från säteskudden för att inte riskera att klämma fingrarna.

! **VARNING**
Kontrollera att inget hindrar stolen att röra sig fritt (t.ex. barn, husdjur eller fasta föremål) före benstödet höjs.

! **VIKTIGT**
När benstödet sänks, eller stolen återvänder från en lutad till upprätt position, är det rekommendabelt att fotstödet justeras (alternativt) till den kortaste positionen eller att det tas bort helt för att undvika skada på fotstödet eller golvet. Om det lämnas utdraget, kommer det falla i golvet när stolen lutas framåt och skulle förstöras.

6.7. Inbyggt nackstöd

Nackstödet är en integrerad del av Florian Elite stolens bakdel. Rotationspunkten är belägen ungefär 30 cm (12 tum) från stolens ovansida.

För att justera nackstödet:

Stå bakom stolen och placera en hand på tryckhandtaget. Använd den andra handen och tryck ordentligt framåt på ovansidan av ryggstödet fram tills nackstödet är i önskad position.

Friktionslåset kommer försäkra att den här positionen upprätthålls och kommer inte ändras när stolen används.

! **FÖRSIKTIGHET**
Nackstödet ska alltid justeras av en vårdgivare eller någon annan, aldrig av stolens användare när denne befinner sig i stolen.



6.8. Armmoduler

Båda armmodulerna kan roteras bakåt för att underlätta en sidförflyttning eller förbättra åtkomsten till selen. Ha alla förflytnings- och hanteringsråd i åtanke och om du känner dig osäker på hur en förflyttning görs på säkert vis, prata med din arbetsterapeut eller sjukvårdspersonal..

! **VIKTIGT**
Kontrollera att stolen är i en upprätt position och att alla sidostöd som används på stolen har tagits bort före armen roteras. Före man försöker göra en sidförflyttning, måste stolen vara i en upprätt position, med armen helt roterad bakåt.

Lokalisera knäppningsjusteraren under armmodulens framsida. Dra knäppningen framåt och vrid i en 90° vinkel för att låsa den i ett öppet läge.

Håll i armstödet främre kant och dra det uppåt och bakåt.

Armmodulen kommer rotera ur vägen för att möjliggöra en problemfri sidförflyttning.

! **VARNING**
Kontrollera alltid att armen är återpositionerad och att även knäppningen är låst i position för att garantera säker användning.



**VARNING**

Ta inte bort arm om brukaren har en dålig sittbalans.

**VARNING**

Utför endast sidförflyttning om det går att göra på ett säkert vis.

**VARNING**

Kontrollera att det inte finns några föremål i vägen, på sidan och bakom stolen, före och medan armstödet svängs tillbaka.

**CAUTION**

Kontrollera att den bakre muttern inte är lös då detta skulle påverka armstödetets funktionalitet.

**VARNING**

Försäkra att inget hindrar stolen att röra sig fritt före armmodulen roteras tillbaka.

**VARNING**

Sitt aldrig på stolens armstöd.

**VARNING**

Applicera inte tryck, såsom att luta eller vila på armarna när stolen är i en roterad ryggposition.

**VARNING**

Sätt alltid på stolens bromsar före armarna roteras eller man försöker göra en sidförflyttning in eller ut ur stolen.

7. Tillbehör

7.1. Sidostöd

Sidostöd hjälper till att upprätthålla en individs ställning och uppmuntrar ett lämpligt mellanliggande läge.

Sidostöd används vanligtvis tillsammans, där en av dem är monterad till en av stolens sidor. De justeras oberoende men fungerar på samma sätt.

Sidostöden sätts fast på stolen via sidostödets stång på stolens baksida.

För att fästa eller ta bort sidostöden, skruva enkelt bort det "triangulära" handtaget och låt varje stöd glida på eller av bygelns på stolens baksida.

- De två sidostöden kan flyttas horisontellt (bredare eller smalare) eller roteras vertikalt (upp och ner) för att ge stöd åt stolens brukare.
- När lämplig position har hittats, ska de triangulära handtagen spännas, för att tillhandahålla ett stabilt och säkert stöd.

**VIKTIGT**

Båda sidostöden kan tas bort helt vid behov eller roteras tillbaka på stolen. Det här är viktigt under borttagning eller rotering av armmodulerna.

7.2. Höjdjusterbart och uppfällbart fotstöd

Det höjdjusterbara fotstödet tillhandahåller extra stöd och positionering för fötterna och är utmärkt för att hjälpa droppfot och andra liknande tillstånd.

Fotstödet kan höjas så att det ligger mot benstödet när man tar sig in eller ut ur stolen och fälls ner när används.

När det är sänkt, sitter fotstödet i en 90° vinkel på benstödet.

**FÖRSIKTIGHET**

Vårdgivaren ska hålla händerna borta från fotstödet gångjärn när det uppfällbara fotstödet används, för att undvika att riskera att klämma fingrarna.



Fotstödet är höjjusterbart:

- Hög benstödet till den önskade vinkeln (se avsnitt 5.6).
- Hela fotstödet ska sedan justeras genom att de två fjäderbelastade knäppningar som fästs i hålen på benstödet metallsmide lossas.

Knäppningarna är belägna bakom benstödet ramverk. Sträck dig runt benstödet och dra ut båda sprintarna och vrid dem till 90° för att göra det möjligt att positionera fotstödet.


- Låt fotstödet glida upp eller ner efter behov och sätt tillbaka knäppningarna i 90° vinkel, se till att knäppningarna klickar fast i de korrekta hålen.



Endast när knäppningen hörbart klickar på plats är fotstödet säkrat.

**WARNING**

Kontrollera att knäppningen är helt stängd och att fotstödet är säkrat före brukaren lämnas ensam.

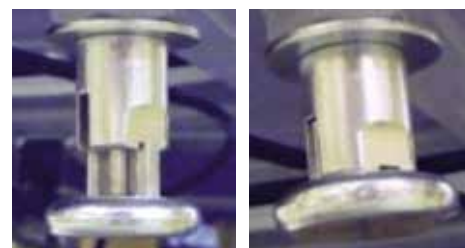

UNLOCKED

LOCKED

7.3. Nackstöd**Avtagbart format nackstöd**

(Endast för Florian Elite stolar med waterfall bakdel)

Det avtagbara formade nackstödet kan användas tillsammans med Florian Elite stolen för att tillhandahålla ytterligare komfort, stöd och positionering för brukarens huvud.

Placera knäppningen på ryggstödet överdel för att fästa nackstödet till stolen.

Det här kommer monteras fast på stolen vid leverans om det beställs tillsammans med stolen.

Om format nackstöd beställs vid ett senare tillfälle, ta bort den övre waterfall-kudden och ersätt den med det formade nackstödet.

**Dämpande nackstöd**

(Endast för Florian Elite stolar med formad bakdel)

Ett dämpande nackstöd med ett omslutande kardborrbandsfäste finns tillgängligt för extra komfort och positionering.

Nackstödet kan tas bort om så krävs genom att man lossnar på kardborrbandets fästremmar på stolens baksida och låter det glida av.

Fäst på nytt genom att fästa kardborrband på stolens baksida så tätt som möjligt i lämplig position för brukaren.

**7.4. Höftbälte och D-ringfäste**

Höftbältet hjälper till att stabilisera bäckenet och placerar brukaren baktill i stolen så att denne kan få en bra sittställning och riskerna för vävnadsskada minskar och därmed även effekterna av skjuvning som kan uppstå om brukaren har en instabil kroppshållning.

När ett höftbälte används kan övervakning behövas beroende på brukarens förmågor.



Alla höftbälten ska justeras korrekt för att ge adekvat stöd åt brukaren utan att begränsa andningen eller orsaka obehag.

Det är viktigt att höftbältet inte sitter löst runt brukaren och inte får fungera löst, då det här kommer göra att bäckenet lutar bakåt, samt uppmuntrar brukaren att glida ner och upp i stolen, speciellt om denne är i en upprätt position.

Idealt kommer D-ringfästena för höftbältet och själva höftbältet att monteras vid tillverkningen men; de kan monteras i efterhand av en utbildad representant (se D-ringfäste).

För att använda höftbältet effektivt, öppna spännet som fäster remmens två delar, genom att knappen på den centrala konsolen trycks ned och remmarna placeras över armarna eller på sidan av sätet före brukaren placeras i stolen.

När brukaren sitter korrekt, sätt ihop spännets båda sidor och fäst dem.

För att justera höftbältet, dra på plastöglan för att ge en bra kontroll, men var försiktig så att brukarens rörelser inte begränsas. Höftbältet är utformat för att dras på över höfterna vid en vinkel på 45° och 60°.

Den här vinkeln hjälper till att upprätthålla ett vertikalt bäcken genom att höftleden positioneras både nedåt och bakåt.

D-ringfäste

Stolen kan levereras förmonterad med D-ringremmar om detta beställs vid tiden för tillverkning.

Om detta är fallet, kommer de normalt vara synliga nära beröringspunkten mellan sätesmodulen och ryggkudden.

I det här fallet, kan höftbältet fästas till D-ringarna genom att man enkelt knäpper fast fjäderklämman på höftbältets ände på den synliga D-ringen.

Om stolen inte redan är monterad med D-ringar, ska dessa fästas till en fast del av stolens metallramverk på ena sidan av sätesmodulen, så att de kan matas in mellan sätet och armmodulerna.



VARNING

Om höftbältet är för löst finns det risk för att brukaren glider ned eller hamnar i en olämplig position. Höftbältet ska regelbundet kontrolleras för korrekt täthet. Var försiktig när höftbältet spänns, för att undvika att skada brukaren.



VARNING

Vadderingen och plastfästena ska kontrolleras åtminstone veckovis för tecken på skada. Om det är skadat, ska höftbältet inte användas.



VARNING

Brukaren befinner sig i risk om höftbältet inte har angivits och justerats i enlighet med specifika behov.



VARNING

Anfall, spasmer och kraftiga rörelser, exempelvis, såväl som att delvis lossna på höftbältet skulle kunna skada brukaren.

7.5. Bäckpositionering

Bäckpositionering används för att hjälpa till att positionera brukaren på ett säkert vis i stolens bakdel, och är lämplig för de som har låg muskeltonus eller dålig bäckenkontroll.



Montera bäckenpositionering på stolen

Kontrollera att stolen är tom före bäckenpositioneringen monteras.



Placera bäckenpositioneringen i stolens säte så att spännena i stolens säte så att spännena pekar mot stolens framsida och spännenas klämmor pekar nedåt.



Mata in längden på remmarna genom D-ringarna på en av sättesmodulens sidor.



Placera remmarnas ändrar över stolens armar så att brukaren kan flyttas över till stolen.

Sätt brukaren i stolen med deras bäcken i den bakre delen av sätet och deras bakdel på bäckenpositioneringens bakre kant.



Placera bäckenpositioneringen i stolens säte så att spännena pekar mot stolens framsida och spännenas klämmor pekar nedåt.



Mata in längden på remmarna genom D-ringarna på en av sättesmodulens sidor.



FÖRSIKTIGHET

Var försiktig när positionen justeras för att undvika att kroppsdelar fastnar eller att kläms.



VARNING

Brukaren ska kontrolleras regelbundet och bäckenpositioneringen justeras, för att försäkra optimal placering och säkerhet.



VARNING

Endast en utbildad eller ansvarsfull person ska justera produkten.



VARNING

På grund av risk för korsinfektion, ska den här produkten inte användas av mer än en person.

8. Återanvända och återutfärda

Fastän Florien Elite stolen har blivit skraddarsydd specifikt för brukarens behov vid tillverkning, med några modifieringar och justeringar, kan stolen återutfärdas och återanvändas i en kollektiv hälsovårdsmiljö.

Sök råd från en kvalificerad arbetsterapeut, sjukvårdspersonal och / eller Direct Healthcare Group representant / återförsäljare för Florien Elite stolen används med en annan användare som stolen inte ursprungligen utfärdats för.



VARNING

Hänsyn till riskerna för korsinfektion måste tas i beaktning när stolarna återanvänds eller återutfärdas.



FÖRSIKTIGHET

Om Florien Elite stolen används i en kollektiv miljö så rekommenderas *en situ* rrskbedömning.

8.1. Modularitet

Florien Elite stolen har en hållbar ram med modulära rygg-, arm-, säte- och benstödskomponenter. Dessa komponenter kan köpas separat efter behov, oavsett om det är för att ersätta en utsliten modul eller för att utfärda på nytt till en annan användare. Kontakta Direct Healthcare Groups kundtjänst på vårt avgiftsfria nummer 0800 043 0881 eller din lokala återförsäljare för aktuella priser och tillgänglighet.

8.1.1 Alternativ för sätets djup

Florien Elite finns tillgänglig i tre säteshöjdalternativ, som ställs in vid tillverkning. Dessa kan endast ändras på ett senare datum av en utbildad Direct Healthcare Group ingenjör. Sätets höjdalternativ är följande: 550 mm, 575 mm och 600 mm.

8.1.2. Tiltfunktionens område

Florien Elite har en tiltfunktionsräckvidd på 40° vinkel, i förhållande till den valda säteshöjden som stolen är inställd på, och ger en lätt framåtlutning. Stolen kan ställas in på flera olika framåtlutningar, men, desto större framåtlutning, desto mindre bakåtlutning kan stolen få. Notera att den efterfrågade konfigurationen ska anges vid inköpstillfället, då det här endast kan ändras vid ett senare datum av en utbildad Direct Healthcare Group ingenjör.

Följande konfigurationer kan erhållas:

| Säteshöjd | Grader av framåtlutning |
|-----------|-------------------------|
| 600 mm | 0° |
| 575 mm | 0°, 10° |
| 550 mm | 0°, 10°, 15° |

8.1.3. Sättesmoduler

Florien Elite sättesmodulen har en standardstorlek för alla Florian Elite stolarna.

Sätets tryckhanteringsalternativ för Florian Elite stolen inkluderar:

- Dyna-Tek® Intelligent Air sätteskudde (för de som befinner sig i hög risk för tryckskador eller de som har upp till en grad IV tryckskada).
- Dyna-Flex® kudde (för de med medelhög till hög risk för tryckskador).
- Dyna-Tek® Posture Visco (för de med hög risk för tryckskador).
- Intelli-Gel® sätteskudde (för de som befinner sig i hög risk för tryckskador eller de som har upp till en grad II tryckskada).
- Sätesskiva för att använda en egen tryckkudde i enlighet med rekommendationer från vårdpersonal.

För ersättning av sättesmodulen:

- Roter båda armmodulerna bakåt (Se avsnitt 6.8 i den här manualen).

Sättesmodulen är fäst till stolen via ett 'kuvert' med material på båda sidorna.

Låt kuvertet med material glida av ramen på båda sidorna av sättesmodulen.

- Ta bort sättesmodulen.
- Montera den ersättande sättesmodulen, och låt kuvertet med material glida tillbaka på ramverket på stolens båda sidor.
- Roter båda armmodulerna framåt för att återvända till standardläget.

8.1.4. Ryggmoduler

En ersättande formad eller Waterfall ryggstödsmodul kan köpas för Florian Elite stolen, vänligen kontakta Direct Healthcare Groups kundtjänst på vårt avgiftsfria nummer 0800 043 0881 för mer information eller din lokala återförsäljare.

Ett besök från en Direct Healthcare Groups utbildade ingenjör kommer behövas för att montera den ersättande ryggmodulen.



8.1.5. Armmoduler

Ersättande armmoduler kan köpas för Florien Elite stolen, vänligen kontakta Direct Healthcare Groups kundtjänst på vårt avgiftsfria nummer 0800 043 0881 eller din lokala återförsäljare, för mer information.

8.1.6. Benstöd kudde

En ersättande benstödkudde kan köpas för Florien Elite stolen. Kontakta Direct Healthcare Groups kundtjänst på vårt avgiftsfria nummer 0800 043 0881 eller din lokala återförsäljare för mer information.

8.2. Kassering av stol

Florien Elite stolen består framförallt av metall, plast, trä, skum och tygkomponenter.

Kassering av varje enskilt material måste ske i enlighet med bestämmelser gällande miljö och kassering i det aktuella landet, och får endast ske efter stolen är helt nedmonterad.

9. Vård och underhåll

Kontrollera för tecken på skador eller överdrivet slitage, varje gång stolen används.

Om stolen visar tecken på överdrivet slitage, sluta genast använda den och kontakta Direct Healthcare Groups kundtjänst på vårt avgiftsfria nummer 0800 043 0881 eller din lokala återförsäljare för råd gällande reparation och restaurering.



VARNING

Underlåtelse att reparera skada eller slitage kan utsätta brukaren för skaderisk.

9.1. Livslängd

Stolens livslängd vid normalt dagligt bruk är 10 år. Ramverket, exklusive hjul och förbrukningsvaror, har en garanti på 10 år. Stoppning och andra förbrukningsvaror som har en garanti på 12 månader, såsom hjul, kan behövas ersättas under den här tidsramen.

Det rekommenderas att stolen granskas av en utbildad servicetekniker varje år, för att garantera att det är säkert att använda produkten (se 2. Riktlinjer för garanti).



VARNING

Det finns inga delar på stolen som man kan utföra självservice på. Om ett fel uppstår på stolen, SLUTA genast att använda stolen, och kontakta Direct Healthcares kundtjänst på vårt avgiftsfria nummer 0800 043 0881 eller din lokala återförsäljare för ytterligare rådgivning.

9.2. Periodiska kontroller

Stolen ska kontrolleras varje gång den använts för tecken på skador eller överdrivet slitage för att garantera säker och korrekt drift.

Månatliga kontroller ska inkludera, men inte vara begränsade till:

- Alla skador på kablar eller inställningsspakar.
- Alla lösa eller avlägsnade delar.
- Kontrollera hjul för skador och ansamling av ludd och smutspartiklar.
- Alla skador på stolens tyg, inklusive smuts på tyget.

Om det finns ett fel, SLUTA genast att använda stolen, och kontakta Direct Healthcares kundtjänst på vårt avgiftsfria nummer 0800 043 0881 eller din lokala återförsäljare för ytterligare rådgivning gällande reparation och restaurering.

9.3. Rengöring

Stolen ska hållas ren för att bibehålla stolens livslängd och utseende.

Regelbunden rengöring är viktigt för att minimera riskerna för korsinfektion mellan användare och vårdgivare, speciellt i en kollektiv vårdmiljö.

**VARNING**

Kontrollera att stolen fungerar korrekt efter rengöring.

**VARNING**

Regelbunden rengöring är viktig för att minimera risken för överföring av infektioner mellan användare och vårdgivare.

**VIKTIGT**

För att minska risken för överföring av infektioner till vårdgivaren, använd alltid skyddshandskar vid dekontaminering eller rengöring av stolen.

9.3.1. Rengöring av ram

Stolens metallram kan rengöras med mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa.

**VIKTIGT**

För att minska risken för överföring av infektioner till vårdgivaren, använd alltid skyddshandskar vid dekontaminering eller rengöring av stolen.

9.3.2. Rengöring av stoppning**VIKTIGT**

För att minska risken för överföring av infektioner till vårdgivaren, använd alltid skyddshandskar vid dekontaminering eller rengöring av stolen.

Cadet-, Venture-, Berkshire- och Brookland- vinyl rengöringsinstruktioner (externa ytor)

Den här typen av vinyl är mycket repbeständig och har en färg som överensstämmer med bastyget.

Bakterie- och svampdödande skydd. Testad för AATCC147.

- Regelbunden rengöring och vård av tyget kommer att upprätthålla dess tillstånd och utseende. De flesta fläckar kan enkelt torkas bort.
- Den nya generationen av rengöringsdukar i mikrofiber är extremt effektiva med eller utan tvål för allmän vård och underhåll.
- Torka rent regelbundet med en fuktig trasa för att ta bort dammpartiklar och lätt nedsmutsning.
- Ta bort spill direkt (inom 15 minuter) med en absorberande torr trasa.
- Vid kraftig nedsmutsning, använd en mjuk borste för att undvika nötnings-skador på ytan och ljummet vatten med tvål (icke-alkalisk). Skölj med rent vatten. Torka med en absorberande trasa.
- Kroppsvätskor ska tas bort snabbt (inom 15 minuter) med kallt vatten och därefter rengöras som ovan.
- Vid mycket kraftig nedsmutsning / infektionskontroll ska en 5 % natriumhypokloritlösning (blekmedel) användas.
- Ska inte maskin- eller kemtvättas.
- Använd inte putsmedel eller lösningsmedel.

Enduratex® Vinyl rengöringsinstruktioner (externa ytor)

Enduratex® kontaktmaterial är skyddade av Produratec-C® lackering och står emot daglig nötning och kontakt med milda syror, alkali, drycker, hushållsfläckar.

- Använd varmt vatten och / eller Haz-tab eller Clor-clean lösning samt en hushållstrasa.
- Gnid jämnt i materialets fiberriktning.
- Skölj med rent vatten efteråt.
- Kan även ångrengöras.

ANVÄND INTE blekmedel, lösningsmedel, slipmedel, polervax eller aerosolspray.

Dartex rengöringsinstruktioner (användarens kontaktytor)

Allmänna Riktlinjer

- Var uppmärksam på egenskaperna hos andra material, som går att kombineras med Dartex belagda tyger i den färdiga artikeln (t.ex dimensionsstadga, färgbeständighet, tvättråd).
- Ytan kan rynkas vid rengöringsprocessen. Detta har inga negativa effekter på tygets egenskaper.
- Slipande rengöringsmedel ska inte användas.

Rengöring och desinficering

- Smuts på skyddets yta kan tas bort genom att det torkas av med en mjuk trasa fuktad med vatten och neutralt rengöringsmedel. Svårare kontaminering kan behandlas genom att det torkas av med alkohol eller terpentinsubstitut, och därefter med varmt vatten och rengöringsmedel.
- Rengöring och desinficering kan utföras på skyddet med ljummet vatten och ett neutralt rengöringsmedel eller med en natriumhypokloritlösning (0,1 % eller 1 000 delar per miljon aktivt klor).
- Farmaceutiska desinfektionsmedel kan användas givet att tillverkarens instruktioner följs.
- Alla rengörings- och desinfektionsmedel ska sköljas av ordentligt och föremålet ska torka helt, före förvaring. Underlåtelse att göra detta, kan resultera i ackumulering av reagens, som skulle kunna skada polyuretanskyddet, reagera med stolsramen, eller ogiltigförklara resultaten för biokompatibilitet för Dartex-tyget.

Torkning

- Det är viktigt att föremål torkar ordentligt efter alla rengöringsprocesser innan de förvaras.

Förvaring

- Förvaras på en sval, torr plats. Undvik överdrivet tryck och kontakt med material som inte är tvättäkta.

10. Tekniska data

10.1. Tillverkningsadress

Direct Healthcare Group Withey Court, Western Industrial Estate, Caerphilly, Storbritannien, CF83 1BF

Telefon: +44 (0) 800 043 0881 **Email:** info@directhealthcaregroup.com

10.2. Maximal användarvikt

Gränsen för maximal användarvikt är **160 kg (353 lbs) eller 25 stone**

Följ gränserna gällande användarvikt för Florien Elite stolen och observera att din garanti kan hävas och användarens säkerhet kan äventyras om viktgränsen överskrids.

10.3. Stolens vikt och dimensioner

| Föremål | Vikt (kg) | Dimensioner (mm) |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Florien Elite med stoppade armar | 56 | 1 300 x 668 x 930 |
| Florien Elite med stoppade armar + Pappkartong + Lastpall | 73 | 1 000 x 800 x 1 450 |
| Pappkartong | 7 | 1 000 x 800 x 1 450 |
| Lastpall | 10 | 1 000 x 800 x 1 50 |

10.4. Miljöförhållande för användning

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Transport..... | -25°C - +70°C |
| Förvaring..... | -25°C - +70°C |
| Användning | +5°C - +40°C |
| Fuktighet | 10 % - 93 % |
| Atmosfäriskt tryck | 700 hPa – 1060 hPa |
| Operativ höjd | ≤ 200m |

10.5. Produktstandarder

MHRA Registrering CA000105

10.5.1. Testa flambeständighet

- BS 7176:2007+A1:2011 (Specifikationer för de stoppade möbelsätena, som inte är för hushållsbruk, antändningsmotstånd genom testning av kompositer).
- BS EN 1021-1:2014 (Möbler. Bedömning för antändning av stoppade möbler. Antändningskälla glödande cigarett).
- BS EN 1021-2:2014 (Möbler. Bedömning för antändning av stoppade möbler. Antändningskälla tändsticka eller liknande).
- BS 5852:2006 (Testmetoder vid bedömning för antändning av stoppat säte för glödande och flammande antändningskällor).

10.5.2. Styrka, stabilitet, hållbarhet, risk och säkerhet

- BS EN 1022:2005 (Hushållsmöbler. Säte. Fastställande av stabilitet).
- BS EN 16139:2013 (Möbler. Styrka, hållbarhet och säkerhet. Krav för säte som inte är för hushållsbruk).
- BS EN ISO 14971:2012 (Läkarutrustningar. Tillämpning av riskhantering för läkarutrustningar).

10.5.3. Kvalitet och miljö**11. Kundtjänst**

Om du har några funderingar eller upplever problem gällande montering eller underhåll av din Florien Elite stol, kontakta vår kundtjänst på:

vårt avgiftsfria nummer 0800 043 0881



Intelligent tryckvård

Specialist säte

Hyses- och servicelösningar

Direct Healthcare Group

Withey Court, Western Industrial Estate
Caerphilly, Storbritannien
CF83 1BF

T: +44 (0) 800 043 0881

F: +44 (0) 845 459 9832

E: info@directhealthcaregroup.com

Asien och Stilla-havsområdet

Direct Healthcare Group PTY Ltd.
PO Box 562, Wembley
Western Australia 6913

T: +61 (0) 423 852 810

E: info@directhealthcaregroup.com.au



LIT-103 Utgåva 1
Datum: Juni 2018

DIRECTHEALTHCAREGROUP.COM

