

Mercury Advance SMARTcare®

Een verandering in zorgverlening

Intelligent®
Pressure Care
Management



- Mercury Advance SMARTcare® is een innovatieve oplossing ter voorkoming en behandeling van decubitus. Het biedt effectieve duale therapie met een enkel matras door het combineren van geavanceerde, klinisch bewezen technologieën, die eerder alleen beschikbaar waren in afzonderlijke hybride oppervlakken.



Klinische toepassingen/categorie
decubitus



Zeer
hoog
risico


3 kleine gekartelde schuim en
luchtcellen om de bovenrug en
schouders te ondersteunen.

Vaste hoofdzone van
alleen schuim.

7 grote gekartelde schuim en
luchtcellen voor ondersteuning van
de torso, onderrug, dijnen en benen.

Een unieke lage druk hielzone met
alleen lucht laat de hielen 'zweven'
waardoor de druk op dit zeer
kwetsbare gebied vermindert.

De Dartex™ vochtdoorlatende, uittrekbare
hoes heeft op hoge frequentie gelaste
naden en een beschermende flap voor de
rits die voldoet aan de striktste eisen op
het gebied van infectiecontrole.

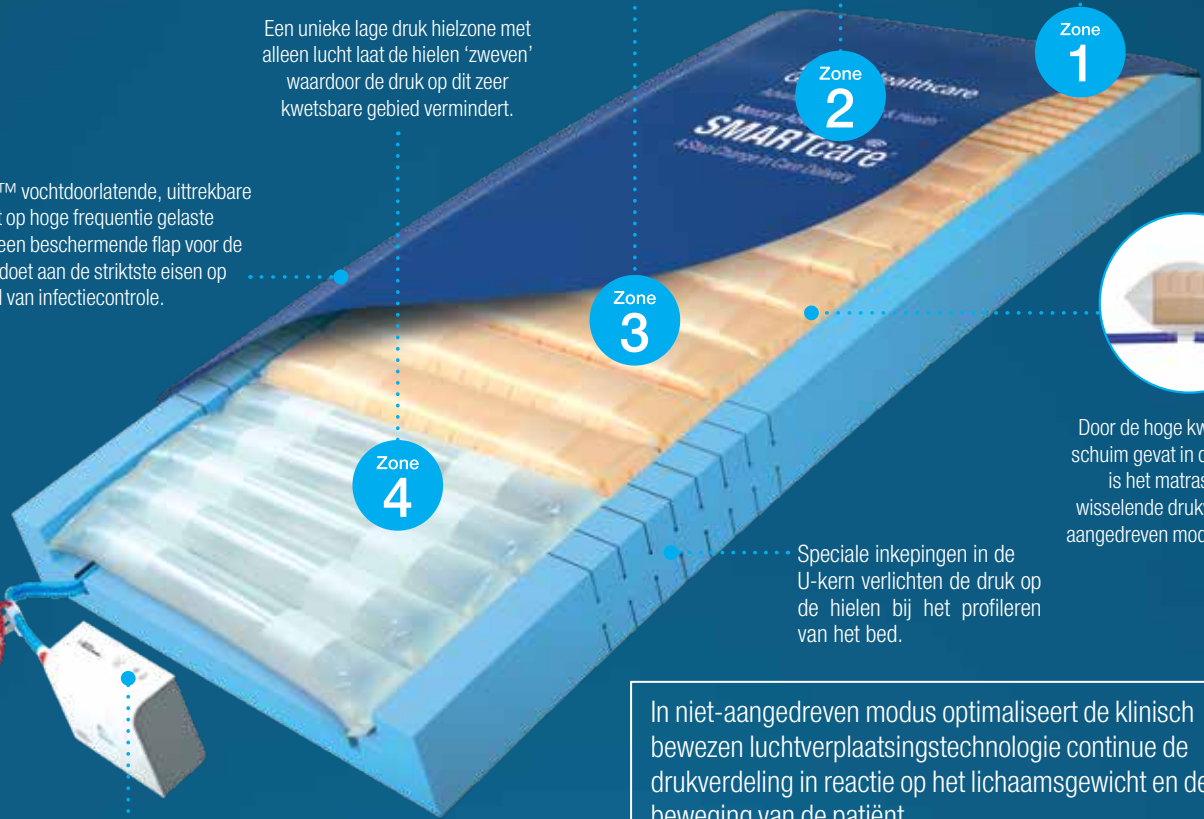

Door de hoge kwaliteit CME-
schuim gevat in de luchtcellen
is het matras in staat
wisselende drukverlichting in
aangedreven modus te leveren.

Speciale inkepingen in de
U-kern verlichten de druk op
de hielen bij het profileren
van het bed.

In niet-aangedreven modus optimaliseert de klinisch
bewezen luchtverplaatsingstechnologie continue de
drukverdeling in reactie op het lichaamsgewicht en de
beweging van de patiënt.

Bij gebruik in aangedreven/dynamische modus levert de
Mercury Advance SMARTcare® drukverlichting door
middel van een reeks verbonden wisselende schuim en
luchtcellen. Niet gehinderd door een bovenlaag van schuim
op het matras, zorgt de unieke 'schuim in luchtcel'-
constructie voor effectieve drukverlichtingstherapie.

Afhankelijk van de klinische beoordeling
kan de wisselfunctie gebruikt worden
met lage of hoge druk.


Eenvoudig leeg laten
lopen met CPR-label.



Een verandering in zorgverlening

Het is klinisch bewezen dat Mercury Advance SMARTcare® helpt bij het voorkomen en behandelen van decubitus. Mercury Advance SMARTcare® representeert een verandering in zorgverlening, door het aantal stappen en de tijd te verminderen die er mee gemoeid is om patiënten op het juiste matras te krijgen: het is een betere kosteneffectieve methode en maakt het beste gebruik van middelen. Mercury Advance SMARTcare® kan eenvoudig opgeschaald worden van de statische naar de dynamische modus en weer terug indien klinisch vereist, zonder vertragingen, bijkomende administratie of transporteisen voor de patiëntoverdracht.

- Mercury Advance SMARTcare® combineert de meest innovatieve en klinisch bewezen technologieën voor drukzorg in een enkel matras.

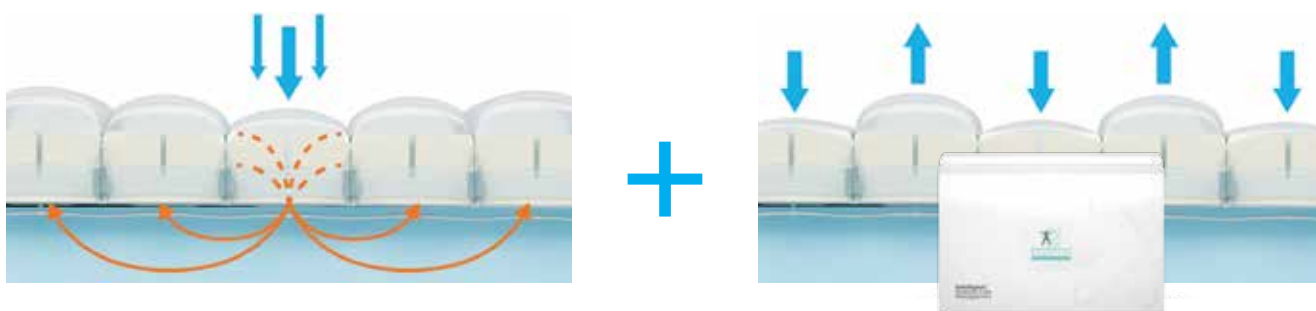

EFFECTIEVERE, CONTINU GEOPTIMALISEERDE DRUKVERDELING

- CME-schuim en luchtcellen met strenge specificaties
- Geavanceerde luchtverplaatsingstechnologie optimaliseert continu de drukverdeling in reactie op het gewicht en beweging van de patiënt
- De unieke hielzone met 'alleen lucht' verlicht effectief de druk op dit kwetsbare gebied

EFFECTIEVE DRUKVERLICHTINGSTHERAPIE

- Sluit eenvoudigweg de voedingseenheid aan voor de wisselfunctie
- Unieke 'schuim in luchtcel'-constructie voor effectievere therapie
- 10 minuten, 2-in-1 wisselcyclus
- Keuze uit lage of hoge instelling

Alle componenten zijn uitwisselbaar en vervangbaar waardoor de levensduur gemaximaliseerd wordt en een kosteneffectieve oplossing voor drukzorgmanagement geboden wordt.

Compatibiliteit met infectiecontrole/hypochlorietoplossing

De matrashoes/regeleenheid moet worden afgenomen met een juist verdunde natriumhypochlorietoplossing en warm water.

Gebruik een hypochlorietoplossing verdund tot 1.000 deeltjes per miljoen beschikbaar chloor. Gebruik voor zware bevuiling een hypochlorietoplossing verdund tot 10.000 deeltjes per miljoen beschikbaar chloor. Goed afspoelen na het schoonmaken.

Technische specificaties

Productcode	MAT1610079
Risicocategorie	Zeer hoog risico
Gewichtslimiet	Geen minimum gewichtslimiet. Product is beoordeeld op een capaciteit van 254 kg
Garantie	2 jaar
Afmetingen	Standaard afmeting (lengte) 198 cm x (breedte) 88 cm x (hoogte) 15 cm
Productgewicht	13,3 kg matras/1,7 kg voedingseenheid
Cyclusduur	10 minuten
Werkingsmodus	Elektronisch
Voltage	220V – 240V / 50HZ
Stroomverbruik	10W
Classificatie	Ila
Kleur	Blauw

**Intelligent®
Pressure Care
Management**

