


Dyna-Form[®] Mercury Advance

Dit is een korte handleiding voor het **Dyna-Form Mercury Advance System** (raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie).


Product Code MAT1210357

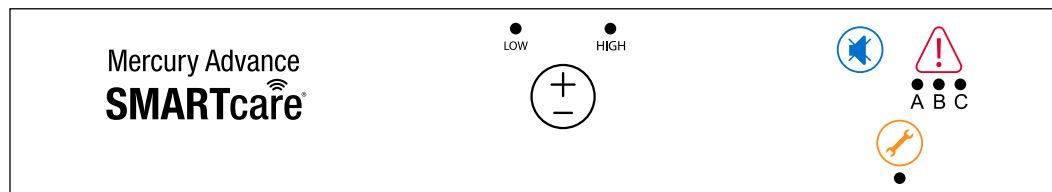

Geluidswaarschuwing bij resetten stroomschakelaar

De stroomschakelaar schakelt eenvoudig de hoofdstroom naar de pomp in en uit.

Als de pomp een conditie voor een geluidswaarschuwing detecteert, kan dit gedempt worden zoals hieronder aangegeven en kan gereset worden door de pomp uit en weer aan te zetten.

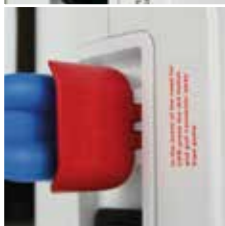

CPR-ventiel

Zorg ervoor dat de CPR-connector altijd goed ingestoken is voordat het matras opgeblazen wordt.

NB: Het matras wordt NIET goed opgeblazen als dit niet het geval is.

De CPR-connector dient alleen gebruikt te worden in een klinisch noodgeval voor prioritair gebruik. Echter, het uitschakelen van deze functie is handig om de lucht snel uit het matras te laten ontsnappen voor transport of statische modus.




Instellingen led-modus

Indien verlicht betekent dat het matras AAN staat.

Deselecteer om de stroom UIT te schakelen.

Voor patiënten met bestaande drukschade of die een zeer hoog risico lopen wordt aanbevolen dat, afhankelijk van de klinische beoordeling van de dokter, de instelling "hoog" wordt geactiveerd door de +/--knop, bovenop de pomp, eenmaal in te drukken. In de "hoog"-modus krijgt de pomp meer de eigenschappen van een wisseldruk-luchtbed, terwijl de voordelen van het statische schuimkussen nog steeds benut worden. Het herhaaldelijk indrukken van de 'modus'-knop maakt het selecteren van de hoog- en laag-modus mogelijk.

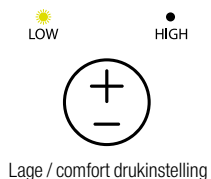

De standaardinstelling waarnaar de pomp terugkeert bij het inschakelen is "laag". De instelling "laag" is ideaal voor de lichtere patiënt of voor diegene die ongemak ervaren op een normaal wisseldruk-luchtbed.



Deze functie wordt gebruikt om de geluidswaarschuwing te dempen. Het led-lampje blijft branden als de geluidswaarschuwing eerder gedempt is, maar er nog steeds een fout gedetecteerd wordt. Raadpleeg de stroomschakelaar (zoals hierboven) om helemaal te resetten. Indien de geluidswaarschuwing herhaaldelijk blijft klinken, samen met een brandend lampje, dan moet er een monteur geraadpleegd worden.









Dit symbool betekent een "geluidswaarschuwingfout". Raadpleeg de probleemoplossingsgids voor het resetten.

Opmerking: Zorg er voor dat (indien beschikbaar) dat alle zekeringsbanden van de bodem van het matras zijn gezekerd aan de BEWEGENDE DELEN van het bedframe.

Probleemoplossing

Waarschuwing / fout

Oorzaak

<p>Regeleenheid werkt niet; displayverlichting licht niet op</p>	<p>De regeleenheid is mogelijk niet aangesloten op een stroombron of er moet een zekering vervangen worden.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of de regeleenheid is aangesloten op een stopcontact met het juiste voltage. 2. Controleer of de regeleenheid is ingeschakeld. Zet de eenheid uit en trek de stekker eruit voor het herstarten. 3. Controleer de netstekkerzekering (5 amp) en controleer dan de zekeringen van de regeleenheid (1 amp) - zekeringen kunnen worden losgemaakt door met een schroevendraaier te drukken en te draaien. <p>⚠ Probeer de regeleenheid niet te openen. Het openen van de eenheid kan persoonlijk letsel of schade aan de apparatuur veroorzaken.</p> <p>⚠ Zorg ervoor dat de zekeringen vervangen worden in overeenstemming met lokale voorschriften.</p>
<p> Waarschuwing led C +geluidswaarschuwing</p>	<p>Stroomuitval / anders, zie hierboven, plus:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reset de geluidswaarschuwing - zet de stroom uit en druk op de muteknop voor de geluidswaarschuwing. 2. Controleer of de handgreep intact is en dat alle vier afdichtingsverbindingstukken stevig gemonteerd zijn op de regeleenheid en de luchtslangen. Controleer of het CPR-label bevestigd is en dat alle afdichtingsstukken stevig gemonteerd zijn. 3. Controleer alle luchtslangen aan de binnenkant van het matras - deze dienen allemaal stevig gemonteerd te zijn. Controleer of iedere luchtcel goed bevestigd is aan de aangesloten luchtpijp. 4. Controleer alle cellen, pijpen en slangen op luchtlekkage. 5. Schakel de stroom in.
<p> Waarschuwing led B +geluidswaarschuwing</p>	<p>Druk te laag</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reset de waarschuwing - zet de stroom uit en druk op de muteknop voor de geluidswaarschuwing. 2. Controleer of de handgreep intact is en dat alle vier afdichtingsverbindingstukken stevig gemonteerd zijn op de regeleenheid en de luchtslangen. Controleer of het CPR-label bevestigd is en dat alle afdichtingsstukken stevig gemonteerd zijn. 3. Controleer alle luchtslangen aan de binnenkant van het matras - deze dienen allemaal stevig gemonteerd te zijn. Controleer of iedere luchtcel goed bevestigd is aan de aangesloten luchtpijp. 4. Controleer alle cellen, pijpen en slangen op luchtlekkage. 5. Controleer dat het luchtfilterdeksel goed bevestigd is en dat het luchtfilter schoon is. 6. Schakel de stroom in.
<p> Waarschuwing led B+C + geluidswaarschuwing</p>	<p>Druk te laag / kink in luchtpijp</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer alle luchtslangen aan de binnenkant van het matras - deze dienen allemaal stevig gemonteerd te zijn. Controleer of iedere luchtcel goed bevestigd is aan de aangesloten luchtpijp.
<p> Waarschuwing led A +geluidswaarschuwing</p>	<p>Druk te hoog</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reset de waarschuwing - zet de stroom uit en druk op de geluidswaarschuwingsknop. 2. Ontkoppel de luchtslangen om de druk te verlagen en sluit deze weer aan als de druk verlaagd is. 3. Controleer op kronkels in de luchtslangen tussen het matras en de regeleenheid. 4. Schakel de stroom in.
<p> Waarschuwing led A+B +geluidswaarschuwing</p>	<p>Fout wisselmodus (geen wijziging)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reset de waarschuwing - zet de stroom uit en druk op de muteknop voor de geluidswaarschuwing. 2. Ontkoppel de luchtslangen om de druk te verlagen en sluit deze weer aan zodra druk is verlaagd.
<p> Waarschuwing led A,B+C +geluidswaarschuwing</p>	<p>Initialisatiefout</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op de muteknop voor de geluidswaarschuwing om de geluidswaarschuwing te dempen. 2. Controleer of de stroomkabel goed in het stopcontact en in de regeleenheid is gestoken; en controleer of de hoofdstroom ingeschakeld is. 3. Controleer de zekering van de regeleenheid (1 amp) - zekeringen kunnen worden losgemaakt door met een schroevendraaier te drukken en te draaien.

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Direct Healthcare Group

Withey Court, Western Industrial Estate
Caerphilly, United Kingdom
CF83 1BF

T: +44 (0) 800 043 0881

F: +44 (0) 845 459 9832

E: info@directhealthcaregroup.com

Asia Pacific

Direct Healthcare Group PTY Ltd.
PO Box 562, Wembley
Western Australia 6913

T: +61 (0) 423 852 810

E: info@directhealthcaregroup.com.au



Hoewel de Direct Healthcare Group Ltd zal trachten de exacte specificatie te leveren zoals afgedrukt, behouden wij het recht om de specificatie te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. Alle apparatuur en informatie in deze brochure dient gebruikt te worden samen met de toepasselijke klinische beoordelings- en verpleegkundige procedures.

Alle producten zijn gefabriceerd volgens standaarden:

