

**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health®

Tryckreducerande kuddsortiment

Bruksanvisning



1. Översikt

1.1 Produktbeskrivning

Dyna-Tek®, Dyna-Flex® och Transfo-kuddarna har unikt designats för att tillhandahålla tryckreducerande egenskaper.

Våra unika designers använder flera tätheter av högspecifikt medicinskt skum som har designats för tryckreducering för människokroppen. Överdragen är gjorda av vattenresistent, stretchigt, ångpermeabelt material som har utformats för att minska uppbyggnaden av både värme och fukt. Se produktinformationen för fler detaljer.

1.2 Symboler

Varningar

I den här bruksanvisningen indikeras varningar med symboler. Varningssymbolerna kommer tillsammans med en rubrik som indikerar hur allvarlig faran är.

VARNING

Indikerar en farlig situation som skulle kunna resultera i allvarlig skada eller dödsfall om den inte undviks.

FÖRSIKTIGHET

Indikerar en farlig situation som skulle kunna resultera i en mindre eller lätt skada om den inte undviks.

! VIKTIGT

Indikerar en farlig situation som skulle kunna resultera i skada på egendom om den inte undviks.

1.3 Symbolguide



FÅR INTE
PUNKTERAS
ELLER SKÅRAS



HÄNGTORKA



BLEK INTE



KEMTVÄTTA INTE




FÖRSÄKRAN OM
ÖVERENSSTÄMMELSE



STRYK INTE



PLACERA INTE
I NÄRHETEN AV
FLAMMOR

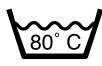

REKOMMENDERAD 80°C



TORKTUMLA PÅ LÅG
VÄRME MAX 40°C




FÖR GRÄNSER GÄLLANDE
ANVÄNDARVIKT, SE TEKNISK
DATATABELL


Bruksanvisning Tryckomfördelande kuddsortiment

2. Användning

2.1 Avsedd användning

Direct Healthcare Groups sortiment av tryckomfördelande kuddar är utformat för att både förhindra och behandla trycksår och är avsedda att användas tillsammans med en stol / rullstol av lämplig storlek, som en del av ett allmänt vårdprogram för att förebygga trycksår.


 **VARNING** Din kliniker ska avgöra vilken kudde som är lämplig för ditt individuella bruk, denne ska även fatta beslut gällande den lämpligaste metod som förebygger trycksår eller behandlingsplan, samt de relevanta vårdmetoderna.

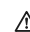
 **VARNING** Följande bruksanvisning ska användas tillsammans med produktinformation och kommer att ge dig instruktioner om hur man får bästa resultat när man använder en av våra tryckreducerande kuddar, skulle du behöva ytterligare information, kontakta vår kundtjänst på +44 (0) 800 043 0881.

2.2 Vid leverans av din nya kudde


! VIKTIGT Öppna den yttre förpackningen minst 1 timme före användning för bästa prestanda. Avyttra alla förpackningar i enlighet med relevant miljöpolicy.


2.3 Använd din kudde

 **FÖRSIKTIGHET** Kontrollera att stolen inte har några hårda kanter som kan förstöra kudden före du använder den. Kontrollera att blixtlåset är stängt och att blixtlåsknappningen täcker blixtlåset helt. Undvik kontakt med vassa objekt som kan skada kudden.

 **VARNING** Vid användning av ytterligare lager mellan kudden och patienten, såsom fårskin eller andra liknande objekt kan tryckets effektivitet minska samt försämra kuddens egenskaper eller rent av leda till en extra ökning av kroppstemperatur som kan orsaka klåda och är därför inte rekommendabelt. Sök klinisk rådgivning om du skulle vilja använda några andra överdrag än överdraget som har levererats tillsammans med kudden.

Var försiktig vid användning av mekaniska objekt såsom kopplingsskivor, PAT-lakan eller annan assisterande patienttransport, att skada inte uppkommer på kudden på grund av vassa eller skadade kanter.

 **VARNING** Den maximala användarvikten för din kudde beror på vilken kudde som passar patienten bäst. Kontrollera att patientens bakdel inte hänger ut över kuddens kant när denne sitter ner, då detta skulle innebära att patienten är för bred för den specifika kuddstorleken. Olika kuddstorlekar finns tillgängliga.

 **VARNING** Kontrollera att kudden är placerad och roterad korrekt. Följ alltid din kuddes märkta instruktioner. Använd inte kudden utan överdraget som levererades av tillverkaren.

2.4 Lägesändring av patient

! VIKTIGT Din tryckomfördelning kommer inte bara att ge den bästa tryckomfördelningen utan även utmärkt patientkomfort och produktlivslängd. För att undvika uppbyggnad av tryck, som kan leda till vävnadsskada och eventuell formation av trycksår, är det viktigt att patienten antingen ändrar läge på egen hand, eller med hjälp ändrar läge regelbundet. Det här ska baseras på klinisk bedömning från kvalificerad sjukvårdspersonal som även kommer att tillhandahålla dig med en lämplig vändningsregim.

3. Rengöring och skötsel

Kuddens rengöringsmetod beror på kontamineringsens natur och patientens känslighet.

Rengöring ska ske både före och efter användning, samt efter varje patient.

3.1 Lätt nedsmutsad

! VIKTIGT Vid frånvaro av grov nedsmutsning eller ovanlig risk, ta bort smuts och rester med händerna, tillsammans med rent varmt vatten och neutralt rengöringsmedel. Men, vid behov kan överdraget torkas av med 0,1 % Hypokloritlösning (1 000 ppm). Försäkra att överdraget är sköljt med rent vatten, använd en engångstrasa som inte är sträv och helt torr. Försäkra adekvat ventilering.

3.2 Mycket nedsmutsad

! VIKTIGT Vid fall av grov nedsmutsning ska kuddens överdrag rengöras först med rengöringsmedel och vatten, därefter med en utblandad lösning på 1 % Hypoklorit (10 000 ppm). Skölj ordentligt med rent vatten och en fuktig engångstrasa som inte är skrovlig. Försäkra adekvat ventilering. Engångshandskar och förkläde ska användas. Om det finns risk för stänk ska även ögon- / ansiktsskydd bäras. Efter borttagning av handskar, rengör händerna.

3.3 Torkning

! VIKTIGT Kontrollera att kuddöverdraget har torkat ordentligt före det placeras på kudden. Fuktiga miljöer har visat sig leda till återupptagande av bakterietillväxt.

I kollektiva miljöer, kan det vara önskvärt att överdraget tvättas efter att det inre skummet tagits bort. I sådant fall, ska överdraget tvättas i högst 80 °C. För att undvika att överdraget krymper ska det endast torktumlas på låg värmeinställning på högst 40 °C och under högst 10 minuter. Överdraget måste torka ordentligt innan det placeras på kudden på nytt.

3.4 Inspektion

⚠ VARNING Kontrollera överdragets inre och yttre ytor samt dess blyxtlås regelbundet för skador. Om överdraget är fläckat, smutsigt eller sönderslitet, ska även skummet kontrolleras för kontaminering. Skadade / smutsiga överdrag och skum ska rapporteras till avdelningschefen.

Om kudden är våt i mitten eller mycket fläckad, ska den inte användas mer. Vi rekommenderar även att stolen rengörs efter varje patient.

4. Underhåll

4.1 Granskning

⚠ FÖRSIKTIGHET Det rekommenderas att granskning av alla kuddar på avdelningen sker var 6:e månad eller årligen. I kollektiva miljöer, ska även granskning ske under samma perioder och göras efter varje patient. Fler detaljer om hur granskningen av din kudde, inklusive överdrag, luftceller och tryckventiler ska utföras, finns tillgänglig hos Direct Healthcare Group.

5. Efter användning

5.1 Förvaring

⚠ FÖRSIKTIGHET Kuddar kan skadas om de förvaras felaktigt.

Det rekommenderas att kudden bevaras i en torr, ren miljö och inte på golvet. Förvara inte kudden i närheten av uppvärmningsanordningar såsom elektriska kaminer eller värmeledningselement. Där möjligt, ska kuddar lagras inuti ett skyddande överdrag.

5.2 Återanvändning

! VIKTIGT Ett rengöringsregister måste finnas som en del av rengöringssystemet. Produkten kan återanvändas. Antalet gånger den kan användas beror på hur ofta, samt hur produkten används. Före återanvändning, rengör produkten noggrant i enlighet med riktlinjerna.

5.3 Kassering

! VIKTIGT Kassering och återanvändning av apparat samt förpackning måste följa varje lands förordning.

6. Quality & Testing

6.1 Service Life

Vi uppskattar en livslängd på fyra år för dessa produkter, givet att de används i enlighet med de riktlinjer som fastställs i det här dokumentet och att alla underhålls- och servicekrav möts.

Den uppskattade livslängden kan förlängas om produkten används med försiktighet och lagras korrekt, samt givet att tekniska och vetenskapliga framsteg inte resulterar i tekniska begränsningar. Livslängden kan även förkortas avsevärt vid extrem eller felaktig användning. Det faktum att vi har uppskattat en livslängd för dessa produkter utgör inte en extra garanti.

6.2 Produktgarantiperioder

Se produktinformation för kuddens garantiperiod. Kuddens garanti är giltig från och med tiden för leverans. Om defekt eller fel upptäcks, kontakta kundservice på +44 (0) 800 043 0881.

6.3 Brandtest

Direct Healthcare Groups produkter har oberoende brandtestats. Överdragen följer BS 7175. Kuddarna följer BS EN 597-1:1995, BS EN 597-2:1995, och där tillämpligt BS 7176 gällande låg eller medelhög risk.

6.4 Kvalitetsstandard

Kvalitet är fundamentalt för företagets drift, och vi arbetar inom disciplinerna för BS EN ISO 9001: 2008 och ISO 13485: 2012. Alla Direct Healthcare Groups kuddprodukter är CE-märkta, i enlighet med Direktiv 93/42/EEC för läkarutrustning.

Alla ansträngningar har gjorts för att försäkra att innehållet av den här publiceringen är uppdaterad vid publiceringsdatumet. Som en del av vår fortlöpande förbättringsprocess, reserverar sig Direct Healthcare Group för rättigheten att modifiera existerande modeller när som helst.

7. Tekniska data

Produkt	Garanti	Brandtest	Kvalitetsklass och färg	Nominellt densitetsområde (kg / m3)	Nominellt hårdhetsområde (N)	Maximal användarvikt (kg)	Produktvikt (kg)
Dyna-Tek™ Gelekudde	2 år	BS7176	Blå	Skum 34	100	159	3
Dyna-Tek™ Pad kudde	2 år	BS7176	Beige RX 36 / 125	34 – 36	125	127	1
Dyna-Tek™ Superior	2 år	BS7176	Beige RX 36 / 125 Blå RX 39 / 200	34 – 36	125	127	1.3
Dyna-Tek™ Posture Visco	2 år	BS7176	Vit inte tillgänglig Blå RX 39 / 200	Visko 60 Skum 38 – 40	Inte tillgänglig	178	1.3
Dyna-Tek™ Owl	2 år	BS7176	Beige inte tillgänglig	40 – 45	250 / 260	152	1.3
Dyna-Flex™ Cushion	2 år	BS7176	Vinröd	Visko 55 – 60 CME-bas 38 – 40	200	152	1
Dyna-Tek™ Profile	1 år	BS7176	Ljusblå	CME-bas 38 – 40	200	114	>1
Transflo-kudde	2 år	BS7177	Vit	40 – 60	Inte tillgänglig	178	2.5
Dyna-Tek™ Intelligent Air	2 år	BS7176	Svart	38 - 40	120	152	2

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®



Storbritannien
Direct Healthcare Group
Withey Court, Western Industrial
Estate Caerphilly, Storbritannien
CF83 1BF
T: +44 (0) 800 043 0881
info@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com

Asien och Stillahavsområdet
Direct Healthcare Group PTY Ltd.
PO Box 562, Wembley
Western Australia, 6913
T: +61 (0) 423 852 810
info@directhealthcaregroup.com.au
www.directhealthcaregroup.com