

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Florien II

Bruksanvisning



Viktigt:

Läs noggrant igenom före och behåll för framtida referens.

Det är vårdgivarens / användarens ansvar att försäkra att de är helt medvetna om och har förstått alla säkerhetsinstruktionerna på dessa sidor innan de installerar eller använder stolen.

Innehåll

| | | | |
|---|----------|---|-----------|
| 1. Introduktion till Florian II-stolen | 4 | 7. Tillbehör | 12 |
| 1.1. Varför behövs den här typen utav stol? | 4 | 7.1. Sidostöd | 12 |
| 2. Riktlinjer för garanti | 5 | 7.2. Höjdjusterbart och uppfällbart fotstöd | 12 |
| 2.1. Garanti och ansvar | 5 | 7.3. Nackstöd | 13 |
| 2.2. Användning | 5 | 7.3.1. Dämpande nackstöd | 13 |
| 2.3. När garantin inte gäller | 5 | 7.3.2. Viktat universellt nackstöd | 13 |
| 2.4. När garantin gäller | 5 | 7.4. Höftbälte och D-ringfäste | 13 |
| 2.5. Lagstadgade rättigheter | 5 | 7.5. Bäckpositionering | 15 |
| 2.6. Varning | 5 | 8. Återanvända och återutfärda | 16 |
| 3. Klinisk tillämpning | 6 | 8.1. Modularitet | 16 |
| 3.1. Avsedd användning | 6 | 8.1.1. Sättesmoduler | 16 |
| 3.2. Vem lämpar sig Florian II för? | 6 | 8.1.2. Ryggmoduler | 16 |
| 3.3. Vem lämpar sig Florian II inte för? | 6 | 8.1.3. Armmoduler | 16 |
| 4. Produktinformation | 6 | 8.1.4. Benstöd kudde | 16 |
| 4.1. Produktidentifiering | 6 | 8.2. Kassering av stol | 16 |
| 4.2. Nyckelfunktioner | 6 | 9. Vård och underhåll | 17 |
| 4.3. Tryckhanteringsalternativ | 7 | 9.1. Livslängd | 17 |
| 4.4. Tillbehör | 7 | 9.2. Periodiska kontroller | 17 |
| 5. Riktlinjer för bästa praxis | 7 | 9.3. Rengöring | 17 |
| 6. Bruksanvisningar | 8 | 9.3.1. Rengöring av ram | 17 |
| 6.1. GAllmän drift | 8 | 9.3.2. Rengöring av stoppning | 17 |
| 6.2. Ställa in Florian II för användning | 8 | 10. Tekniska data | 19 |
| 6.3. Hjul | 8 | 10.1. Tillverkningsadress | 19 |
| 6.3.1. Hjul med riktade lås | 9 | 10.2. Maximal användarvikt | 19 |
| 6.3.2. Stort hjul alternativ | 9 | 10.3. Stolens vikt och dimensioner | 19 |
| 6.4. Tiltfunktion | 10 | 10.4. Produktstandarder | 19 |
| 6.5. Justering av sätets djup | 10 | 10.4.1. Testa flambeständighet | 19 |
| 6.6. Upphöjt benstöd | 11 | 10.4.2. Styrka, stabilitet, hållbarhet, risk och säkerhet | 20 |
| 6.7. Vridbart nackstöd | 11 | 10.4.3. Kvalitet och miljö | 20 |
| 6.8. Avtagbara armar | 11 | 11. Kundtjänst | 20 |

1. Introduktion till Florian II-stolen

Tack för ditt köp av en Direct Healthcare Group (DHG) Florian II-stol.

Ett dynamiskt och mycket mobilt sätessystem, Florian II möjliggör större oberoende genom att främja korrekt ställning och underlätta en stödjande, bekväm sittställning.

1.1. Varför behövs den här typen utav stol?

Möjligheten för en sittande person att fungera effektivt och utföra aktiviteter beror på deras förmåga att hitta den lämpliga ställningen. All aktivitet beror på kroppshållning, om en person inte kan röra sig eller har svårigheter att justera sin kroppshållning, kan det vara nödvändigt att använda ett säte för att försöka tillhandahålla den här kroppshållningen.

Florien II hjälper till att uppfylla behovet att bibehålla en individs sittställning, samt inrikta och omfördela tryck. Det här har uppnåtts genom att man använder tiltfunktionen och benstöd höjningsegenskaper som är nyckeln till Florian II-stolens funktionalitet.

2. Riktlinjer för garanti

2.1. Garanti och ansvar

Direct Healthcare Group ger köparen en garanti att den levererade varan kommer att vara fri från brister på grund av dåligt utförande, design eller material under en period på (12) månader från och med leveransdatum. Florian II-stolsram har tio (10) års garanti exklusive skada på hjul och stoppning. En årlig underhållsservice rekommenderas men är inte nödvändig.

2.2. Användning

- a) Alla Direct Healthcare Groups produkter är utformade för ett specifikt användningsområde.
- b) Det är därför viktigt att köparen köper den korrekta produkten. Om köpare har för avsikt att köpa varor för icke godkänt bruk måste denne använda sina egna färdigheter och omdöme.
- c) Ingen anställd eller agent på Direct Healthcare Group är auktoriserad att rekommendera icke godkända användningsområden, och köparen ska inte förlita sig på den typen av rekommendationer.
- d) Bruksanvisningarna ska alltid följas.

2.3. När garantin inte gäller:

- a) Användning av felaktiga rengöringsprodukter kan skada materialets yta.
- b) Felaktigt underhåll som inte godkänts av Direct Healthcare Group.
- c) Modifieringar av köparen på ursprungsvaran.
- d) Felaktigt transportsätt av varan.
- e) Normalt slitage.
- f) Felaktig användning:
 - Att sitta på stolens armstöd.
 - Att sitta på stolens ben- eller fotstöd.
 - Att slå i personer eller föremål med stolen, såsom väggar, dörrar, sängar, bord, stolar o.s.v.
 - Att spilla mat, urin, avföring och annat i stolen och inte rengöra det snabbt efter spillning inträffat (2 minuter), orsakar ofta att stolen luktar illa och blir en hälsofara. Dessutom, stoff penetrerar överdragsmaterial, sömmar och skum.
 - Överdrivet våld som används på stolens rörliga delar, kan förstöra eller böja metall- och trädelarna.
 - Att knuffa stolarna upp och ner för trappor eller över hinder med en person sittande i stolen skadar hjul, ramverk och stoppning.

2.4. När garantin gäller:

Direct Healthcare Group kommer:

- a) Korrigera defekten eller
- b) När Direct Healthcare Group anser att en korrigering är omöjlig kommer produkten att ersättas.

2.5. Lagstadgade rättigheter

Ingenting i våra villkor och bestämmelser eller i dessa riktlinjer ska påverka konsumentens lagstadgade rättigheter.

2.6. Varning

I den här manualen indikeras varningar med symboler. Varningssymbolerna kommer tillsammans med en rubrik som indikerar hur allvarlig faran är.



VARNING

Indikerar en farlig situation som skulle kunna resultera i allvarlig skada eller dödsfall om den inte undviks.



FÖRSIKTIGHET

Indikerar en farlig situation som skulle kunna resultera i en mindre eller lätt skada om den inte undviks.



VIKTIGT

Indikerar en farlig situation som skulle kunna resultera i skada på egendom om den inte undviks.

3. Kliniska tillämpningar

3.1. Avsedd användning

Florien II är lämplig för följande användarmiljöer:

- Vårdinrättningar såsom sjukvård och vårdhem.
- Sjukhusmiljöer.
- Hospisvård.
- Kollektiva bostäder.
- Privata bostäder.
- Enskilda eller kollektiva miljöer.

3.2. Vem lämpar sig Florian II för?

Florien II-stolen är lämplig för följande användare:

- Halvt-mobiliserade och icke-mobiliserade användare som behöver assistans med att ta sig in och ut från stolen.
- Användare som behöver moderat kroppshållningsstöd när de sitter ned.
- Användare som sidförflyttas.
- Användare som har en låg till medelhög risk för tryckskador (stolar som är utrustade med Reflexion™ sätesskum).
- Användare med hög risk eller upp till en grad II tryckskada (stolar utrustade med ett Intelli-Gel® säte) efter en klinisk bedömning.
- Användare som har allt från hög risk till väldigt hög risk eller med upp till en grad IV tryckskada (på stolar utrustade med en Dyna-Tek® Intelligent luftsäte) efter en klinisk bedömning.
- Användare med mild till allvarlig nedsatt kognitiv förmåga.

3.3. Vem lämpar sig Florian II inte för?

Florien II är inte lämplig för följande användare:

- Fullt mobiliserade användare om denne inte är helt övervakad av sjukvårdspersonal i en behandlingsmiljö och följer en klinisk bedömning.
- Användare med komplex kroppshållning som kräver signifikant stöd.

4. Produktinformation

4.1. Produktidentifiering

Varje Florian II-stol har ett unikt nummer för att möjliggöra snabb identifiering. Det här numret kan hittas på undersidan av stolens sätesmodul.

4.2. Nyckelfunktioner

Florien II-stolen inkorporerar flera funktioner för att göra det möjligt för lämpliga brukare att få en lämplig sittställning.

- Manuell tilfunktionsåtgärd.
- Manuell höjning av benstöd.
- 25° negativ benstödsinkel för att ackommodera kontrakturer vid knäet eller för att hjälpa till vid stående förflyttningar.

- Avtagbara armar för enklare liftåtkomst och sidförflyttningar.
- Integrerat nackstöd med flera lägen.
- Bekvämt format ryggstöd.
- Ergonomiskt beläget påskjutningshandtag.

| | |
|--|--|
| Sales Order No. |  |
| Date of Manufacture..... | Direct Healthcare Group Ltd, Withey Court, Western Industrial Estate, Caerphilly, UK, CF83 1BF Tel: +44 (0)800 043 0881 |
| Client's Name..... | |
| Product | |
| Meets B.S. 5852 for cigarette and match, also crib 5 over CMHR foam. Meets 'The Furniture & Furnishing (Fire) (Safety) Amendment Regulations 1993' | |

4.3. Tryckhanteringsalternativ

Tryckhantering är kritiskt för de som sitter ner under långa perioder. Florien II har trycklindrande skum på stolens kontaktyta och flera alternativ finns tillgängliga för sätesmodulen och kan anpassas utifrån brukarens behov.

Om du är osäker på lämpligheten av din tryckvård, sök råd och information från en kvalificerad arbetsterapeut, sjuksköterska som är specialiserad inom vävnadsviabilitet, sjukvårdspersonal och / eller Direct Healthcare Groups representant / återförsäljare för köp.

4.4. Tillbehör

Flera alternativa tillbehör finns tillgängliga för att användas tillsammans med Florien II-stolen. Kontakta Direct Healthcare Groups kundtjänst på vårt **gratisnummer 0800 043 0881** eller din lokala återförsäljare för aktuella priser och tillgänglighet.

Om du är osäker på lämpligheten av någon av dessa tillbehör för din Florien II-stol, sök råd och information från en kvalificerad arbetsterapeut, sjukvårdspersonal och / eller Direct Healthcare Groups representant / återförsäljare för köp.

| | | | |
|--------------|---|--------------|---|
| NG501 | Florien sidostöd (ett par) | DU705 | Easicare stort 4-punkt höftbälte med fästen |
| NG586 | Florien uppfällbart fotstöd | KB724 | Höftbälte (kräver D-ringremmar) |
| NG401 | Florien nackstöd | KB705 | Stor bäckenpositionering (kräver D-ringremmar) |
| NG402 | Florien universellt nackstöd i Dartex | KB726 | Stor vadderad bäckenpositionering i vinyl (kräver D-ringremmar) |
| NG403 | Florien universellt nackstöd för stol stoppningstyg | KB719 | Stor fleecetäckt bäckenpositionering (kräver D-ringremmar) |
| NG582 | Armmoduler för 400 sätesbredd (ersättningspar) | UL706 | D-ringremmar (lång) |
| NG583 | Armmoduler för 450 sätesbredd (ersättningspar) | KB313 | Universell rörlig bricka |
| NG584 | Armmoduler för 500 sätesbredd (ersättningspar) | | |
| DU701 | Easicare medelstort 4-punkt höftbälte med fästen | | |
| DU703 | Easicare medelstort 2-punkt höftbälte med fästen | | |
| DU704 | Easicare stort 2-punkt höftbälte med fästen | | |



FÖRSIKTIGHET

Använd endast tillbehör tillsammans med Florien II-stolen, som rekommenderats av Direct Healthcare Group.

5. Riktlinjer för bästa praxis

För att försäkra bra praxis när man funderar på att köpa en Florien II-stol, och effektiv användning efter köp, rekommenderar vi att man tar hänsyn till följande riktlinjer:

- Sök råd och information från en kvalificerad arbetsterapeut, sjukvårdspersonal och / eller Direct Healthcare Groups representant / återförsäljare vid beställning av stolen.
- Man ska matcha stolens dimensioner till brukarens kroppsstorlek, för att garantera att bra hållning, stöd, komfort och säkerhet. All tryckvård, rörelse och hantering, inkontinens eller infektionskontroll ska tas hänsyn till och lämpliga råd ska tas från kvalificerad sjukvårdspersonal.
- Miljöfaktorer ska även tas hänsyn till och bedömas, dessutom ska alla potentiella risker och faror identifieras och tas hänsyn till för att garantera användarens säkerhet.
- När en stol väljs ut, rekommenderar vi att en riskbedömning utförs för att garantera att den kommer vara säker och lämplig för stolens användare(na) och för alla som befinner sig i stolens omgivning. Allmän bedömning gällande produktens lämplighet för användaren är viktigt.
- Alla vårdgivare som kommer att övervaka användare(n) ska utbildas i hur stolen används, för att garantera att korrekt positionering av brukaren uppnås.

6. Bruksanvisningar

Ändamålet av dessa användarinstruktioner är att försäkra säker drift, justering och underhåll av din Florian II-stol.

Stolen är redo att användas så fort den har installerats helt i korrekt position och alla vårdgivare / användare har läst igenom och förstått instruktionerna gällande drift.

Säkerhetsråd inkluderas i dessa bruksanvisningarna och det är operatörens ansvar att försäkra att dessa har lästs igenom och förstås fullt ut. Om det finns några frågor eller bekymmer, kontakta Direct Healthcare Group representanten, återförsäljare eller Direct Healthcare Groups kundtjänst på vårt **avgiftsfria nummer 0800 043 0881**.

Behåll dessa instruktioner för framtida referens.

6.1. Allmän drift

Produkten ska **aldrig** modifieras eller förändras efter köp av andra än Direct Healthcare Groups auktoriserade personal.

Det är viktigt att Florian II-stolarna används korrekt, om det finns några tvivel gällande produktens lämplighet för användaren, ska professionella råd sökas från en kvalificerad sjukvårdspersonal såsom en arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska som är specialiserad inom vävnadsviabilitet eller rörelse- och hanteringspecialist.

Om du vill diskutera säkerhetsfrågor mer detaljerat, ring vår kundtjänst på vårt **avgiftsfria nummer 0800 043 0881**.



FÖRSIKTIGHET

När stolen används, se alltid till att användaren kontrolleras regelbundet för säkerhet och inte lämnas ensam under långa tidsperioder.



VARNING

Knuffa inte stolen upp eller ner för trappor eller en brant lutning, då detta kan resultera i att man förlorar kontroll.



VARNING

Florien II är inte lämplig att användas av barn. Alla barn som finns i stolens omgivning ska övervakas hela tiden.



VARNING

Försäkra att inget hindrar stolen att röra sig fritt innan stolen används.



FÖRSIKTIGHET

Sitt aldrig på stolens armstöd.

6.2. Ställa in Florian II för användning

Vid leverans av stolen, ska emballaget tas bort försiktigt så att stoppningen inte skadas.

Bruksanvisningen ska läsas igenom av alla som kommer använda stolen och kontrollera att stolen installeras korrekt före användning.



VIKTIGT

Använd inte vassa saxar eller knivar för att klippa bort plastemballaget från stolen, då detta kan skada stoppningen.

6.3. Hjul

Florien II är monterad som standard med fyra 100 mm / 4 tum hjul, med två svängbara hjul framtill och två låshjul baktill som inte kommer rulla eller svänga när bromsarna är aktiverade.

För att använda bromsarna på de bromshjulen, tryck ner den **röda** upphöjda främre kanten på varje hjuls upphöjda dyna (Fig 1).

För att låsa upp bromsarna, tryck försiktigt ner den upphöjda veckade dynan med din fot, fram tills den är i nivå med resten av hjulhuset (Fig 2). Hjulen ska rulla fritt.

**VARNING**

Kontrollera att hjulens bromsar är aktiverade när brukaren lämnas ensam i stolen.

**VARNING**

Kontrollera att stolen befinner sig på en jämn yta före en patient lämnas ensam.

**VARNING**

Kontrollera att alla fyra hjul är i kontakt med golvytan före patienten lämnas ensam.

**VARNING**

Kontrollera att hjulens bromsar är aktiverade när brukaren tar sig in eller ut från stolen för att undvika att stolen rör på sig.

**FÖRSIKTIGHET**

Kontrollera att inget hindrar stolen att röra sig fritt före bromsen lossas och man försöker flytta stolen.

**FÖRSIKTIGHET**

Kontrollera alltid att hjulen är upplåsta före stolen förflyttas.



Låst



Upplåst

6.3.1. Hjul med riktade lås (valfritt tillbehör)

Florien II-stolarna kan monteras med hjul som har riktade lås som ett extra tillbehör. Det här gör det möjligt att ett hjul blir låst i en 'framåt' riktning.

Det bakre högra hjulet är ett hjul med riktningslås (grön) som kan låsas i en framåtposition, vilket gör det enklare att knuffa stolen i en rak linje.

- Tryck ner den gröna främre kanten på den veckade dynan. Knuffa sedan stolen framåt för att aktivera riktningslåset.

Ett "klick" kommer att ljuda när den är i en framåtriktad position.

- För att avaktivera riktningshjulet, tryck ner den gröna veckade dynans överkant fram tills den är i linje med resten av hjulets överkant.
- Kontrollera att hjulets riktningslås är inaktiverat före manövrering av stolen i trånga utrymmen.
- De andra tre hjulen kommer att ha helt låsta hjul men en rödfärgad flik som inte kommer rulla eller svänga när bromsen är aktiverad.

**6.3.2. Alternativ för stort hjul (valfritt vid tillverkning)**

Florien II-stolar med stort hjul, monteras med 315 mm diameter bakhjul, en bromsstång och 125 mm framhjul.

För att aktivera bromsen, tryck ner den fjäderbelastade bromsstången för att låsa upp bromsen, tryck upp bromsstången igen med foten.

**VARNING**

Kontrollera att bromsen är aktiverad när brukaren lämnas ensam i stolen.

**VARNING**

Kontrollera att bromsen är aktiverad när brukaren tar sig in eller ut från stolen för att undvika att stolen rör på sig.

**VIKTIGT**

Kontrollera alltid att hjulen är upplåsta före stolen förflyttas.

6.4. Tiltfunktion Vad är tiltfunktion?

Tiltfunktionen är ett svängningssystem som tillhandahåller en lutande, vilande position samtidigt som kroppsställning och bäckenstabilitet upprätthålls.

Huvudändamålet för tiltfunktionen är att minska trycket på bakdelområdet och att tillhandahålla muskelavslappning i den nedre delen av ryggen.

När stolen lutas omfördelas brukarens vikt över en större kontaktyta, vilket är ett enkelt och effektivt sätt att motverka uppbyggnaden av tryck i sittregionen.

Drift

Det rekommenderas att tiltfunktionens vinkeln ändras regelbundet för att minska risken för att brukaren utvecklar trycksår.

Lokalisera spaken på höger sida av påskjutningshandtaget, som finns på stolens baksida och tryck mot påskjutningshandtaget för att lösgöra lutningslåset.

Tryck hårt ner påskjutningshandtaget med båda händerna för att luta stolen bakåt eller lyft upp påskjutningshandtaget för att höja stolen.

- När som helst under uppåt- eller nedåtlutning kan spaken släppas och stolen kommer att låsas i den valda positionen.
- Det rekommenderas alltid att läget på benstödet justeras så fort tiltfunktionens position har valts, för att garantera en korrekt och bekväm ställning.



VARNING

Lämna aldrig en användare som har dålig kroppshållning när denne sitter i en helt upprätt position utan övervakning då de kan välta framåt eller glida ut från stolen helt.



VARNING

Kontrollera att patientens händer hålls borta från stolens ryggstöd när stolen lutas, för att undvika klämrisk i lutningsmekanismen.



FÖRSIKTIGHET

Det rekommenderas att man använder ett höftbälte eller bäckenpositionering (alternativa tillbehör) på användare som har dålig sittställningsförmåga.



VARNING

Kontrollera alltid att det inte finns något som hindrar stolen att röra sig fritt.

6.5. Justering av sätets djup

Trots att sätesdjupet kommer att ställas in på djupet som specificerats vid tillverkning, så kan det här justeras utifrån behov vid ett senare tillfälle.

Florien II erbjuder tre sätesalternativ för sätesdjup, 435 mm, 460 mm eller 485 mm.

För att justera sätets djup:

- Lokalisera de fyra tumskruvarna under sätesmodulen.
- Skruva bort alla fyra tumskruvar.
- Flytta sätesmodulen bakåt eller framåt till dess önskade position, och placera tumskruvarna i de korrekta hålen.
- Spänn alla tumskruvarna på nytt.



FÖRSIKTIGHET

Kontrollera alltid att tumskruvarna är ordentligt spända efter sätesdjupet har justerats.



VIKTIGT

Justera endast sätets längd när stolen är tom.

6.6. Upphöjt benstöd

Lokalisera benstödet utlösningsspak i botten på höger sida, mot det främre hjulet (när den ses från baksidan).

Benstödet kan höjas eller dras tillbaka genom att man drar i spaken med vänster hand samtidigt som man flyttar benstödet med höger hand och sedan släpper spaken för att låsa fast benstödet i dess position. Detta gör det möjligt för vårdgivaren att ha ögonkontakt med brukaren.

En negativ benstödsvinkel kan uppnås med benstödet för att biträda brukare med kontrakturer såväl som hjälpa dem att ta sig ut ur stolen.

Sänk benstödet före stolen återvänder till dess helt uppräta positionen så att användaren enkelt kan ställa sig upp från stolen.



FÖRSIKTIGHET

Sitt inte på benstödet. Benstödet är inte utformat för att stödja en vuxen persons vikt.



FÖRSIKTIGHET

När benstödet dras tillbaka, håll händerna borta från säteskudden för att inte riskera att klämma fingrarna.



FÖRSIKTIGHET

När benstödet dras tillbaka, kontrollera att brukarens ben finns i mitten av benstödet för att undvika risken att brukarens ben eller fötter fastnar mellan benstödet och stolsramen.



VIKTIGT

När benstödet sänks, eller stolen återvänder från en lutad till upprätt position, är det rekommendabelt att fotstödet justeras (alternativt) till den kortaste positionen eller att det tas bort helt för att undvika skada på fotstödet eller golvet. Om det lämnas utdraget, kommer det falla i golvet när stolen lutar framåt och skulle förstöras.

6.7. Vridbart nackstöd

Det vridbara nackstödet är en integrerad del av Florien II-stolens bakdel. Rotationspunkten är belägen ungefär 30 cm (12 tum) från stolens ovansida.

För att justera nackstödet:

Stå bakom stolen och placera en hand på tryckhandtaget. Använd den andra handen och tryck ordentligt framåt på ovansidan av ryggstödet fram tills nackstödet är i önskad position.

Friktionslåset kommer försäkra att den här positionen upprätthålls och kommer inte ändras när stolen används.



6.8. Avtagbara armar

Den här unika egenskapen hos Florien II-stolen möjliggör sidförflyttning, samt underlättar liftåtkomst.

För att ersätta armarna:

- Ta upp den borttagna armmodulen, håll den i det bakre hörnet och framsidan där armen möter sätet.
- Stå vid sidan om stolen och positionera armen så att den vilar ovanpå säteskudden.
- För metallplattan på insidan av armen på metallbygeln bredvid säteskudden och tryck ner ordentligt.
- Armens baksida ska ställas upp nära nackstödet och armens framsida ska möta sätets ovansida.



**VARNING**

Kontrollera alltid att armen är fäst på sin plats före stolen används.

**VARNING**

Använd ett sidbräde eller draglakan vid förflyttning av en patient sidleds, för att undvika risk för skador på brukaren.

**VARNING**

Extrem försiktighet ska tas vid borttagning av armarna för att försäkra att stolens brukare inte faller åt sidan eller ramlar ut ur stolen.

**VARNING**

Kontrollera att armen är säkert på plats genom att försöka dra armen från sida till sida, före brukaren lämnas ensam.

7. Tillbehör

Flera alternativa tillbehör finns tillgängliga för att användas tillsammans med Florien II-stolen. Kontakta Direct Healthcare Groups kundtjänst på vårt **avgiftsfria nummer 0800 043 0881** eller din lokala återförsäljare för aktuella priser och tillgänglighet.

Om du är osäker på lämpligheten av någon av dessa tillbehör för din Florien II-stol, sök råd och information från en kvalificerad arbetsterapeut, sjukvårdspersonal och / eller Direct Healthcare Groups representant / återförsäljare för köp.

7.1. Sidostöd

Sidostöd hjälper till att upprätthålla en individs ställning och uppmuntrar ett lämpligt mellanliggande läge.

Sidostöd används vanligtvis tillsammans, där en av dem är monterad till en av Florien II-stolens sidor. De justeras oberoende men fungerar på samma sätt.

Sidostöden sätts fast på stolen via sidostödets stång på stolens baksida.

För att fästa eller ta bort sidostöden, skruva enkelt bort det triangulära handtaget och låt varje stöd glida på eller av bygeln på stolens baksida.

- De två sidostöden kan flyttas horisontellt (bredare eller smalare) eller roteras vertikalt (upp och ner) för att ge stöd åt stolens brukare.
- När lämplig position har hittats, ska de triangulära handtagen spännas, för att tillhandahålla ett stabilt och säkert stöd.

**VIKTIGT**

Båda sidostöden kan tas bort helt vid behov eller roteras tillbaka på stolen. Det här är viktigt under borttagning av armmodulerna.

7.2. Höjjusterbart och uppfällbart fotstöd

Det höjjusterbara fotstödet tillhandahåller extra stöd och positionering för fötterna och är utmärkt för att undvika droppfot och andra liknande tillstånd.

Fotstödet kan höjas så att det ligger mot benstödet när man tar sig in eller ut ur stolen och fälls ner när används. När det är sänkt, sitter fotstödet i en 90° vinkel på benstödet.

**FÖRSIKTIGHET**

Vårdgivaren ska hålla händerna borta från fotstödet gångjärn när det uppfällbara fotstödet används, för att undvika att riskera att klämma fingrarna.

Fotstödet på Florian II-stolen är höjjusterbart:

- Höj benstödet till den önskade vinkeln (se avsnitt 6.6).
- Hela fotstödet ska sedan justeras genom att man lossar på de två fjäderbelastade "knäppningar" som fästs i hålen på benstödet metallsmide.
- "Knäppningarna" är belägna bakom benstödet ramverk. Sträck dig runt benstödet och dra ut båda sprintarna och vrid dem till 90° för att göra det möjligt att positionera fotstödet.
- Låt fotstödet glida upp eller ner efter behov och sätt tillbaka knäppningarna i 90° vinkel, se till att knäppningarna klickar fast i de korrekta hålen.
- Endast när knäppningen hörbart klickar på plats är fotstödet säkrat.



Låst

Upplåst



VARNING

Kontrollera att knäppningen är helt stängd och att fotstödet är säkrat före brukaren lämnas ensam.

7.3. Nackstöd

7.3.1. Dämpande nackstöd

Ett dämpande nackstöd med ett omslutande kardborrbandsfäste finns tillgängligt för extra komfort och positionering.

Nackstödet kan tas bort om så krävs genom att man lossnar på kardborrbandets fästremmar på stolens baksida och låter det glida av.

Fäst på nytt genom att fästa kardborrband på stolens baksida så tätt som möjligt i lämplig position för brukaren.

7.3.1. Viktat universellt nackstöd

Det viktade universella nackstödet kan användas tillsammans med Florian II-stolen för att tillhandahålla ytterligare komfort, stöd och positionering för brukarens huvud.

Placera den viktade knäppning över ryggstödet överdel och ställ in till den korrekta höjden för brukaren, sitter vanligtvis precis ovanför axlarna. Vikten i nackstödet knäppning garanterar att nackstödet stannar på sin plats.

7.4 Höftbälte och D-ringfäste

Höftbältet hjälper till att stabilisera bäckenet och placerar brukaren baktill i stolen så att denne kan få en bra sittställning och riskerna för vävnadsskada minskar och därmed även effekterna av skjuvning som kan uppstå om brukaren har en instabil kroppshållning.

När ett höftbälte används kan övervakning behövas beroende på brukarens förmågor.

Alla höftbälten ska justeras korrekt för att ge adekvat stöd åt brukaren utan att begränsa andningen eller orsaka obehag.

Det är viktigt att höftbältet inte sitter löst runt brukaren och inte får fungera löst, då det här kommer göra att bäckenet lutar bakåt, samt uppmuntrar brukaren att glida ner och upp i stolen, speciellt om denne är i en upprätt position.

Idealt kommer D-ringfästena för höftbältet och själva höftbältet att monteras vid tillverkningen men; de kan monteras i efterhand av en utbildad representant (se D-ringfäste).

För att använda höftbältet effektivt, öppna spännet som fäster remmens två delar, genom att knappen på den centrala konsolen trycks ned och remmarna placeras över armarna eller på sidan av sätet före brukaren placeras i stolen.

När brukaren sitter korrekt, sätt ihop spännets båda sidor och fäst dem.



För att justera höftbältet, dra på plastöglan för att ge en bra kontroll, men var försiktig så att brukarens rörelser inte begränsas. Höftbältet är utformat för att dras på över höfterna vid en vinkel på 45° och 60°.

Den här vinkeln hjälper till att upprätthålla ett vertikalt bäcken genom att höftleden positioneras både nedåt och bakåt.



D-ringfäste

Stolen kan levereras förmonterad med D-ringremmar om detta beställs vid tiden för tillverkning. Om detta är fallet, kommer de normalt vara synliga nära beröringspunkten mellan sätesmodulen och ryggkudden.

I det här fallet, kan höftbältet fästas till D-ringarna genom att man enkelt knäpper fast fjäderklämman på höftbältets ände på den synliga D-ringen.

Om stolen inte redan är monterad med D-ringar, ska dessa fästas till en fast del av stolens metallramverk på ena sidan av sätesmodulen, så att de kan matas in mellan sätet och armmodulerna.



VARNING

Om höftbältet är för löst finns det risk för att brukaren glider ned eller hamnar i en olämplig position. Höftbältet ska regelbundet kontrolleras för korrekt täthet. Var försiktig när höftbältet spänns, för att undvika att skada brukaren.



VARNING

Vadderingen och plastfästena ska kontrolleras åtminstone veckovis för tecken på skada. Om det är skadat, ska höftbältet inte användas.



VARNING

Brukaren befinner sig i risk om höftbältet inte har angivits och justerats i enlighet med specifika behov.



VARNING

Anfall, spasmer och kraftiga rörelser, exempelvis, såväl som att delvis lossna på höftbältet skulle kunna skada brukaren.

7.5. Bäckpositionering

Bäckpositionering används för att hjälpa till att positionera brukaren på ett säkert vis i stolens bakdel, och är lämplig för de som har låg muskeltonus eller dålig bäckenkontroll.

Montera bäckenpositionering på stolen

Kontrollera att stolen är tom före bäckenpositioneringen monteras.



Placera bäckenpositioneringen i stolens säte så att spännena i stolens framsida och spännenas klämmor pekar nedåt.



Mata in längden på remmarna genom D-ringarna på en av sättesmodulens sidor.



Placera remmarnas ändrar över stolens armar så att brukaren kan flyttas över till stolen.

Sätt brukaren i stolen med deras bäcken i den bakre delen av sätet och deras bakdel på bäckenpositioneringens bakre kant.



Lägg remmarna över brukarens lår och genom spännena på varje ände av bäckenpositioneringen, belägen mellan brukarens ben.



Spänn fast remmarna och fäst dem på spännena. Passformen ska vara åtsittande – inte för hårt och inte för löst.



FÖRSIKTIGHET

Var försiktig när positionen justeras för att undvika att kroppsdelar fastnar eller att kläms.



VARNING

Endast en utbildad eller ansvarsfull person ska justera produkten.



VARNING

Brukaren ska kontrolleras regelbundet och bäckenpositioneringen justeras, för att försäkra optimal placering och säkerhet.



VARNING

På grund av risk för korsinfektion, ska den här produkten inte användas av mer än en person.

8. Återanvända och återutfärda

Fastän Florien II-stolen har blivit skräddarsydd specifikt för brukarens behov vid tillverkning, med några modifieringar och justeringar, kan stolen återutfärdas och återanvändas i en kollektiv hälsovårdsmiljö.

Sök råd från en kvalificerad arbetsterapeut, sjukvårdspersonal och / eller Direct Healthcare Group representant / återförsäljare för Florien II-stolen används med en annan användare som stolen inte ursprungligen utfärdats för.



VARNING

Hänsyn till riskerna för korsinfektion måste tas i beaktning när stolarna återanvänds eller återutfärdas.

8.1. Modularitet

Florien II-stolen har en hållbar ram med modulära rygg-, arm-, säte- och benstödskomponenter. Dessa komponenter kan köpas separat efter behov, oavsett om det är för att ersätta en utsliten modul eller för att utfärda på nytt till en annan användare.

Kontakta Direct Healthcare Groups kundtjänst på vårt **avgiftsfria nummer 0800 043 0881** eller din lokala återförsäljare för aktuella priser och tillgänglighet.

8.1.1. Sättesmoduler

Florien II sättesmodulen har en standardstorlek för alla Florien II-stolarna.

Sättesmodulerna kan även tillverkas med tre nivåer av trycklindring:

- Reflexion™ sätteskudde i skum (för de med låg till medelhög risk för tryckskador).
- Intelli-Gel® sätteskudde (för de som befinner sig i hög risk för tryckskador eller de som har upp till en grad II tryckskada).
- Dyna-Tek® Intelligent Air sätteskudde (för de som befinner sig i väldigt hög risk för tryckskador eller de som har upp till en grad IV tryckskada).

Ett besök från en Direct Healthcare Groups utbildade ingenjör kommer behövas för att montera den ersättande sättesmodulen.

8.1.2. Ryggmoduler

En ersättande ryggmodul kan köpas för Florien II-stolen, vänligen kontakta Direct Healthcare Groups kundtjänst på vårt **avgiftsfria nummer 0800 043 0881** för mer information eller din lokala återförsäljare.

Ett besök från en Direct Healthcare Groups utbildade ingenjör kommer behövas för att montera den ersättande ryggmodulen.

8.1.3. Armmoduler

Ersättande armmoduler kan köpas för Florien II-stolen, vänligen kontakta Direct Healthcare Groups kundtjänst på vårt **avgiftsfria nummer 0800 043 0881** eller din lokala återförsäljare, för mer information.

8.1.4. Benstöd kudde

En ersättande benstödkudde kan köpas för Florien II. Kontakta Direct Healthcare Groups kundtjänst på vårt **avgiftsfria nummer 0800 043 0881** eller din lokala återförsäljare för mer information.

8.2. Kassering av stol

Florien II-stolen består framförallt av metall, plast, trä, skum och tygkomponenter. Kassering av varje enskilt material måste ske i enlighet med bestämmelser gällande miljö och kassering i det aktuella landet, och får endast ske efter stolen är helt nedmonterad.



9. Vård och underhåll

Kontrollera för tecken på skador eller överdrivet slitage, varje gång stolen används.

Om stolen visar tecken på överdrivet slitage, sluta genast använda den och kontakta Direct Healthcare Groups kundtjänst på vårt avgiftsfria nummer 0800 043 0881, eller din lokala återförsäljare för råd gällande reparation och restaurering.



VARNING

Underlåtelse att reparera skada eller slitage kan utsätta brukaren för skaderisk.

9.1. Livslängd

Stolens livslängd vid normalt dagligt bruk är 10 år. Ramverket, exklusive hjul och förbrukningsvaror, har en garanti på 10 år. Stoppning och andra förbrukningsvaror som har en garanti på 12 månader, såsom hjul, kan behövas ersättas under den här tidsramen.

Det rekommenderas att stolen granskas av en utbildad servicetekniker varje år, för att garantera att det är säkert att använda produkten (se 2. Riktlinjer för garanti).

9.2. Periodiska kontroller

Stolen ska kontrolleras varje gång den använts för tecken på skador eller överdrivet slitage för att garantera säker och korrekt drift.

Månatliga kontroller ska inkludera, men inte vara begränsade till:

- Alla skador på kablar eller inställningsspakar.
- Alla lösa eller avlägsnade delar.
- Kontrollera hjul för skador och ansamling av ludd och smutspartiklar.
- Alla skador på stolens tyg, inklusive smuts på tyget.

Om det finns ett fel, SLUTA genast att använda stolen, och kontakta Direct Healthcare's kundtjänst på vårt avgiftsfria nummer 0800 043 0881 eller din lokala återförsäljare för ytterligare rådgivning gällande reparation och restaurering.

9.3. Rengöring

Stolen ska hållas ren för att bibehålla stolens livslängd och utseende.

Regelbunden rengöring är viktigt för att minimera riskerna för korsinfektion mellan användare och vårdgivare, speciellt i en kollektiv vårdmiljö.



VARNING

Kontrollera att stolen fungerar korrekt efter rengöring.

9.3.1. Rengöring av ram

Stolens metallram kan rengöras med mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa.



VIKTIGT

Det är inte rekommendabelt att man rengör med skursvampar.

9.3.2. Rengöring av stoppning



VIKTIGT

För att minska risken för överföring av infektioner till vårdgivaren, använd alltid skyddshandskar vid dekontaminering eller rengöring av stolen.

Cadet-, Venture-, Berkshire- och Brookland- vinyl rengöringsinstruktioner (externa ytor)

Den här typen av vinyl är mycket repbeständig och har en färg som överensstämmer med bastyget.

Bakterie- och svampdödande skydd. Testad för AATCC147.

- Regelbunden rengöring och vård av tyget kommer att upprätthålla dess tillstånd och utseende. De flesta fläckar kan enkelt torkas bort.
- Den nya generationen av rengöringsdukar i mikrofiber är extremt effektiva med eller utan tvål för allmän vård och underhåll.
- Torka rent regelbundet med en fuktig trasa för att ta bort dammpartiklar och lätt nedsmutsning.
- Ta bort spill direkt (inom 15 minuter) med en absorberande torr trasa.
- Vid kraftig nedsmutsning, använd en mjuk borste för att undvika nötningskador på ytan och ljummet vatten med tvål (icke-alkalisk). Skölj med rent vatten. Torka med en absorberande trasa.
- Kroppsvätskor ska tas bort snabbt (inom 15 minuter) med kallt vatten och därefter rengöras som ovan.
- Vid mycket kraftig nedsmutsning / infektionskontroll ska en 5 % natriumhypokloritlösning (blekmedel) användas.
- Ska inte maskin- eller kemtvättas.
- Använd inte putsmedel eller lösningsmedel.

Enduralex® Vinyl rengöringsinstruktioner (externa ytor)

Enduralex® kontaktmaterial är skyddade av Produratect-C® lackering och står emot daglig nötning och kontakt med milda syror, alkali, drycker, hushållsfläckar.

- Använd varmt vatten och / eller Haz-tab eller Clor-clean lösning samt en hushållstrasa.
- Gnid jämnt i materialets fiberriktning.
- Skölj med rent vatten efteråt.
- Kan även ångrengöras.

ANVÄND INTE blekmedel, lösningsmedel, slipmedel, polervax eller aerosolspray.

Dartex rengöringsinstruktioner (användarens kontaktytor)

Allmänna riktlinjer

- Var uppmärksam på egenskaperna hos andra material, som går att kombineras med Dartex belagda tyger i den färdiga artikeln (t.ex dimensionsstadga, färgbeständighet, tvättråd).
- Ytan kan rynkas vid rengöringsprocessen. Detta har inga negativa effekter på tygets egenskaper.
- Slipande rengöringsmedel ska inte användas.

Rengöring och desinficering

- Smuts på skyddets yta kan tas bort genom att det torkas av med en mjuk trasa fuktad med vatten och neutralt rengöringsmedel. Svårare kontaminering kan behandlas genom att det torkas av med alkohol eller terpentinsubstitut, och därefter med varmt vatten och rengöringsmedel.
- Rengöring och desinficering kan utföras på skyddet med ljummet vatten och ett neutralt rengöringsmedel eller med en natriumhypokloritlösning (0,1 % eller 1 000 delar per miljon aktivt klor).
- Farmaceutiska desinfektionsmedel kan användas givet att tillverkarens instruktioner följs.
- Alla rengörings- och desinfektionsmedel ska sköljas av ordentligt och föremålet ska torka helt, före förvaring. Underlåtenhet att göra detta, kan resultera i ackumulering av reagens, som skulle kunna skada polyuretanskyddet, reagera med stolsramen, eller ogiltigförklara resultaten för biokompatibilitet för Dartex-tyget.

Torkning

• Det är viktigt att föremål torkar ordentligt efter alla rengöringsprocesser innan de förvaras.

Förvaring

• Förvaras på en sval, torr plats. Undvik överdrivet tryck och kontakt med material som inte är tvättäkta.

10. Tekniska data**10.1. Tillverkningsadress**

Direct Healthcare Group
Withy Court, Western Industrial Estate, Caerphilly, Storbritannien, CF83 1BF

Email: info@directhealthcaregroup.com

10.2. Maximal användarvikt

Gränsen för maximal användarvikt är **180 kg (397 pund) eller 28 stone**

Följ gränserna gällande användarvikt för Florien II-stolen och observera att din garanti kan hävas och användarens säkerhet kan äventyras om viktgränsen överskrids.

10.3. Stolens vikt och dimensioner

| Föremål | Vikt (kg) | Dimensioner (mm) |
|------------------------------|-----------|---------------------|
| Florien II | 53 | 880 x 700 x1 330 |
| Florien II + låda + lastpall | 70 | 1 000 x 800 x1 450 |
| Pappkartong | 7 | 1 000 x 800 x 1 300 |
| Lastpall | 10 | 1 000 x 800 x 150 |

10.4. Produktstandarder

MHRA Registrering CA000105

10.4.1. Testa flambeständighet

BS 7176:2007+A1:2011 Specifikationer för de stoppade möbelsätena, som inte är för hushållsbruk, antändningsmotstånd genom testning av kompositer).

BS EN 1021-1:2014 (Möbler. Bedömning för antändning av stoppade möbler. Antändningskälla glödande cigarett).

BS EN 1021-2:2014 (Möbler. Bedömning för antändning av stoppade möbler. Antändningskälla tändsticka eller liknande).

BS 5852:2006 (Testmetoder vid bedömning för antändning av stoppat säte för glödande och flammade antändningskällor).

10.4.2. Styrka, stabilitet, hållbarhet, risk och säkerhet

BS EN 1022:2005 (Hushållsmöbler. Säte. Fastställande av stabilitet).

BS EN 16139:2013 (Möbler. Styrka, hållbarhet och säkerhet. Krav för säte som inte är för hushållsbruk).

BS EN ISO 14971:2012 (Läkarutrustningar. Tillämpning av riskhantering för läkarutrustningar).

10.4.3. Kvalitet och miljö



11. Kundtjänst

Om du har några funderingar eller upplever problem gällande montering eller underhåll av Florian II-stol, kontakta vår kundtjänst på vårt avgiftsfria nummer 0800 043 0881 eller din lokala återförsäljare.



Intelligent tryckvård
Specialist säte
Hyres- och servicelösningar

Direct Healthcare Group

Withey Court, Western Industrial Estate
Caerphilly, Storbritannien
CF83 1BF

T: +44 (0) 800 043 0881

F: +44 (0) 845 459 9832

E: info@directhealthcaregroup.com

Asien och Stilla-havsområdet

Direct Healthcare Group PTY Ltd.
PO Box 562, Wembley
Western Australia 6913

T: +61 (0) 423 852 810

E: info@directhealthcaregroup.com.au



LIT-00037 Utgåva 1
Datum: Juni 2018

DIRECTHEALTHCAREGROUP.COM

