

Dyna-Form[®]


Mercury Advance Alternnerande Sittdyna

Dyna-Form™ Mercury Advance Alternnerande Sittdyna är ett dynamiskt system, med alla fördelarna som modern skumteknologi tillför. Den är speciellt utformad för patienter som anses ha en "Väldigt Hög Risk" att utveckla trycksår.

Sittdynan erbjuder en hög patientkomfort och det unika systemet kan enkelt bli en dynamisk kudde vid kliniska behov. På liknande sätt, kan kuddens funktion "nedgraderas" när patientens tillstånd förbättras. En högre maximal viktkapacitet, upp till 152 kg, gör det möjligt för produkten att möta utmaningarna inom bariatrin.

Det yttre överdraget består av ett multi-stretch och ångpermeabelt tyg som uppfyller de mest strikta riktlinjerna gällande infektionskontroll.

Sittdynan är utformad med den senaste medicinska cellteknologin, för att skapa bättre kroppshållning och samtidigt reducera tryck.

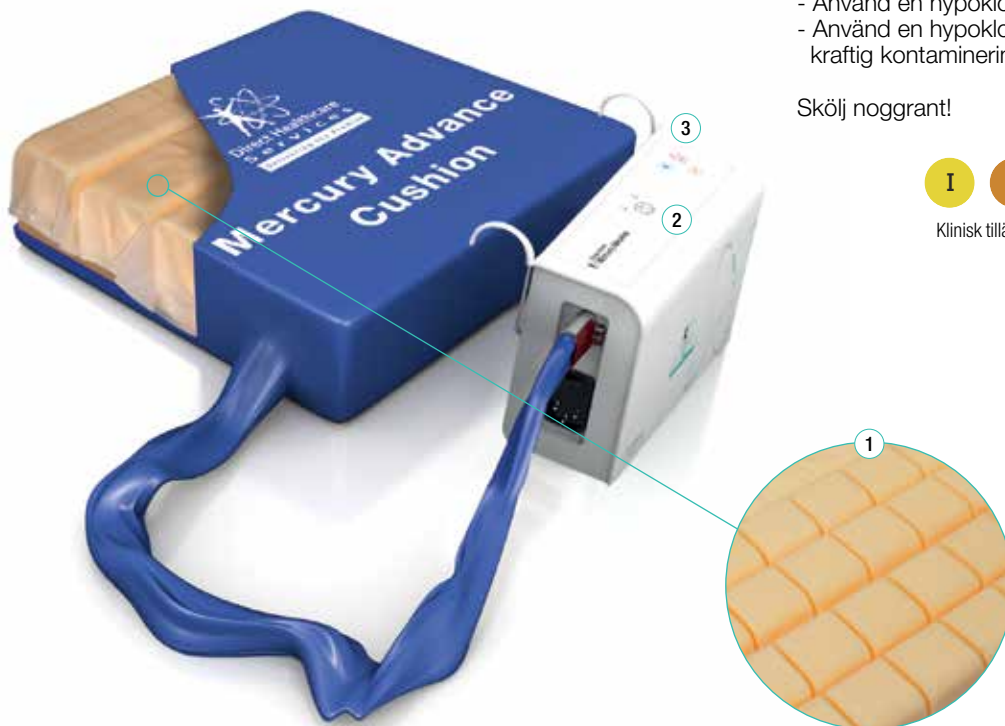

Tekniska specifikationer

Produktkod CUSH/ADV/ALT/46/46/10

Riskkategori Väldigt Hög Risk

Viktgräns 152 kg

Garanti 2 år

Dimensioner L46 cm x B46 cm x H10 cm
Olika storlekar finns
tillgängliga på begäran

Produktvikt 1,3 kg sittdynan / 1,7 kg pump

Cykeltid 10 minuter

Driftläge Elektronisk

Spänning 220 V – 240 V / 50 HZ

Energiförbrukning 10W

Färg Blå



Rengöring

Överdraget / pumpen ska rengöras med hypokloritlösning och varmt vatten, som är adekvat utspädd.

- Använd en hypokloritlösning 1 000 ppm.
- Använd en hypokloritlösning 10 000/ppm vid kraftig kontaminering.

Skölj noggrant!



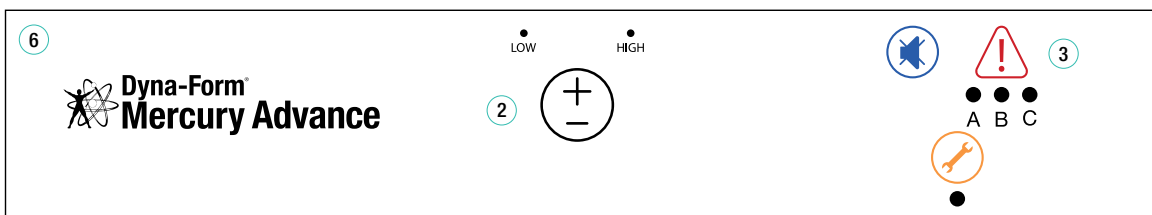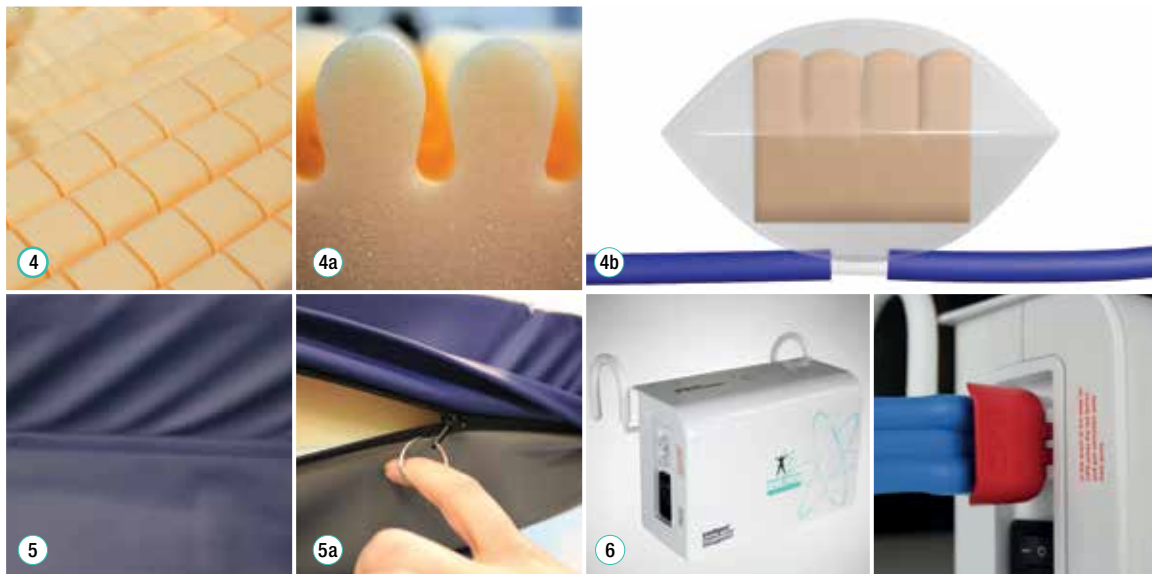

Egenskaper

① Kombinerad skum och dynamisk teknologi

② Tryckurvalsläge

Professorledd dokumentering finns tillgänglig

③ Lysdiodvarning

④ Skumcellsteknologi inom en driftcykel

4a: Närbild av det tårformade CME-skummet inuti cellen

4b: Förmåga att ändra alla enskilda celler

⑤ Minimal svetsdesign med skyddande överdrag och blixtlås, skyddar därmed för bakterier

5a: Blixtlås med ring förenklar hanteringen

⑥ Modernt designat kraftaggregat kommer med flera funktioner inklusive: Automatisk urvalsläge för pressinställning / komfort, CPR / statiska lägesfunktioner, lysdiod för lågt / högt tryck och ljudvarning, lysknapp På / Av

Fördelar

Tillhandahåller möjligheten att uppgradera / nedgradera utifrån patientens kliniska behov.

Tillhandahåller ultimata patientkomfort, utan att påverka vårdmetoderna

Kliniskt bevisad sittdyna

Blinkande indikatorer varnar vårdgivare för lågt celltryck / fel