

Vega505EE

SystemRoMedic

SWL 230 kg



Potilasnostin

Vega505EE on siirrettävä potilasnostin enintään 230 kg painavien henkilöiden turvalliseen nostamiseen. Vega505EE:n muotoiluun kuuluu nostovarsi, jonka voi nostaa lähes pystyyn ja laskea alas lattiaan saakka. Nostin sopii mitoiltaan myös huoneisiin ja tilanteisiin, joissa tilaa on hyvin rajallisesti. Vega505EE tarjoaa laajan (23 - 176,5 cm) nostoalueen, minkä ansiosta nostin soveltuu kattavasti erilaisiin nostotilanteisiin ja -vaatimuksiin aina matalista ja korkeista nostoista, istuvan/makaavan asennon nostoista, lattialle/lattialta -nostoista, sängylle/sänkyyn -nostoista, tuoliin/tuolilta -nostoista kävelyharjoitteluun.

Muotoilun V-konsepti

Vega 505EE:n muotoilua täydentää nostovarsi, joka voidaan nostaa lähes pystyasentoon ja laskea lattiaan saakka. Lisäksi masto on jaettu kahteen osaan ja kahvatangot on integroitu mastoon. Tämä V-konseptiksi kutsuttu muotoilu tarjoaa useita etuja sekä hoitajalle että käyttäjälle.

Vega 505EE:n mastoon on integroitu ainutlaatuiset ergonomiset kahvatangot tarjoten hyvän otteen ja useita käsien sijoitusvaihtoehtoja ja -korkeuksia. Ergonomiset kahvatangot vähentävät potilaan manuaalisen nostamisen tarvetta ja voivat siten vähentää hoitohenkilöiden manuaaliseen potilasnostoon liittyviä vammoja.

V-konseptin mukaisen jaetun maston ansiosta toimilaite ja ohjausyksikkö sijaitsevat mastojen välissä. Tämä antaa potilaalle ja hoitajalle enemmän tilaa ja parantaa käyttömukavuutta.

Helppoa ja turvallista

Käsiohjaimessa on merkityt painikkeet nostamiseen ja laskemiseen sekä sähköiseen alustan levitykseen. Kaikki liike pysähtyy heti, kun painikkeet vapautetaan.

Ohjausyksikössä on käyttövalmis hätäpysäytyspainike. Vega 505EE:ssä on myös sekä manuaalinen että sähköinen hätälasku.

Virtalähde

Suuren kapasiteetin 2,9 Ah -akku. Laite antaa äänimerkin, kun akun varaus on alhainen. Ohjausyksikössä oleva ilmaisin näyttää, kun lataus on käynnissä.



Käsiohjainneljällä painikkeella.



Ohjausyksikön diagnostiikkalukema, esim. nostolaskuri ja ylikuormituksen ilmaisin.

Lisätarvikkeita vakiovarusteina

Vega 505EE toimitetaan käyttövalmiina käsiohjaimella varustettuna sekä seuraavat lisävarusteet vakiovarusteina:

- SlingBar M, alumiininen kaksipistenostokaari, vakioleveys 450 mm
- SwiftHook, SlingBarin lisävaruste
- Sisäänrakennettu lataustoiminto
- Koteloidut kaksoispyörät, Ø100 mm, puskurit

Käytöltään yksinkertainen, toiminnoiltaan monipuolinen

- Poikkeuksellisen suuri nostoalue: 23 - 176,5 cm
- Sopii sekä erittäin mataliin että erittäin korkeisiin nostoihin ja kävelyharjoitteluun
- Mastoon integroidut työntökahvat
- Ohjausyksikön sijainti antaa potilaalle ja hoitajalle tilaa parantaen käyttömukavuutta
- Ergonominen ja helppo ohjaus
- Pikaopas integroitu nostimen ohjausyksikköön
- Huoltovapaat koteloidut kaksoispyörät
- Sähköinen alustan levitys
- Käyttövalmis hätäpysäytyspainike ohjausyksikössä
- Manuaalinen ja sähköinen hätälasku
- Suuren kapasiteetin 2,9 Ah -akku
- Sisäänrakennettu lataustoiminto



Kuvassa on alenpi Vega505EE-malli, jossa on vanhamallinen käsöjarrin ja ohjausyksikkö. Tämä malli ei ole enää saatavilla.

Vega505EE

TUOTEKUVAUS

Siirrettävä potilasnostin, jossa sähköinen alustan levitys, käsiohjain, SlingBar M, SwiftHook, 100 mm:n pyörät ja sisäänrakennettu lataustoiminto.

KÄYTTÖTARKOITUS

Vega on siirrettävä ja kannettava lääkinällinen laite, joka yhdessä hyväksyttyjen lisävarusteiden kanssa auttaa potilaiden nostamisessa ja/tai siirtämisessä istuvassa asennossa tai makuuasennossa sängystä tuoliin (sekä vastaavat) tai toisin päin. Se auttaa myös siirtämään potilaita sisätiloissa tarvittaessa lyhyitä matkoja. Potilasnostimen käyttö vähentää hoitajan loukkaantumisriskiä nostotilanteissa. Tarkoitettu hoitajille, jotka voivat lukea ja ymmärtävät nostimen käyttöohjeet. Tuote on tarkoitettu sekä kotihoitoon että laitoshiitoon.

TEKNISET TIEDOT

Suurin sallittu potilaan paino (SWL)	230 kg
Materiaali	Jauhemaalattu teräs
Korkeus	1 235–1 998 mm
Jalasten pituus	1 210 mm
Jalasten korkeus	117 mm
Pohjan leveys, ulkomitat	670–1 065 mm
Pohjan leveys, sisämitat	550–925 mm
Paino	42,8 kg
Alustan levitys	Sähköinen
Pyörien halkaisija	100 mm
Nostoalue	230–1 765 mm
Nostonopeus ilman kuormaa	37 mm sekunnissa
Hätälasku	Manuaalinen ja sähköinen
Akun kapasiteetti	2,9 Ah
Nostokaaren materiaali	Alumiini
Nostokaaren leveys	450 mm
IP-suojaluokitus	IP24



Vega505EE täyttää lääkinnällisten laitteiden asetuksen 2017/745 luokan 1 tuotteille asetetut vaatimukset.

LISÄVARUSTEET

Vega505EE-nostinta voidaan käyttää yhdessä nostoliinon ja monien muiden Direct Healthcare Groupin SystemRoMedic™-nostovälinevalikoimassa olevien nostolisävarusteiden kanssa luotaessa optimaalisia ratkaisuja erilaisten tarpeiden käyttäjille.

Tuoteno.	Tuotenimi	Kuvaus
70200071	SlingBar XS	Alumiininen kaksipistenostokaari, 25 cm
70200001	SlingBar S	Alumiininen kaksipistenostokaari, 35 cm
70200003	SlingBar L	Alumiininen kaksipistenostokaari, 60 cm
70200042	SlingBarSpreader M	Sivukaaret SlingBariin
70200006	StretcherBar	Vaakasuoraan nostamiseen
70200017	SlingBar RFL X4	Teräksinen nelipistenostokaari
70100002	Charder MHS2500	Vaaka, SWL 300 kg
70100003	Charder MHS2500	Vaaka, SWL 400 kg
70200089	Käsiohjain HB33-6	Kuusi painiketta sekä huollon, akun tilan ja ylikuormituksen ilmaisimet
70200101	QuickLink	Nostokaaren helppoon vaihtoon
70200029	Ulkoinen laturi Linak	Vega505EE:lle

Lisätietoja: www.directhealthcaregroup.com

© Direct Healthcare Group 201105 -
www.directhealthcaregroup.com

SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ on kokonaisvaltainen ratkaisu potilaiden helppoon siirtoon. Konseptin sisältämät neljä tuotealuetta täyttävät useimmat tarpeet erilaisissa siirtotilanteissa. Siirtäminen paikasta toiseen. Asennon kohentaminen samassa paikassa. Tukeaminen liikkumisen helpottamiseksi. Nostaminen sekä käsin että mekaanisesti.

DHG

Moving Health Forward



Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35,
SE-164 40 Kista, Sweden
Tel: +46 (0)8-557 62 200
info@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4 | 00550 HELSINKI
p. 0306 40 40 40
www.medimattress.fi
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi