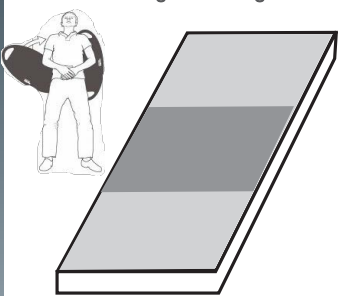
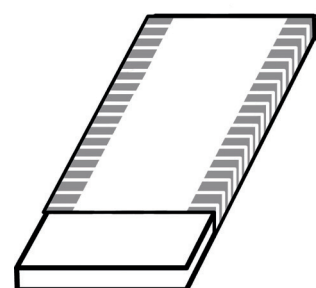
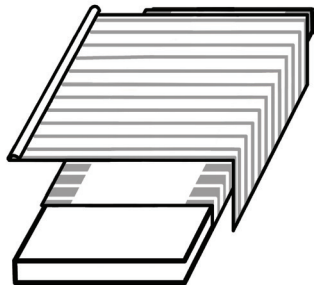
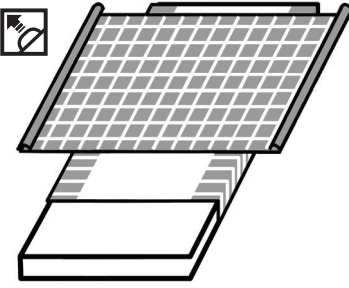
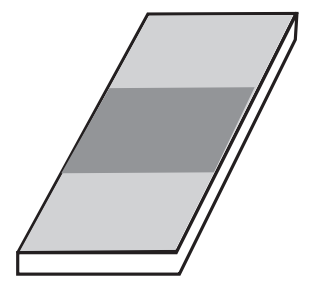
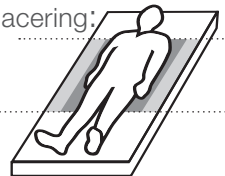
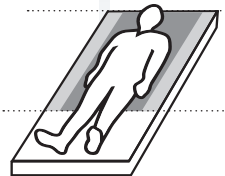
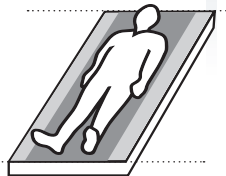


Namn: _____

Säng/Rum: _____
(t.ex. rumsnummer: eller sal 2:3)

Temporära & permanenta kombinationer

☐ Temporär lösning	☐ Permanent lösning	☐ Permanent lösning	☐ Permanent lösning	☐ Permanent lösning
Ovala glidskivor / glidmatta  Egenskaper: Två ovala glidskivor som placeras under ett draglakan. Glidskivor fördelar tyngden mot alla typer av underlag.	Glidlakan  Egenskaper: Glatt satin i mittdelen med mönstrade bromsytor på sidorna som guidar satinets glidriktning.	Glidlakan + Draglakan  Egenskaper: Båda lakanen är mönstrade som guider om produktens glidriktningen. Draglakan reducerar även värme.	Glidlakan + Gliddraglakan  Egenskaper: Båda lakanen är mönstrade som guider om produktens glidriktning. Har glidytor på ovan och undersidan som optimerar glidfunktionen.	Inkontinenslakan med och utan glid  Egenskaper: Absorberande med eller utan glid. Placera ett skyddsunderlägg mellan patienten och underlag. Vita sidan mot patienten / satänget ned.
Ange produktnamn/artikelnummer:	Ange produktnamn/artikelnummer:	Ange produktnamn/artikelnummer:	Ange produktnamn/artikelnummer:	Ange produktnamn/artikelnummer:
Andra instruktioner:				
Placering:				
 Glidzon Höft: För den mer aktiva/lätta brukaren som endast behöver glidfunktion vid höftpartiet.	 Glidzon Huvud-Höft: För den mindre aktiva brukaren/tyngre brukaren som behöver glidfunktion från höften och uppåt.	 Glidzon Huvud-Fot: För den passiva/vårdtunga brukaren där glidfunktion behövs under hela kroppen.	 WendyLett Systemet	! Läs alltid manualen innan användning! Vissa hjälpmedel är markerade med etikett eller färg med upp- och nedsida samt mönster som visar produktens glidriktning.