

# Produkter til løft og forflytning som gjør hverdagen lettere

System**RoMedic**



For flere produkter og produktoppdateringer,  
besøk [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com)

**Direct Healthcare  
Group**

Advancing Movement & Health®

# Index

## FORFLYTNINGSPRODUKTER



### GLIDESKIVER

EasyGlide \_\_\_\_\_ 10



### GLIDEMATTER

EasySlide (forflytningsversjon) \_\_\_\_\_ 10

MoveMaster \_\_\_\_\_ 11

RollerSlide \_\_\_\_\_ 11



### GLIDESKIVER


EasyGlide (Mini)/ EasyGlide \_\_\_\_\_ 12



### GLIDEMATTER

OneWaySlide \_\_\_\_\_ 12

AutoSlide \_\_\_\_\_ 13

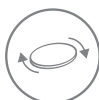

### DREIESKIVER

TurnTableSoft \_\_\_\_\_ 13



### ANDRE POSISJONERINGSHJELPEMIDLER

SitWalk \_\_\_\_\_ 13



### GLIDEMATTER

ReadySlide \_\_\_\_\_ 14

EasySlide / EasySlide, engangs \_\_\_\_\_ 14-15



### GLIDELAKEN

Innledning \_\_\_\_\_ 16-17

Produktutvalg \_\_\_\_\_ 18

WendyLett glidelaken \_\_\_\_\_ 19

WendyLett 2Way stikkklaken \_\_\_\_\_ 20

WendyLett 4Way glidestikkklaken \_\_\_\_\_ 21

WendyLean \_\_\_\_\_ 22

EasyRoll glidelaken \_\_\_\_\_ 23-25

EasyRoll 2Way stikkklaken \_\_\_\_\_ 26

EasyRoll Inco 2Way glidelaken \_\_\_\_\_ 26

EasyRoll 4Way glidestikkklaken \_\_\_\_\_ 27

EasyRoll putevar \_\_\_\_\_ 29

EasyRoll underlag \_\_\_\_\_ 30-32

EasyRoll madrassbeskytter \_\_\_\_\_ 32

PositioningCover \_\_\_\_\_ 33

TurnSheet (system i to deler) \_\_\_\_\_ 34



### ANDRE POSISJONERINGSHJELPEMIDLER

TopSheet \_\_\_\_\_ 35

AntiSlip \_\_\_\_\_ 36

FootStool / FootStoolCover \_\_\_\_\_ 36

## POSISJONERINGSPRODUKTER



### HJELPEMIDLER FOR SITTEDE-TIL-STÅENDE

FlexiMove \_\_\_\_\_ 38

FlexiGrip \_\_\_\_\_ 38



### BELTER

PositioningBelt \_\_\_\_\_ 38

FlexiBelt / EasyBelt \_\_\_\_\_ 39

ReadyBelt \_\_\_\_\_ 39

WalkingBelt \_\_\_\_\_ 40



### TILBEHØR FOR BELTER

SupportStraps \_\_\_\_\_ 40



### GÅHJELPEMIDLER

RoWalker400 \_\_\_\_\_ 40



### DREIESKIVER

TurnTable \_\_\_\_\_ 41

TurnSafe2 \_\_\_\_\_ 41



### OPPREISNINGSHJELPEMIDLER

ReTurn \_\_\_\_\_ 42-43

QuickMove \_\_\_\_\_ 44

MiniLift \_\_\_\_\_ 46

ThoraxSling \_\_\_\_\_ 47, 85



### MANUELLE LØFTEHJELPEMIDLER

LiftSeat \_\_\_\_\_ 50

FlexiMove \_\_\_\_\_ 50



### TAKMONTERTE PERSONLØFTERE

RiseBasic / RiseAtlas, \_\_\_\_\_ 52-55

stasjonære takmonterte løfteenheter



### SKINNESYSTEMER

Castor / Helena, frittstående løftestativer \_\_\_\_\_ 56-57

MilkyWay, skinnesystem \_\_\_\_\_ 58-59



### MOBILE PERSONLØFTERE

Eva \_\_\_\_\_ 60

EvaDrive \_\_\_\_\_ 61

Carina350 \_\_\_\_\_ 62

Vega505EE \_\_\_\_\_ 63



### LØFTETILBEHØR

SlingBar \_\_\_\_\_ 64

SlingBarSpreader M \_\_\_\_\_ 64

SlingBarWrap \_\_\_\_\_ 64

StretcherBar \_\_\_\_\_ 65

Vekter \_\_\_\_\_ 65

BackBoardStraps \_\_\_\_\_ 65

BariBar \_\_\_\_\_ 66

BariTurn \_\_\_\_\_ 66

## STØTTEPRODUKTER

## LØFTEPRODUKTER

**LØFTESEIL**

Velge seilmodell, -materiale og -størrelse _____	69-71
HighBackSling _____	72
ShellHBSling _____	73
FlexibleSling _____	74, 81
AmpHBSling _____	74
HygieneHBSling _____	75
BasicSling _____	76
AmpSling _____	77
LowBackSling _____	78
HygieneSling _____	79
HygieneLBSling _____	80
ClassicHBSling _____	81
ClassicSling _____	82
BariSling _____	82
Stretchersling _____	83
SafeHandlingSheet _____	83
PositioningSling _____	83
LimbSling _____	87
Størrelsesguide for løfteseil, oversikt _____	88-91

**LØFTESEIL - REISE SEG / STÅ / GÅ**

StandingVest _____	86
WalkingVest _____	86
BariVest _____	87

**TILBEHØR TIL LØFTESEIL**

AdjustmentLoop _____	92
HeadSupport _____	92
SoftLegSupport _____	92
StrapsPadding _____	93
NameTag _____	93
LoopTag _____	93

**ANNET**

Om Direct Healthcare Group _____	4
Ethos Education Programme _____	5
Finn riktig hjelpemiddel til riktig situasjon _____	6-8
BackPack _____	15
Sikkerhetsinformasjon _____	94
Check: Kontrollere og forbedre arbeidsmiljøet _____	95

## Med en kombinasjon av utstyr oppnås individuelt tilpassede løsninger

For å skape optimale løsninger for brukere med ulike behov kan de fleste hjelpemidler brukes i kombinasjon med ett eller flere andre. I denne katalogen finner du symboler for brukeranvendelser. Nedenfor følger forklaringer for disse symbolene.

### Aktiviteter / Symboler

Flytting i liggende stilling



Vending i sengen



Høyere opp i sengen



Liggende til sittende



Opp fra gulvet



Støtte for gåtrening



Ståtrening



Fra seng til rullestol



Fra seng til toalettstol



Fra rullestol til toalett



Reise seg – sette seg



Posisjonering i stol



Inn og ut av kjøretøy



Posisjonering i bil



# Om Direct Healthcare Group

Dårlig helse kan gi en dramatisk reduksjon i mulighetene våre til å bevege på oss, og det kan igjen føre til enda større helseproblemer og at det tar lengre tid å bli frisk.

Vi hos Direct Healthcare Group ser at bevegelse er viktig for tilfriskning, rehabilitering og selvstendighet. Vi mener det er viktig å støtte bevegelighet og selvstendighet for å oppnå og opprettholde god helse. Ingen har bedre forståelse for betydningen av bevegelse og bevegelsens forhold til både fysisk og psykisk helse enn Direct Healthcare Group – for behovet for å bevege seg, som direkte påvirker den daglige livskvaliteten vår. Gjennom denne forståelsen og nært samarbeid med helsepersonell arbeider vi for å levere effektive, bevegelsesbaserte løsninger som øker livskvaliteten innenfor helsevesenet og ute i samfunnet.

Fra effektiv forebygging og behandling av trykksår til fremming av trygg selvstendighet og fallforebygging støtter løsningene våre omsorgstjenester til et bredt pasientspekter, inkludert pasienter med komplekse, langvarige lidelser. Hos Direct Healthcare Group har vi en unik resultattenkning når det gjelder de helseutfordringene som forventes i forbindelse med redusert bevegelse hos pasienten. Alt dette fører til bedre helseresultater, raskere tilfriskning og en enklere hverdag.

## Utfordringen

Hver dag befinner helsepersonalet seg i situasjoner der de er presset for tid, opplever personalmangel og savner kunnskaper og tilgang til enkle og funksjonelle hjelpemidler.

Trange budsjetter sammen med en ambisjon og et ønske om å levere et helsetilbud av høy kvalitet bidrar til forskjellige belastningsskader. Resultatet er økt personalfravær og eskalerende kostnader. Det kan være vanskelig å få slutt på denne negative spiralen.

## Løsningen er enkel

Direct Healthcare Groups overføringshjelpemidler er basert på enkel, logisk tenkning, ergonomiske prinsipper og en design som fokuserer på både brukeren og helsepersonalet.

Enkelhet er nøkkelen. Oppmerksomhet på de grunnleggende prinsippene fører til brukervennlige løsninger. Det er de enkle, mest tidsbesparende enhetene som man begynner å bruke vanemessig.

Produktene våre fungerer med naturlovene – ikke mot dem. Friksjon er et eksempel på en faktor det er nødvendig å ta hensyn til. Med smarte løsninger og kombinasjoner av spesielle og funksjonelle materialer kan vi både redusere friksjonen under brukeren for å lette overføring eller flytting og øke friksjonen for å minimere risikoen for at brukeren skal gli ut av sengen.



# ēthos

EDUCATION PROGRAMME



## Direct Healthcare Group – mer enn bare produkter

For at hjelpemiddelteknologi skal kunne brukes til sitt fulle potensial, må de som bruker produktene både ha en forståelse av alt som kan gjøres med utstyret og hvilke ferdigheter som kreves for å bruke det på best mulig måte i hver enkelt situasjon.

I Direct Healthcare Group ønsker vi at våre kunder, dvs. pleiere og annet helsepersonell, familiemedlemmer og brukere, skal få best mulig nytte og verdi fra våre hjelpemidler og løsninger. Derfor handler det om mer enn bare innovasjons-, design- og produksjonsprosessen. Vi arbeider også med å utvikle midler og metoder for å dele vår kunnskap og erfaring med å skape sikre og enkle løsninger for alle brukere i alle forflytningssituasjoner.



## Nye ferdigheter. Nye valg. Bedre resultater.

Med Ethos Education Programme har vi et mål om å levere utmerket kunnskap og førstehåndserfaring med grunnleggende kjerneprinsipper og teknikker for å vise hvordan våre hjelpemidler kan brukes mest mulig effektivt for å skape sikre og lettanvendelige forflytningsløsninger som resulterer i:

- **Forbedret arbeidsmiljø**  
med forebygging og reduksjon av yrkesskader for pleierne
- **Forbedret pleiekvalitet**  
slik at brukerne kan utnytte mest mulig av sine evner for å oppnå rehabilitering og større uavhengighet og verdighet
- **Betydelige kostnadsbesparelser for pleieinstitusjonene**

## Våre veiledere og kursledere

Våre kurs holdes av folk som har omfattende praktisk erfaring samt teoretiske kunnskaper innenfor de emnene som opplæringen dekker. Avhengig av innholdet er de enten spesialister fra Direct Healthcare Groups team eller selvstendige bransjeeksperter.

## Hvordan kan jeg bestille kurs/workshop?

Når du har valgt et kurs/workshop, sender du en e-post til [ethos.no@directhealthcaregroup.com](mailto:ethos.no@directhealthcaregroup.com) med ditt ønske samt de 2–3 datoene du foretrekker. Minste deltakerantall for å avholde workshop, er 6 personer, og maksimum deltakerantall er 12. Vi er glade for å kunne tilby Ethos-programmet uten kostnad til helsepersonell, og ber dere som arrangerer opplæringen å organisere et lokalt med tilgang til en sykehusseng. Du finner mer informasjon på nettsiden vår [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com)

## Skreddersydd opplæring og konsultasjoner fra våre erfarne produktspecialister

Vårt Ethos-team er erfarne og lager skreddersydde opplæringspakker etter deres behov, noe som vil si at vi kan tilby opplæring som passer ditt teams logistiske begrensninger.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vårt personaliserte opplæringsprogram kan hjelpe dere, kan du kontakte [ethos.no@directhealthcaregroup.com](mailto:ethos.no@directhealthcaregroup.com)

# Finn riktig forflytningshjelpemiddel til riktig situasjon

Med matrisen nedenfor blir det lettere å finne og velge riktig hjelpemiddel til riktig situasjon ved å kombinere hovedproduktene i fire forflytningskategorier med de 14 mest vanlige aktivitetene ved brukerforflytning.

## Indeks/Matrise

### FORFLYTNINGSPRODUKTER



#### GLIDESKIVER

EasyGlide

10

PRODUKTER	Side	AKTIVITETER													
		Forflytning i liggende stilling	Vending i sengen	Høyere opp i sengen	Liggende til sittende	Opp fra gulvet	Støtte for gåtrening	Ståtrening	Fra seng til rullestol	Fra seng til toiletstol	Fra rullestol til toalett	Reise seg - sette seg	Posisjonering i stol	Inn og ut av kjøretøy	Posisjonering i bil
EasyGlide	10	✓							✓	✓	✓			✓	
<b>GLIDEMATTER</b>															
EasySlide (forflytningsversjon)	10	✓	✓												
MoveMaster	11								✓	✓	✓				
RollerSlide	11	✓													
<b>GLIDESKIVER</b>															
EasyGlide (Mini)/ EasyGlide	12	✓							✓	✓	✓		✓	✓	
<b>GLIDEMATTER</b>															
OneWaySlide	12												✓		
AutoSlide	13													✓	✓
<b>DREIESKIVER</b>															
TurnTableSoft	13				✓										✓
<b>ANDRE POSISJONERINGSHELPEMIDLER</b>															
SitWalk	13												✓		
<b>GLIDEMATTER</b>															
ReadySlide	14		✓	✓									✓		
EasySlide / EasySlide, engangs	14-15	✓	✓	✓					✓				✓		
<b>GLIDELAKEN</b>															
WendyLett glidelaken	19	✓													
WendyLett 2Way stikkklaken	20		✓				✓								
WendyLett 4Way glidestikkklaken	21		✓	✓			✓								
WendyLean	22			✓			✓								
EasyRoll glidelaken	23-25		✓												
EasyRoll 2Way stikkklaken	26		✓				✓								
EasyRoll Inco 2Way glidelaken	26		✓	✓											
EasyRoll 4Way glidestikkklaken	27		✓	✓			✓								
EasyRoll putetrekk	29			✓											
EasyRoll underlag	30-32														
EasyRoll madrassbeskytter	32														
PositioningCover	33		✓	✓											
TurnSheet (system i to deler)	34		✓	✓											
<b>ANDRE POSISJONERINGSHELPEMIDLER</b>															
TopSheet	35		✓												
AntiSlip	36			✓											
FootStool / FootStoolCover	36								✓	✓	✓		✓		

### POSISJONERINGSPRODUKTER



# Indeks/Matrise

STØTTEPRODUKTER

LØFTEPRODUKTER

## PRODUKTER

Side

### AKTIVITETER

 Forflytning i liggende stilling

 Vending i sengen

 Høyere opp i sengen

 Liggende til sittende

 Opp fra gulvet

 Støtte for gåtrening

 Ståtrening

 Fra seng til rullestol

 Fra seng til toalettstol

 Fra rullestol til toalett

 Reise seg - sette seg

 Posisjonering i stol

 Inn og ut av kjøretøy

 Posisjonering i bil

### HJELPEMIDLER FOR SITTEDE-TIL-STÅENDE



FlexiMove	38			✓	✓				✓		✓								
FlexiGrip	38				✓				✓										

### BELTER



PositioningBelt	38				✓				✓										
FlexiBelt / EasyBelt	39								✓		✓		✓	✓					
ReadyBelt	39								✓		✓		✓	✓			✓		
WalkingBelt	40								✓										

### TILBEHØR FOR BELTER




SupportStraps	40								✓	✓									
---------------	----	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### GÅHJELPEMIDLER



RoWalker400	40								✓	✓									
-------------	----	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### DREIESKIVER

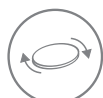

TurnTable	41										✓	✓	✓						
TurnSafe2	41										✓	✓	✓	✓			✓	✓	

### OPPREISNINGSHJELPEMIDLER



ReTurn	42-43										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
QuickMove	44										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MiniLift	46										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ThoraxSling	47, 85										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

### MANUELLE LØFTEHJELPEMIDLER



LiftSeat	50								✓			✓	✓	✓					✓
FlexiMove	50	✓	✓	✓					✓										

### TAKMONTERTE PERSONLØFTERE



RiseBasic / RiseAtlas, stasjonære takmonterte løfteenheter 52-55		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

### SKINNESYSTEMER



Castor / Helena, frittstående løftestativer	56-57	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MilkyWay, skinnesystem	58-59	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

### MOBILE PERSONLØFTERE



Eva	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EvaDrive	61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Carina350	62	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Vega505EE	63	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

# Finn riktig forflytningshjelpemiddel til riktig situasjon

Med matrisen nedenfor blir det lettere å finne og velge riktig hjelpemiddel til riktig situasjon ved å kombinere hovedproduktene i fire forflytningskategorier med de 14 mest vanlige aktivitetene ved brukerforflytning.

## Indeks/Matrise

### LØFTEPRODUKTER



PRODUKTER	Side	AKTIVITETER													
		Forflytning i liggende stilling	Vending i sengen	Høyere opp i sengen	Liggende til sittende	Opp fra gulvet	Støtte for gåtrening	Ståtrening	Fra seng til rullestol	Fra seng til toalettstol	Fra rullestol til toalett	Reise seg - sette seg	Posisjonering i stol	Inn og ut av kjøretøy	Posisjonering i bil
<b>LØFTESEIL</b>															
HighBackSling	72					✓			✓						✓
ShellHBSling	73					✓			✓						✓
FlexibleSling	74, 81				✓	✓			✓	✓	✓				✓
AmpHBSling	74					✓			✓						✓
HygieneHBSling	75								✓	✓					✓
BasicSling	76								✓						✓
AmpSling	77								✓						✓
LowBackSling	78				✓				✓						✓
HygieneSling	79									✓	✓				✓
HygieneLBSling	80									✓	✓				✓
ClassicHBSling	81								✓						✓
ClassicSling	82								✓	✓	✓				✓
BariSling	82								✓						✓
StretchersSling	83	✓		✓		✓									
SafeHandlingSheet	83	✓	✓	✓	✓	✓									
PositioningSling	83	✓	✓	✓	✓	✓									
<b>LØFTESEIL - REISE SEG / STÅ / GÅ</b>															
StandingVest	86										✓				
WalkingVest	86				✓		✓	✓			✓				
BariVest	87						✓	✓			✓				







## Glideskiver og glidematter



EasyGlide 5020



EasyGlide 5060

### EasyGlide

For forflytninger i sittende stilling fra rullestol til senger, toaletter, bilseter og mange andre sittende stillinger. Den er spesielt godt egnet for å utjevne høydeforskjeller og bygge bro over korte avstander. Tilgjengelig i to modeller og flere størrelser.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
5020	043189	EasyGlide	60 x 33 cm, tredelt	1 stk.
5050	045761	EasyGlide	75 x 33 cm, tredelt	1 stk.
5060	069642	EasyGlide	60 x 25 cm	1 stk.
5070	153286	EasyGlide	45 x 20 cm	1 stk.



EasyGlide 5000

### EasyGlide

For forflytning i liggende stilling fra én seng til en annen.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
5000	234427	EasyGlide, ekstra lang	120 x 60 cm	1 stk.



EasySlide 1030



Beskyttelsestrekk

Engangstrekk



WallRack

### EasySlide (forflytningsversjon)

EasySlide (190 x 60 cm) brukes primært til forflytninger i liggende stilling, f.eks. mellom senger og røntgen- eller operasjonsbord, dusjvogn, ambulansébåre eller lignende. EasySlide er også et svært effektivt hjelpemiddel for å vende brukere i sengen eller på røntgen- eller operasjonsbord. Engangstrekk til EasySlide for bedre hygiene og mindre klesvask.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
1020	-	EasySlide	190 x 60 cm	1 stk.
1030	058072	EasySlide (1020 + 1051)	190 x 60 cm, komplett	1 sett

#### Tilbehør

1051	-	Beskyttelsestrekk	For 1020, 1030	1 stk.
1055	-	Engangstrekk	For 1020, 1030	2 x 50 stk.
1151	166338	Beskyttelsestrekk	For 1120*, 1130*	1 stk.
1155	-	Engangstrekk	For 1120*, 1130*	2 x 90 stk.
1085	-	WallRack	For oppbevaring av glidematter og engangstrekk for EasySlide og RollerSlide	1 stk.

\* 1120, 1130, EasySlide 100 x 60, ute av produksjon





### MoveMaster

MoveMaster er en litt annerledes, åpen glidematte med håndtak i den ene enden. Det gjør det mulig å hjelpe ved å dra brukerne i ulike forflytninger, f.eks. å flytte dem lengre opp i sengen. MoveMaster er spesielt godt egnet for bruk mot bar hud ved forflytninger til dusjstoler eller toalettet.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
2090	055469	MoveMaster	47 x 120 cm, 3 håndtak	1 stk.



RollerSlide 9145

### RollerSlide

For forflytninger av passive brukere i liggende stilling mellom en seng og et røntgen- eller operasjonsbord, dusjvogn, ambulansébåre eller lignende. Bygger bro over åpninger og beveger seg med brukeren under forflytningen.



RollerSlide er en polstret glideskive med et trekk laget av ULF™ (Ultra Low Friction), et avansert glidemateriale som glir rundt på skiven under forflytninger. RollerSlide er tilgjengelig i tre modeller og flere størrelser.



RollerSlide, flexi 9148

RollerSlide, flexi er en lettere og bøybar variant av RollerSlide. Våre kunders favorittmodell, RollerSlide light 9120, er en lettvektvariant av RollerSlide, flexi. RollerSlide, flexi er også tilgjengelig i to bredere varianter som er tilpasset for større og tyngre brukere som veier opptil 300 kg, avhengig av avstanden mellom underlagene.

Glidetrekket for RollerSlide er laget av ULF (Ultra Low Friction), Direct Healthcare Groups eget avanserte glide-materiale. Det er veldig lett å rengjøre og om nødvendig kan trekket erstattes med et nytt. Engangstrekk, som er tilgjengelige som tilbehør for RollerSlide, gir ytterligere forbedret hygiene og mindre vask.



Engangstrekk

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Vekt	Enhet
9145	-	RollerSlide	175 x 50 cm, foldbar, lang	4,1 kg	1 stk.
9155	-	RollerSlide	85 x 50 cm, kort	2,2 kg	1 stk.
9148	-	RollerSlide, flexi	175 x 50 cm, foldbar, lang	3,9 kg	1 stk.
9158	-	RollerSlide, flexi	85 x 50 cm, kort	2,0 kg	1 stk.
9120	-	RollerSlide, light	175 x 50 cm, foldbar, lang	2,0 kg	1 stk.
9110	-	RollerSlide, light	85 x 50 cm, kort	1,1 kg	1 stk.
9170	-	RollerSlide, flexi	175 x 60 cm, foldbar, lang	5,7 kg	1 stk.
9175	-	RollerSlide, flexi	85 x 60 cm, kort	3,2 kg	1 stk.

#### Tilbehør



WallRack

9136	-	Glidetrekk	For 9120, 9145, 9148		1 stk.
9156	-	Glidetrekk	For 9110, 9155, 9158		1 stk.
9172	-	Glidetrekk	For 9170		1 stk.
9177	-	Glidetrekk	For 9175		1 stk.
9138	-	Engangstrekk, lang modell	For 9120, 9145, 9148		2 x 50 stk.
9168	-	Engangstrekk, kort modell	For 9110, 9155, 9158		2 x 115 stk.
1085	-	WallRack	For oppbevaring av glidematter og engangstrekk for EasySlide og RollerSlide		1 stk.



## Glideskiver og glidematter




EasyGlide 5045

### EasyGlide (Mini)

EasyGlide brukes i par for å forenkle posisjonering lengre inn i stolen. Den mindre størrelsen gjør det enklere å plassere glideskivene under brukerens lår og bak fordi de fordeler vekten over overflaten. EasyGlide, oval kan også brukes til å forenkle bruk av benstøtter på seler med delte benstøtter i en sittende stilling. Glideskivene er også nyttige for å hjelpe en bruker med å legge seg ned i sengen. EasyGlides er lette å rengjøre og tørke av.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
5045	192370	EasyGlide, oval	45 x 20 cm	2 stk.

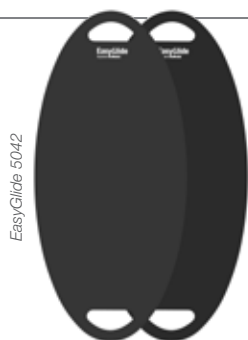

EasyGlide 5042

### EasyGlide

For forflytninger i liggende stilling fra én seng til en annen, men også for posisjonering høyere opp i sengen og for å plassere selen bak brukerens ryggstøtte, (rulle)stol eller på gulvet.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
5040	-	EasyGlide, oval	85 x 39 cm	1 stk.
5042	-	EasyGlide, oval	85 x 39 cm	2 stk.



OneWaySlide 2075

### OneWaySlide

OneWaySlide har mange funksjoner. Hovedfunksjonen er å forbedre sittende stillinger i stoler eller rullestoler. Glidematten muliggjør bevegelse bakover, men vil ikke gli fremover, noe som gjør det enklere for brukeren å innta og forbli i en mer komfortabel stilling i stolen. Også tilgjengelig i en rørformet design uten håndtak for mer aktive brukere.



OneWaySlide 2069

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
2074	149309	OneWaySlide	110 x 30 cm, 6 håndtak	1 stk.
2075	089685	OneWaySlide	130 x 40 cm, 6 håndtak	1 stk.
2076	127269	OneWaySlide	130 x 45 cm, 6 håndtak	1 stk.
2077	214198	OneWaySlide	130 x 55 cm, 6 håndtak	1 stk.
2069	-	OneWaySlide, rørformet	50 x 40 cm	1 stk.
2070	043328	OneWaySlide, rørformet	50 x 45 cm	1 stk.



## Glideskiver og glidematter



### AutoSlide

Gjør det lettere å komme inn og ut av biler, ettersom det blir enklere for brukerne å snu seg og bevege seg sideveis. Seteputene er godt festet til ryggen på bilsetene, slik at brukerne ikke kan gli fremover.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
8100	038288	AutoSlide	46 x 46 cm	1 stk.



## Dreieskiver



TurnTableSoft 5086

### TurnTableSoft

TurnTableSoft gjør det enklere å snu seg i sittende stilling. TurnTableSoft består av to runde skiver med et friksjonsreducerende materiale på innsiden slik at skivene lett kan rotere over hverandre.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
5086	158538	TurnTableSoft	Ø 45 cm	1 stk.
5087	-	TurnTableSoft	Ø 40 cm	1 stk.




## Andre posisjoneringshjelpemidler



SitWalk 6080

### SitWalk

Dette hjelpemiddelet har fått sitt navn etter metoden med å flytte en bruker bakover i stolen til en mer komfortabel sittestilling ved å lene brukeren sideveis og flytt en rumpeballe om gangen, slik at brukeren kan utføre et hofteløft.

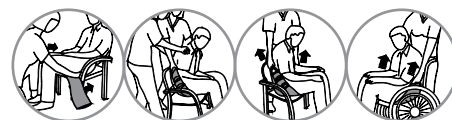

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
6080	-	SitWalk	140 x 13 cm, 8 håndtak	1 stk..



# Posisjonering

## Glideskiver og glidematter



### ReadySlide

ReadySlide er en tynn, rørformet, smidig og lettanvendelig glidematte som forenkler ulike typer posisjonering i senger og påsetting av løfteseil.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
11240	-	ReadySlide	50 x 60 cm, polyamid	1 stk.
11250	-	ReadySlide	70 x 70 cm, polyamid	1 stk.
11230	-	ReadySlide	110 x 70 cm, polyamid	1 stk.
11235	-	ReadySlide	110 x 90 cm, polyamid, ekstra bred	1 stk.
11236	-	ReadySlide	110 x 110 cm, polyamid	1 stk.
11210	-	ReadySlide	195 x 70 cm, polyamid	1 stk.
11215	-	ReadySlide	195 x 70 cm, polyamid, med håndtak	1 stk.
11241	-	ReadySlide	130 x 90 cm, polyamid	1 stk.



EasySlide 2010



EasySlide 2015



EasySlide 1220



EasySlide 1470



EasySlide 1420



Engangstrekk



### EasySlide


EasySlide (50 x 60), (50 x 70) og (25 x 60) er utmerkede hjelpemidler for vending i sengen, for å flytte brukere høyere opp i sengen og for å forflytte dem fra sengen til rullestol. EasySlide er et lite, praktisk hjelpemiddel som oppmuntrer til aktivisering. For pleieren minsker EasySlide antallet posisjoneringer der det behøves assistanse og eliminerer unødvendig løfting, noe som sparer både ryggen og skuldrene.



EasySlide (100 x 70 cm) er hovedsakelig designet for brukere som bare trenger en viss pleie og hjelp med å snu seg og bevege seg i sengen. Den fungerer best på et grovt underlag. EasySlide reduserer friksjonen på både skuldre og hofter, noe som i sin tur reduserer risikoen for trykksår. Takket være disse egenskapene er EasySlide svært skånsomt for brukere med smerter, men også for pleieren.



EasySlide (140 x 90 cm) er designet for brukere med normal vekt med begrenset til sterkt redusert evne til å delta i vendeprosessen. Disse brukerne er ofte permanent sengeliggende og derfor er det viktig å forhindre trykksår.

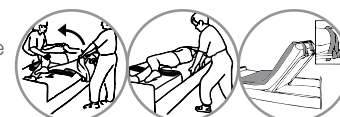

EasySlide (200 x 90 cm) har ekstra polstring for ytterligere å redusere risikoen for trykksår. Polstringen fordeler trykket over hele kroppen og reduserer trykk, friksjon og risikoen for shearing på spesielt utsatte trykkpunkter: skuldrene, hoftene, hodet og hælene.

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
2010	187036	EasySlide	50 x 60 cm, polyester	1 stk.
2020	124084	EasySlide	50 x 60 cm, mikrofiber	1 stk.
2021	213535	EasySlide	50 x 70 cm, mikrofiber	1 stk.
2015	172583	EasySlide	25 x 60 cm, polyester	1 stk.
1220	166338	EasySlide	100 x 70 cm	1 stk.
1420	-	EasySlide	140 x 90 cm, 2 festestropper	1 stk.
1470	-	EasySlide	200 x 90 cm, 4 festestropper	1 stk.

#### Tilbehør

2051	169976	Beskyttelsestrekk	For 2010, 2020, 2030	1 stk.
2055	-	Engangstrekk	For 2010, 2020, 2030	100 stk.
1085	-	WallRack	For oppbevaring av glidematter og engangstrekk for EasySlide og RollerSlide	1 stk.



## Glideskiver og glidematter



### EasySlide, engangs

EasySlide, engangs er en tynn, smidig og svært lettanvendelig personlig glidematte for korttidsbruk. EasySlide til engangsbruk kan benyttes til å forenkle vending og repositionering høyere opp i sengen og til repositionering i sittende stilling. EasySlide til engangsbruk kan også brukes til å løfte brukerens ben inn og ut av sengen, til å assistere ved på- og avkledning og for å gjøre det lettere å ta på en løftesele. EasySlide til engangsbruk er en ny og svært anvendelig glidematte som gjør mange vanlige forflytninger, også de tunge, enklere for både brukeren og pleieren. Glidematten er laget av miljøvennlig polyetylenplast (PE) og den praktiske, hygieniske pakken inneholder en rull med opptil 60 EasySlide-matter for korttidsbruk.



EasySlide, engangs, 2040

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
2040	-	EasySlide, engangs	50 x 70 cm	2 x 60 stk.



## Utprøvningssekk/BackPack

### BackPack

Ryggsekken BackPack kan fylles med forskjellige praktiske hjelpemidler for posisjonering og forflytning.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
952	-	BackPack	Vurderingssekk/BackPack, mørkegrå	1 stk.



Eksempel på produkter som kan legges i sekken:



EasyGlide (5040/5042)



EasyGlide 5045



ReadySlide (11230)




FootStool (8090 + 8091)




EasyBelt, hug (6004)

# Veiledning for laken


Velg riktig glidesone på lakenet avhengig av brukerfunksjon.

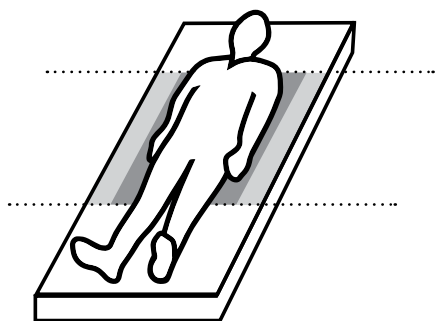

**Glidesone for hofte:** For mer aktive/lettere brukere som bare trenger glidefunksjon på hofte nivå.

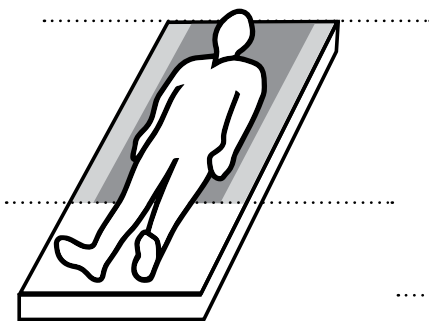


**Glidesone for hode-hofte:** For mindre aktive/tyngre brukere som trenger glidefunksjon fra hofte nivå og opp.

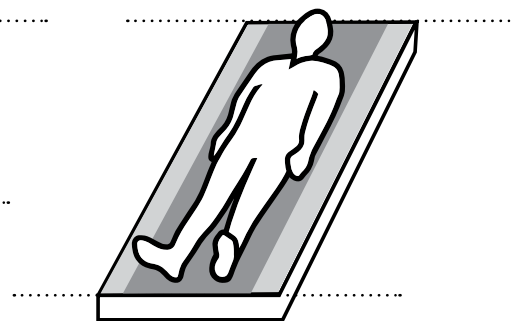

**Glidesone for hode-føtter:** For brukere som er passive/trenger mer intensiv pleie og der glidefunksjon er nødvendig for hele kroppen.

Velg riktig glidelaken etter sengebredde.

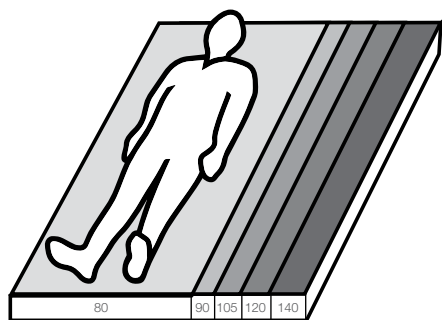

80 cm 31,5"	90 cm 35,4"	105 cm 41,3"	120 cm 47,2"	140 cm 55,1"
----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sengebredde

Madrassmålene er viktige for å kunne optimalisere glideflaten til lakenet og stimulere brukerens aktivitet.

Det finnes ingen anbefalt madrassbredde for våre stikkklakener og glidestikkklakener.

Finn riktig funksjon.



## Inkontinestrekk

Inkontinestrekken er et vaskbart laken som legges oppå et vanlig laken og/eller annet sengetøy. Inkontinestrekken er tilgjengelig med eller uten glideflate under. Materialet er svært absorberende og fordeler væske over en stor flate.



## Håndtak

N Noen glidestikkklakener har også håndtak som kan festes til personløftere. Det gjør det enklere i forhold til posisjonering, intimhygiene og å feste løfteseler.



## Strikk

Glidelaken med dette symbolet har en strikk som trekkes rundt madrassen. Andre laken har sidedeler som dyttes inn under madrassen.


## Vedlikeholdsinstruksjoner

Ta hensyn til vedlikeholdsinstruksjonene når du velger produkt.






## Velg riktige kombinasjoner.

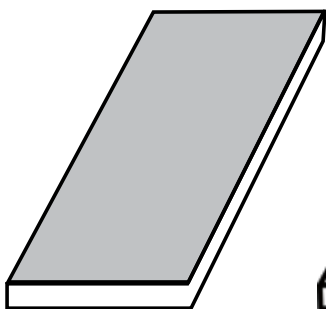


**Madrasstrekk** med barrierelag. Legges oppå madrassen.

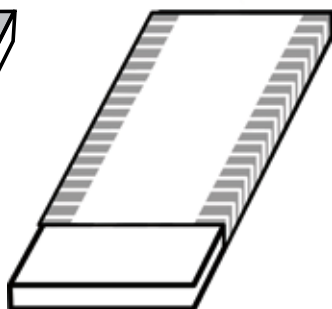

**Glidelaken.** Sateng i midtdelen og sklissikkert materiale i sidedelene. Forflytning skjer i mønsterets retning.



**Glidelaken + stikkklaken.** Forenkler vending og demper varmen fra satengen i glidelakenet. Forflytning skjer i mønsterets retning.

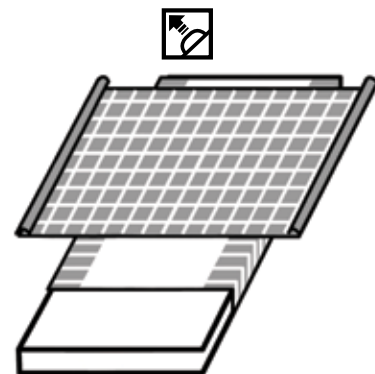

**Glidelaken + glidestikkklaken.** Begge lakenene har glideflater både nederst og øverst. Forflytning skjer i mønsterets retning.


## Slik brukes kombinasjonene



For pasienter som klarer å snu seg selv, er det ofte tilstrekkelig med et glidelaken som gir bedre gil i de områdene der dette er nødvendig.



En kombinasjon av glidelaken og stikkklaken brukes når brukeren er mindre aktiv, tyngre og har større behov for hjelp.

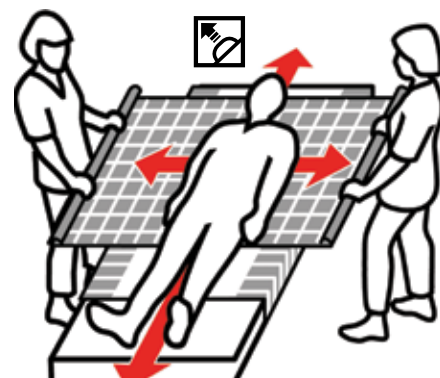

Kombinasjonen av glidelaken og glidestikkklaken brukes når brukeren er passiv, tyngre og har større behov for hjelp. Denne kombinasjonen brukes ofte sammen med en personløfter, under stell og ved applisering av løfteseil.

## Finn riktig laken.

Eksempel fra produktlisten:

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet
1661	WendyLett	120	120	120	95	Grå- og hvitstripet	Glidelaken	Mulig info

↑ Produktnavn  
 ↑ Artikkelnummer  
 ↑ Lakenet er egnet til denne sengebredden  
 ↑ Måll (lengde + bredde)  
 ↑ Sone/glideflate  
 ↑ Produktfarge  
 ↑ Produktfunksjon  
 ↑ Annen info  
 ↑ Spesielle egenskaper  
 ↑ Laken + glidesone på madrassen  
 ↑ HMS nr. xxxxx

# Posisjonering

## Glidematter og glidelaken

### WendyLett, produktutvalg




WendyLett  
Glidelaken  
side 19



WendyLett 2Way  
Stikkelaken  
side 20



WendyLett 4Way  
Glidestikkelaken  
side 21

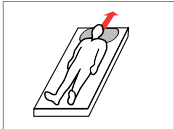


WendyLean  
putevar  
side 22



WendyLett Inco-serien  
WendyLett 4Way, Inco  
Glidestikkelaken  
side 21

### EasyRoll, produktutvalg

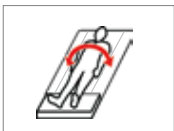

EasyRoll  
Glidelaken  
side 23–25




EasyRoll 2Way  
Stikkelaken  
side 26



EasyRoll 4Way  
Glidestikkelaken  
side 27



EasyRoll putevar  
side 29

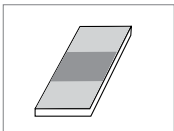

EasyRoll underlag  
og madrassbeskytter  
side 30–32



EasyRoll  
Glidelaken, Inco  
side 24



EasyRoll Inco 2Way  
Glidelaken  
side 26



EasyRoll 4Way  
Glidestikkelaken, Inco  
side 27




WendyLett-produktene er våre patenterte høykvalitetssystemer som er utformet for å gjøre det lettere å forflytte høyere opp i sengen, vending og mindre reposisjonering i sengen.

Sammen utgjør Direct Healthcare Groups tre WendyLett-lakener et nøye gjennomtenkt system med glide- og stikkklakener som utfyller hverandre og bidrar til å gjøre dagliglivet lettere for både brukere, helsepersonell og private omsorgspersoner.

## WendyLett glidelaken

WendyLett er et glidelaken av sateng. Glidningen skjer sideveis, i stripenes retning. WendyLett er beregnet på brukere som har problemer med å snu seg i sengen. WendyLett har en glatt midtdel, noe som betyr at svært lite energi trengs for å snu pasienten. Det er veldig lett for brukerne å gli sidelengs, men de blir stanset av et sklisikkert materiale i sidedelene, slik at de ikke glir ut av sengen.

Materialet hindrer også at brukeren glir nedover i sengen. Når WendyLett ikke er i bruk, kan det foldes rundt madrassen som et vanlig laken med den glatte overflaten i midten av sengen. For brukere som trenger mer hjelp kan WendyLett kombineres med WendyLett 2Way stikkklaken eller WendyLett 4Way glidestikkklaken. WendyLett er tilgjengelig i flere forskjellige versjoner og størrelser.

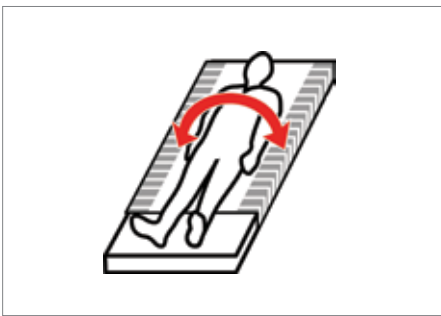

## Produktoversikt for WendyLett glidelaken

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Laken	Lengde på laken	Glidesone
1609	WendyLett	80-90	100	200	60	Hvitt	Glidelaken		HMS nr.		
1614	WendyLett	80-90	140	200	60	Hvitt	Glidelaken		HMS nr.		
1629	WendyLett	80-90	100	200	60	Grå- og hvitstripet	Glidelaken		HMS nr.		
1634	WendyLett	80-90	140	200	60	Grå- og hvitstripet	Glidelaken		HMS nr.		
1641	WendyLett	90	200	90	70	Grå- og hvitstripet	Glidelaken		HMS nr.		
1639	WendyLett	105	200	200	70	Grå- og hvitstripet	Glidelaken		HMS nr.		
1651	WendyLett	105	200	105	80	Grå- og hvitstripet	Glidelaken		HMS nr.		
1667	WendyLett	120	100	220	100	Grå- og hvitstripet	Glidelaken		HMS nr.		
1668	WendyLett	120	140	220	100	Grå- og hvitstripet	Glidelaken		HMS nr.		
1669	WendyLett	120	200	220	100	Grå- og hvitstripet	Glidelaken		HMS nr.		
1661	WendyLett	120	200	120	95	Grå- og hvitstripet	Glidelaken		HMS nr.		
1671	WendyLett	140	200	140	110	Grå- og hvitstripet	Glidelaken		HMS nr.		
1681	WendyLett	-	200	365	70	Grå- og hvitstripet	Glidelaken	Ekstra bred for valgfri plassering av glideflaten	HMS nr.		

**Materiale:** Polyester, bomull, sateng

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Ikke bruk tøymykner. Unngå tørketromling for å sikre optimal levetid for materialet.



# Posisjonering

## Glidematter og glidelaken




### WendyLett 2Way stikklaken

WendyLett 2Way er et stikklaken som er lagd av et materiale som er tilpasset til WendyLett glidelakener. Glidningen foregår sidelengs, i stripenes retning, noe som vil si at brukeren ikke glir nedover i sengen.

WendyLett 2Way plasseres oppå WendyLett glidelaken. Kombinasjonen gjør det lett for pleieren å snu brukeren sidelengs. WendyLett 2Way er tilgjengelig i flere forskjellige versjoner og størrelser.



### Produktoversikt for WendyLett 2Way glidelaken

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet
1620	WendyLett 2Way	-	90	180	-	Hvitt	Stikklaken	HMS nr. 
1631	WendyLett 2Way	-	100	200	-	Grå- og hvitstripet	Stikklaken	HMS nr. 
1636	WendyLett 2Way	-	140	200	-	Grå- og hvitstripet	Stikklaken	HMS nr. 

**Materiale:** Polyester, bomull, sateng

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Ikke bruk tøyknær. Unngå tørketromling for å sikre optimal levetid for materialet.



CE Medisinsk utstyr i klasse 1



#### Våre WendyLett-produkter

- Tynt høykvalitetsstoff som puster
- Egnet for brukere med risiko for å utvikle trykksår
- Mønster som tydelig viser glideretningen





### WendyLett 4Way glidestikklaken

WendyLett 4Way er et glidestikklaken som kan kombineres med et WendyLett glidelaken for å gjøre forflytning lettere både sideveis og opp/ ned i sengen, slik rutemønstret viser. WendyLett 4Way plasseres oppå WendyLett glidelaken.

Kombinasjonen muliggjør posisjonering i fire retninger og gjør det dermed

lettere å vende i sengen, repositionere høyere opp i sengen og mindre repositionering når pasienten ligger i sengen, selv med store, tunge eller helt passive brukere. WendyLett 4Way er tilgjengelig i mange versjoner og størrelser.

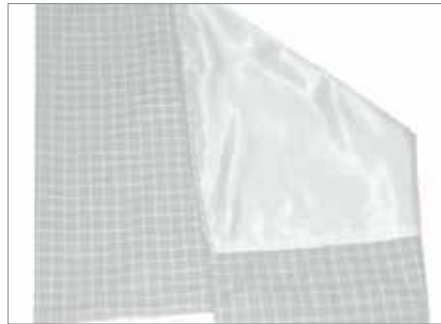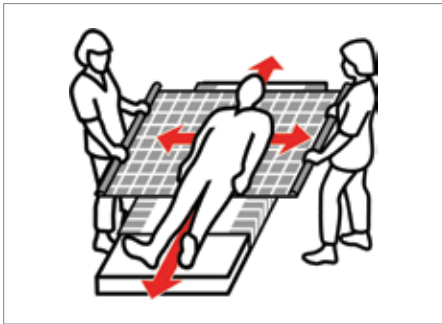

### Produktoversikt for WendyLett 4Way glidestikklaken

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Glideretning	
1657	WendyLett 4Way	-	140	190	-	Grå- og hvitrutete	Glidestikklaken		2 x 7 håndtak	HMS nr.
1637	WendyLett 4Way	-	140	200	-	Grå- og hvitrutete	Glidestikklaken			HMS nr.
1647	WendyLett 4Way	-	200	200	-	Grå- og hvitrutete	Glidestikklaken			HMS nr.
1652	WendyLett 4Way	-	140	260	-	Grå- og hvitrutete	Glidestikklaken		Bredere madrass	HMS nr.

**Materiale:** Polyester, bomull, sateng

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Ikke bruk tøyvaskemiddel. Unngå tørketromling for å sikre optimal levetid for materialet.



### Produktoversikt for WendyLett 4Way Inco glidestikklaken

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Glideretning	
1648	WendyLett 4Way, Inco	-	75	200	-	Grå- og hvitrutete	Glidestikklaken		Ekstra stoff på begge sider	HMS nr.
1649	WendyLett 4Way, Inco	-	140	120	-	Grått	Glidestikklaken		2 x 7 håndtak	HMS nr.

**Materiale:** Polyester, bomull, sateng

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Ikke bruk tøyvaskemiddel. Unngå tørketromling for å sikre optimal levetid for materialet.




WendyLett 4Way med håndtak, Art. nr. 1657

# Posisjonering

## Glidematter og glidelaken

### WendyLean

De patenterte håndtakene som trekker seg inn igjen i trekket av seg selv, er ikke den eneste fordelaktige funksjonen ved dette putevaret, men de er praktiske når du skal hjelpe en bruker å flytte seg høyere opp i sengen eller til sittende posisjon på sengekanten. Undersiden av putevaret er laget av myk sateng som gjør det svært enkelt både å posisjonere puten og å trekke den inn under skuldrene for å heve brukerens overkropp. Stripene viser glideretningen.

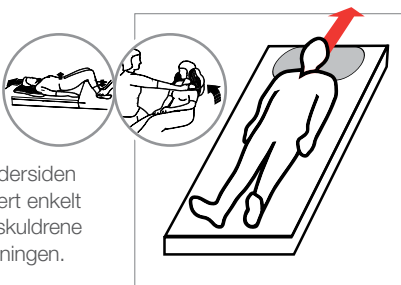

- Glatt sateng med håndtak som trekker seg inn i trekket av seg selv

### Produktoversikt for WendyLean

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Glideretning
1680	WendyLean	-	50	60	-	Grå- og hvitstripet	Putevar	2 håndtak	HMS nr.

**Materiale:** Overside: Polyester/bomull Bakside: Bomull/polyester Underside: Sateng  
**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Bruk ikke skyllemiddel. For å sikre maksimal levetid for materialet heng det til tork eller bruk torketrommel på lav varme.




CE Medisinsk utstyr i klasse 1



### EasyRoll glidelaken Hvitt

Det økonomiske alternativet til vårt WendyLett-system. Forskjellen er at EasyRoll er uføret og består av en glideflate som er laminert på et laken. EasyRoll-systemet er tilgjengelig i en rekke versjoner og størrelser med ulike funksjoner som er tilpasset for å sikre at du kan finne den beste løsningen for dine behov.

- **Markerings-sømmer for enklere plassering av lakenet**

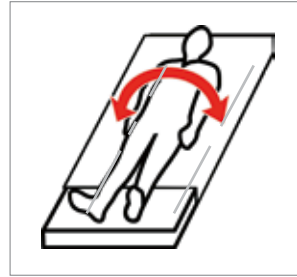

### Produktoversikt for EasyRoll glidelaken / hvitt

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet
41801PS	EasyRoll glidelaken	80	100	180	60	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
41802PS	EasyRoll glidelaken	80	140	180	60	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
41803PS	EasyRoll glidelaken	80	200	180	60	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
41901PS	EasyRoll glidelaken	90	100	200	60	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
41902PS	EasyRoll glidelaken	90	140	200	60	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
41903PS	EasyRoll glidelaken	90	200	200	60	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
411051PS	EasyRoll glidelaken	105	100	215	75	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
411052PS	EasyRoll glidelaken	105	140	215	75	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
411053PS	EasyRoll glidelaken	105	200	215	75	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
411201PS	EasyRoll glidelaken	120	100	230	90	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
411202PS	EasyRoll glidelaken	120	140	230	90	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -
411203PS	EasyRoll glidelaken	120	200	220	90	Hvitt	Glidelaken	HMS nr. -

Laken   
Lengde på laken   
Glidesone

**Materiale:** Sidedeler: bomull/polyester Glideflater: duchesse (polyester)  
**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Ikke bruk tøymykner. Unngå tørketromling for å sikre optimal levetid for materialet.



**CE** Medisinsk utstyr i klasse 1



# Posisjonering

## Glidematter og glidelaken

### EasyRoll glidelaken Hvit- og blåstripet

Det økonomiske alternativet til vårt WendyLett-system. Forskjellen er at EasyRoll er uføret og består av en glideflate som er laminert på et laken. EasyRoll-systemet er tilgjengelig i en rekke versjoner og størrelser med ulike funksjoner som er tilpasset for å sikre at du kan finne den beste løsningen for dine behov.

- **Markerings-sømmer for enklere plassering av lakenet**

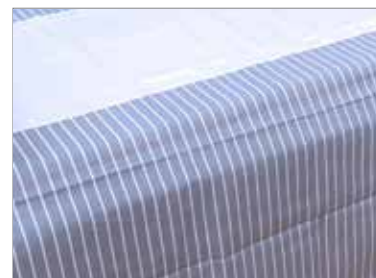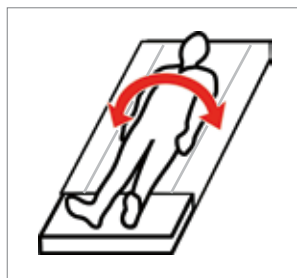

### Produktoversikt for EasyRoll glidelaken / hvit- og blåstripet

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Laken	Lengde på laken	Glidesone	HMS nr.
418011	EasyRoll glidelaken	80	100	180	50	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		-	-	-	-
418021	EasyRoll glidelaken	80	140	180	50	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		-	-	-	-
418031R	EasyRoll glidelaken	80	200	180	60	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		-	-	-	-
419011	EasyRoll glidelaken	90	100	190	60	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		-	-	-	-
419021	EasyRoll glidelaken	90	140	190	60	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		-	-	-	-
419031	EasyRoll glidelaken	90	200	190	60	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		-	-	-	-
419031R	EasyRoll glidelaken	90	200	90	70	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		-	-	-	-
4110511	EasyRoll glidelaken	105	100	205	75	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		-	-	-	-
4110521	EasyRoll glidelaken	105	140	205	75	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		-	-	-	-
4110531	EasyRoll glidelaken	105	200	205	75	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		-	-	-	-
4110531R	EasyRoll glidelaken	105	200	105	85	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		-	-	-	-
4112011	EasyRoll glidelaken	120	100	220	90	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		-	-	-	-
4112021	EasyRoll glidelaken	120	140	220	90	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		-	-	-	-
4112031	EasyRoll glidelaken	120	200	220	90	Hvit- og blåstripet	Glidelaken		-	-	-	-

**Materiale:** Sidedeler: bomull/polyester Glideflater: duchesse (polyester)  
**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Ikke bruk tøymykner. Unngå tørketromling for å sikre optimal levetid for materialet.





### EasyRoll glidelaken med skliskikker kant

EasyRoll glidelaken med skliskikker kant har bremsende overflater på sidene av glideflaten og er forsterket med silikon for å hindre at brukeren gli ut av sengen.

Glidelakenet trekkes på madrassen, og strikken gjør at glidelakenet sitter godt fast rundt madrassen. Egnet for personer med redusert mobilitet og/eller sterke smerter ettersom det gir god støtte ved vending dersom du ligger rett på lakenet. EasyRoll kan eventuelt brukes i kombinasjon med et stikkklaken eller et glidestikkklaken som et teknisk hjelpemiddel for pleiere som vender/reposisjonere pleiepasienter i sengen.




### Produktoversikt for EasyRoll glidelaken med skliskikker kant

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Breidde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Laken	Lengde på laken	Glidesone	HMS nr.
51901FAH	EasyRoll glidelaken med skliskikker kant	90	100	180	50	Hvit- og blåstripet	Glidelaken	Bremseflate i silikon	■	.....	■	-
51902FAH	EasyRoll glidelaken med skliskikker kant	90	140	180	50	Hvit- og blåstripet	Glidelaken	Bremseflate i silikon	■	.....	■	-
519031RAH	EasyRoll glidelaken med skliskikker kant	90	200	90	70	Hvitt	Glidelaken	Bremseflate i silikon	■	.....	■	-


**Materiale:** Sidedeler: bomull/polyester Glideflater: duchesse (polyester)

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Ikke bruk tøymykner. Unngå tørketromling for å sikre optimal levetid for materialet.

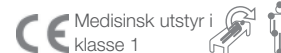

### EasyRoll glidelaken med barriere

EasyRoll glidelaken med barriere legges som et vanlig laken rett på sengen, sengelakenet festes under madrassen. Glidelakenet med væskebarriere brukes når det er risiko for lekkasje. Barrierelaget er fuktsikkert og forhindrer at væske sprer seg til underliggende sengetøy/madrass. Røde markørstriper gjør det enklere å sjekke at glidelakenet er riktig plassert.

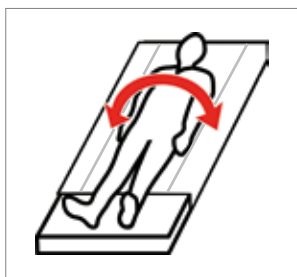


### Produktoversikt for EasyRoll glidelaken med barriere

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Breidde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Glideretning	Laken	Glidesone	HMS nr.
42901PS	EasyRoll glidelaken med barriere	90	100	200	60	Hvit/blå	Glidelaken med barriere	■	→	■	■	-
42902PS	EasyRoll glidelaken med barriere	90	140	200	60	Hvit/blå	Glidelaken med barriere	■	→	■	■	-

**Materiale:** Polyester Barriere: PU Absorberende lag: Polyester

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Vask før første gangs bruk. Må ikke renses. Må ikke kløres. Ikke bruk tøymykner. Unngå tørketromling for å sikre optimal levetid for materialet.

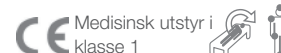


# Posisjonering

## Glidematter og glidelaken

### EasyRoll 2Way Stikkklaken

EasyRoll 2Way stikkklaken brukes i kombinasjon med EasyRoll glidelaken. Stikkklaken plasseres direkte oppå glidelakenet, og brukeren ligger på stikkklakenet. Kombinasjonen av glidelakenet og stikkklakenet er et svært godt hjelpemiddel ved vending av en pasient som ligger i sengen. Ved å gripe i stikkklakenet og trekke, kan brukeren enkelt flyttes til ønsket posisjon.

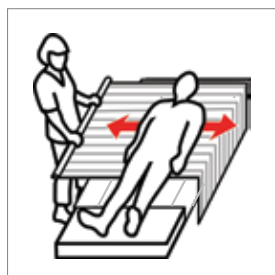

### Produktoversikt for EasyRoll 2Way stikkklaken

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet
2101S	EasyRoll 2Way stikkklaken	-	140	200	-	Blå- og hvitstripet	Stikkklaken	Markørstriper viser draretningen

**Materiale:** Duchesse, bomull/polyester


**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Vask for første gangs bruk. Tørkes ved maks. 70 °C.



### EasyRoll Inco 2Way Glidelaken

EasyRoll Inco 2Way glidelaken er et absorberende inkontinestreck med barrierelag som forhindrer lekkasje. Undersiden av produktet har også et lavfriksjonsbelegg (glidende stoff) som gjør det lett å gli i sengen. Det vil si at det blir lettere for pleierne å snu pasienten.

EasyRoll Inco 2Way glidelaken har tre håndtak på hver side for best mulig grep ved bevegelse av pasienten sideveis.

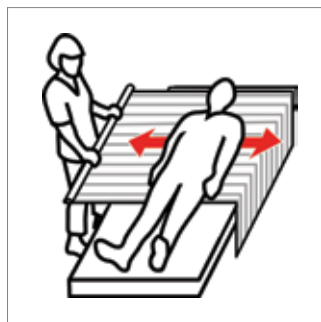

• Dette produktet brukes uten glidelaken under

### Produktoversikt for EasyRoll Inco 2Way glidelaken

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet
10991	EasyRoll Inco 2Way	-	90	185	-	Hvitt/rodt	Glidelaken	2x3 håndtak


**Materiale:** Duchesse Barriere: PU Absorberende lag: Polyester/rayon

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Vask for første gangs bruk. Tørkes ved maks. 70 °C.



### EasyRoll 4Way Glidestikkklaken

Glidestikkklakenet plasseres direkte oppå et glidelaken, med glideflatene mot hverandre. EasyRoll glidestikkklaken er et teknisk hjelpemiddel for helsepersonell for enkel vending/reposisjonering av en bruker som befinner seg i sengen. Når man vender brukeren, frigjøres glidestikkklakenet fra madrassen. Pleieren tar tak i glidestikkklakenet ved brukerens hofter og skulder og sørger for å fylle hendene med stoffet. Deretter, med rette håndledd, lener pleieren seg bakover slik hans eller hennes vekt utøver kraft på lakenet. Hvis det finnes to pleiere, kan den andre hjelpe til ved å presse ned på brukerens skulder og hofter på motsatt side og skyve. Dermed vendes brukeren. Etter vendingen stappes glidestikkklakenet inn på begge sider av madrassen.

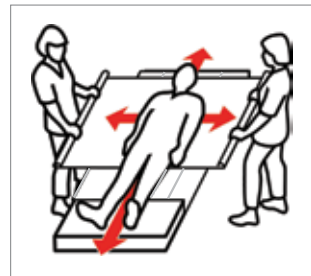

### Produktoversikt for EasyRoll 4Way glidestikkklaken

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Glideretning
4011S	EasyRoll 4Way glidestikkklaken	-	140	210	-	Hvit/blå	Glidestikkklaken		HMS nr.
4011L	EasyRoll 4Way glidestikkklaken	-	200	200	-	Hvit/blå	Glidestikkklaken		HMS nr.
4011S1	EasyRoll 4Way glidestikkklaken	-	150	200	-	Hvit- og blåstripet	Glidestikkklaken		HMS nr.
4111T	EasyRoll 4Way glidestikkklaken	-	140	115	-	Hvit/blå	Glidestikkklaken (med underliggende sengestopper)	2 x 9 håndtak	HMS nr.
4111LT	EasyRoll 4Way glidestikkklaken	-	200	115	-	Hvit/blå	Glidestikkklaken (med underliggende sengestopper)	2 x 13 håndtak	HMS nr.

**Materiale:** Duchesse, bomull/polyester

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Ikke bruk tøymykner. Vask før første gangs bruk. Tørkes ved maks. 70 °C.



CE Medisinsk utstyr i klasse 1



### Produktoversikt for EasyRoll 4Way glidestikkklaken, Inco

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Glideretning
10992-5	EasyRoll 4Way glidestikkklaken, Inco	-	140	200	-	Hvitt/rødt	Glidestikkklaken	2 x 5 håndtak	HMS nr.

**Materiale:** Duchesse Barriere; PU Absorberende lag; Polyester/rayon

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Ikke bruk tøymykner. Vask før første gangs bruk. Tørkes ved maks. 70 °C.



CE Medisinsk utstyr i klasse 1





### EasyRoll putevar

EasyRoll putevar (4303) med glideflate har lav friksjon sideveis, noe som øker mobiliteten for nakken og skuldrene. Det gir også lavere friksjon på baksiden av hodet og ved ørene. EasyRoll putevar med barriere (4304) har et barrierelag på innsiden som beskytter det mot smuss og fuktighet, og det fungerer også som en middbarriere. Trekket er forsterket ved at putevaret kan lukkes med en glidelås. Dette putevaret har ingen glidefunksjon.



### Produktoversikt for EasyRoll putevar

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Glideretning	
4303	EasyRoll glideputevar	-	50	60	-	Hvitt	Putevar	Glideflate med lav friksjon	HMS nr. -	
4304	EasyRoll putevar med barriere	-	50	60	-	Hvitt	Putevar	Barrierelag	HMS nr. -	

**Materiale: 4303:** Glideflate: Duchesse (100 % polyester) Bakside: Bomull/polyester **4304:** Barrierelag Polyuretan Område: Bomullsjersey

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Ikke bruk tøymykner. Vask for første gangs bruk. Tørkes ved maks. 70 °C.



**CE** Medisinsk utstyr i klasse 1

# Posisjonering

## Glidematter og glidelaken

### EasyRoll Underpad med sengestropper

EasyRoll Underpad madrassstrekk brukes til å absorbere væske i sengen når brukeren er inkontinent. Trekket absorberer omtrent 1–2 liter/m<sup>2</sup> og har et laminert barriereleg som hindrer at væske trenger gjennom til annet sengetøy. Madrassstrekket er sterkt og godt egnet ved vending/reposisjonering av pasientene i sengen. Ved flytting/posisjonering av brukerne, må du holde i absorpsjonsdelen, siden sidedelene ikke er egnet til å trekke i og reposisjonere. Brukt sammen med et glidelaken, får man en utmerket produktkombinasjon av hjelpemidler for inkontinens og reposisjonering.



### Produktoversikt for EasyRoll Underpad med sengestropper

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Breddde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	
								Barriereleg	
80011B	EasyRoll Underpad	80–90	80	180	–	Hvitt/blekgrønt	Madrassstrekk med sengestropper		HMS nr. -
80011P	EasyRoll Underpad	80–90	80	180	–	Hvitt/blekgrønt	Madrassstrekk med sengestropper		HMS nr. -
80011-1	EasyRoll Underpad	80–90	85	180	–	Hvitt/blekgrønt	Madrassstrekk med sengestropper		HMS nr. -
80011PL	EasyRoll Underpad	80–90	90	210	–	Hvitt/blekgrønt	Madrassstrekk med sengestropper		HMS nr. -
80011PS	EasyRoll Underpad	90	70	190	–	Hvitt/blekgrønt	Madrassstrekk med sengestropper		HMS nr. -

#### Materiale:

**80011B:** Sengeflate: Bomull/polyester; barriere: PU; absorberende lag: Polyester

**80011P:** Sengeflate: Polyester; barriere: PU; absorberende lag: Polyester

**80011-1:** Sengeflate: Bomull/polyester; barriere: PU; absorberende lag: Polyester

**80011PL:** Sengeflate: Polyester; barriere: PU; absorberende lag: Polyester

**80011PS:** Sengeflate: Duchesse, bomull/polyester; barriere: PU; absorberende lag: Polyester/rayon

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Kan tørketromles ved 70 °C. Må ikke renses. Må ikke kiores. Ikke bruk tøymykner. Vask for første gangs bruk for å aktivere absorbenten.



## EasyRoll Underpad med sengestroppe /ekstra beskyttelse

EasyRoll Underpad madrassstrekk brukes til å absorbere væske i sengen når brukeren er inkontinent. Denne modellen har en ekstra absorberende funksjon. Madrassstrekket er sterkt og svært godt egnet for bruk ved vending/reposisjonering av pasienter i sengen. Når trekket brukes sammen med et glidelaken, får man en utmerket produktkombinasjon av hjelpemidler for inkontinens og reposisjonering.



### Produktoversikt for EasyRoll Underpad med sengestroppe/ekstra beskyttelse

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Barrirelag
80019	EasyRoll Underpad	90/	120	180	-	Hvitt/blekgrønt	Madrassstrekk med sengestroppe		HMS nr. -
80018	EasyRoll Underpad	90/	150	180	-	Hvitt/blekgrønt	Madrassstrekk med sengestroppe		HMS nr. -

**Materiale:** Sengeflate i bomull/polyester. Absorberende lag av polyester/rayon. Væskebarriere av polyuretan.  
**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Kan tørketromles ved 70 °C. Må ikke renses. Må ikke kleses. Ikke bruk tøymykner. Vask før første gangs bruk for å aktivere absorbenten.



Medisinsk utstyr i klasse 1

## EasyRoll Underpad uten sengestroppe

Madrassstrekk brukes som absorberende beskyttelse i sengen for inkontinente brukere. Trekket absorberer ca. 1-2 liter/m<sup>2</sup> og har et laminert barrirelag som hindrer at væske trenger gjennom til annet sengetøy. Madrassstrekket er sterkt og svært godt egnet for bruk ved vending/reposisjonering av pasientene i sengen. Ved flytting/posisjonering av brukerne, må du holde i absorpsjonsdelen, siden sidedelene ikke er egnet til å trekke i og reposisjonere. Ved bruk sammen med et glidelaken oppnås en svært bra produktkombinasjon av hjelpemidler ved inkontinens og reposisjonering. På grunn av lakenets høye absorpsjonsevne opplever brukeren en bedre følelse av tørrhet fordi produktet sjelden anvendes opp til sin maksimale absorpsjon.



### Produktoversikt for EasyRoll Underpad uten sengestroppe

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet	Barrirelag
80017-1	EasyRoll Underpad	80-90	85	90	-	Hvitt/blekgrønt	Madrassstrekk uten sengestroppe		HMS nr. -

**Materiale:** Polyester Barriere: PU Absorberende lag: Polyester  
**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Kan tørketromles ved 70 °C. Må ikke renses. Må ikke kleses. Ikke bruk tøymykner. Vask før første gangs bruk for å aktivere absorbenten.




Medisinsk utstyr i klasse 1

# Posisjonering

## Glidematter og glidelaken

### EasyRoll Underpad med glidelaken

EasyRoll Underpad med glidelaken brukes på samme måte som EasyRoll Underpad, men har ergonomiske sidedeler og brukes til beskyttelse i sengen for inkontinente brukere og som et hjelpemiddel ved repositionering. Trekket absorberer omtrent 1–2 liter/m<sup>2</sup> og har et laminert barrierelag som hindrer at væske trenger gjennom til annet sengetøy. Underlaget er sterkt og svært godt egnet for bruk ved vending/repositionering av pasienter i sengen. Glideflaten på bunnen gir en utmerket produktkombinasjon av hjelpemidler for inkontinens og repositionering.

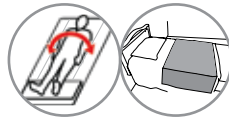

• Dette produktet brukes uten glidelaken under

### Produktoversikt for EasyRoll Underpad med glidelaken

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet
80010P	EasyRoll Underpad med glidelaken	80–90	80	180	–	Hvitt	Madrassstrekk med sengestropper, glideflate på undersiden	Barrierelag <input checked="" type="checkbox"/> HMS nr.

**Materiale:** Sengeflate i polyester. Absorberende lag av polyester/rayon. Væskebarriere av polyuretan. Glideflate av duchesse.

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Kan tørketromles ved 70 °C. Må ikke renses. Må ikke kloses. Ikke bruk tøymyknere. Vask for første gangs bruk for å aktivere absorbenten.



### EasyRoll madrassbeskytter

Madrassbeskyttere beskytter madrassen mot fuktighet, f.eks. ved inkontinens, eller mot midd, eller de fungerer som generell beskyttelse for madrassen/madrassovertrekket. Madrassbeskytteren har et barrierelag i bunnen for å forhindre at fuktighet siver gjennom. Denne fungerer også som en middbarriere.



### Produktoversikt for EasyRoll madrassbeskytter

Art. nr.	Produktnavn	Passer til madrass (cm)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Glideflate (cm)	Farge	Funksjonalitet	Annet
90.200J01	EasyRoll madrassbeskytter	90	200	90	–	Hvitt	Madrassstrekk	 Art. nr. 90.200J01
105.200J01	EasyRoll madrassbeskytter	105	200	105	–	Hvitt	Madrassstrekk	 Art. nr. 105.200J01
120.200J01	EasyRoll madrassbeskytter	120	200	120	–	Hvitt	Madrassstrekk	 Art. nr. 120.200J01

**Materiale:** Sengeflate i bomullsjersey. Væskebarriere av polyuretan.

**Vedlikeholdsinstruksjoner:** Kan tørketromles ved 70 °C. Må ikke renses. Må ikke kloses. Ikke bruk tøymyknere.







### PositioningCover

PositioningCover er et fasongsydd madrastrekk som brukes under et vanlig laken for posisjonering i sengen.

PositioningCover kan brukes sammen med alle typer madrasser og i situasjoner der det finnes spesielle krav til forflytning av brukeren i sengen, for eksempel for sengeliggende brukere på intensivavdelinger. PositioningCover er laget av Direct Healthcare Groups eget unike glidemateriale ULF™ (Ultra Low Friction). Ved å redusere friksjonen under brukeren, kan brukeren enkelt og trygt repositioneres, vendes og flyttes høyere opp i sengen med lite bruk av krefter og uten behov for å løfte. Dette er komfortabelt for brukeren og det sparer pleierens rygg og skuldre.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
1596	-	PositioningCover	200 x 90 cm, med strammesnor	1 stk.
1596S	-	PositioningCover	200 x 90 cm, madrassovertrekk med strikk	1 stk.



## Glidematter og glidelaken



### TurnSheet (system i to deler)

En smertesensitiv bruker som krever intensiv og hyppig pleie, kan være en utfordring for pleierne. Med TurnSheet (210 x 150 cm) kreves det lite krefter og man unngår unødvendig løfting under vending. Dette hjelpemiddelet brukes både på sykehus og i hjemmepleien. Det ligger permanent i sengen og dekker alle trykkpunkter så det effektivt kan forhindre trykksår fra å utvikle seg.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produkt navn	Beskrivelse	Enhet
1592	-	TurnSheet	210 x 150 cm	1 stk.
1588	-	TurnSheet	200 x 150 cm, med spenner	1 stk.
1597	-	TurnSheet	200 x 160 cm, todelt	1 stk.
1589	-	TurnSheet	200 x 240 cm, for ekstra tunge brukere	1 stk.

Art. nr.	Madrasstrekk	Beskrivelse	Enhet
1593	-	Til 1592, 1590, 1597 og TopSheet 1510, 1515, 1511, lengde 200 cm, passer til seng på 90 cm	1 stk.
1587	-	For 1588 og 1586, lengde 200 cm, passer til seng på 90 cm	1 stk.
1594	-	Til 1592, 1589 og TopSheet 1510, 1515, lengde 200 cm, passer til seng på 105 cm	1 stk.
1595	-	For 1592 og 1589, lengde 200 cm, passer til seng på 120 cm	1 stk.





TopSheet 1520

### TopSheet

TopSheet brukes for inkontinente, sengeliggende brukere som må vendes ofte. TopSheet er også utmerket når du trenger å holde en tung bruker i en sideliggende posisjon, f.eks. når du hjelper til med personlig hygiene eller skifter bandasjer.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
1515	-	TopSheet	155 x 140 cm, ULF* på undersiden	1 stk.
1510	159174	TopSheet	200 x 160 cm, ULF* på undersiden	1 stk.
1520	074679	TopSheet	144 x 140 cm	1 stk.



TopSheet 1515

Art. nr.	Ekstra nedre deler	Beskrivelse	Enhet
1514	-	Nedre del for TopSheet 1515	1 stk.
1519	-	Nedre del for TopSheet 1520	1 stk.
1509	-	Nedre del for TopSheet 1510	1 stk.

\*) ULF: Ultra Low Friction




## Andre posisjoneringshjelpemidler



### AntiSlip

AntiSlip er nyttig når man trenger et godt grep for å flytte seg høyere opp i sengen. Det kan også brukes som en friksjonsflate mellom materialer i mange av våre glideprodukter.

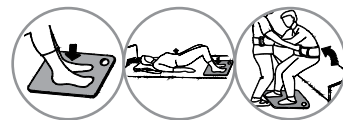

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
8040	089405	AntiSlip	45 x 38 cm	1 stk.
8045	-	AntiSlip	45 x 38 cm	10 stk.



FootStool 8090



FootStool 8095

### FootStool

FootStool brukes til å løfte brukerens knær for å muliggjøre en enklere og sikrere forflytning i en sittende stilling. FootStool gir også utmerket støtte under brukerens føtter under toalettbesøk eller ved forflytning lengre inn i en stol eller rullestol.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
8090	134518	FootStool	32 x 38 x 10 cm	1 stk.
8095	234356	FootStool	32 x 38 x 5 cm	1 stk.

Designbeskyttelse: RCD-67533-1



### FootStoolCover

FootStoolCover er et avtørkbart trekk som er designet for bruk sammen med Direct Healthcare Groups FootStool. Det er laget av et avtørkbart materiale, noe som gir optimal hygiene. Trekket har et håndtak slik at man enkelt kan transportere FootStool, eller det kan oppbevares på en henger når FootStool ikke er i bruk.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
8091	-	FootStoolCover	Avtørkbart trekk til FootStool art. nr. 8090	1 stk.
8096	-	FootStoolCover	Avtørkbart trekk til FootStool art. nr. 8095	1 stk.

Designbeskyttelse: RCD-67533-1





## Hjelpemidler for sittende-til-stående



FlexiMove 3030

### FlexiMove

FlexiMove har flere bruksområder. For eksempel som støtte når man hjelper noen med å reise seg fra en seng eller stol, når man flytter en bruker høyere opp i sengen eller ved forflytning til og fra en rullestol – da ofte på en glideskive. FlexiMove er tilgjengelig i to varianter med forskjellig materiale på innsiden.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
3012	141591	FlexiMove	20 x 60 cm, nylon	1 stk.
3030	-	FlexiMove	20 x 60 cm, polyesterfløyel	1 stk.



### FlexiGrip

FlexiGrip har en ergonomisk design som gir økt komfort for hender og hud. Det er en ideell løsning for brukere som har fysiske begrensninger som gjør det vanskelig å komme seg ut av sengen. Steg for steg trekker de seg gradvis opp fra en liggende til en sittende stilling. FlexiGrip kan også brukes for å hjelpe til ved forflytninger fra rullestol til seng.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
6090	-	FlexiGrip	175 x 9 cm, 8 håndtak	1 stk.

#### Tilbehør

6091	-	Forlengelsesrem	120 cm, for FlexiGrip	1 stk.
------	---	-----------------	-----------------------	--------



## Belter



### PositioningBelt

PositioningBelt brukes som støtte i forskjellige overflytnings-situasjoner. Det skal ikke brukes som hjelpemiddel ved løfting. Innsiden av EasyRoll Belt er trukket med nylon, slik at det blir lettere å vaske eller tørke av det med desinfeksjonsmiddel.

EasyRoll Belt har en myk innside som føles komfortabel mot huden. Begge materialene har antiskliellegg.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
9007S	-	PositioningBelt	20 x 70 cm (B x L)	1 stk.
9007L	-	PositioningBelt	17 x 120 cm (B x L)	1 stk.
9007XL	-	PositioningBelt	17 x 240 cm (B x L)	1 stk.





## FlexiBelt / EasyBelt

FlexiBelt og EasyBelt brukes til sittende-til-stående-forflytninger eller for å flytte en bruker fra rullestolen til sengen, toalettet eller bilen. FlexiBelt har en myk innside av polyesterfløyel slik at det er svært komfortabelt under bruk.

EasyBelt har et innvendig antiskliblegg av PU-belagt nylon og kan derfor brukes i miljøer der det finnes fuktighet og væte eller når det stilles spesielle krav til hygiene. EasyBelt er også tilgjengelig i et avtørkbart materiale som kan rengjøres med desinfeksjonsmidler.

FlexiBelt, hug og EasyBelt, hug er nye versjoner av Direct Healthcare Groups klassiske belter. FlexiBelt, hug og EasyBelt, hug har en ny patentert\* design med horisontale håndtak som glir fritt i løkker slik at beltet hekter seg fast til brukeren i stedet for å gli oppover i forflytningssituasjoner. Med FlexiBelt, hug og EasyBelt, hug kan pleieren gi enda mer støtte uten å gjøre en større innsats. Den nye designen gjør faktisk alt arbeidet av seg selv.



FlexiBelt, hug



EasyBelt, hug

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
6072	207034	FlexiBelt, hug	XS, 45–70 cm, 3 + 2 bevegelige håndtak	1 stk.
6073	-	FlexiBelt, hug	S, 60–100 cm, 4 + 3 bevegelige håndtak	1 stk.
6074	174425	FlexiBelt, hug	M, 70–120 cm, 5 + 4 bevegelige håndtak	1 stk.
6075	-	FlexiBelt, hug	L, 100–160 cm, 6 + 5 bevegelige håndtak	1 stk.
6076	-	FlexiBelt, hug	XL, 115–175 cm, 7 + 6 bevegelige håndtak	1 stk.
6002	-	EasyBelt, hug	XS, 45–70 cm, 3 + 2 bevegelige håndtak	1 stk.
6003	156626	EasyBelt, hug	S, 60–100 cm, 4 + 3 bevegelige håndtak	1 stk.
6004	-	EasyBelt, hug	M, 70–120 cm, 5 + 4 bevegelige håndtak	1 stk.
6005	193919	EasyBelt, hug	L, 100–160 cm, 6 + 5 bevegelige håndtak	1 stk.
6006	-	EasyBelt, hug	XL, 115–175 cm, 7 + 6 bevegelige håndtak	1 stk.

### Tilbehør

6061	166866	SupportStraps	Tilbehør for belter	1 par
------	--------	---------------	---------------------	-------

\*) Patent: SE-536273, EP-2611409, Patentsøkt: JP-2013-527040



## ReadyBelt

ReadyBelt er et belte som er designet for å gi brukeren støtte og assistanse under mobilitetstrening og i ulike forflytningssituasjoner. For pleieren er ReadyBelt et ideelt hjelpemiddel for å støtte brukeren under mobilitetstrening eller ved toalettbesøk.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
16023	-	ReadyBelt	Small, 105 x 10 cm, 7 håndtak	1 stk.
16024	-	ReadyBelt	Medium, 120 x 10 cm, 9 håndtak	1 stk.
16025	-	ReadyBelt	Large, 140 x 10 cm, 11 håndtak	1 stk.



# Støtte

## Belter



### WalkingBelt

WalkingBelt brukes til å støtte barn med svekket styrke og stabilitet under gåtrening. WalkingBelt, som gir støtte rundt overkroppen, holdes på plass med en polstret bensele. Lengden på de to polstrede håndtakene kan tilpasses for å gi pleieren en komfortabel arbeidsstilling når han eller hun går ved siden av barnet og holder i håndtakene for å gi barnet ekstra støtte og stabilitet under gåtrening



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
6041	166078	WalkingBelt	XXS, 60 cm	1 stk.
6042	199775	WalkingBelt	XS, 70 cm	1 stk.




## Støttetilbehør



### SupportStraps

SupportStraps er et flerfunksjonelt tilbehør som gir ekstra støtte og sikkerhet for brukere i stående stilling og under gåtrening og forflytninger med Direct Healthcare Groups belter, sittende-til-stående-hjelpemidler og forflytningsplattformer. SupportStraps kan brukes som:

- bensele for EasyBelt/FlexiBelt og ReadyBelt
- overkroppss-/sidedstøtte når man bruker QuickMove sammen med EasyBelt/FlexiBelt/FlexiMove
- sidedstøtte når man bruke ReTurn sammen med ReTurnBelt

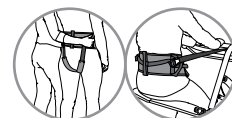

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
6061	166866	SupportStraps	Tilbehør for belter	1 par



## Gåhjelpemidler



### RoWalker400

RoWalker400 er et unikt, ergonomisk designet gåhjelpemiddel for tidlig mobilisering, spesifikt for brukere som har gjennomgått hjerte/lunge- og mageoperasjoner. RoWalker400 gir sikker og trygg støtte under gå- og ståtrening. Flere justerbare innstillinger sikrer perfekt tilpasning for enhver bruker og innebygde seteputer sørger for komfortabel hvile. RoWalker400 har også integrasjon for oksygen, oppsamlingsposer og IV-stenger.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
20101010	-	RoWalker400	Gåhjelpemiddel for tidlig mobilisering	1 stk.

#### Tilbehør

70200059	-	OxygenTankHolder	Høyre, komplett med låsehåndtak	1 stk.
70200060	-	OxygenTankHolder	Venstre, komplett med låsehåndtak	1 stk.



OxygenTankHolder






TurnTable 5085

## TurnTable

TurnTable kan brukes til forflytninger i sittende stilling mellom rullestol og seng, toalett eller stol/lenestol. For økt sikkerhet kan TurnTable brukes sammen med FlexiBelt/EasyBelt. TurnTable er tilgjengelig med håndtak.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produkt navn	Beskrivelse	Enhet
5085	043152	TurnTable	Ø 38 cm, maks. 135 kg	1 stk.

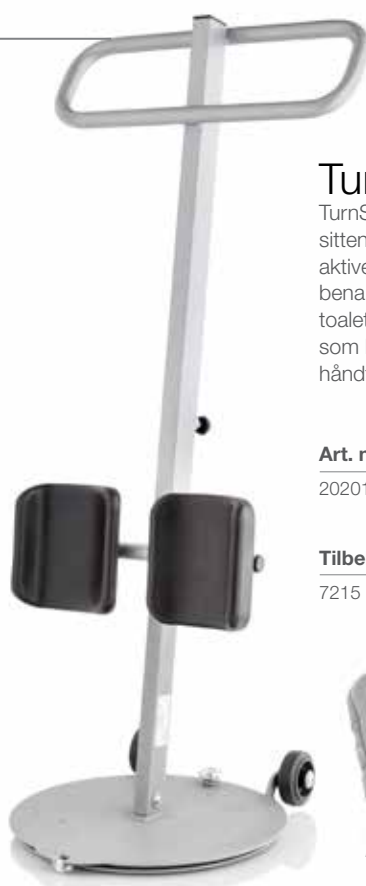

## TurnSafe2

TurnSafe2 er et ergonomisk og lettanvendelig hjelpemiddel for sittende-til-stående og forflytninger med vending. TurnSafe2 aktiverer og støtter brukere med svekket balanse og styrke i bena under forflytninger fra seng til rullestol eller fra rullestol til toalett. TurnSafe2 har en stor fotplate med en antiskloverflate, justerbar høyde og støtte for nedre del av bena som kan justeres både sideveis og i høyden. Disse egenskapene, sammen med de stabile og gripevennlige håndtakene, gjør at brukeren kan delta aktivt i sittende-til-stående og forflytninger.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produkt navn	Beskrivelse	Enhet
20201010	-	TurnSafe2	Maks. 150 kg	1 stk.

### Tilbehør

7215	-	Polstring for benstøtte	For TurnSafe2 og ReTurn 7400, 7500, 7500i	1 par
------	---	-------------------------	---	-------



Polstring for benstøtte



## Støttetilbehør



## PantLock

PantLock festes rundt låret for å hindre at buksen glir for langt ned, f.eks. ved besøk på toalettet. Dette gjør det enklere å nå ned og trekke opp buksen etterpå. PantLock har borrelåsremser som føres gjennom en øyering av metall, og som deretter festes til hverandre.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produkt navn	Beskrivelse	Enhet
8055	-	PantLock	En størrelse	1 stk.



## Oppreisningshjelpemidler

### ReTurn

ReTurn er et enkelt og utrolig effektivt hjelpemiddel for oppreisning og forflytning, men det er også et treningsredskap. ReTurn muliggjør sikker og aktiv oppreisning og forflytninger til eller fra seng, rullestol eller toalett. ReTurn kan også brukes som et hjelpemiddel til posisjonering lengre inn i stol eller rullestol. For pleieren gir ReTurn enkle forflytninger uten tunge løft.

For brukere som fremdeles har en viss styrke, stimulerer ReTurn det naturlige bevegelsesmønstret under oppreisning, samtidig som det styrker musklene og funksjonsevnen. Det gjør ReTurn til et ideelt hjelpemiddel i en rehabiliteringsenhet, og en bruker som anvender det hjemme, kan vanligvis bo hjemme lenger med hjelp fra bare én hjelper.

ReTurn er tilgjengelig i tre modeller, alle med en unik, patentert\* design som sørger for lett manøvrering, selv med tunge brukere på trange steder. De er også enkle å montere og demontere for transport og oppbevaring.



- **ReTurn7500i** har en oppreisningsstige med standard høyde og er egnet for de fleste voksne brukere (maks. 150 kg). ReTurn7500i er også tilgjengelig i en ny versjon der oppreisningsstigen (patentsøkt\*\*) har en åpning slik at man raskt og enkelt kan hekte fast ReTurnBelt.
- **ReTurn7400** har en lav oppreisningsstige som er ideell for kortvokste og barn (maks. 150 kg). Den fungerer også godt i spesielle pleie-situasjoner, f.eks. på en røntgenavdeling.
- **ReTurn7600** er utviklet for brukere som veier opp til 205 kg. Denne modellen har derfor en bredere bunnplate, slik at den gir mer plass til større og tyngre brukere.

ReTurn7600 har også leggstøtter som er tilpasset for disse brukerne, og en oppreisningsstige som er både høyere og bredere enn stigen på ReTurn7500i og ReTurn7400.

ReTurn7500i og ReTurn7400 har samme stabile bunnplate, som gjør det mulig å bytte mellom stiger med lav eller standard høyde slik at man kan dekke flere behov og utnytte produktet best mulig.

\*) Patent: SE-0300528-7

\*\*) Patentsøkt: EP-12868688-8, US-14/378658

Designbeskyttelse: RCD-529631-1 (ReTurn7500/7500ii/7400/7600)

## Oppreisningshjelpemidler



ReTurnBelt



SupportStraps



HeelStrap



Polstring for benstøtte, 7215, 7216



Bag

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
7500i	163938	ReTurn7500i	Forflytningsplattform, komplett med oppreisningsstige med standard høyde, med åpning for å hekte fast ReTurnBelt	1 stk.
7400	113683	ReTurn7400	Forflytningsplattform, komplett med lav oppreisningsstige	1 stk.
7600	212999	ReTurn7600	Forflytningsplattform, komplett med bred oppreisningsstige	1 stk.

### Tilbehør

6031--6038	-	ReTurnBelt***	Str. XXS-XXXL, for ReTurn med artikkelnummer 7100****, 7500, 7500i, 7400, 7600	1 stk.
6061	166866	SupportStraps	Tilbehør for belter	1 par
7250	-	HeelStrap	For ReTurn7500 med serienummer fra 373317697500500001 og for ReTurn7400 med serienummer fra 373317697400500001	1 stk.
7215	-	Polstring for benstøtte	For ReTurn med artikkelnummer 7100****, 7500, 7500i, 7400 (standardutstyr for 7500i) og for TurnSafe	1 par
7216	-	Polstring for benstøtte	For ReTurn med artikkelnummer 7600	1 par
954	-	Bag	For ReTurn med artikkelnummer 7500, 7500i, 7400	1 stk.

\*\*\*) Patent: SE-0401517-8

\*\*\*\*) Produktet er slettet fra sortimentet



## Oppreisningshjelpemidler



### QuickMove

QuickMove er et sikkert og lettanvendelig hjelpemiddel for oppreisning og forflytning av brukere med svekket balanse og redusert benstyrke. Basert på naturlige bevegelsesmønstre støtter QuickMove brukeren når han eller hun reiser seg ved egen styrke, og deretter forflyttes, i stående eller sittende stilling, fra sengen til en stol eller rullestol eller til og fra toalettet. Brukeren må ha en viss styrke i armene og kunne bære sin egen vekt for å kunne delta aktivt i forflytningen. BackSupport er et tilbehør som kan brukes som overkropps-/sidestøtte for QuickMove. Det gir ekstra stabilitet og trygghet for brukere under forflytninger med QuickMove.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produkt navn	Beskrivelse	Enhet
400801334	-	QuickMove	Maks. 170 kg	1 stk.
<b>Tilbehør</b>				
70200037	-	BackSupport	Ryggstøtte for QuickMove	1 stk.



BackSupport





## Oppreisningshjelpemidler



MiniLift200 sett forfra




SlingBarWrap MiniLift



CalfStrap

### MiniLift

MiniLift er en mobil aktivløfter som er utviklet for å hjelpe brukere, så skånsomt som mulig, med å reise seg fra en sittende til en stående stilling. Brukt i kombinasjon med det rette tilbehøret får brukeren støtte under føttene, for knærne og leggene samt bak ryggen. MiniLift er tilgjengelig i flere modeller for brukere som veier fra maks. 125 kg til maks. 200 kg. Bøylene på MiniLift200 kan utstyres med en myk beskyttelse, SlingBarWrap MiniLift, noe som noen ganger er nødvendig for brukere med ukontrollerte bevegelser. SlingBarWrap MiniLift festes med velcro og kan lett tas av for rengjøring.

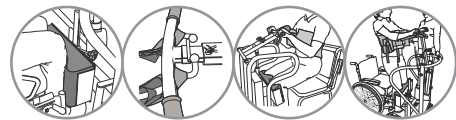

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
401100334	162798	MiniLift200	Maks. 200 kg	1 stk.
60300012	-	MiniLift160EE	Maks. 160 kg, elektrisk justering av understellets bredde	1 stk.
400641436	-	MiniLift160 Classic	Maks. 160 kg	1 stk.
400641437	-	MiniLift160 Classic med lave ben	Maks. 160 kg	1 stk.
400641434	-	MiniLift125	Maks. 125 kg	1 stk.
400641435	-	MiniLift 125 med lave ben	Maks. 125 kg, sengeklaring 58 mm	1 stk.

#### Tilbehør

Se side 85		ThoraxSling	Sittende-til-stående-vest	
70200012	162991	SlingBarWrap MiniLift	For MiniLift200 og MiniLift160	1 stk.
70200033	199289	CalfStrap	For MiniLift200 fra serienummer 200001277, for MiniLift160 og for MiniLift125 fra serienummer 125001653	1 stk.
70200029	-	Ekstern lader Linak	For MiniLift200 / MiniLift160 / MiniLift125	1 stk.



MiniLift200 og ThoraxSling med setestøtte



MiniLift160 og ThoraxSling, avtørkbare



MiniLift125 og ThoraxSling



## ThoraxSling

For oppreisning og ståtrening i kombinasjon med MiniLift200/160/125

Sammen med MiniLift gir ThoraxSling en svært skånsom og behagelig oppreisning. Løftearmens bevegelse er designet slik at draget fra løftearmen ender komfortabelt ved nedre del av ryggen, noe som forhindrer at selen glir opp under armene. Se delen om MiniLift eller ThoraxSling for mer informasjon.









## Manuelle løftehjelpemidler



LiftSeat 4005



LiftSeat  
4006, 4007

### LiftSeat

LiftSeat er utviklet for bruk ved manuell løfting i en sittende stilling. Ett vanlig bruksområde er løfting av en bruker inn i eller ut av et fly- eller bussete. LiftSeat er tilgjengelig i to modeller, en helmodell og en med delte benstøtter for enklere pålegging. Begge modellene gir brukeren støtte under bena og fra halebenet og opp til skuldrene. Begge modellene er enkle å oppbevare og ta med på reiser.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
4005	147803	LiftSeat, hel	Maks. 120 kg	1 stk.
4006	158844	LiftSeat, delte benstøtter	Small/Medium, maks. 150 kg	1 stk.
4007	158843	LiftSeat, delte benstøtter	Large/X-Large, maks. 150 kg	1 stk.



FlexiMove 4012



FlexiMove 4016

### FlexiMove

Med FlexiMove er det svært lite behov for å faktisk løfte. Den er hovedsakelig designet for å flytte brukeren høyere opp i sengen, vending og sideveis forflytninger. I disse situasjonene er det enklere å dra enn å løfte ettersom undersiden er glatt og glir svært godt i sengen. Når løfting ikke kan unngås, kan FlexiMove brukes til forflytninger i både sittende og liggende stilling. FlexiMove er tilgjengelig i to størrelser, alle for brukere som veier maks. 150 kg.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
4012	-	FlexiMove	112 x 53 cm, 4 håndtak	1 stk.
4016	-	FlexiMove	152 x 53 cm, 6 håndtak	1 stk.







## RiseBasic

RiseBasic er en moderne og elegant stasjonær takmontert personløfter med mange funksjoner som gir maksimal komfort og trygghet under løfting, både for brukeren og pleieren. Når RiseBasic brukes med egnet løftetilbehør, gir den trygg, komfortabel og individuelt tilpasset løfting av brukere i forbindelse med forflytninger i sittende eller liggende stilling til og fra sengen, rullestolen eller toalettet.

RiseBasic har et stort løfteområde og gir mulighet til både svært lav og svært høy løfting. Dermed fungerer den også utmerket for løfting fra gulvet og til gå- og ståtrening. RiseBasic kan også brukes til praktisk forflytning av brukere fra ett rom til et annet.



RiseBasic er tilgjengelig i to modeller: **RiseBasic300M**, med en løftekapasitet på 138 kg, og **RiseBasic440M**, med en løftekapasitet på 200 kg. Begge modellene av RiseBasic leveres med håndkontroll og lader. Løftebøyle bestilles separat.

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
50100039	-	RiseBasic300M	Maks. last 138 kg	1 stk.
50100040	199202	RiseBasic440M	Maks. last 200 kg	1 stk.
<b>Tilbehør</b>				
70200062	199279	Lading i skinne / Endepunktslading:	To alternativer for lading	1 sett
70200048	199276	Programvare for diagnostikk	Programvare, for alle modeller av RiseBasic	1 sett
50400048	199284	Parkeringsplate	For praktisk oppbevaring av løftebøyer, manualer og løfteseler	1 stk.
70200001	162984	SlingBar S	Løftebøyle, 35 cm	1 stk.
70200002	199848	SlingBar M	Løftebøyle, 45 cm	1 stk.
70200003	162985	SlingBar L	Løftebøyle, 60 cm	1 stk.
70200042	199282	SlingBarSpreader M	Sidebøyer for SlingBar S/M/L	1 par
70200017	-	SlingBar RFL X4	Fire-punkts løftebøyle	1 stk.



Parkeringsplate



SlingBarSpreader



SlingBar RFL X4


# Stasjonære takheismotorer

## Teknisk informasjon

Modell / Spesialversjon	RiseBasic300M	RiseBasic440M	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, høy fuktighet	RiseAtlas450T	RiseAtlas625M, med QuickTrolleySystem	RiseAtlas625T
<b>Art. nr. / HMS art.nr.</b>	50100039 / -	50100040 / 199202	50100057 / 199200	50100058 / 199203	50100059 / 199201	50100060 / 199204
<b>Maks brukervekt:</b>	138 kg	200 kg	205 kg	205 kg	285 kg	285 kg
<b>Framdrift i skinne:</b>	Manuell	Manuell	Manuell	Motor	Manuell	Motor
<b>Materiale, chassis:</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Materiale, deksel:</b>	Flammesikker ABS-plast	Flammesikker ABS-plast	Flammesikker ABS-plast	Flammesikker ABS-plast	Flammesikker ABS-plast	Flammesikker ABS-plast
<b>Mål, lengde x bredde x høyde:</b>	26,6 x 15,1 x 15,6 cm	26,6 x 15,1 x 15,6 cm	26,6 x 15,1 x 15,6 cm	26,6 x 15,1 x 15,6 cm	26,6 x 15,1 x 15,6 cm	26,6 x 15,1 x 15,6 cm
<b>Vekt:</b>	6,8 kg	6,8 kg	7,2 kg	7,5 kg	7,3 kg	7,5 kg
<b>Hastighet ved forflytning, lans skinnen, uten belastning:</b>	n.a.	n.a.	n.a.	14 cm per sek.	n.a.	14 cm per sek.
<b>Hastighet ved forflytning, lans skinnen, med belastning:</b>	n.a.	n.a.	n.a.	12 cm per sek.	n.a.	12 cm per sek.
<b>Håndkontroll:</b>	Elektrisk, 4 knapper	Elektrisk, 4 knapper	Elektrisk, 4 knapper	Elektrisk, 6 knapper	Elektrisk, 4 knapper	Elektrisk, 6 knapper
<b>Løftehøyde:</b>	240 cm	240 cm	240 cm	240 cm	240 cm	240 cm
<b>Løftehastighet, uten belastning:</b>	3,0 cm per sek.	3,0 cm per sek.	5,0 cm per sek.	5,0 cm per sek.	5,0 cm per sek.	5,0 cm per sek.
<b>Løftehastighet, med belastning:</b>	2,0 cm per sek.	2,0 cm per sek.	3,9 cm per sek.	3,9 cm per sek.	3,9 cm per sek.	3,9 cm per sek.
<b>Lydnivå, med belastning:</b>	51 dB(A)	51 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
<b>Effektiv styring av løftebånd:</b>	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>Nødsekk:</b>	Elektrisk og manuell	Elektrisk og manuell	Elektrisk og manuell	Elektrisk og manuell	Elektrisk og manuell	Elektrisk og manuell
<b>Nødstopp:</b>	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
<b>Nattlys:</b>	n.a.	n.a.	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>Batteri:</b>	2 x 12 V 2,9 Ah	2 x 12 V 2,9 Ah	NIMH 24 V 3,2 Ah / 768 Wh	NIMH 24 V 3,2 Ah / 768 Wh	NIMH 24 V 3,2 Ah / 768 Wh	NIMH 24 V 3,2 Ah / 768 Wh
<b>Håndkontrolllading:</b>	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>Lading i skinne:</b>	Valgfritt, tilbehør	Valgfritt, tilbehør	Valgfritt, standard	Valgfritt, tilbehør	Valgfritt, tilbehør	Valgfritt, tilbehør
<b>Endepunktslading:</b>	Valgfritt, tilbehør	Valgfritt, tilbehør	Valgfritt, standard	Valgfritt, tilbehør	Valgfritt, tilbehør	Valgfritt, tilbehør
<b>IP-klasse, løfteenhet:</b>	IP20	IP20	IPX4	IP20	IP20	IP20
<b>IP-klasse, håndkontroll:</b>	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Alle modeller og spesialversjoner av RiseBasic og RiseAtlas overholder kravene i direktivet om medisinsk utstyr for klasse 1-produkter (MDD93/42/EEC).

## Takheis

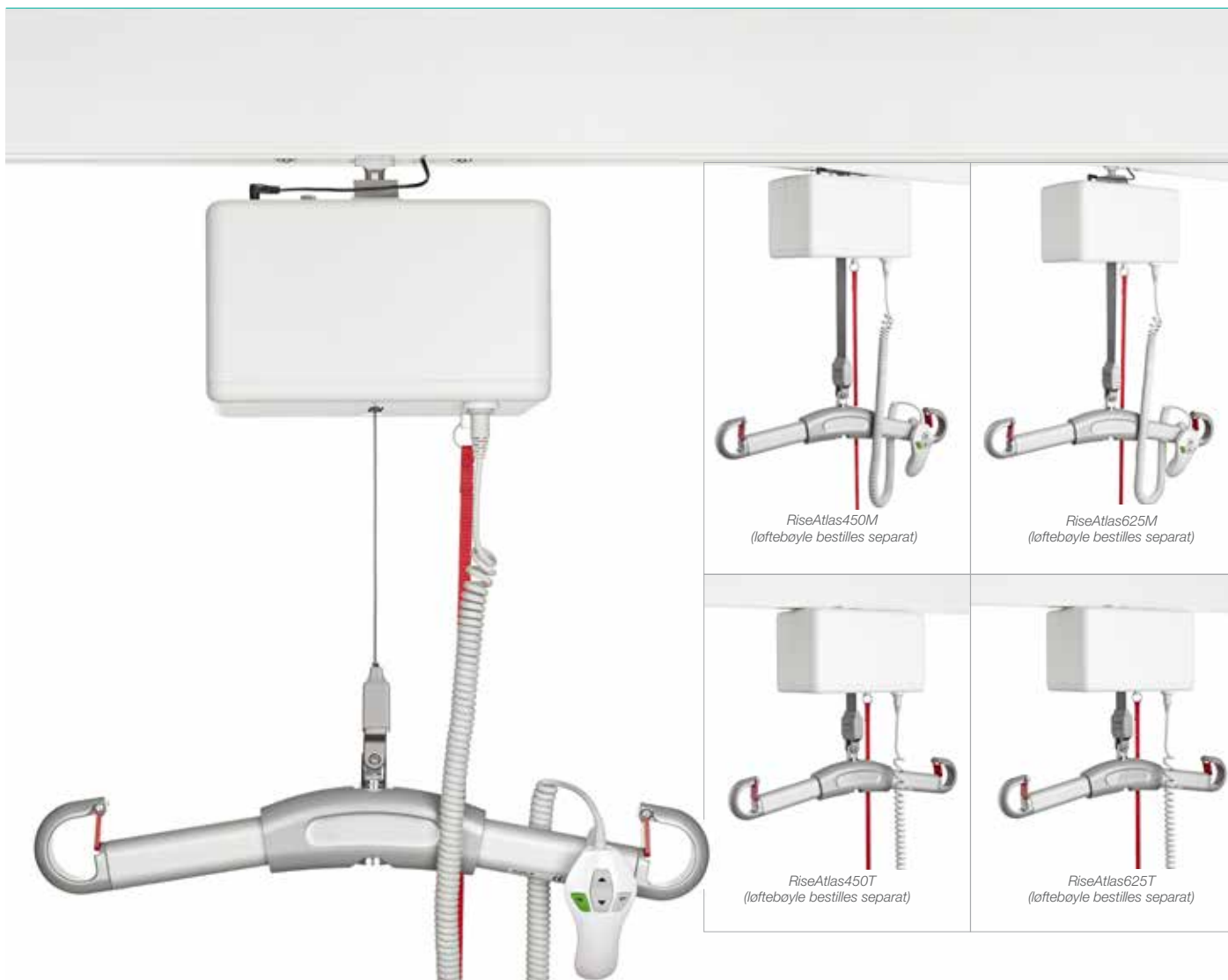

## RiseAtlas

RiseAtlas er en sikker og lettanvendelig takheismotor som er tilgjengelig i flere ulike modeller og spesialversjoner med ulike løftekapasiteter og med eller uten innebygd framdriftsmotor og andre egenskaper og funksjoner. Valget avhenger av behovet for løftekapasitet, hvilke miljøer og situasjoner takheisen skal brukes i og, selvfølgelig, brukernes behov.

**RiseAtlas450** har en løftekapasitet på 205 kg mens **RiseAtlas625** har en løftekapasitet på 285 kg.

Både RiseAtlas450 og RiseAtlas625 er tilgjengelige med ulike løsninger for forflytning langs skinnen. RiseAtlas450M og RiseAtlas625M forflyttes manuelt langs skinnen mens RiseAtlas450T og RiseAtlas625T har fremdriftsmotor og har med det motordrevet forflytning langs skinnen.

Både RiseAtlas450M og RiseAtlas625M har Direct Healthcare Groups nye QuickTrolleySystem. Disse modellene har hjulsett med hurtigkobling som gjør det enkelt å demontere takheismotoren fra skinnen slik at det blir enklere å utføre service. Det gjør det også mulig å flytte takheismotoren mellom ulike skinner i ulike rom.

RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, er også tilgjengelig i en spesialversjon (høy fuktighet) som er designet for bruk i miljøer der det finnes fuktighet.

Alle modeller av RiseAtlas, med unntak av versjonen for høy fuktighet, har enkel og praktisk håndkontrollading som standard. Spesialversjonen har som standard en unik ladeløsning med hjulsett for to ladealternativer (lading i skinne / endepunktloading). Som et tillegg kan RiseAtlas med håndkontrollading også utstyres med denne ladeløsningen (lading i skinne / endepunktloading).

RiseAtlas gir sikker, komfortabel og individuelt tilpasset løfting av brukere i forbindelse med forflytninger i sittende eller liggende stilling til og fra sengen, rullestolen eller toalettet. RiseAtlas har et stort løfteområde og gir mulighet til både svært lav og svært høy løfting. Dermed fungerer den også utmerket for løfting fra gulvet og til gå- og ståtrening. RiseAtlas kan også brukes til praktisk forflytning av brukere fra ett rom til et annet.

Alle modeller og spesialversjoner av RiseAtlas leveres med håndkontroll og lader. Løftebøyle bestilles separat.

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
50100057	199200	RiseAtlas450M	Med QuickTrolleySystem, maks. last 205 kg	1 stk.
50100051	-	RiseAtlas450M	Med QuickTrolleySystem, høy fuktighet, maks. last 205 kg	1 stk.
50100058	199203	RiseAtlas450T	Maks. last 205 kg	1 stk.
50100059	199201	RiseAtlas625M	Med QuickTrolleySystem, maks. last 285 kg	1 stk.
50100060	199204	RiseAtlas625T	Maks. last 285 kg	1 stk.



Parkeringsplate

**Tilbehør**

70200046	199290	QuickTrolley450	Hjulsett med hurtigkobling for 50100057, 50100051	1 sett
70200051	199277	QuickTrolley450 70 mm	Hjulsett med hurtigkobling, senking av løfteenhet med 70 mm, for 50100057, 50100051	1 sett
70200062	199279	Lading i skinne / Endepunktslading:	To alternativer for lading, for 50100057, 50100058, 50100059, 50100060	1 sett
70200065	199281	IR styring	For trådløs drift, for 50100057, 50100059	1 sett
70200047	199275	9 V-batteri og kabel	For nødsenking, for 50100057, 50100058, 50100052, 50100059, 50100060, 50100053	1 sett
70200048	199276	Programvare for diagnostikk	Programvare, for alle modeller og spesialversjoner av RiseAtlas	1 sett
50400066	162992	Deksel for lader	For alle modeller og spesialversjoner av RiseAtlas	1 stk.
50400048	199284	Parkeringsplate og løfteseler	For praktisk oppbevaring av løftebøyler, manualer	1 stk.
70200001	162984	SlingBar S	Løftebøyle, 35 cm	1 stk.
70200002	199848	SlingBar M	Løftebøyle, 45 cm	1 stk.
70200003	162985	SlingBar L	Løftebøyle, 60 cm	1 stk.
70200042	199282	SlingBarSpreader M	Sidebøyler for SlingBar S/M/L	1 par
70200017	-	Sling bar RFL X4	Fire-punkts løftebøyle	1 stk.



Deksel for lader



SlingBarSpreader



SlingBar RFL X4





Castor vist med skinne og ekstra låsehåndtak. Begge deler selges separat.



Låsehåndtak

## Castor

Castor er et sikkert og bærbart frittstående løftestativ med høy ytelse. Sammen med én skinne og en takheismotor fungerer det som et stasjonært løftesystem. Castor er laget av aluminium, noe som gjør den lett i forhold til den store løftekapasiteten: 300 kg. Designen er både kompakt og diskret, samtidig som Castor er en av de mest robuste frittstående løftestativene på markedet. Castor er ideelt for sporadiske løftebehov på et bestemt sted, eller der det ikke er mulig å installere et permanent skinnesystem i taket.



Skinnene bestilles separat. Dermed kan du velge skinnelengde og tilpasse løftestativets bredde og løfteområdet slik at de oppfyller løftebehovene optimalt i ulike miljøer. Skinnene er tilgjengelige i lengder på 2–5 meter.

Med låsehåndtakene på de vertikale stengene kan høyden enkelt justeres til sju ulike posisjoner for å tilpasse løftestativets høyde og løfteområdet etter den spesifikke situasjonen og løftebehovene.

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
50300004	163021	Castor	Portabelt løftestativ, uten skinne, hvitt, maks. 300 kg	1 sett
50400264	199221	Skinne 64-2000	Skinne, 200 cm	1 stk.
50400269	199222	Skinne 64-3000	Skinne, 300 cm	1 stk.
50400285	199228	Skinne 120-4000	Skinne, 400 cm	1 stk.
50400290	199229	Skinne 120-5000	Skinne, 500 cm	1 stk.

### Tilbehør

50300006	199296	Låsehåndtak	Hurtigkobling og låsehåndtak, for Castor	4 stk.
50400180	199242	BariTurn	360° hjulsett for to takheismotorer	1 stk.





## Helena

Helena er et sikkert, høytytelses frittstående løftestativ med en tverrskinne. Sammen med en takheismotor fungerer Helena som et stasjonært (x-y) traverssystem. Tverrskinnen er opphengt i vogner og kan beveges sideveis i faste skinner langs løftestativets totale bredde. Dermed kan den takheismotoren beveges i alle retninger og brukes hvor som helst i løfteområdet.



Helena er laget av aluminium, noe som gjør løftestativet lett i forhold til den store løftekapasiteten på 285 kg. Designen er både kompakt og diskret, men Helena er samtidig et av de mest robuste frittstående løftestativene på markedet. Helena er ideelt for sporadiske løftebehov på et bestemt sted, eller der det ikke er mulig å installere et permanent skinnesystem i taket.

Helena er tilgjengelig i tre modeller med ulike mål som gir løfteområder av ulike størrelser. Alle modellene av Helena leveres komplette og klare for montering og bruk. De kan brukes med alle Direct Healthcare Groups takmonterte løfteenheter.

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
50300009	199292	Helena 3x3	Frittstående løftestativ med traversskinne, komplett, total bredde x lengde: 3157 x 3104 mm, maks. last 285 kg	1 sett
50300010	199293	Helena 4x3	Frittstående løftestativ med traversskinne, komplett, total bredde x lengde: 4157 x 3104 mm, maks. last 285 kg	1 sett
50300011	199294	Helena 5x4	Frittstående løftestativ med traversskinne, komplett, total bredde x lengde: 5157 x 4104 mm, maks. last 285 kg	1 sett



Helena 3x3

# MilkyWay skinnesystem – ubegrensede muligheter

*En stasjonær løfteløsning, bestående av en takheismotor montert på et permanent installert skinnesystem eller på frittstående stativ. MilkyWay er en ergonomisk favoritt, et ideelt konsept som eliminerer behovet for manuell løfting og gjør at pleieren kan arbeide i et sikkert og komfortabelt miljø for forflytning og håndtering.*

*Et installert takheissystem er alltid på plass og tilgjengelig, og frittstående stativ krever minimalt med gulvplass og er svært lett å manøvrere når det skal flyttes til et annet sted. Med et bredt utvalg av skinner i ulike størrelser, lengder og konfigurasjoner kan begge systemene dekke et stort løfteområde og få plass i små rom, noe som gir mulighet til løfting med liten rekkevidde og svært høy klaring.*

## Et permanent installert skinnesystem er den rette løsningen når:

Hvert MilkyWay skinnesystem er individuelt utformet i nært samarbeid med kunden, for å sikre at det kan tilpasses etter spesifikke forhold og krav.

Sammen med en takheismotor og egnet tilbehør gir MilkyWay ubegrensede muligheter for utforming og tilpasning av en perfekt stasjonær løfteløsning for alle miljøer, rom og løftebehov.

## Enkel installasjon

MilkyWay gir stor fleksibilitet og kan tilpasses til de fleste miljøer og forhold. Systemet er svært enkelt å installere og det finnes en design og løsning for de fleste situasjoner, inkludert nye bygninger eller de som bygges om. Skinnesystemet MilkyWay må alltid installeres av kvalifisert og autorisert personell og i samsvar med Direct Healthcare Groups instruksjoner. MilkyWay er utviklet for å oppfylle de høyeste sikkerhetsstandardene i MDD og ISOEN 10535.



# Et elegant og økonomisk system

## Takfester og pendler

MilkyWay tilbyr flere muligheter for installasjon i taket. Avhengig av faktorer som takhøyde, materiale og struktur kan du velge mellom takbraketter og/eller høydejusterbare pendler av ulike typer. Med sin fleksibilitet og sitt utvalg av komponenter og fester, inkludert uni-strut-system og side-støttede pendler, kan MilkyWay installeres i de fleste takområder inkludert høye buetak og i de fleste byggematerialer og designere.




## Veggfester

MilkyWay tilbyr også flere alternativer for veggmontering av frittstående skinnesystemer. Også her avhenger valget av feste av veggens struktur og materiale, samt den belastningen som systemet skal utsettes for.



## Skinner og hjulsett

MilkyWay tilbyr flere forskjellige alternativer av rette skinner og kurver for å kunne bygge den totale løsningen som trengs, samt hjulsett som kan brukes i forbindelse med RiseAtlas-serien eller med takheiser fra andre leverandører. Alle skinner og kurver er forberedt for lading i skinnen. For de som ønsker et mer elegant utseende, tilbyr MilkyWay også muligheten for å montere takskinnen innfelt, som er veldig populær i moderne bygninger.

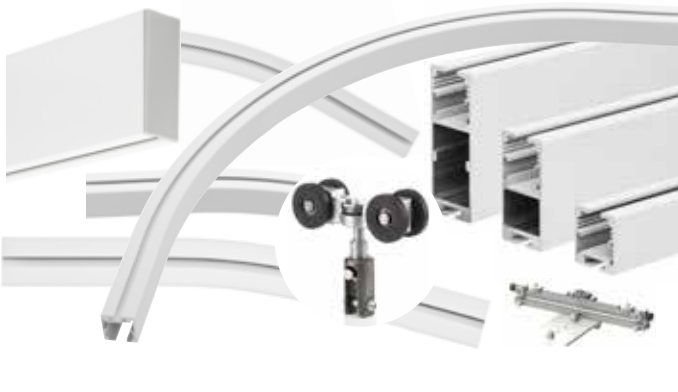

## Strømforsyning

MilkyWay kan installeres med skinnelading, med en konstant strømforsyning (24 V DC) innebygd i skinnen. Det betyr at takheisen kan forsynes med strøm hele tiden, overalt i skinnesystemet, og det eliminerer behovet for en ladestasjon. Om ønskelig kan MilkyWay skinnesystemer selvfølgelig også installeres med en eller flere ladestasjoner for løfteenheten på forhåndsbestemte steder i skinnesystemet.



## Sporvekslere

Sporvekslere brukes til å koble en enkelt skinne eller et skinnesystem til en annen skinne eller et annet skinnesystem. Dermed kan takheismotoren bevege seg mellom de to skinnesystemene, noe som gir økt romdekning, fleksibilitet og bruksnytte.

MilkyWay overgangs-koblinger og dreieskive.



## Mobile personløftere

### Eva

Eva er en allsidig mobil personløfter for alle løftesituasjoner og for brukere med forskjellige behov. Sammen med Direct Healthcare Groups funksjonelle og brukervennlig løftetilbehør er Eva er et utmerket valg for løft i forbindelse med forflytning til og fra seng, stol eller gulv samt for horisontal løft og gåtrening. Eva er tilgjengelig i flere modeller og design med ulik løftekapasitet og med elektrisk bredderegulering av bena (EE). Eva finnes også i spesialversjoner med lave ben for lave senger. Alle modeller og versjoner av Eva leveres komplette og klare til bruk. Det er de utstyrt med en stabil løftebøyle, med klaffer som skal påse at stroppene holdes på plass, og en håndkontroll. Alle versjoner av Eva400 og Eva450 er utstyrt med løftebøyle i standard bredde (SlingBar M, 450 mm) som passer de fleste brukere og løftesituasjoner. Alle versjoner av Eva600 er utstyrt med en bredere løftebøyle (SlingBar L, 600 mm) som gir en åpnere løftesele og økt plass, som er egnet for større og tyngre brukere.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
60100002	-	Eva450EE	Maks. 205 kg, aluminium, hjulstørrelse Ø 100 mm	1 stk.
60100006	-	Eva450EE	Med lave ben, maks. 205 kg, aluminium, hjulstørrelse foran 2 x Ø 35 mm, bak Ø 100 mm	1 stk.
60100003	-	Eva600EE	Maks. 270 kg, aluminium, hjulstørrelse Ø 100 mm	1 stk.
60100010	-	Eva600EE	Med lave ben, maks. 270 kg, aluminium, hjulstørrelse foran 2 x Ø 35 mm, bak Ø 100 mm	1 stk.

#### Tilbehør

70200029	-	Ekstern lader Linak	For Eva450 og Eva600	1 stk.
----------	---	---------------------	----------------------	--------



*Eva450EE,  
med elektrisk justering av  
understellets bredde for brukere  
som veier opptil 205 kg.*



*Eva450EE,  
med lave ben, med elektrisk  
justering av understellets  
bredde, for brukere som veier  
opptil 205 kg.*



*Eva600EE,  
med elektrisk justering av  
understellets bredde for brukere  
som veier opptil 270 kg.*



*Eva600EE,  
med lave ben, med elektrisk  
justering av understellets  
bredde, for brukere som veier  
opptil 270 kg.*

## EvaDrive

EvaDrive er en motorisert personløfter som gir sterk reduksjon av hvor mye krefter som kreves for å manøvrere pasienten i heisen. EvaDrive beveges nesten uten innsats, også på trange steder. Med det intuitive styrehåndtaket er den like lett å manøvrere som en vanlig handlevogn! EvaDrive svinger, rygger og beveger seg fremover ved bare en forsiktig berøring av håndtaket i ønsket retning. EvaDrive vet hvor du vil gå – og bringer deg dit! EvaDrive er tilgjengelig i to versjoner: Eva450Drive og Eva600Drive.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
60900002	242568	Eva450Drive	Maks. 205 kg, aluminium, hjulstørrelse foran 2 x Ø 100 mm, bak 2 x Ø 203 mm	1 stk.
60900003	242569	Eva600Drive	Maks. 270 kg, aluminium, hjulstørrelse foran 2 x Ø 100 mm, bak 2 x Ø 203 mm	1 stk.
<b>Tilbehør</b>				
60900022	-	Litiumbatteri	For EvaDrive	1 stk.



Eva450Drive, for brukere som veier opptil 205 kg  
Også tilgjengelig: Eva600Drive, for brukere som veier opptil 270 kg



Det trykfølsomme og ergonomiske håndtaket er utstyrt med belastningsceller som fanger opp alle bevegelsene dine. Trykk lett på håndtaket så kjører EvaDrive fremover. Trekk lett i håndtaket og EvaDrive rygger. Håndtaket oppdager hver bevegelse du vil gjøre, og EvaDrive kan styres i hvilken som helst retning med bare fingertuppene. Håndtaket er ergonomisk og justerbart i høyden. I tillegg forhindrer en sikkerhetsbryter alle uønskede bevegelser.



Bakhjulene kan dreies til en hvilken som helst vinkel ved hjelp av knappene på kontrollpanelet. EvaDrive kan enkelt betjenes i svært små rom takket være hjulenes mulighet til å justeres sideveis.



Det kraftige litiumbatteriet varer hele arbeidsskiftet. Batteriet lades når EvaDrive ikke er i bruk, så står en fullt ut fungerende heis klar til neste arbeidsskift. Batteriet er avtakbart og kan byttes ved behov.




## Carina350

Carina350 er en sammenleggbar, mobil personløfter tilpasset for sikker og enkel løfting av brukere som veier opptil 165 kg. Carina350 er tilgjengelig i fire varianter, med manuell eller elektrisk justering av understellet og med standardhøyde eller lave ben. Alle varianter er robuste og stabile og kan håndtere de fleste løftesituasjoner og -krav. Alle modellene av Carina350 leveres komplette og klare for bruk, utstyrt med håndkontroll og en løftebøyle med standard bredde (SlingBar M, 45 cm).



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
60600011	-	Carina350EM	Mobil løfteenhet med manuell justering av understell, stål, hjulstørrelse Ø 100 mm	1 stk.
60600012	-	Carina350EM	Mobil løfteenhet med manuell justering av understell, stål, hjulstørrelse Ø 35 / 100 mm, lave ben	1 stk.
60600009	215396	Carina350EE	Mobil løfteenhet med elektrisk justering av understell, stål, hjulstørrelse Ø 100 mm	1 stk.

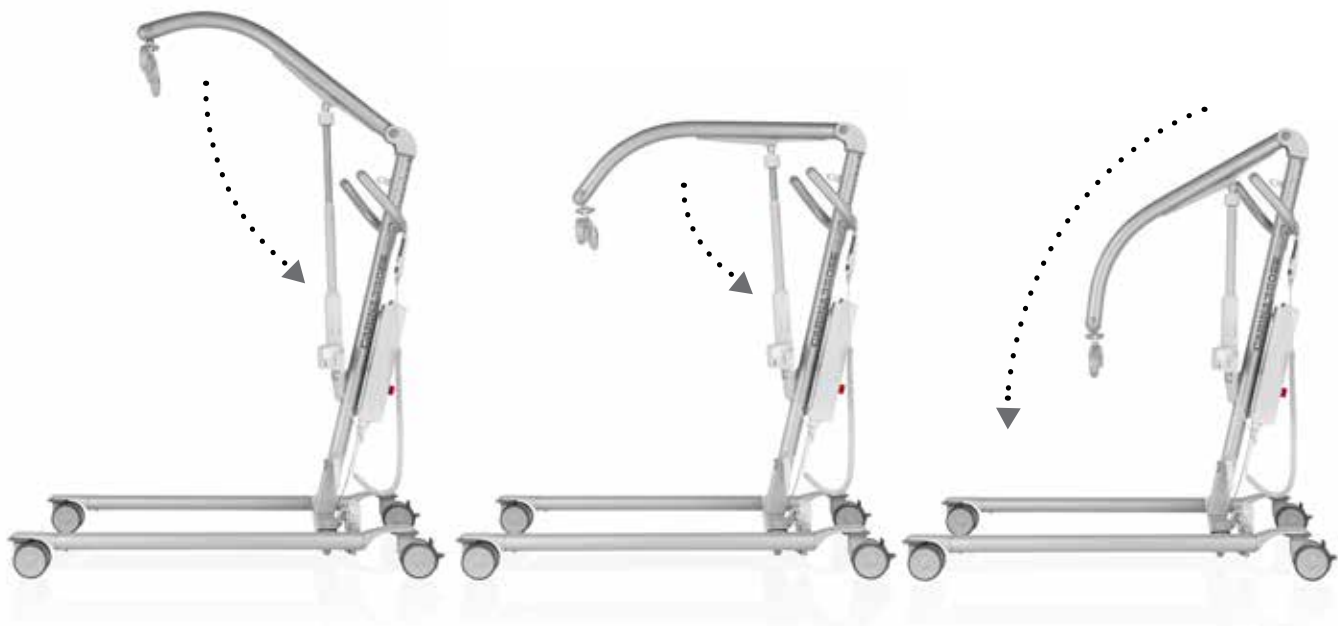

Carina350EM, med lave ben, art. nr. 60600012



Carina350EE, sammenfelt



## Vega505EE

Vega er en mobil personløfter tilpasset for sikker og enkel løfting av brukere som veier opptil 230 kg. Vega har en unik design med en løftearm som både kan heves til en nesten vertikal posisjon og senkes helt ned til gulvet. Den er også relativt smal og kompakt, med dimensjoner som er tilpasset for bruk i lokaler og situasjoner der plassen er begrenset. Til tross for den praktiske størrelsen har Vega en uvanlig høy løftehøyde og et ekstremt stort løfteområde. Vega505EE leveres komplett og klar for bruk, utstyrt med håndkontroll og en løftebøyle med standard bredde (SlingBar M, 45 cm).




Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
60600003	199199	Vega505EE	Maks. 230 kg, stål, vedlikeholdsfrie hjul, Ø 100 mm	1 stk.

### Tilbehør

70200042	199282	SlingBarSpreader M	Sidebøyler for SlingBar S/M/L	1 par
----------	--------	--------------------	-------------------------------	-------



## Løftetilbehør

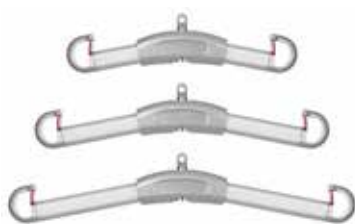

### SlingBar

SlingBar er en topunkts løftebøyle i aluminium som finnes i ulike bredder. Løftebøylene har sikkerhetslåser som hindrer at løfteselens remmer glir ut av løftebøylen.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
70200001	162984	SlingBar S	35 cm, maks. 300 kg	1 stk.
70200002	199848	SlingBar M	45 cm, maks. 300 kg	1 stk.
70200003	162985	SlingBar L	60 cm, maks. 300 kg	1 stk.



*SlingBarSpreader M, montert på SlingBar M.*

### SlingBarSpreader M

For å få bedre plass i en topunkts løftebøyle, kan man bruke SlingBarSpreader M sidebøylor som et tilbehør. SlingBarSpreader M åpner opp løfteselen og gir en mer tilbaketrukket posisjon. SlingBarSpreader M leveres i par og kan brukes sammen med alle modeller av SlingBar.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
70200042	199282	SlingBarSpreader M	Sidebøylor for SlingBar S/M/L	1 par



### SlingBarWrap

SlingBar kan utstyres med en myk beskyttelse, SlingBarWrap, noe som noen ganger er nødvendig for brukere med ukontrollerte bevegelser. Den festes med velcro og kan lett tas av for rengjøring.



*SlingBarWrap MiniLift*

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
70200009	162990	SlingBarWrap	For SlingBar S/M/L	1 stk.
70200012	162991	SlingBarWrap MiniLift	For MiniLift200	1 stk.







## StretcherBar

StretcherBar er en løftebøyle som brukes sammen med StretcherSling for løfting i liggende stilling med stasjonære eller mobile personløftere. StretcherBar har ti opphengspunkter: fem på hver side av brukeren, noe som gir jevn støtte under hele kroppen. Selens bredde justeres enkelt ved å trekke ut eller skyve inn opphengskrokene.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
70200006	199283	StretcherBar	10 punkter, maks. 300 kg	1 stk.



StretcherBar brukt i kombinasjon med StretcherSling




## Vekter

Charder MHS2500 brukes sammen med våre stasjonære eller mobile personløftere for å veie brukere.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
70100002	166632	Charder MHS2500	Maks. 300 kg	1 stk.
70100003	-	Charder MHS2500	Maks. 400 kg	1 stk.

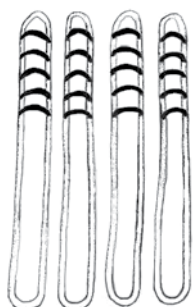

## BackBoardStraps


BackBoardStraps er designet for bruk i kombinasjon med Ferno Scoop Stretcher 065 EXL for å muliggjøre mekanisk løfting med en manuell bære på akuttmottak. BackBoardStraps består av fire uavhengige løftestropper. Det finnes seks alternative løfteløkker på den ene siden av hver stropp slik at man kan balansere baren.

BackBoardStraps tres sikkert gjennom håndtakhullene (to på hver side), og kobles deretter til løftebøylens kroker. Maks. last 160 kg



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
49482000	-	BackBoardStraps	For Ferno Scoop Stretcher 065 EXL	4 stk.



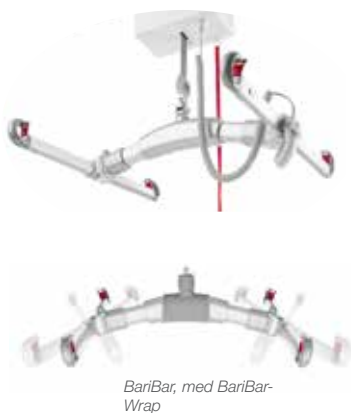

### BariBar

BariBar er en firepunkts løftebøyle i aluminium/stål som brukes i kombinasjon med en korrekt montert løftesele og en takmontert personløfter godkjent av Direct Healthcare Group, for løfting av brukere med en vekt opptil 454 kg. BariBar åpner opp løfteselen slik at det blir bedre plass og mulig for brukeren å sitte i en mer tilbaketrukket stilling. Dermed er BariBar egnet for større og tyngre brukere og/eller smertesensitive brukere. BariBar er svært enkel å bruke. Den innebygde justeringsfunksjonen tilpasser løftebøylen automatisk til hver enkelt bruker slik at man får optimal komfort. Pålitelige sikkerhetslåser hindrer at løfteselens remmer glir ut av løftebøylen. BariBar leveres komplett, utstyrt med BariBarWrap, et avtørkbart beskyttelsestrekk for sikker håndtering av den firepunkts løftebøylen.




Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
70200072	-	BariBar	Firepunkts løftebøyle for godkjente takheismotorer, maks. last 454 kg	1 stk.



### BariTurn

BariTurn er en 360° hjulsett for to takheismotorer. BariTurn brukes, i kombinasjon med permanent installert MilkyWay skinnesystem, til løfting av ekstremt store og tunge brukere, f.eks. i forbindelse med forflytninger i sittende eller liggende stilling. BariTurn er også et perfekt hjelpemiddel for stå- og gåtrening med svært tunge brukere.

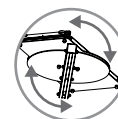

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
50400180	-	BariTurn	Maks. last 500 kg	1 stk.







# Vurder følgende når du velger selestørrelse og materiale.

## Størrelse

### Løfteselen er for liten

- hvis brukers ansikt er for nær løftebøylen
- hvis benstøttene gnager i lysken
- hvis løfteselen ser eller føles for trang

### Løfteselen er for stor

- hvis brukers bak glir ut for mye i den nedre åpningen
- hvis benstøttene glir fremover mot brukers knehaser

## Materiale

### Polyester

- Holdbart og lettstelt
- Lav friksjon
- Tåler høye vasketemperaturer

### Polyesternetting

- Fleksibelt og luftig
- Transporterer selv fukt gjennom nettingen
- Tåler høye vasketemperaturer
- Kan forbli liggende under brukeren

### Plastnetting


- Absorberer ikke vann, utmerket for løfting i forbindelse med bading
- Kan desinfiseres med spritløsning

### Engangsmateriale

- Robust og holdbar non-woven eller polyester
- I stedet for vask kasseres disse løfteselen etter bruk
- Hindrer spredning av f.eks. multiresistente bakterier

## Viktige detaljer

Direct Healthcare Group tilbyr et bredt utvalg av komfortable og funksjonelle løfteseler med en sikker design og mange praktiske detaljer. Les alltid manualen før du bruker løfteselen og glem ikke å utføre regelmessige funksjonstester. Les mer på [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com).

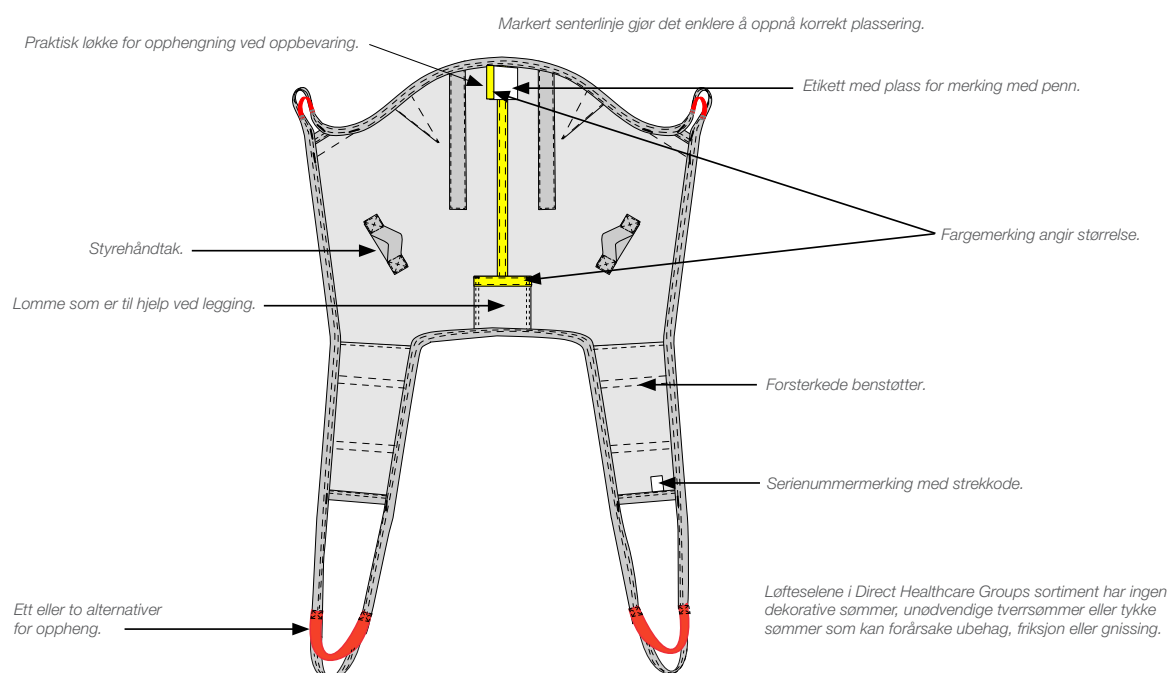

# Våre løfteseil



## Det skal være enkelt å velge!

Vi vet at det iblant kan virke komplisert å velge rett løfteseil. Og jo flere modeller, størrelser og materialer du har å velge mellom, desto mer komplisert virker det å velge.

Direct Healthcare Group tilbyr et komplett utvalg av løfteseil for alle løftesituasjoner og brukere. For å gjøre det enklere å velge har vi likevel begrenset antallet modeller.

Vi har også utviklet et hjelpemiddel, SupportScale, som deler inn våre løfteseil for løfting i sittende stilling i fire kategorier basert på hvilken type funksjonalitet de gir brukeren.

## Mer aktivering

Jo lavere løfteseilets ryggdel er, desto bedre kan brukeren delta og aktiveres. Løfteseil med delte benstøtter tillater også at brukeren deltar mer under på- og avtaking av løfteseil.

## Mer støtte

Jo høyere løfteseilets ryggdel er, desto bedre støtte får brukeren. Løfteseil med udelte benstøtter gir også mer støtte og er bedre tilpasset for brukerens funksjonsevne og tilstand, f.eks. ved svært dårlig muskeltonus, smertesensitivitet og andre faktorer som kan gjøre løfting vanskelig.

# gir mer



## Aktiver brukeren, også i løftesituasjoner

Direct Healthcare Group både forutsetter og fremmer samhandling mellom brukeren og pleieren. Det som er bra for den ene, er også bra for den andre.

Vår filosofi er at brukeren alltid bør delta i forflytningen etter beste evne. Det handler om å bruke den tilgjengelige styrken på best mulig måte, om ikke å utsettepleieren for store belastninger og samtidig utnytte brukerens funksjonsevne, selv i en løftesituasjon. Basert på brukerens behov for støtte samt mobilitet og evne til å delta kan Direct Healthcare Group SupportScale vise hvilke løfteseilmodeller som gir størst grad av sikkerhet og trygghet uten å gjøre det brukeren kan gjøre selv.

SupportScale	Delte benstøtter	Udelte benstøtter
Lav rygg	+	++
Skulderhøy rygg	++	+++
Høy rygg	+++	++++

*Brugerens funksjonsnivå og tilstand bestemmer behovet for støtte og andre løfteseilfunksjoner, og dermed også valget av løfteseilmodell. Klassifiseringer fra 1+ (mer aktivering) til 4++++ (mer støtte) viser hvilke funksjoner Direct Healthcare Groups ulike løfteseil for løfting i sittende stilling gir brukeren.*



### **Veletablert fargekodningssystem**

*Vi bruker et internasjonalt fargekodningssystem, med ulike farger for ulike størrelser, for å gjøre det enkelt å velge størrelse. Fargemerkingen er festet til løfteseil i form av et farget bånd som også fungerer som en løkke som kan brukes til å henge opp seil. Dette gjør det raskt å finne rett størrelse.*



## HighBackSling



### Standardmodell for brukere som trenger mye støtte.

HighBackSling er designet for bruk i de fleste vanlige løftesituasjoner, f.eks. forflytning i sittende stilling mellom seng og rullestol, og når brukeren trenger ekstra støtte for hodet. HighBackSling kan også brukes til løft fra en liggende stilling på gulvet. Denne standardmodellen passer for de fleste brukere. Den høye ryggen sikrer at brukeren får støtte fra halebenet opp over hodet og under bena. HighBackSling er tilgjengelig i flere ulike materialer, varianter og størrelser, alle for brukere som veier maks. 300 kg.

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
40800002	162813	HighBackSling	Polyester, XX-Small	1 stk.
40800003	162814	HighBackSling	Polyester, X-Small	1 stk.
40800004	162815	HighBackSling	Polyester, Small	1 stk.
40800006	162816	HighBackSling	Polyester, Medium	1 stk.
40800007	162817	HighBackSling	Polyester, Large	1 stk.
40800008	162818	HighBackSling	Polyester, X-Large	1 stk.
40800009	162819	HighBackSling	Polyester, XX-Large	1 stk.
40820002	162820	HighBackSling	Polyesternetting, XX-Small	1 stk.
40820003	162821	HighBackSling	Polyesternetting, X-Small	1 stk.
40820004	162822	HighBackSling	Polyesternetting, Small	1 stk.
40820006	162823	HighBackSling	Polyesternetting, Medium	1 stk.
40820007	162824	HighBackSling	Polyesternetting, Large	1 stk.
40820008	162825	HighBackSling	Polyesternetting, X-Large	1 stk.
40820009	162826	HighBackSling	Polyesternetting, XX-Large	1 stk.
40822002	162827	HighBackSling	Polyesternetting, ikke forsterket, XX-Small	1 stk.
40822003	162828	HighBackSling	Polyesternetting, ikke forsterket, X-Small	1 stk.
40822004	162829	HighBackSling	Polyesternetting, ikke forsterket, Small	1 stk.
40822006	162830	HighBackSling	Polyesternetting, ikke forsterket, Medium	1 stk.
40822007	162831	HighBackSling	Polyesternetting, ikke forsterket, Large	1 stk.
40822008	162832	HighBackSling	Polyesternetting, ikke forsterket, X-Large	1 stk.
40822009	162833	HighBackSling	Polyesternetting, ikke forsterket, XX-Large	1 stk.
40852002	162881	HighBackSling	Plastnetting, XX-Small	1 stk.
40852003	162882	HighBackSling	Plastnetting, X-Small	1 stk.
40852004	162883	HighBackSling	Plastnetting, Small	1 stk.
40852006	162884	HighBackSling	Plastnetting, Medium	1 stk.
40852007	162885	HighBackSling	Plastnetting, Large	1 stk.
40852008	162886	HighBackSling	Plastnetting, X-Large	1 stk.
40852009	162887	HighBackSling	Plastnetting, XX-Large	1 stk.
40890004	-	HighBackSling	Engangs, non-woven, Small	5 stk.
40890006	-	HighBackSling	Engangs, non-woven, Medium	5 stk.
40890007	-	HighBackSling	Engangs, non-woven, Large	5 stk.
40890008	-	HighBackSling	Engangs, non-woven, X-Large	5 stk.
40890009	-	HighBackSling	Engangs, non-woven, XX-Large	5 stk.







## ShellHBSling



### Unik skålførm med justerbar hodestøtte.

ShellHBSling er designet for bruk i de fleste vanlige løftesituasjoner, f.eks. forflytning i sittende stilling mellom seng og rullestol, og når brukeren trenger ekstra støtte for hodet. ShellHBSling kan også brukes til løft fra en liggende stilling på gulvet. Den skålførmede seil følger kroppens form og muliggjør en oppreist sittende stilling som enkelt kan reguleres ved hjelp av alternative løfteløkker. Den justerbare hodestøtten gir enhver bruker perfekt støtte for hodet. Den høye ryggen sikrer at brukeren får støtte fra halebenet opp over hodet og under bena. ShellHBSling er tilgjengelig i flere størrelser, alle for brukere som veier maks. 300 kg.

Art. nr.	HMS art.nr.	Produkt navn	Beskrivelse	Enhet
40700002	162929	ShellHBSling	Polyester, XX-Small	1 stk.
40700003	162930	ShellHBSling	Polyester, X-Small	1 stk.
40700004	162931	ShellHBSling	Polyester, Small	1 stk.
40700006	162932	ShellHBSling	Polyester, Medium	1 stk.
40700007	162933	ShellHBSling	Polyester, Large	1 stk.
40700008	162934	ShellHBSling	Polyester, X-Large	1 stk.
40700009	162935	ShellHBSling	Polyester, XX-Large	1 stk.



## Løfteseil

Delte benstøtter / Høy rygg



## FlexibleSling

**Smidig støtte for brukere med deformiteter.**

FlexibleSling er en seil som oppfyller behovet for mye støtte og, på en fleksibel måte, følger kroppens konturer og gir brukeren en følelse av trygghet. FlexibleSling er designet for bruk i de fleste vanlige løftesituasjoner, f.eks. forflytning i sittende stilling mellom seng og rullestol, og spesielt for brukere med deformiteter og brukere som trenger ekstra hodestøtte. FlexibleSling kan også brukes til løft fra en liggende stilling på gulvet. Den høye ryggen sikrer at brukeren får støtte fra halebenet opp over hodet og under bena.

FlexibleSling er tilgjengelig i to varianter og flere størrelser, alle for brukere som veier maks. 300 kg. FlexibleSling er også tilgjengelig med udelte benstøtter og med udelte benstøtter og åpning for toalettstol (se side 81).

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
42520002	162869	FlexibleSling	Polyesternetting, XX-Small	1 stk.
42520003	162870	FlexibleSling	Polyesternetting, X-Small	1 stk.
42520004	162871	FlexibleSling	Polyesternetting, Small	1 stk.
42520006	162872	FlexibleSling	Polyesternetting, Medium	1 stk.
42520007	162873	FlexibleSling	Polyesternetting, Large	1 stk.
42520008	162874	FlexibleSling	Polyesternetting, X-Large	1 stk.
42522002	162875	FlexibleSling	Polyesternetting, ikke forsterket, XX-Small	1 stk.
42522003	162876	FlexibleSling	Polyesternetting, ikke forsterket, X-Small	1 stk.
42522004	162877	FlexibleSling	Polyesternetting, ikke forsterket, Small	1 stk.
42522006	162878	FlexibleSling	Polyesternetting, ikke forsterket, Medium	1 stk.
42522007	162879	FlexibleSling	Polyesternetting, ikke forsterket, Large	1 stk.
42522008	162880	FlexibleSling	Polyesternetting, ikke forsterket, X-Large	1 stk.



## AmpHBSling

**For brukere med høye benamputasjoner og som trenger mye støtte.**

AmpHBSling er designet for bruk i de fleste vanlige løftesituasjoner, f.eks. for forflytning i sittende stilling mellom seng og rullestol, også når en løfteseil uten delte benstøtter hadde vært bedre, f.eks. ved løfting av pasienter med doble, høye benamputasjoner. Den høye ryggen sikrer at brukeren får støtte fra halebenet opp over hodet og under bena. AmpHBSling er tilgjengelig i flere størrelser, alle for brukere som veier maks. 300 kg.

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
42800004	-	AmpHBSling	Polyester, Small	1 stk.
42800006	-	AmpHBSling	Polyester, Medium	1 stk.
42800007	-	AmpHBSling	Polyester, Large	1 stk.
42800008	-	AmpHBSling	Polyester, X-Large	1 stk.





## HygieneHBSling



**For toalettbesøk og for brukere som trenger mye støtte.**

HygieneHBSling er en løfteseil som er enkel å ta på og som gjør det lettere for pleieren å kle på/av brukeren i forbindelse med toalettbesøk. HygieneHBSling er designet for brukere som trenger ekstra støtte, også for hodet. Den høye ryggen sikrer at brukeren får støtte bak ryggen, opp bak hodet, rundt øvre del av kroppen og under bena. HygieneHBSling er tilgjengelig i flere størrelser, alle for brukere som veier maks. 300 kg.

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
43704002	162955	HygieneHBSling	Polyester, XX-Small	1 stk.
43704003	162956	HygieneHBSling	Polyester, X-Small	1 stk.
43704004	162957	HygieneHBSling	Polyester, Small	1 stk.
43704006	162958	HygieneHBSling	Polyester, Medium	1 stk.
43704007	162959	HygieneHBSling	Polyester, Large	1 stk.
43704008	162960	HygieneHBSling	Polyester, X-Large	1 stk.
43704009	162961	HygieneHBSling	Polyester, XX-Large	1 stk.





## BasicSling



### Standardmodell for brukere med god hodestabilitet.

BasicSling er designet for bruk i de fleste vanlige løftesituasjoner, f.eks. forflytning i sittende stilling mellom seng og rullestol, og når pasienten har dårlig overkroppsstabilitet, men god hodestabilitet. Denne standardmodellen passer for de fleste brukere med god hodestabilitet. Den skulderhøye ryggen sikrer at brukeren får støtte fra halebenet opp til skuldrene og under bena. BasicSling er tilgjengelig i flere ulike materialer, varianter og størrelser, alle for brukere som veier maks. 300 kg.

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
40500002	162848	BasicSling	Polyester, XX-Small	1 stk.
40500003	162849	BasicSling	Polyester, X-Small	1 stk.
40500004	162850	BasicSling	Polyester, Small	1 stk.
40500006	162851	BasicSling	Polyester, Medium	1 stk.
40500007	162852	BasicSling	Polyester, Large	1 stk.
40500008	162853	BasicSling	Polyester, X-Large	1 stk.
40500009	162854	BasicSling	Polyester, XX-Large	1 stk.
40520002	162855	BasicSling	Polyesternetting, XX-Small	1 stk.
40520003	162856	BasicSling	Polyesternetting, X-Small	1 stk.
40520004	162857	BasicSling	Polyesternetting, Small	1 stk.
40520006	162858	BasicSling	Polyesternetting, Medium	1 stk.
40520007	162859	BasicSling	Polyesternetting, Large	1 stk.
40520008	162860	BasicSling	Polyesternetting, X-Large	1 stk.
40520009	162861	BasicSling	Polyesternetting, XX-Large	1 stk.
40522002	162862	BasicSling	Polyesternetting, ikke forsterket, XX-Small	1 stk.
40522003	162863	BasicSling	Polyesternetting, ikke forsterket, X-Small	1 stk.
40522004	162864	BasicSling	Polyesternetting, ikke forsterket, Small	1 stk.
40522006	162865	BasicSling	Polyesternetting, ikke forsterket, Medium	1 stk.
40522007	162866	BasicSling	Polyesternetting, ikke forsterket, Large	1 stk.
40522008	162867	BasicSling	Polyesternetting, ikke forsterket, X-Large	1 stk.
40522009	162868	BasicSling	Polyesternetting, ikke forsterket, XX-Large	1 stk.





## AmpSling



### For brukere med høye benamputasjoner.

AmpSling er designet for bruk i de fleste vanlige løftesituasjoner, f.eks. for forflytning i sittende stilling mellom seng og rullestol, også når en løftesele uten delte benstøtter hadde vært bedre, f.eks. ved løfting av pasienter med doble, høye benamputasjoner. Den skulderhøye ryggen sikrer at brukeren får støtte fra halebenet opp til skuldrene og under bena. AmpSling er tilgjengelig i ulike materialer og flere størrelser, alle for brukere som veier maks. 300 kg.

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
42700003	162917	AmpSling	Polyester, X-Small	1 stk.
42700004	162918	AmpSling	Polyester, Small	1 stk.
42700006	162919	AmpSling	Polyester, Medium	1 stk.
42700007	162920	AmpSling	Polyester, Large	1 stk.
42700008	162921	AmpSling	Polyester, X-Large	1 stk.
42700009	162922	AmpSling	Polyester, XX-Large	1 stk.
42720003	162923	AmpSling	Polyesternetting, X-Small	1 stk.
42720004	162924	AmpSling	Polyesternetting, Small	1 stk.
42720006	162925	AmpSling	Polyesternetting, Medium	1 stk.
42720007	162926	AmpSling	Polyesternetting, Large	1 stk.
42720008	162927	AmpSling	Polyesternetting, X-Large	1 stk.
42720009	162928	AmpSling	Polyesternetting, XX-Large	1 stk.



## Løfteseil

Delte benstøtter / Lav rygg



## LowBackSling

**Standardmodell for mer aktive brukere.**

LowBackSling er designet for bruk i de fleste vanlige løftesituasjoner, f.eks. forflytning i sittende stilling mellom seng og rullestol, og når brukeren har overkroppsstabilitet. Denne standardmodellen passer for de fleste brukere med overkroppsstabilitet. Den lave ryggen sikrer at brukeren får støtte fra halebenet opp til armhulene og under bena. LowBackSling er tilgjengelig i flere materialer og størrelser, alle for brukere som veier maks. 300 kg.

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
40200002	162834	LowBackSling	Polyester, XX-Small	1 stk.
40200003	162835	LowBackSling	Polyester, X-Small	1 stk.
40200004	162836	LowBackSling	Polyester, Small	1 stk.
40200006	162837	LowBackSling	Polyester, Medium	1 stk.
40200007	162838	LowBackSling	Polyester, Large	1 stk.
40200008	162839	LowBackSling	Polyester, X-Large	1 stk.
40200009	162840	LowBackSling	Polyester, XX-Large	1 stk.
40220002	162841	LowBackSling	Polyesternetting, XX-Small	1 stk.
40220003	162842	LowBackSling	Polyesternetting, X-Small	1 stk.
40220004	162843	LowBackSling	Polyesternetting, Small	1 stk.
40220006	162844	LowBackSling	Polyesternetting, Medium	1 stk.
40220007	162845	LowBackSling	Polyesternetting, Large	1 stk.
40220008	162846	LowBackSling	Polyesternetting, X-Large	1 stk.
40220009	162847	LowBackSling	Polyesternetting, XX-Large	1 stk.



## HygieneSling



### For toalettbesøk – to varianter for mer aktive brukere.

HygieneSling er en løfteseil som er enkel å ta på og som gjør det lettere for pleieren å kle på/av brukeren i forbindelse med toalettbesøk. HygieneSling er designet for brukere med passende muskeltonus. Den lave ryggen sikrer at brukeren får støtte bak ryggen, opp til armhulene og under bena. HygieneSling er tilgjengelig i to varianter: med belte og ekstra ryggstøtte, og i flere størrelser, alle for brukere som veier maks. 300 kg.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
43504002	162936	HygieneSling	Polyester, med belte, XX-Small	1 stk.
43504003	162937	HygieneSling	Polyester, med belte, X-Small	1 stk.
43504004	162938	HygieneSling	Polyester, med belte, Small	1 stk.
43504006	162939	HygieneSling	Polyester, med belte, Medium	1 stk.
43504007	162940	HygieneSling	Polyester, med belte, Large	1 stk.
43504008	162941	HygieneSling	Polyester, med belte, X-Large	1 stk.
43504009	162942	HygieneSling	Polyester, med belte, XX-Large	1 stk.
43904003	162950	HygieneSling	Polyester, ekstra ryggstøtte, X-Small	1 stk.
43904004	162951	HygieneSling	Polyester, ekstra ryggstøtte, Small	1 stk.
43904006	162952	HygieneSling	Polyester, ekstra ryggstøtte, Medium	1 stk.
43904007	162953	HygieneSling	Polyester, ekstra ryggstøtte, Large	1 stk.
43904008	162954	HygieneSling	Polyester, ekstra ryggstøtte, X-Large	1 stk.





## HygieneLBSling



**For toalettbesøk – ekstra støtte for brukere med god hode- og overkroppsstabilitet.**

HygieneLBSling er en løfteseil som er enkel å ta på og som gjør det lettere for pleieren å kle på/av brukeren i forbindelse med toalettbesøk. HygieneLBSling er designet for brukere med god hode- og overkroppsstabilitet og passende muskeltonus. Den lave ryggen sikrer at brukeren får støtte bak ryggen, opp til armhulene, rundt øvre del av kroppen og under bena. HygieneLBSling er tilgjengelig i flere størrelser, alle for brukere som veier maks. 300 kg.

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
43804002	162962	HygieneLBSling	Polyester, XX-Small	1 stk.
43804003	162963	HygieneLBSling	Polyester, X-Small	1 stk.
43804004	162964	HygieneLBSling	Polyester, Small	1 stk.
43804006	162965	HygieneLBSling	Polyester, Medium	1 stk.
43804007	162966	HygieneLBSling	Polyester, Large	1 stk.
43804008	162967	HygieneLBSling	Polyester, X-Large	1 stk.
43804009	162968	HygieneLBSling	Polyester, XX-Large	1 stk.







FlexibleSling, udelt, med åpning for toalettstol

## FlexibleSling, udelt



### Skånsom og fleksibel, med maksimal støtte.

FlexibleSling, udelt, er en løfteseil som oppfyller behovet for mye støtte og, på en fleksibel måte, følger kroppens konturer og gir brukeren en følelse av trygghet. FlexibleSling, udelt, er designet for bruk i de fleste vanlige løfte-situasjoner, f.eks. forflytning i sittende stilling mellom seng og rullestol, og spesielt for brukere med deformiteter og brukere som trenger ekstra hodestøtte. Den høye ryggen sikrer at brukeren får støtte fra halebenet opp over hodet og under bena. FlexibleSling, udelt, er også tilgjengelig med åpning for toalettstol. Denne varianten er designet for å forenkle løfting i forbindelse med toalettbesøk, spesielt for brukere med deformiteter og brukere som trenger ekstra hodestøtte. Begge variantene av FlexibleSling, udelt er tilgjengelige i flere størrelser, alle for brukere som veier maks. 300 kg. FlexibleSling er også tilgjengelig med delte benstøtter (side 74).

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
42521003	162912	FlexibleSling, udelt	Polyesternetting, X-Small	1 stk.
42521004	162913	FlexibleSling, udelt	Polyesternetting, Small	1 stk.
42521006	162914	FlexibleSling, udelt	Polyesternetting, Medium	1 stk.
42521007	162915	FlexibleSling, udelt	Polyesternetting, Large	1 stk.
42521008	162916	FlexibleSling, udelt	Polyesternetting, X-Large	1 stk.
42521403	162969	FlexibleSling, udelt	Polyesternetting, med åpning for toalettstol, X-Small	1 stk.
42521404	162970	FlexibleSling, udelt	Polyesternetting, med åpning for toalettstol, Small	1 stk.
42521406	162971	FlexibleSling, udelt	Polyesternetting, med åpning for toalettstol, Medium	1 stk.
42521407	162972	FlexibleSling, udelt	Polyesternetting, med åpning for toalettstol, Large	1 stk.
42521408	162973	FlexibleSling, udelt	Polyesternetting, med åpning for toalettstol, X-Large	1 stk.



## ClassicHBSling



### Skånsom for brukere som trenger mye støtte.

For brukere som trenger ekstra støtte for hodet. ClassicHBSling muliggjør en sikker og komfortabel sittende stilling og gir brukeren en følelse av trygghet. ClassicHBSling er designet for bruk i de fleste vanlige løfte-situasjoner, f.eks. forflytning i sittende stilling mellom seng og rullestol, og er også egnet for brukere med høye benamputasjoner. Den høye ryggen sikrer at brukeren får støtte hele veien fra knehasene til over hodet. ClassicHBSling er tilgjengelig i flere størrelser, alle for brukere som veier maks. 300 kg.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
41522003	162907	ClassicHBSling	Polyesternetting, X-Small	1 stk.
41522004	162908	ClassicHBSling	Polyesternetting, Small	1 stk.
41522006	162909	ClassicHBSling	Polyesternetting, Medium	1 stk.
41522007	162910	ClassicHBSling	Polyesternetting, Large	1 stk.
41522008	162911	ClassicHBSling	Polyesternetting, X-Large	1 stk.



## Løfteseil

Udelte benstøtter / Skulderhøy rygg



### ClassicSling



**Skånsom støtte for brukere med god hodestabilitet.**

ClassicSling muliggjør en sikker og komfortabel sittende stilling og gir brukeren en følelse av trygghet.

ClassicSling er designet for bruk i de fleste vanlige løftesituasjoner, f.eks. forflytning i sittende stilling mellom seng og rullestol, og er også egnet for brukere med høye benamputasjoner. Den skulderhøye ryggen sikrer at brukeren får støtte fra knehasene opp til skuldrene og under bena. ClassicSling er tilgjengelig i flere størrelser, alle for brukere som veier maks. 300 kg.

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
41222003	162902	ClassicSling	Polyesternetting, X-Small	1 stk.
41222004	162903	ClassicSling	Polyesternetting, Small	1 stk.
41222006	162904	ClassicSling	Polyesternetting, Medium	1 stk.
41222007	162905	ClassicSling	Polyesternetting, Large	1 stk.
41222008	162906	ClassicSling	Polyesternetting, X-Large	1 stk.



### BariSling



**For ekstremt store og tunge brukere – over 200 kg.**

BariSling er en løfteseil som er designet for løfting av brukere som veier 200 kg eller mer. Den kan brukes i kombinasjon med både mobile og stasjonære personløftere, med en firepunkts løftebøyle eller med BariTurn.

BariSling har seks opphengspunkter: to løkker på ryggen og fire på undersiden, under bena, for å fordele trykket sikkert og komfortabelt. Den skulderhøye ryggen sikrer at brukeren får støtte fra knehasene opp til skuldrene og under bena. BariSling er tilgjengelig i polyester og i to størrelser for brukere som veier maks. 570 kg.

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
47001010	199208	BariSling	Polyester, XXX-Large	1 stk.
47001011	-	BariSling	Polyester, XXXX-Large	1 stk.




## Løfting i liggende stilling / Vending




## StretcherSling

StretcherSling er en løfteseil som brukes i kombinasjon med mobile personløftere eller stasjonære personløftere og Direct Healthcare Groups StretcherBar, en spesialdesignet løftebøyle for løfting og forflytning av brukere i en liggende stilling. StretcherSling har ti opphengspunkter (fem på hver side av brukeren). Det gir en jevnt fordelt støtte under hele kroppen. StretcherSling er tilgjengelig i polyester og én størrelse, for brukere som veier opptil 300 kg.

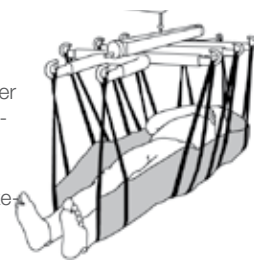

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
46502007	199207	StretcherSling	Polyester, én størrelse,	1 stk.

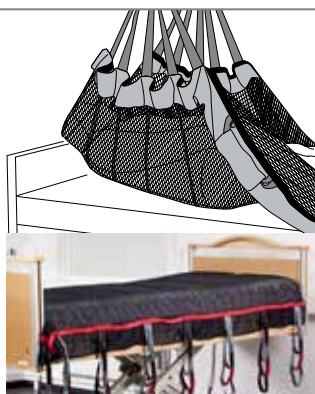

## SafeHandlingSheet

SafeHandlingSheet er et laken som brukes til løfting i liggende stilling eller for å posisjonere en bruker i sengen uten å utsette pleieren for unødige belastninger. SafeHandlingSheet brukes i kombinasjon med mobile personløftere eller stasjonære personløftere og en topunkts løftebøyle. SafeHandlingSheet er tilgjengelig i polyesternetting og passer til ulike brukere og situasjoner.

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
47522007	199211	SafeHandlingSheet	Polyesternetting, Large, maks. 300 kg	1 stk.
47542007	-	SafeHandlingSheet	Polyesternetting/WendyLett4Way, Large, maks. 300 kg	1 stk.



## PositioningSling

PositioningSling er et laken som brukes til løfting i liggende stilling eller for å posisjonere en bruker i sengen uten å utsette pleieren for unødige belastninger. PositioningSling brukes i kombinasjon med mobile personløftere eller stasjonære personløftere og en topunkts løftebøyle.

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
547810	-	PositioningSling	Polyester, engangs, maks. 450 kg	10 stk.



Løft





ThoraxSling

## ThoraxSling

ThoraxSling er en spesialtilpasset vest for sittende-til-stående som brukes i kombinasjon med Direct Healthcare Groups sittende-til-stående løfteenheter MiniLift200, MiniLift160 og MiniLift125. Den er enkel for pleieren å ta på, og gir samtidig brukeren en økt følelse av trygghet under trening på å reise seg og stå oppreist. ThoraxSling gjør det også enklere å gå på toalettet. ThoraxSling er tilgjengelig i to modeller: en som gir støtte bak ryggen (ThoraxSling) og en som også gir støtte under baken (ThoraxSling, med setestøtte), og i flere materialer og størrelser. Begge modellene av ThoraxSling er tilgjengelige i holdbar og lettstelt polyester. ThoraxSling i polyester er beregnet på brukere som veier opptil 300 kg.

ThoraxSling,  
med setestøtte

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
45500003	199215	ThoraxSling	Polyester, X-Small	1 stk.
45500004	162804	ThoraxSling	Polyester, Small	1 stk.
45500006	162805	ThoraxSling	Polyester, Medium	1 stk.
45500007	162806	ThoraxSling	Polyester, Large	1 stk.
45500008	162807	ThoraxSling	Polyester, X-Large	1 stk.
45500009	162808	ThoraxSling	Polyester, XX-Large	1 stk.
45600004	162809	ThoraxSling	Med setestøtte, polyester, Small	1 stk.
45600006	162810	ThoraxSling	Med setestøtte, polyester, Medium	1 stk.
45600007	162811	ThoraxSling	Med setestøtte, polyester, Large	1 stk.
45600008	162812	ThoraxSling	Med setestøtte, polyester, X-Large	1 stk.



## Løfteseil

Reise seg / Stå / Gå



### StandingVest

StandingVest er en løftevest som er spesialdesignet for løfting i forbindelse med gåtrening når brukeren bruker et ståskall. StandingVest gir støtte i lysken, rundt øvre del av kroppen og hele veien opp bak hodet. Den holdes på plass av en bensele i lysken. StandingVest er tilgjengelig i forskjellige størrelser, alle for brukere som veier maks. 300 kg.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
44503003	162981	StandingVest	Polyester, X-Small	1 stk.
44503004	162982	StandingVest	Polyester, Small	1 stk.
44503006	162983	StandingVest	Polyester, Medium	1 stk.
44503007	199205	StandingVest	Polyester, Large	1 stk.
44503008	199206	StandingVest	Polyester, X-Large	1 stk.



### WalkingVest

WalkingVest er en vest som designet for trening på å reise seg og gå ved hjelp av en stasjonær eller mobil løfteenhet. WalkingVest gir støtte i lysken og holdes på plass med en polstret bensele. WalkingVest er tilgjengelig i forskjellige størrelser, alle for brukere som veier maks. 300 kg.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
44200002	162974	WalkingVest	Polyester, XX-Small	1 stk.
44200003	162975	WalkingVest	Polyester, X-Small	1 stk.
44200004	162976	WalkingVest	Polyester, Small	1 stk.
44200006	162977	WalkingVest	Polyester, Medium	1 stk.
44200007	162978	WalkingVest	Polyester, Large	1 stk.
44200008	162979	WalkingVest	Polyester, X-Large	1 stk.
44200009	162980	WalkingVest	Polyester, XX-Large	1 stk.



## Løfteseil

Reise seg / Stå / Gå



## BariVest

**For aktivering av ekstremt store og tunge brukere**

BariVest er en vest som er designet for trening på å reise seg opp, stå og gå med brukere som veier 180 kg eller mer. Den kan brukes i kombinasjon med både mobile og stasjonære personløftere, med en firepunkts løfteboyle eller med BariTurn. BariVest består av en ryggdel, en frontdel og en smalere del i midten slik at man kan oppnå en komfortabel tilpasning i lysken. Den har to løfteboyleløkker, både foran og bak, samt belter på tre nivåer. BariVest er tilgjengelig i ulike størrelser, alle for brukere som veier maks. 570 kg.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
47103010	199209	BariVest	Polyester, XXX-Large	1 stk.
47103011	199209	BariVest	Polyester, XXXX-Large	1 stk.



## Løfteseler

Løftestropper



## LimbSling

LimbSling er designet for komfortabel og praktisk hjelp når en bruker skal løfte benet eller armen, f.eks. for å komme bedre til for behandling og bandasjeskift. LimbSling er svært praktisk for store og tunge brukere. LimbSling brukes ved å plassere den under armen/benet som skal løftes, og så feste remløkkene til løfteboyle. LimbSling er tilgjengelig i én størrelse.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
49200006	162997	LimbSling	Polyester, maks. 300 kg	1 stk.



# Størrelsesguide for løfteseil.

## Delte benstøtter / Høy rygg



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Materiale/Beskrivelse	Maks. last	Størrelse	Anb. vekt for bruker	Mål for selens sete	Selens totale høyde
40800002	162813	HighBackSling	Polyester	300 kg	XXS	10–25 kg	20 cm	77 cm
40800003	162814	HighBackSling	Polyester	300 kg	XS	20–35 kg	25 cm	85 cm
40800004	162815	HighBackSling	Polyester	300 kg	S	30–55 kg	35 cm	91 cm
40800006	162816	HighBackSling	Polyester	300 kg	M	50–90 kg	45 cm	94 cm
40800007	162817	HighBackSling	Polyester	300 kg	L	80–110 kg	56 cm	98 cm
40800008	162818	HighBackSling	Polyester	300 kg	XL	110–160 kg	62 cm	98 cm
40800009	162819	HighBackSling	Polyester	300 kg	XXL	130–200 kg	70 cm	102 cm
40820002	162820	HighBackSling	Polyesternetting	300 kg	XXS	10–25 kg	20 cm	77 cm
40820003	162821	HighBackSling	Polyesternetting	300 kg	XS	20–35 kg	25 cm	85 cm
40820004	162822	HighBackSling	Polyesternetting	300 kg	S	30–55 kg	35 cm	91 cm
40820006	162823	HighBackSling	Polyesternetting	300 kg	M	50–90 kg	45 cm	94 cm
40820007	162824	HighBackSling	Polyesternetting	300 kg	L	80–110 kg	56 cm	98 cm
40820008	162825	HighBackSling	Polyesternetting	300 kg	XL	110–160 kg	62 cm	98 cm
40820009	162826	HighBackSling	Polyesternetting	300 kg	XXL	130–200 kg	70 cm	102 cm
40822002	162827	HighBackSling	Polyesternetting, ikke forsterket	300 kg	XXS	10–25 kg	20 cm	77 cm
40822003	162828	HighBackSling	Polyesternetting, ikke forsterket	300 kg	XS	20–35 kg	25 cm	85 cm
40822004	162829	HighBackSling	Polyesternetting, ikke forsterket	300 kg	S	30–55 kg	35 cm	91 cm
40822006	162830	HighBackSling	Polyesternetting, ikke forsterket	300 kg	M	50–90 kg	45 cm	94 cm
40822007	162831	HighBackSling	Polyesternetting, ikke forsterket	300 kg	L	80–110 kg	56 cm	98 cm
40822008	162832	HighBackSling	Polyesternetting, ikke forsterket	300 kg	XL	110–160 kg	62 cm	98 cm
40822009	162833	HighBackSling	Polyesternetting, ikke forsterket	300 kg	XXL	130–200 kg	70 cm	102 cm
40852002	162881	HighBackSling	Plastnetting	300 kg	XXS	10–25 kg	20 cm	77 cm
40852003	162882	HighBackSling	Plastnetting	300 kg	XS	20–35 kg	25 cm	85 cm
40852004	162883	HighBackSling	Plastnetting	300 kg	S	30–55 kg	35 cm	91 cm
40852006	162884	HighBackSling	Plastnetting	300 kg	M	50–90 kg	45 cm	94 cm
40852007	162885	HighBackSling	Plastnetting	300 kg	L	80–110 kg	56 cm	98 cm
40852008	162886	HighBackSling	Plastnetting	300 kg	XL	110–160 kg	62 cm	98 cm
40852009	162887	HighBackSling	Plastnetting	300 kg	XXL	130–200 kg	70 cm	102 cm
40890004	-	HighBackSling	Engangs, non-woven	200 kg	S	30–55 kg	35 cm	91 cm
40890006	-	HighBackSling	Engangs, non-woven	200 kg	M	50–90 kg	45 cm	94 cm
40890007	-	HighBackSling	Engangs, non-woven	200 kg	L	80–110 kg	56 cm	98 cm
40890008	-	HighBackSling	Engangs, non-woven	200 kg	XL	110–160 kg	62 cm	98 cm
40890009	-	HighBackSling	Engangs, non-woven	300 kg	XXL	150–250 kg	70 cm	102 cm
40700002	162929	ShellHBSling	Polyester	300 kg	XXS	10–30 kg	17 cm	80 cm
40700003	162930	ShellHBSling	Polyester	300 kg	XS	20–35 kg	25 cm	85 cm
40700004	162931	ShellHBSling	Polyester	300 kg	S	30–55 kg	35 cm	94 cm
40700006	162932	ShellHBSling	Polyester	300 kg	M	50–90 kg	40 cm	97 cm
40700007	162933	ShellHBSling	Polyester	300 kg	L	80–120 kg	45 cm	98 cm
40700008	162934	ShellHBSling	Polyester	300 kg	XL	110–160 kg	55 cm	100 cm
40700009	162935	ShellHBSling	Polyester	300 kg	XXL	150–210 kg	65 cm	100 cm
42520002	162869	FlexibleSling	Polyesternetting	300 kg	XXS	10–30 kg	20 cm	75 cm
42520003	162870	FlexibleSling	Polyesternetting	300 kg	XS	20–35 kg	25 cm	81 cm
42520004	162871	FlexibleSling	Polyesternetting	300 kg	S	25–55 kg	35 cm	90 cm
42520006	162872	FlexibleSling	Polyesternetting	300 kg	M	50–75 kg	45 cm	102 cm
42520007	162873	FlexibleSling	Polyesternetting	300 kg	L	70–110 kg	55 cm	102 cm
42520008	162874	FlexibleSling	Polyesternetting	300 kg	XL	100–130 kg	65 cm	104 cm
42522002	162875	FlexibleSling	Polyesternetting, ikke forsterket	300 kg	XXS	10–30 kg	20 cm	75 cm
42522003	162876	FlexibleSling	Polyesternetting, ikke forsterket	300 kg	XS	20–35 kg	25 cm	81 cm
42522004	162877	FlexibleSling	Polyesternetting, ikke forsterket	300 kg	S	25–55 kg	35 cm	90 cm
42522006	162878	FlexibleSling	Polyesternetting, ikke forsterket	300 kg	M	50–75 kg	45 cm	102 cm
42522007	162879	FlexibleSling	Polyesternetting, ikke forsterket	300 kg	L	70–110 kg	55 cm	102 cm
42522008	162880	FlexibleSling	Polyesternetting, ikke forsterket	300 kg	XL	100–130 kg	65 cm	104 cm
42800004	-	AmpHBSling	Polyester	300 kg	S	35–60 kg	37 cm	90 cm
42800006	-	AmpHBSling	Polyester	300 kg	M	50–80 kg	45 cm	97 cm
42800007	-	AmpHBSling	Polyester	300 kg	L	70–110 kg	50 cm	100 cm
42800008	-	AmpHBSling	Polyester	300 kg	XL	100–130 kg	60 cm	100 cm





## Delte benstøtter / Skulderhøy rygg



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Materiale/Beskrivelse	Maks. last	Størrelse	Anb. vekt for bruker	Mål for selens sete	Selens totale høyde
40500002	162848	BasicSling	Polyester	300 kg	XXS	10–25 kg	21 cm	63 cm
40500003	162849	BasicSling	Polyester	300 kg	XS	20–35 kg	27 cm	65 cm
40500004	162850	BasicSling	Polyester	300 kg	S	35–55 kg	37 cm	77 cm
40500006	162851	BasicSling	Polyester	300 kg	M	45–80 kg	50 cm	89 cm
40500007	162852	BasicSling	Polyester	300 kg	L	75–110 kg	60 cm	95 cm
40500008	162853	BasicSling	Polyester	300 kg	XL	100–150 kg	65 cm	98 cm
40500009	162854	BasicSling	Polyester	300 kg	XXL	140–200 kg	75 cm	98 cm
40520002	162855	BasicSling	Polyesternetting	300 kg	XXS	10–25 kg	21 cm	63 cm
40520003	162856	BasicSling	Polyesternetting	300 kg	XS	20–35 kg	27 cm	65 cm
40520004	162857	BasicSling	Polyesternetting	300 kg	S	35–55 kg	37 cm	77 cm
40520006	162858	BasicSling	Polyesternetting	300 kg	M	45–80 kg	50 cm	89 cm
40520007	162859	BasicSling	Polyesternetting	300 kg	L	75–110 kg	60 cm	95 cm
40520008	162860	BasicSling	Polyesternetting	300 kg	XL	100–150 kg	65 cm	98 cm
40520009	162861	BasicSling	Polyesternetting	300 kg	XXL	140–200 kg	75 cm	98 cm
40522002	162862	BasicSling	Polyesternetting, ikke forsterket	300 kg	XXS	10–25 kg	21 cm	63 cm
40522003	162863	BasicSling	Polyesternetting, ikke forsterket	300 kg	XS	20–35 kg	27 cm	65 cm
40522004	162864	BasicSling	Polyesternetting, ikke forsterket	300 kg	S	35–55 kg	37 cm	77 cm
40522006	162865	BasicSling	Polyesternetting, ikke forsterket	300 kg	M	45–80 kg	50 cm	89 cm
40522007	162866	BasicSling	Polyesternetting, ikke forsterket	300 kg	L	75–110 kg	60 cm	95 cm
40522008	162867	BasicSling	Polyesternetting, ikke forsterket	300 kg	XL	100–150 kg	65 cm	98 cm
40522009	162868	BasicSling	Polyesternetting, ikke forsterket	300 kg	XXL	140–200 kg	75 cm	98 cm
42700003	162917	AmpSling	Polyester	300 kg	XS	20–40 kg	27 cm	85 cm
42700004	162918	AmpSling	Polyester	300 kg	S	35–60 kg	37 cm	90 cm
42700006	162919	AmpSling	Polyester	300 kg	M	50–80 kg	45 cm	97 cm
42700007	162920	AmpSling	Polyester	300 kg	L	70–110 kg	50 cm	100 cm
42700008	162921	AmpSling	Polyester	300 kg	XL	100–130 kg	60 cm	100 cm
42700009	162922	AmpSling	Polyester	300 kg	XXL	120–180 kg	70 cm	100 cm
42720003	162923	AmpSling	Polyesternettingnetting	300 kg	XS	20–40 kg	27 cm	85 cm
42720004	162924	AmpSling	Polyesternettingnetting	300 kg	S	35–60 kg	37 cm	90 cm
42720006	162925	AmpSling	Polyesternettingnetting	300 kg	M	50–80 kg	45 cm	97 cm
42720007	162926	AmpSling	Polyesternettingnetting	300 kg	L	70–110 kg	50 cm	100 cm
42720008	162927	AmpSling	Polyesternettingnetting	300 kg	XL	100–130 kg	60 cm	100 cm
42720009	162928	AmpSling	Polyesternettingnetting	300 kg	XXL	120–180 kg	70 cm	100 cm







## Delte benstøtter / Lav rygg



Art. nr. H	HMS art.nr.	Produktnavn	Materiale	Maks. last	Størrelse	Anb. vekt for bruker	Mål for selens sete	Selens totale høyde
40200002	162834	LowBackSling	Polyester	300 kg	XXS	10–25 kg	21 cm	60 cm
40200003	162835	LowBackSling	Polyester	300 kg	XS	20–35 kg	27 cm	60 cm
40200004	162836	LowBackSling	Polyester	300 kg	S	30–50 kg	37 cm	77 cm
40200006	162837	LowBackSling	Polyester	300 kg	M	45–80 kg	47 cm	85 cm
40200007	162838	LowBackSling	Polyester	300 kg	L	75–110 kg	57 cm	90 cm
40200008	162839	LowBackSling	Polyester	300 kg	XL	100–140 kg	67 cm	92 cm
40200009	162840	LowBackSling	Polyester	300 kg	XXL	130–190 kg	77 cm	92 cm
40220002	162841	LowBackSling	Polyesternetting	300 kg	XXS	10–25 kg	21 cm	60 cm
40220003	162842	LowBackSling	Polyesternetting	300 kg	XS	20–35 kg	27 cm	60 cm
40220004	162843	LowBackSling	Polyesternetting	300 kg	S	30–50 kg	37 cm	77 cm
40220006	162844	LowBackSling	Polyesternetting	300 kg	M	45–80 kg	47 cm	85 cm
40220007	162845	LowBackSling	Polyesternetting	300 kg	L	75–110 kg	57 cm	90 cm
40220008	162846	LowBackSling	Polyesternetting	300 kg	XL	100–140 kg	67 cm	92 cm
40220009	162847	LowBackSling	Polyesternetting	300 kg	XXL	130–190 kg	77 cm	92 cm

### ! MERK!

For å finne passende modell, størrelse og materiale for den enkelte brukeren er det alltid viktig å prøve løftesill på forhånd. Målene og anbefalingene i størrelsesguiden er bare ment som en hjelp til å velge rett løftesill. Bredden på løftesillens sete gir en indikasjon på hvor brede brukersens hofter (trokanterbredden) kan være. Brukersens trokanterbredden må være innenfor +/- 10 cm av løftesillens setebredde. Løftesillens bredde gir en indikasjon på omfanget av brukersens overkropp. Omfanget av brukersens overkropp må være innenfor +/- 10 cm av løftesillens bredde. Løftesill er for stor hvis brukersens bak glir for langt ut av den nedre åpningen, eller hvis benstøttene glir fremover mot brukersens knehaser. Løftesill er for liten hvis brukersens ansikt er for nær løfteboylen, hvis benstøttene gnager mot lysken eller hvis selven virker eller føles for stram.

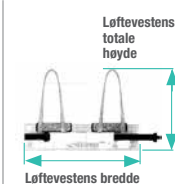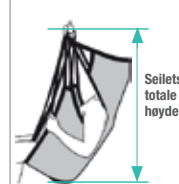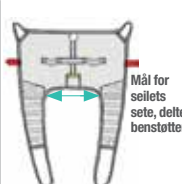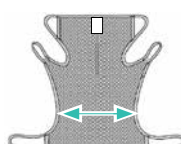

## Udelte benstøtter / Høy og skulderhøy rygg



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Materiale	Maks. last	Størrelse	Anb. vekt for bruker	Mål for selens sete	Selens totale høyde
42521003	162912	FlexibleSling, udelte	Polyesternettingnetting	300 kg	XS	20–40 kg	75 cm	80 cm
42521004	162913	FlexibleSling, udelte	Polyesternettingnetting	300 kg	S	30–70 kg	85 cm	85 cm
42521006	162914	FlexibleSling, udelte	Polyesternettingnetting	300 kg	M	60–90 kg	94 cm	93 cm
42521007	162915	FlexibleSling, udelte	Polyesternettingnetting	300 kg	L	80–130 kg	105 cm	96 cm
42521008	162916	FlexibleSling, udelte	Polyesternettingnetting	300 kg	XL	110–180 kg	115 cm	98 cm
41522003	162907	ClassicHBSling	Polyesternettingnetting	300 kg	XS	20–40 kg	30 cm	95 cm
41522004	162908	ClassicHBSling	Polyesternettingnetting	300 kg	S	30–60 kg	40 cm	98 cm
41522006	162909	ClassicHBSling	Polyesternettingnetting	300 kg	M	55–85 kg	48 cm	106 cm
41522007	162910	ClassicHBSling	Polyesternettingnetting	300 kg	L	80–120 kg	65 cm	110 cm
41522008	162911	ClassicHBSling	Polyesternettingnetting	300 kg	XL	110–140 kg	80 cm	115 cm
41222003	162902	ClassicSling	Polyesternettingnetting	300 kg	XS	20–40 kg	30 cm	80 cm
41222004	162903	ClassicSling	Polyesternettingnetting	300 kg	S	30–60 kg	38 cm	90 cm
41222006	162904	ClassicSling	Polyesternettingnetting	300 kg	M	55–85 kg	46 cm	95 cm
41222007	162905	ClassicSling	Polyesternettingnetting	300 kg	L	80–120 kg	63 cm	98 cm
41222008	162906	ClassicSling	Polyesternettingnetting	300 kg	XL	110–140 kg	80 cm	100 cm
47001010	199208	BariSling	Polyester	570 kg	XXXL	200–350 kg	–	–
47001011	-	BariSling	Polyester	570 kg	XXXXL	250–570 kg	–	–

## Til og fra toalettet / Høy og skulderhøy rygg



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Materiale	Maks. last	Størrelse	Anb. vekt for bruker	Mål for selens sete	Selens totale høyde
43704002	162955	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	XXS	10–30 kg	25 cm	92 cm
43704003	162956	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	XS	25–45 kg	28 cm	92 cm
43704004	162957	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	S	40–60 kg	30 cm	96 cm
43704006	162958	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	M	55–80 kg	35 cm	102 cm
43704007	162959	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	L	75–110 kg	41 cm	102 cm
43704008	162960	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	XL	90–130 kg	46 cm	104 cm
43704009	162961	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	XXL	120–170 kg	60 cm	104 cm
42521403	162969	FlexibleSling, udelte*	Polyesternettingnetting	300 kg	XS	20–40 kg	75 cm	80 cm
42521404	162970	FlexibleSling, udelte*	Polyesternettingnetting	300 kg	S	30–70 kg	85 cm	85 cm
42521406	162971	FlexibleSling, udelte*	Polyesternettingnetting	300 kg	M	60–90 kg	94 cm	93 cm
42521407	162972	FlexibleSling, udelte*	Polyesternettingnetting	300 kg	L	80–130 kg	105 cm	96 cm
42521408	162973	FlexibleSling, udelte*	Polyesternettingnetting	300 kg	XL	110–180 kg	115 cm	98 cm

\*) med åpning for toalettstol

## Til og fra toalettet / Lav rygg




Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Materiale/Beskrivelse	Maks. last	Størrelse	Anb. vekt for bruker	Mål for selens sete	Selens totale høyde
43504002	162936	HygieneSling	Polyester, med belte	300 kg	XXS	10–30 kg	25 cm	50 cm
43504003	162937	HygieneSling	Polyester, med belte	300 kg	XS	25–45 kg	35 cm	65 cm
43504004	162938	HygieneSling	Polyester, med belte	300 kg	S	40–60 kg	48 cm	75 cm
43504006	162939	HygieneSling	Polyester, med belte	300 kg	M	55–85 kg	55 cm	87 cm
43504007	162940	HygieneSling	Polyester, med belte	300 kg	L	75–100 kg	60 cm	93 cm
43504008	162941	HygieneSling	Polyester, med belte	300 kg	XL	90–130 kg	80 cm	95 cm
43504009	162942	HygieneSling	Polyester, med belte	300 kg	XXL	120–170 kg	90 cm	95 cm
43904003	162950	HygieneSling	Polyester, ekstra ryggstøtte	300 kg	XS	25–45 kg	35 cm	65 cm
43904004	162951	HygieneSling	Polyester, ekstra ryggstøtte	300 kg	S	40–60 kg	48 cm	75 cm
43904006	162952	HygieneSling	Polyester, ekstra ryggstøtte	300 kg	M	55–85 kg	55 cm	87 cm
43904007	162953	HygieneSling	Polyester, ekstra ryggstøtte	300 kg	L	75–100 kg	60 cm	93 cm
43904008	162954	HygieneSling	Polyester, ekstra ryggstøtte	300 kg	XL	90–130 kg	80 cm	95 cm
43804002	162962	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	XXS	10–30 kg	25 cm	92 cm
43804003	162963	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	XS	25–45 kg	28 cm	92 cm
43804004	162964	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	S	40–60 kg	30 cm	96 cm
43804006	162965	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	M	55–80 kg	35 cm	102 cm
43804007	162966	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	L	75–110 kg	41 cm	102 cm
43804008	162967	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	XL	90–130 kg	46 cm	104 cm
43804009	162968	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	XXL	120–170 kg	60 cm	104 cm

## Løfting i liggende stilling / Vending



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Materiale/Beskrivelse	Maks. last	Størrelse	Anb. vekt for bruker	Lengde	Bredde
46502007	199207	StretcherSling	Polyester	300 kg	én størrelse	50–200 kg	180 cm	86 cm
46592007	-	StretcherSling	Engangs, <i>non-woven</i>	300 kg	én størrelse	50–200 kg	180 cm	86 cm
47522007	199211	SafeHandlingSheet	Polyesternetting	300 kg	L	50–300 kg	240 cm	115 cm
47542007	-	SafeHandlingSheet	Polyesternetting/WL4W	300 kg	L	50–300 kg	240 cm	115 cm
47502008	199213	SafeHandlingSheet	Polyester	400 kg	XL	50–400 kg	240 cm	115 cm
47502009	199214	SafeHandlingSheet	Polyester, <i>forsterket</i>	570 kg	XXL	50–570 kg	240 cm	130 cm
547810	-	PositioningSling	Engangs, <i>non-woven, polyester</i>	454 kg	én størrelse	50–400 kg	198 cm	132 cm

## Reise seg / stå med MiniLift

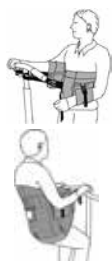

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Materiale/Beskrivelse	Maks. last	Størrelse	Anb. vekt for bruker	Løftevestens bredde
45500003	199215	ThoraxSling	Polyester	300 kg	XS	20–50 kg	85 cm
45500004	162804	ThoraxSling	Polyester	300 kg	S	30–60 kg	94 cm
45500006	162805	ThoraxSling	Polyester	300 kg	M	50–80 kg	104 cm
45500007	162806	ThoraxSling	Polyester	300 kg	L	70–110 kg	124 cm
45500008	162807	ThoraxSling	Polyester	300 kg	XL	100–150 kg	146 cm
45500009	162808	ThoraxSling	Polyester	300 kg	XXL	140–200 kg	170 cm
45600004	162809	ThoraxSling	Polyester, <i>med setestotte</i>	300 kg	S	30–60 kg	94 cm
45600006	162810	ThoraxSling	Polyester, <i>med setestotte</i>	300 kg	M	50–80 kg	104 cm
45600007	162811	ThoraxSling	Polyester, <i>med setestotte</i>	300 kg	L	70–110 kg	124 cm
45600008	162812	ThoraxSling	Polyester, <i>med setestotte</i>	300 kg	XL	100–150 kg	146 cm

## Stå/gå



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Materiale	Maks. last	Størrelse	Anb. vekt for bruker	Løftevestens bredde	Løftevestens totale høyde
44503003	162981	StandingVest	Polyester	300 kg	XS	15–40 kg	82 cm	68 cm
44503004	162982	StandingVest	Polyester	300 kg	S	20–50 kg	96 cm	73 cm
44503006	162983	StandingVest	Polyester	300 kg	M	40–60 kg	110 cm	73 cm
44503007	199205	StandingVest	Polyester	300 kg	L	50–80 kg	122 cm	73 cm
44503008	199206	StandingVest	Polyester	300 kg	XL	70–100 kg	130 cm	73 cm
44200002	162974	WalkingVest	Polyester	300 kg	XXS	15–40 kg	60 cm	67 cm
44200003	162975	WalkingVest	Polyester	300 kg	XS	25–50 kg	70 cm	68 cm
44200004	162976	WalkingVest	Polyester	300 kg	S	40–60 kg	82 cm	68 cm
44200006	162977	WalkingVest	Polyester	300 kg	M	55–80 kg	96 cm	73 cm
44200007	162978	WalkingVest	Polyester	300 kg	L	75–100 kg	110 cm	73 cm
44200008	162979	WalkingVest	Polyester	300 kg	XL	90–110 kg	122 cm	73 cm
44200009	162980	WalkingVest	Polyester	300 kg	XXL	100–130 kg	142 cm	75 cm
47103010	199209	BariVest	Polyester	570 kg	XXXL	180–300 kg	190–280 cm	-
47103011	199210	BariVest	Polyester	570 kg	XXXXL	250–570 kg	230–310 cm	-

## Løfteseil

### Tilbehør



## AdjustmentLoop

AdjustmentLoop er en forlengelsesrem som hovedsakelig brukes til å forlenge selens løfteremmer til ønsket lengde, f.eks. for å muliggjøre en mer tilbaketrent stilling eller en mer oppreist sittende stilling, eller for å oppnå bedre balanse, f.eks. for brukere med hemiplegi. AdjustmentLoop er tilgjengelig i to lengder, begge for maks. 300 kg.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
49182006	162994	AdjustmentLoop	18 cm, gir en forlengelse på ca. 12 cm	1 par
49182007	162995	AdjustmentLoop	28 cm, gir en forlengelse på ca. 22 cm	1 par



## HeadSupport

HeadSupport er et tilbehør for løfteseil uten hodestøtte. HeadSupport plasseres rundt brukerens hode, og kobles deretter til løftebøylekroker for å gi ekstra støtte for hodet. HeadSupport har tre alternative løkker på begge sider slik at man kan velge den mest passende lengden. Vi anbefaler en analyse av ulike seilmodeller for å fastslå behovet for en løfteseil som gir hodestøtte. Maks. vekt: 300 kg.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
49302000	162996	HeadSupport	Polyester, én størrelse	1 stk.



## SoftLegSupport

Trykksensitive brukere trenger iblant ekstra myke benstøtter. SoftLegSupports er polstrede trekk som kan brukes på bendelene av seil med delte benstøtter. SoftLegSupports selges i par og det er lett for pleieren å sette dem på.

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
49373003	162998	SoftLegSupport	X-Small	1 par
49373006	162999	SoftLegSupport	Small/Medium	1 par
49373007	163000	SoftLegSupport	Large/X-Large	1 par





## StrapsPadding

StrapsPadding er polstrede trekk som kan brukes som ekstra polstring på løfteremmene på en løfteseil for å minske trykket for brukere som opplever ubehag. StrapsPadding kan plasseres på mange ulike måter for å øke komforten, f.eks. for brukere med en kraftig lenende sittende stilling og/eller ukontrollerte bevegelser. De festes med velcro og er svært enkle å tilpasse, flytte eller ta av for rengjøring. StrapsPadding kan brukes som et tilbehør for alle løfteseil med delte benstøtter.



Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
49373300	199267	StrapsPadding	Polstrede trekk for løfteremmer	2 stk.



## NameTag

NameTag er en merkelapp som enkelt kan festes til, fjernes fra og flyttes mellom produkter. Den festes sikkert og kan vaskes på opptil 90 °C.

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
49700001	-	NameTag	Merkelapp i tekstil med vevd tekst	10 stk.



## LoopTag

LoopTag er et tilbehør for løfteseil. Det brukes for enkel og midlertidig merking av løfteseilløkker som skal benyttes for en bestemt bruker. LoopTag er bare tilgjengelig i oransje og leveres i 4-pakninger.

Art. nr.	HMS art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Enhet
49982000	-	LoopTag	Tilbehør for løfteseler	4 stk.

# Sikkerhetsinformasjon for forflytnings- og løftehjelpemidler.



## Visuell inspeksjon

Kontroller at materialene og sømmene ikke er skadde. Sjekk at materialene ikke er slitte eller falmede.



## Mekaniske belastninger eller påkjenninger

Utøv trykk på spenner og håndtak for å kontrollere at de ikke åpner seg eller blir ødelagt ved tunge belastninger.



## Stabilitetstest

Bøy platen forsiktig for å kontrollere at den er både elastisk og fast og stiv.



## Friksjonstest

Lav friksjon – Sørg for at overflaten er glatt og glir lett.

Sammenlign med et nytt produkt.

Høy friksjon – Kontroller at overflaten er ru og hindrer at forflytningshjelpemiddelet beveger seg. Sammenlign med et nytt produkt.


## Kontroller at forflytningshjelpemiddelet fungerer perfekt!

Forflytningshjelpemidler blir også eldre. Utfør regelmessige kontroller for å sikre at de er trygge og i perfekt stand! Et hjelpemiddel som ikke oppfyller de nødvendige kravene, må tas ut av bruk umiddelbart.

### Hjelpemidler med håndtak og remmer




Sjekk sikkerheten!

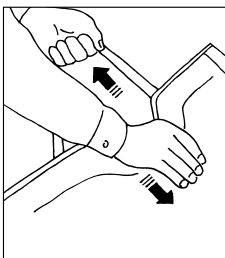

### Hjelpemidler med spenner




Sjekk sikkerheten!

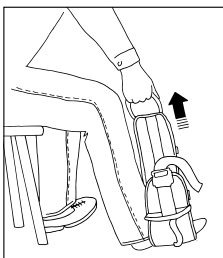

### Hjelpemidler med en stiv kjerne




Sjekk sikkerheten!

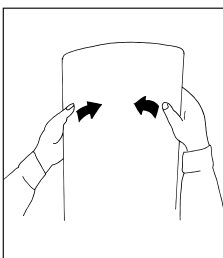

### Hjelpemidler med lav eller høy friksjon




Sjekk sikkerheten!

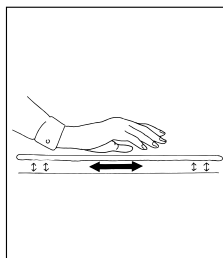

### Hjelpemidler med løkker



Sjekk sikkerheten!

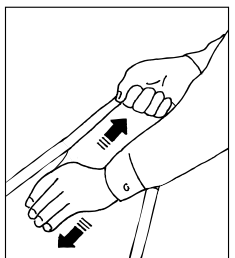

### Mer informasjon

Vennligst besøk nettstedet vårt for å laste ned all dokumentasjon, og for å lese mer om hvordan produktene våre fungerer og vedlikeholdes. På nettstedet kan du også finne videoklipp og instruksjoner for hvordan du bruker produktene. Men glem ikke å lese bruksanvisningen!

**Direct Healthcare Group**

Advancing Movement & Health®

[www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com)

# Vi kan hjelpe deg med å forbedre arbeidsmiljøet.



## CHECK

Check er Direct Healthcare Groups verktøy for systematisk styring av arbeidsmiljøet gjennom kartlegging, evaluering og kvalitetssikring av arbeidsmetoder, opplæring og hjelpemidler for brukerforflytninger. Det er også en del av Direct Healthcare Groups unike, enkle forflytningskonsept.

### Kartlegg og evaluer dine forflytninger og identifiser risikosituasjoner

Check er et verktøy som er designet for å legge til rette for en grundig gjennomgang og evaluering av arbeidet med brukerforflytninger. Hensikten med dette er å kvalitetssikre arbeidsmetodene og å sikre at pleiepersonellet får relevant opplæring og har nødvendige forflytningshjelpemidler. Med dette på plass kan man forbedre arbeidsmiljøet, fremme god ergonomi og sikre høy pleie kvalitet. Det er også en mulighet for arbeidsenheten til å redusere kostnadene ved belastningsskader og trykksår.

Check gir informasjon om hvordan forflytninger utføres i dag, hvilke hjelpemidler som brukes, hvilken kunnskap pleierne har på dette området og hvor vanskelige forflytningene oppleves av pleierne. Basert på resultatene av din egen kartlegging og evaluering vil du kunne identifisere og vurdere risikosituasjoner som oppstår på arbeidsplassen, men også vedta en handlingsplan med egnede forbedringstiltak.

Risikovurderingen kan ideelt sett gjøres i samarbeid med en fysioterapeut, en ergoterapeut, en sykepleier, en instruktør for brukerforflytninger eller en arbeidsmedisiner. Glem ikke å evaluere resultatet av innsatsen ved å gjennomføre en ny Check-evaluering etter en passende tid. Regelmessig oppfølging anbefales sterkt. Hvorfor ikke gjøre det til en god vane å alltid utføre en Check-evaluering hver gang rutiner endres, når det inntreffer en uheldig episode eller hvis noen antyder at risikable brukerforflytninger forekommer?

### Ledelsens ansvar

I visse land finnes det lover som tydelig legger ansvaret på ledelsen på dette området. Men samarbeid mellom arbeidsgiveren og de ansatte er helt nødvendig for å få en fungerende arbeidsmiljøstyring. Check er en støtte for systematisk arbeidsmiljøstyring. Med Check blir det lettere å oppfylle lovfestede krav til ytelse og dokumentasjon av risikovurderinger og handlingsplaner.



### Check the Workplace

Et verktøy for kartlegging, evaluering og utarbeidelse av en oversikt over situasjonen på arbeidsplassen. Hensikten med Check the Workplace er å forbedre arbeidsmiljøet med hensyn til brukerforflytninger.

**For mer informasjon,** vennligst kontakt din lokale Direct Healthcare Group-partner. Vi kan også hjelpe til med å utføre en Check-evaluering på din arbeidsplass, analysere resultatene og utarbeide et forslag til utstyr som passer perfekt for din arbeidsplass. Du finner all nødvendig kontaktinfo på vårt nettsted, [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com).

## SystemRoMedic™

### Over 30 år i enkelhetens tjeneste

SystemRoMedic er Direct Healthcare Groups unike forflytningskonsept som er markedets bredeste og mest komplette utvalg av smarte, lettanvendelige og sikre hjelpemidler for alle typer pasientforflytninger og manuell håndtering. Filosofien bak vårt konsept er et fokus på å forhindre og redusere yrkesskader, samtidig som brukerne kan føle større grad av uavhengighet og verdighet.

Med en unik kombinasjon av opplæring og et komplett utvalg av effektive forflytningshjelpemidler tilbyr vi forbedringer av både arbeidsmiljøet og pleiekvaliteten. Samtidig gir systemet betydelige kostnadsbesparelser.

I mer enn 30 år har vi utviklet SystemRoMedic for å tilby enkle løsninger med utmerkede resultater, og en enklere hverdag for både brukere og personell i helsesektoren.

### Direct Healthcare Group tilbyr løsninger og støtte som øker uavhengigheten for funksjonshemmede eller eldre, samtidig som det blir lettere for dem som pleier dem.

Direct Healthcare Group-gruppen er et av de ledende helserelaterte selskapene i Europa med egne produksjonsenheter og salgsorganisasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Frankrike, Kina, Canada og USA.

Direct Healthcare Groups produkter distribueres også av partnere i mer enn 40 land rundt om i verden.

Vårt brede utvalg av kvalitetsprodukter inkluderer et komplett, lettanvendelig forflytningsystem og andre hjelpemidler for pasienthåndtering samt baderoms- og toalettprodukter.

## Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

### Direct Healthcare Group

Kjellstad Næringspark  
St Hallvards vei 3  
3414 Lierstranda  
T +47 21 01 44 70  
www.directhealthcaregroup.com  
info.no@directhealthcaregroup.com