



RoMedicClips forenkler positionering af brugeren. De er fremstillet således, at de kan benyttes sammen med samtlige træktagener og de fleste løftebøjler. RoMedicClips anvendes altid som par og placeres på hver side af løftebøjlen.

I SystemRoMedic findes et bredt udvalg af funktionelle og bekveme løftesejle af høj kvalitet, tilpassede forskellige typer løft og brugere med forskellige behov. Løftesejlene findes i flere forskellige materialer og i størrelser fra XXS til XXL. Alle modeller er både sikre og meget lette at anvende, og de kan løfte brugere op til 300 kg. Valg af model og materiale bestemmes af løftesituationen og brugerens behov.



## Funktionskontrol

### Visuel og mekanisk inspektion

Foretag regelmæssige funktionskontroller af løftesejlet. Kontroller altid efter vask. Kontroller, at sømme og materiale er helt og ikke udviser tegn på beskadigelse. Kontroller, om materialet er udsat for slitage eller er bleget. Belast og kontroller, at spænder og håndtag kan holde til en kraftig belastning. Ved tegn på slitage skal produktet kasseres.



## Læs altid manualen



Læs altid manualerne for alle hjælpemidler, som anvendes ved en forflytning.

Opbevar manualen tilgængeligt for brugere af produktet.

Efterlad ikke brugeren alene under forflytningsmomentet.

Undgå risikoen for, at brugeren glider ud eller føler sig ubehageligt tilpas ved at være omhyggelig med afprøvningen af løftesejlet. Hægt først løftesejlets rygstropper på løfteåget; hægt derefter benstøttens lokker på. Anvend afprøvet løfteåg.

## Brugervejledning for RoMedicClips

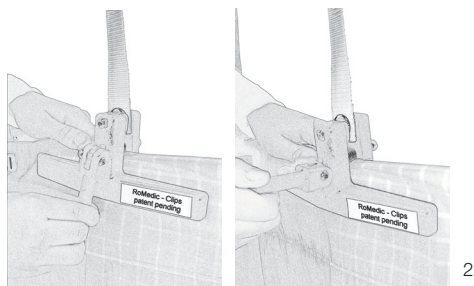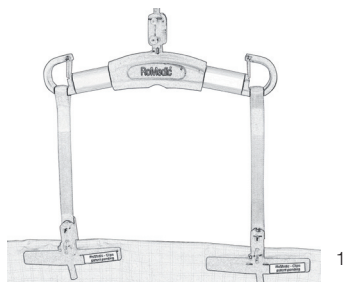

1. Placer først RoMedicClips på løftebøjlen ved at fæste stropperne på løftebøjls kroe. Glat trækklagenet, der hvor Clipsene skal sættes fast.

2. Før man starter positioneringen, trækkes et stykke af trækklagenet ind i åbningen på begge Clips. Placer Clipsene så nær brugeren som muligt, specielt ved lave løftehøjder. Klem trækklagenet fast mellem Clipsene ved at stramme låseskruerne fra åben til låst stilling. Åbningen i Clipsene justeres ved at dreje låseskruerne.

3. Hæv løfteren når brugeren er klar til positionering. Vær opmærksom under hele positioneringsmomentet og afbryd processen, hvis noget virker unormalt. Afslut positioneringen, når brugeren er i ønskede position.

### Vedligeholdelsesråd:

Ved behov rengøres RoMedicClips med varmt vand og desinficering/vaskesprit.

Ved spørgsmål om produkterne og deres anvendelse, kontakt din lokale forhandler. Se [www.handicare.com](http://www.handicare.com) for en komplet forhandlerliste. Sørg for, at du altid har den korrekte version af manualen. Den seneste version kan downloades fra vores hjemmeside [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

Handicare AB  
Veddestav. 15. Box 640  
SE-175 27 Järfälla  
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200  
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)  
E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

