

# EasySlide Disposable

## DRAAIEN IN BED: DRAAIEN NAAR BUIKLIIG

Benodigheden: EasySlideDisposable (art. no: 2040)

1



Scheur de EasySlide disposable op de gewenste lengte af.  
4 slides is gelijk aan 2 meter.

2



Plaats de EasySlide onder de patiënt door deze in het matras onder de patiënt te duwen.

3



Zorg dat patiënt met het halve lichaam op de EasySlide Disposable ligt

4



Plaats de hand waarover de patiënt op de buik wordt gedraaid onder de billen, met de handpalm gericht naar de bil. (zo steekt de elle boog niet uit)

5



Kruis de benen. Het been tegenover de zijde waar de hand onder de bil is geplaatst komt boven te liggen

6



Aan één zijde wordt de patiënt omhoog gedraaid (groene pijl), en aan de andere zijde wordt de patiënt tegen gehouden, dus niet duwen (oranje pijl).

7



Zodra de patiënt op zijn zij ligt, duwen beide kanten, waardoor de patiënt op zijn buik rolt/glijdt.

8



De medewerkers aan de buikzijde van de patiënt duwen door met hun handen over te pakken, zodat de patiënt niet op hun armen komt te liggen.

9



Nu ligt de patiënt op de buik. Verwijder het glijzeil onder de patiënt.