

Upplev ett nytt
sätt att hantera
din mobillyft.

SystemRoMedic™

EVA FIVE
SystemRoMedic

**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health®

Därför skapade vi EvaDrive.

Kostnaderna för olyckor vid manuella personlyft, framförallt ryggskador, inom vårdsektorn ökar i takt med att antalet patienter med stora vård- och förflytningsbehov blir fler. Riskerna för belastningsskador har blivit allt större på grund av ett ökande antal storvuxna patienter i kombination med minskande budgetar.

Vårt mål är att med hjälp av nya och innovativa förflytningshjälpmedel minska skaderisken för vårdpersonal och undvika belastningsskador. Därför skapade vi EvaDrive.

EvaDrive är en ny motordriven mobil lyft som drastiskt minskar hur mycket kraft som krävs för förflyttning och personlyft. EvaDrive kan köras med minimal ansträngning även i trånga utrymmen.

Tack vare den intuitivt utformade handkontrollen är den lika enkel att styra som en vanlig kundvagn!

I kombination med Direct Healthcare Group's funktionella och användarvänliga lyftselar och andra tillbehör är EvaDrive ett optimalt val för förflyttning till och från sängen, stolen eller golvet och även för horisontella byten av ställning eller gångträning.





Intuitiv kontrollpanel

Känslig handkontroll

Kraftfullt litium-batteri

Svängbara bakhjul

Intuitiv funktion. Ett helt nytt sätt att manövrera din mobillyft.

EvaDrive körs intuitivt med minimal styrka. Handtaget känner av minsta rörelse och EvaDrive kan styras in i rejält trånga utrymmen med bara fingertopparna, till exempel för att byta ställning på en patient i ett litet sjukhusrum.

EvaDrive vänder, backar och kör framåt genom att handtaget lätt förs i önskad riktning. EvaDrive vet vart du vill komma - och tar dig dit.



En ensam vårdare kan enkelt styra lyften även för förflyttning av storvuxna brukare.





EVA 450EE

EVADRIVE
SystemoMedic


LINK 13

Så fungerar den.

Kontrollpanelen



Tryck på På/Av-knappen och EvaDrive är klar att användas inom några sekunder.

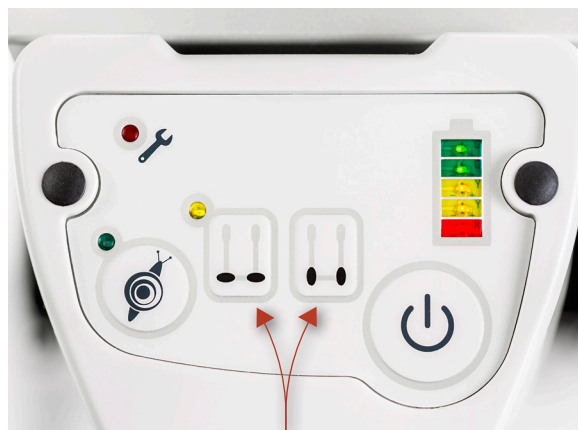

Bakhjulen kan vridas till valfri vinkel.



När du behöver hög precision och låg hastighet - tryck bara på snigeln.



Serviceindikatorn kommer att meddela när EvaDrive behöver påseende.

Handtaget



Det perceptiva och ergonomiska handtaget, är försett med lastceller som tolkar dina rörelser.

Genom att lätt skjuta handtaget framåt så rör sig EvaDrive framåt. Genom att lätt dra det bakåt så backar EvaDrive. Handtaget är ergonomiskt utformat och kan justeras i höjddled.

Dessutom finns en säkerhetsbrytare som förhindrar varje oönskad rörelse.

Hjulen



Bakhjulen kan vändas till valfri vinkel genom att använda knapparna på kontrollpanelen.

EvaDrive kan operera i mycket trånga utrymmen tack vare de laterala rörelserna i hjulen.



EvaDrive hanteras lätt i trånga utrymmen.

Batteriet

Det kraftfulla litiumbatteriet håller ett helt arbetspass. Ladda batteriet när EvaDrive inte används, så att lyften är redo för nästa arbetspass. Batteriet kan tas bort och bytas ut om det behövs.



