
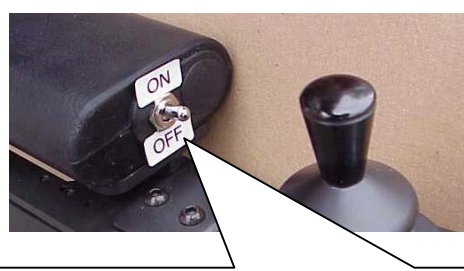


Modus bryter:

- **1x** og velg **Maks. hastighet** ved å bevege joystick (maks. hastighet blinker)
- **2x** og velg **Modus** ved å bevege joystick (modus lys lyser)
- **3x** og Kjør ved å bevege joystick (maks. Hastighet lyser)

Joystick:

- **Kjør** venstre, høyre, for-, bakover
- Velg **Maks. hastighet** ved å bevege sideveis (se også Modus bryter)
- Velg **Modus** ved å bevege sideveis (se også Modus bryter)
- **Aktiver Modus** ved å bevege for- og bakover

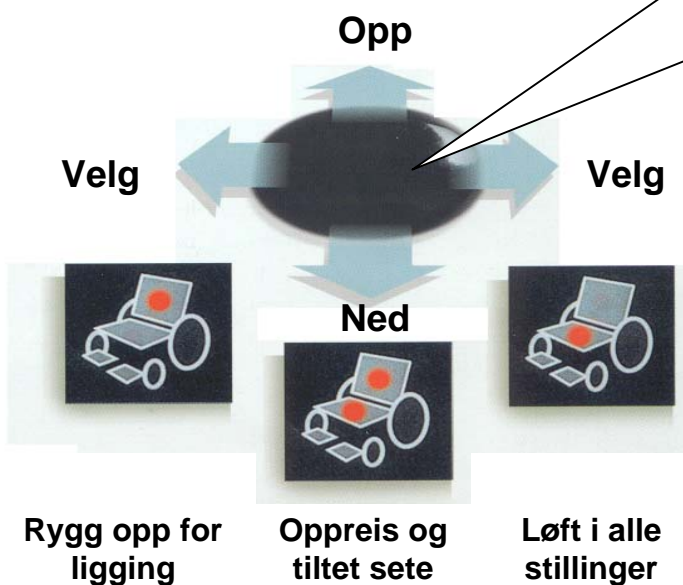

OFF = enkel modus
ON = oppreis og rygg kjøres sammen
 → direkte fra liggende til oppreist
 → avslapping (tilt i rom)