

Charge maxi. : 60 kg/132 lbs

AmbulationArm est une poignée d'appui en aluminium, qui peut être montée sur les différents modèles d'auxiliaires de levage mobiles Eva de SystemRoMedic. AmbulationArm fournit un appui à l'utilisateur pendant l'exercice à la marche. L'utilisateur doit porter une veste de levage, par exemple WalkingVest, pour disposer d'un appui et de plus de sécurité pendant l'exercice à la marche. Les accoudoirs sont longs et offrent des possibilités de préhension adaptées à différents utilisateurs pendant toute la phase de l'exercice.

La série de produits SystemRoMedic de Handicare comprend notamment des auxiliaires de levage et des harnais de levage. SystemRoMedic conçoit les besoins de déplacement d'une manière cohérente et les répartit dans quatre catégories : transfert, positionnement, appui et levage.



Contrôle de fonctionnement

Inspection visuelle

Effectuer des inspections périodiques du fonctionnement de l'auxiliaire de levage. Vérifier que le matériau est entièrement exempt de dommages.

Avant l'utilisation :

Vérifier que l'auxiliaire de levage est correctement assemblé.

Contrôler la fixation de l'étrier de levage et le fonctionnement de la protection contre le décrochement.

Vérifier le mouvement de levage et d'écartement des pieds.

Vérifier que le dispositif de réglage est correctement installé.




Toujours lire le mode d'emploi

Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d'un transfert de patient.

Conserver le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.

Les auxiliaires de levage ne doivent être utilisés que par des personnes qui ont été formées à la manipulation des auxiliaires de levage.


Montage

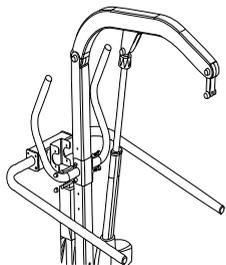

N.B. ! Le montage d'AmbulationArm doit être exclusivement confié à un technicien.

AmbulationArm se place sur la face arrière de l'auxiliaire de levage, en dehors de la poignée de conduite qui se trouve devant l'auxiliaire de levage. Veiller à placer AmbulationArm avec le bon côté tourné vers le haut. Pour régler la hauteur de AmbulationArm, le plus simple est de le faire en fonction de la taille de l'utilisateur, en changeant la hauteur de la colonne. La colonne du dispositif de levage Eva est réglable sur trois niveaux.

Utilisation

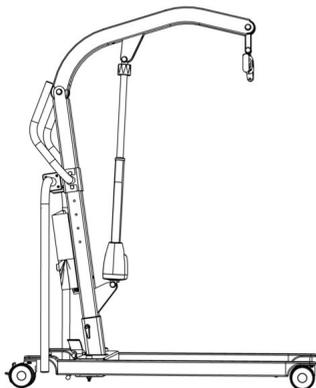

Rabattre les accoudoirs vers l'arrière, de sorte qu'ils se placent en position suspendue verticale, afin d'éviter de heurter l'utilisateur lors de la mise en place de l'auxiliaire de levage.

Placer l'auxiliaire de levage devant l'utilisateur et accrocher les œillets de levage sur l'étrier de levage. Utiliser de préférence la protection d'étrier SlingBarWrap contre les éventuels chocs de l'étrier de levage.


N.B. ! Faire attention aux accoudoirs au moment de les rabattre vers l'avant ou l'arrière, car ils pivotent rapidement et peuvent heurter à la fois l'utilisateur et l'assistant.

Une fois que WalkingVest est placé, les accoudoirs peuvent être rabattus vers l'avant. Lever le bras de levage pour que WalkingVest fournisse un appui à l'utilisateur et demander en même temps à l'utilisateur de saisir les accoudoirs avec les mains et de se relever lentement. Il est important de lever le bras de levage en même temps et de veiller à ce que l'utilisateur ne se relève pas et ne se heurte pas la tête dans l'étrier de levage.



N.B. ! L'utilisateur ne doit pas s'appuyer ou se reposer sur les accoudoirs, mais les utiliser uniquement comme des soutiens.

Indications des dimensions

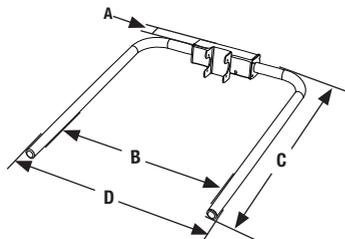

	A	B
A	70	2,76
B	495	19,5
C	820	32,31
D	570	22,46

Colonne A dimensions en mm

Colonne B dimensions en pouces

Entretien

Au besoin, nettoyer avec de l'eau chaude ou de l'alcool à brûler. Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant du phénol ou du chlore, car cela pourrait endommager le matériau.

Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter le site www.handicare.com pour la liste complète des distributeurs. Veiller à toujours disposer de la version correcte du manuel. La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet : www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200

Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

