

Kortinfo



SofCare™

Tryckavlastande bäddmadrass

Statisk trelagsmadrass som förebygger
och behandlar trycksår upp t om sårkategori 3.

SofCare

Tryckavlastande madrass

Installation

1. Lägg madrassen i inkontinensöverdraget (om sådant finns) ovanpå sängens ordinarie madrass, med korken i fotändan.
2. Lägg på ett lakan (stretchlakan är att föredra).
3. Skruva av den blå korken och kontrollera att den grå ventilen är på plats.
4. Koppla in supportpumpen, och ställ in ratten så att spetsen pekar rakt upp, klockan 12* (madrassen fylls på ca. 25 minuter). Gör en handkontroll första gången madrassen används eller om inställningen ändras.
5. Fäst hörnstropparna runt bottenmadrassen.

När supportpumpen är fast ansluten anpassar sig Sofcare till sin användare så fort denne lägger sig i sängen. Ingen manuell inställning behövs. Brukarvikt 0-220 kg.

* Madrasstrycket kan vid behov ställas med lägre eller högre tryck. Vid ändrad inställning ska alltid handkontroll göras.

Rekonditionering:

1. Töm madrassen på luft.
2. Torka av madrass, överdrag och pump med ljummet vatten och tvållösning (desinfektionsmedel vid behov). Överdraget kan även tvättas i 95°.
3. Torka torrt med trasa.


Rekonditionering/Service

Om madrass ej håller luft:

Kontrollera om det finns synliga hål i madrassen (finns hål kan detta lagas med medföljande lagningslapp i originalförpackningen).
Kontrollera om ventilen är hel och sitter rätt på plats.
Kontrollera att supportpumpen är korrekt ansluten.


Strömavbrott/Transport

Vid strömavbrott eller transport, koppla ur supportpumpen och sätt på den blå korken på madrassen.

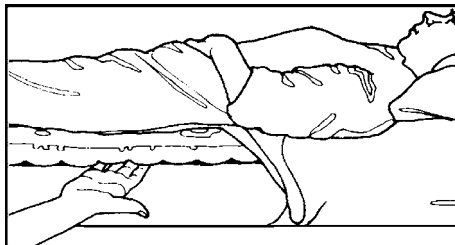

Exempel handkontroll

CPR/HLR – Töm madrassen på luft

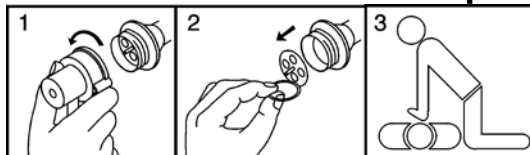

Koppla bort supportpumpen och drag ur ventilen.