



Gåbordsväljaren - Översikt

G å b o r d s m o d e l l

Bure Double 2.0



Gåbord med flexibelt breddmått.

Bure Double är utrustad med dubbel eldrift, dels med eldriven höj- och sänkning och dels med eldriven breddning av bottenstativet. Det flexibla breddmålet underlättar åtkomst för exempelvis en rullstol och för trängre passager som en dörrpost. Detta gör gåbordet praktiskt både i hem- och vårdmiljö.

Max brukarvikt: 150 kg

Bure Space



Gåbord med extra ben- och gångutrymme.

Bure Space är speciellt framtaget för situationer som kräver extra ben- och gångutrymme. Det extra benutrymmet möjliggör och underlättar uppresning för brukare med inskränkt rörlighet och stelhet. Bordet har en kraftig elmotor för eldriven höjjustering. Den optimala höjden för gåbordet kan därmed ställas in med patienten på plats och gåbordet kan också användas som uppresningshjälp. Bottenstativet har ett rymligt innermått med 67 cm. Bure Space kan fås med elmanövrerad eller hydraulisk höjjustering.

Max brukarvikt: 150 kg

Bure Standard/ Bure S



Gåbord i tre utföranden - el, gas eller manuell.

Bure Standard och Bure S passar brukare med enklare och avgränsade behov. Gåbordet finns i tre utföranden: EL, GAS, och MANUELL. Bure S är en smalare version av Bure Standard och speciellt anpassad för trängre utrymmen. Samtliga modeller har en steglös höjinställning av underarmstöden.

Max brukarvikt: 150 kg

Bure Low



Gåbord i lägre modell för korta brukare.

Bure Low är en lägre modell för korta brukare. Modellen är densamma som Bure Std / S förutom att min/max höjd är betydligt lägre (70-95cm med 75mm hjul). Bure Low finns med två olika bottenstativ Std och S, med el eller gas.

Max brukarvikt: 150 kg

Bure XL



Gåbord för större och tyngre patienter.

Bure XL är framtagen för större och tyngre patienter och har därför extra plats och styrka. Eftersom det vid vård och omvårdnad av tyngre patienter är viktigt med kraftfulla hjälpmedel levereras Bure XL alltid med eldrift.

Max brukarvikt: 240 kg

Rise & Go DB™



Gåbord med unik uppresningsfunktion.

Bure Rise & Go är ett kostnads-effektivt gåbord med en patenterad upp-resningsfunktion. Tack vare den elektriska uppresningen är Bure Rise & Go ett gånghjälpmedel, ett uppresningshjälpmedel och ett förflyttningshjälpmedel i en och samma produkt. Rise & Go har eldriven breddning av benstativen. Den flexibla breddningen i kombination med en lägre höjd över benstativen ger en ökad flexibilitet oavsett patientsituation på sjukhus eller i hemmet.

Max brukarvikt: 150 kg

Bure Double 2.0



Gåbordet på bilden är utrustad med PU-armstödsdynor som tillval samt med 75 mm hjul.

Bure Space



Gåbordet på bilden är utrustad med PU-armstödsdynor som tillval samt med 75 mm hjul.

Gåbord med flexibelt breddmått.

Bure Double är utrustad med dubbel eldrift, dels med eldriven höj- och sänkning och dels med eldriven breddning av bottenstativet. Det flexibla breddmättet underlättar åtkomst för exempelvis en rullstol och för trängre passager som en dörrpost. Detta gör gåbordet praktiskt både i hem- och vårdmiljö.

- 1 Ergonomiska handtag**
Ergonomiskt utformade handtag som kan justeras steglöst i alla riktningar för bästa individuella anpassning.
- 2 Lättåtkomlig handkontroll**
Handkontrollen är placerad så att vårdarens alternativt brukarens båda händer enkelt kan nå den.
- 3 Eldriven uppresning**
Bure Double är en bra hjälp vid uppresning av patient eller brukare och minskar belastningen för personalen.

- 4 Öppen konstruktion**
Ger samma stabilitet som ett vanligt gåbord men större manöverutrymme.
- 5 Tål vatten**
Alla eldetaljer på Bure Double har kapslingsklass IP 65 och kan därmed användas även i våta utrymmen.
- 6 Smidig steglös justering**
Med eldriven höj- och sänkning blir det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd.
- 7 Bottenstativ med elbreddning**
Elbreddningen gör det enkelt att skjuta gåbordet ända fram till brukaren, oberoende av rullstolsbredd, sängkonstruktion eller stolsbredd. Med benen i det yttre läget blir gåbordet extra stabilt.

- 8 Stabilt**
Gåbordet har anatomiska dynor som avlastar axlar, armar och nacke. Istället flyttas fokus till större muskelgrupper som ben- och bröst-muskulatur.
- 9 Hållbart**
Gåbordet har konstruerats för att hålla länge och användas i utmanande miljöer som vårdboenden och sjukhus.
- 10 Låsbara hjul**
Bure Double har individuellt låsbara hjul som standard på alla fyra hjul.

Gåbord med extra ben- och gångutrymme.

Bure Space är speciellt framtaget för situationer som kräver extra ben- och gångutrymme. Det extra benutrymmet möjliggör och underlättar uppresning för brukare med inskränkt rörlighet och stelhet. Bordet har en kraftig elmotor för eldriven höjjustering. Den optimala höjden för gåbordet kan därmed ställas in med patienten på plats och gåbordet kan också användas som uppresningshjälp.

- 1 Ergonomiska handtag**
Kan justeras steglöst i alla riktningar.
- 2 Lättåtkomlig handkontroll**
Handkontrollen är placerad så att vårdarens alternativt brukarens båda händer enkelt kan nå den.

- 3 Eldriven uppresning**
Bure Space kan fås med elmanövrerad eller hydraulisk höjjustering.
- 4 Öppen konstruktion**
Ger samma stabilitet som ett vanligt gåbord men större manöverutrymme.
- 5 Tål vatten**
Alla eldetaljer på Bure Space har kapslingsklass IP 65 och kan därmed användas även i våta utrymmen.
- 6 Obegränsat gångutrymme framåt**
Brukare med kontrakturer samt patienter med helbensgips kan ha ett rakt ben och ändå få bordet nära sig.
- 7 Mer utrymme**
Bure Space har ett bottenstativ med inermått på 67cm - mer plats för att komma intill en rullstol.

- 8 Smidig steglös justering**
Med eldriven höj och sänkning blir det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd.
- 9 Stabilt**
Gåbordet har anatomiska dynor som avlastar axlar, armar och nacke. Istället flyttas fokus till större muskelgrupper som ben- och bröst-muskulatur.
- 10 Broms och riktningsspärning**
Placeras så att brukaren själv kan nå den från sin gå-position.
- 11 Låg lägsta höjd**
Endast 85 cm (då 75mm hjul används).

Bure Standard/ Bure S

Elektrisk
Bure Standard och Bure S EL är utrustat med uppresningshjälp och går att ställa in i höjdlöd när patienten redan står på plats.

Gas
Bure Standard och Bure S GAS är ett gåbord som går att ställa in steglöst och snabbt, men utan uppresningshjälp med hjälp av elställdonet.

Manuell
Bure Standard och Bure S MANUELL är ett individuellt anpassningsbart gåbord som lämpar sig för situationer då man inte behöver ställa in det i höjdlöd särskilt ofta och inte är i behov av uppresningshjälp med hjälp av elställdonet.



Gåbordet på bilden är utrustat med PU-armstödsdynor som tillval samt med 125 mm hjul.

Bure Low



Gåbordet på bilden är utrustat med PU-armstödsdynor som tillval samt med 75 mm hjul.

Gåbord i tre utföranden - el, gas eller manuell.

Bure Standard och Bure S passar brukare med enklare och avgränsade behov. Gåbordet finns i tre utföranden: EL, GAS, och MANUELL. Bure S är en smalare version av Bure Standard och speciellt anpassad för trängre utrymmen. Samtliga modeller har en steglös höjdlöjuställning av underarmstöden.

- 1 Ergonomiska handtag**
Ergonomiskt utformade handtag som kan justeras steglöst i alla riktningar för bästa individuella anpassning.
- 2 Lättåtkomlig handkontroll**
Handkontrollen är placerad så att vårdarens alternativt brukarens båda händer enkelt kan nå den.

3 Eldriven uppresning
Bure Standard EL och Bure S är en utmärkt assistent vid uppresning av patient eller brukare.

4 Öppen konstruktion
Ger samma stabilitet som ett vanligt gåbord men större manöverutrymme.

5 Tål vatten
Alla detaljer på Bure Standard EL och Bure S EL har kapslingsklass IP 65 och kan därmed användas även i våta utrymmen.

6 Smidig steglös justering
Med eldriven höj och sänkning blir det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd.

7 Extra lämplig i hemmiljö
Bure S är extra lämplig i trånga miljöer så som hemma eller på vissa vårdboenden. Bure S kommer igenom de allra flesta dörröppningar som är 70 cm och bredare.

8 Stabilt
Gåbordet har anatomiska dynor som avlastar axlar, armar och nacke. Istället flyttas fokus till större muskelgrupper som ben- och bröst-muskulatur.

9 Hållbart
Gåbordet har konstruerats för att hålla länge och användas i utmanande miljöer som vårdboenden och sjukhus.

10 Broms och riktningsspärning
Som tillbehör finns det en- eller tvåhandsbroms som placeras så att brukaren själv kan nå den från sin gå-position. Handbromsen verkar på bakhjulen och i bromskittet ingår också riktningsspärrade hjul som underlättar för brukaren att hålla rätt kurs vid gång.

Gåbord i lägre modell för korta brukare.

Bure Low är en lägre modell för korta brukare. Modellen är densamma som Bure Std / S förutom att min/max höjd är betydligt lägre (70-95 cm med 75 mm hjul). Bure Low finns med två olika bottenstativ; Std och S, med el eller gas.

- 1 Ergonomiska handtag**
Ergonomiskt utformade handtag som kan justeras steglöst i alla riktningar för bästa individuella anpassning.
- 2 Lättåtkomlig handkontroll**
Handkontrollen är placerad så att vårdarens alternativt brukarens båda händer enkelt kan nå den.
- 3 Eldriven uppresning**
Bure Low är en bra hjälp vid uppresning av patient eller brukare och minskar belastningen för personalen.

4 Extra lämplig i hemmiljö
Bure S är extra lämplig i trånga miljöer så som hemma eller på vissa vårdboenden. Bure S kommer igenom de allra flesta dörröppningar som är 70 cm och bredare.

5 Öppen konstruktion
Den öppna konstruktionen ger samma stabilitet som ett vanligt gåbord men större manöverutrymme.

6 Tål vatten
Alla eldetaljer på Bure Low har kapslingsklass IP 65 och kan därmed användas även i våta utrymmen.

7 Broms och riktningsspärning
Som tillbehör finns det en- eller tvåhandsbroms som placeras så att brukaren själv kan nå den från sin gåposition. Handbromsen verkar på bakhjulen och i bromskittet ingår också riktningsspärrade hjul som underlättar för brukaren att hålla rätt kurs vid gång.

8 Smidig steglös justering
Med eldriven höj och sänkning blir det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd.

9 Stabilt
Gåbordet har anatomiska dynor som avlastar axlar, armar och nacke. Istället flyttas fokus till större muskelgrupper som ben- och bröst-muskulatur.

10 Hållbart
Gåbordet har konstruerats för att hålla länge och användas i utmanande miljöer som vårdboenden och sjukhus.

Bure XL



Gåbordet på bilden är utrustad med PU-armstödsdynor som tillval samt med 125 mm hjul.

Gåbord för större och tyngre patienter.

Bure XL är framtagen för större och tyngre patienter och har därför extra plats och styrka. Eftersom det vid vård och omvårdnad av tyngre patienter är viktigt med kraftfulla hjälpmedel levereras Bure XL alltid med eldrift.

1 Ergonomiska handtag

Ergonomiskt utformade handtag som kan justeras steglöst i alla riktningar för bästa individuella anpassning.

2 Lättåtkomlig handkontroll

Handkontrollen är placerad så att vårdarens alternativt brukarens båda händer enkelt kan nå den.

3 Eldriven uppresning

Bure XL är en bra hjälp vid uppresning av patient eller brukare och minskar belastningen för personalen.

4 Öppen konstruktion

Ger samma stabilitet som ett vanligt gåbord men större manöverutrymme.

5 Tål vatten

Alla eldetaljer på Bure XL har kapslingsklass IP 65 och kan därmed användas även i våta utrymmen.

6 Smidig steglös justering

Med eldriven höj- och sänkning blir det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd.

7 Sjukhus- och vårdmiljöer

På grund av sin storlek lämpar sig Bure XL bäst i sjukhus- och vårdmiljöer.

8 Designad för tyngd

Bure XL är framtagen för att ge ett bra stöd åt tyngre patienter på upp till 240 kg. Gåbordet är också breddat för att ge god stabilitet och bra utrymme. Innermåttet är på 44-62 cm.

9 Stabilt

Gåbordet har anatomiska dynor som avlastar axlar, armar och nacke. Istället flyttas fokus till större muskelgrupper som ben- och bröst-muskulatur.

10 Hållbart

Gåbordet har konstruerats för att hålla länge och användas i utmanande miljöer som vårdboenden och sjukhus.

11 Låsningsbara hjul

Bure XL har individuellt låsbara hjul som standard på alla fyra hjul.

Rise & Go DB™



Gåbordet på bilden är utrustad med PU-armstödsdynor som tillval samt med 75 mm hjul.

Gåbord med unik uppresningsfunktion.

Bure Rise & Go är ett kostnadseffektivt gåbord med en patenterad uppresningsfunktion. Tack vare den elektriska uppresningen är Bure Rise & Go ett gånghjälpmedel, ett uppresningshjälpmedel och ett förflyttningshjälpmedel i en och samma produkt.

Rise & Go har eldriven breddning av benstativen. Den flexibla breddningen i kombination med en lägre höjd över benstativen ger en ökad flexibilitet oavsett patientsituation på sjukhus eller i hemmet.

1 Ergonomiska handtag

Ergonomiskt utformade handtag som kan justeras steglöst i alla riktningar för bästa individuella anpassning.

2 Lättåtkomlig handkontroll

Handkontrollen är placerad så att vårdarens alternativt brukarens båda händer enkelt kan nå den.

3 Eldriven uppresning

Bure Rise & Go är ett unikt hjälpmedel vid uppresning av patient eller brukare.

4 Bottenstativ med elbreddning

Elbreddningen gör det enkelt att skjuta gåbordet ända fram till brukaren, oberoende av rullstolsbredd, sängkonstruktion eller stolsbredd. Detta underlättar också för personalen vid uppresning. Med benen i det yttre läget blir gåbordet extra stabilt och kan med fördel användas av brukaren själv. Detta underlättar också för patienter som behöver extra gångutrymme.

5 Tål vatten

Alla eldetaljer på Bure Rise & Go har kapslingsklass IP 65 och kan därmed användas även i våta utrymmen.

6 Smidig steglös justering

Med eldriven höj- och sänkning blir det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd.

7 Utfällbara armstöd

De anatomiskt utformade armstöden på Bure Rise & Go är utfällbara för att brukaren på ett enkelt sätt ska nå handtagen vid uppresning.

8 Låg höjd

Den låga höjden över golvet minimerar problem med att komma intill brukaren exempelvis vid sängsittande.

9 Stabilt

Gåbordet har anatomiska dynor som avlastar axlar, armar och nacke. Istället flyttas fokus till större muskelgrupper som ben- och bröst-muskulatur.

10 Hållbart

Gåbordet har konstruerats för att hålla länge och användas i utmanande miljöer som vårdboenden och sjukhus.

11 Låsningsbara hjul

Bure Rise & Go har fyra individuellt låsbara hjul som standard.

Rise & Go DB™

Gåbord med uppresning.

Bure Rise & Go är ett kostnadseffektivt gåbord som förfinats med en patenterad uppresningsfunktion. Tack var den elektriska uppresningen är Bure Rise & Go ett gånghjälpmedel, ett uppresningshjälpmedel och ett förflyttningshjälpmedel i en och samma produkt. Rise & Go har eldriven breddning av bottenstativet. Den flexibla breddningen i kombination med en lägre höjd över bottenstativet ger en ökad flexibilitet oavsett patientsituation på sjukhus eller i hemmet.



1 Selen sätts på plats över ryggslut och stuss. Remmarna justeras och underbensstöden ställs in i rätt position.



2 Patienten håller händerna på handtagen och den eldrivna uppresningen påbörjas. Med hjälp av den unika selen och gåbordets vertikala lyftfunktion följer patienten ett naturligt rörelsemönster.



3 Efter uppresningen vinklas underbensstöden bort och patienten kan direkt börja gå med gåbordet som stöd. Alternativt placerar patienten fötterna på en ståplatta och är efter uppresningen redo att förflyttas.

Unik uppresningshjälp.

Bure Rise & Go sparar både tid, plats och pengar. Här får man ett gånghjälpmedel, ett uppresningshjälpmedel och ett förflyttningshjälpmedel i en och samma produkt vilket gör konceptet mycket kostnadseffektivt.

Bure Rise & Go skapar möjlighet till en bättre arbetsergonomi. Med den intelligenta uppresningshjälpmedlen skapas en trygg, säker och naturlig uppresning som inte sliter på vårdpersonalens ryggar. Produkten består av ett gåbord med tillhörande sele och fastsättningsremmar. Selen finns i olika storlekar (S, M, L) och är delad bak till vilket underlättar vid exempelvis toalettbesök.

Vid uppresning utnyttjas elmotorns lyftkraft och infästningen i gåbordet gör att avstånd mellan brukare och gåbord minskas i takt med att gåbordet höjs upp till stående. Sammantaget leder Bure Rise & Go till en minskad arbetsbelastning och är en investering i personalens hälsa och brukarens rehabilitering.

Rise & Go finns även med eldriven breddning av bottenstativet. Den flexibla breddningen i kombination med en lägre höjd över bottenstativet ger en ökad flexibilitet oavsett patientsituation på sjukhus eller i hemmet.



Tillbehör

för gångträning och uppresningshjälp.



Gåträningsssele

Gåträningsssele som fästs på 4 punkter. Ger ett bra stöd vid gåträning och bra säkerhet mot fall. Passar till manuella, gas och eldrivna gåbord. Max brukarvikt = 150 kg.



Gåträningsskit/Multi

Gåträningsskit för uppresningssele MULTI är ett tillbehör som används för ökad säkerhet vid gåträning med Bure Rise & Go. Produktens båda ljumskestroppar och fastsättningskrokar minimerar risken för fall om brukare drabbas av yrsel eller motsvarande.

Underbensstöd

För att ytterligare utöka/förbättra användningen av våra standardgåbord så finns nu ett underbensstöd som kan användas vid mobilisering/uppresning. Tillbehöret kan användas till samtliga gåbord förutom Rise&Go (DB) och Bure XL. Pga tipprisk beroende på gåbordsmodell och patient så rekommenderar vi att tillbehöret enbart används i kombination med ståplatta och/eller Trampprör/Tippskydd.



Tillbehör



Droppstång inkl. fäste



Sidostöd/Sidostöd PU



Ståplatta kort/lång

Ståplatta kort/lång,
länkhjul (VSW)

Handbromstillsats DB

Handbromstillsats
standardHjul med broms 75,
100, 125mmHjul med riktningsspärr
75, 100, 125mm

Underbensstöd



Mjukorg



Tubhållare inkl. fäste



Armstödsdynor, PU



Körhandtag



Hälband till ståplatta



Gåträningssle STD

Du vet väl att:



Bure DB har en låg markfrigång vilket gör det betydligt enklare att komma in under säng och därigenom komma nära brukaren. Särskilt låg blir Bure DB i kombination med 75mm hjul.



Om du väljer ett gåbord med elektriskt ställbar breddning så väljer du också en ökad flexibilitet. Du kommer nära patienten oavsett bredd på rullstol, stol. Lägg också märke till att ståplattan i de flesta fall också får plats mellan rullstolens främre hjul.



Ståplattan är ett utmärkt tillbehör i de fall man önskar utnyttja gåbordet för mobilisering/uppresning eller förflyttning. Ståplattan är tillräckligt smal för att kunna användas med de flesta rullstolar.

Tillbehör

Dropphållare med fäste

Skapar goda möjligheter för patienten att röra sig fritt i rummet, på avdelningen eller i hemmet. Levereras tillsammans med fäste.

PU-dynor

PU-dynor kan väljas vid order alternativt efterbeställas. Dessa dynor har inga perforeringar eller smutssamlade kanter. Ett bra alternativ för de som ställer höga krav på Hygiene Management. Observera att yttermått med PU-dynor ökar med +5 cm.

Mjukorg med fäste

Korg med fäste har plats för det allra viktigaste.



Underbensstöd

Underbensstödet underlättar mobilisering/uppresning. Bör dock användas med ståplatta och trampor alt tipskydd pga tipprisk bakåt.

Riktningsspärrat hjul

125mm
100mm
75mm

Hjul med broms

125mm
100mm
75mm

Handbromstillsats, en eller två bromsar

Kompletterar gåbordet med handbroms så att brukaren vid gångträning själv kan bromsa bordets rörelse. Riktningsspärrade hjul ingår för extra säkerhet/hjälp. Enhandsbroms finns både som vänster och höger. Då Handbromstillsats är monterad så ökar bottenstativets bredd med +2 cm.

Handkontroll/PLUS

Handkontroll/PLUS med funktioner såsom multipla hastigheter och service/batteriindikator i handkontrollen ingår som standard.

Ställbart sidostöd

Förhindrar att armarna glider av armstödsdynorna. Justeras steglöst längs med gåbordets sida vilket stabiliserar gången ytterligare. Sidostödet finns även i PU-utförande.

Syrgastubshållare med fäste

Gör att patienten inte längre behöver vara låst vid sängen.



Ståplatta

Ståplattan är ett utmärkt komplement i de fall då man önskar att använda gåbordet för mobilisering/förflyttning. Finns i en kort och lång version.

Lathund

Benämning	Art#	Bure Std/S	Bure Low	Bure Rise & Go	Bure Space	Bure DB 2.0	Bure XL
Armstödsdynor PU, Std/Low/DB/Space/XL	57-361-PAR	x	x		x	x	x
Armstödsdynor (Std) Skum, Std/Low/DB/Space	56-366-PAR	x				x	
Armstödsdynor/Knästödsdyna PU, Rise & Go (DB)	57-372			x			
Droppställning inkl. hållare	56-338	x	x	x	x	x	x
Gaskolvsats inkl. htg, Low	56-330-LOW		x				
Gaskolvsats inkl. htg, Std	56-330	x			x		
Körhandtag	57-391			x			
Hjul med broms 75mm	57-051	x	x	x	x	x	x
Hjul med broms 100mm	56-358	x	x	x	x	x	x
Hjul med broms 125mm	56-361	x	x	x	x	x	x
Hjul med riktningsspärr 75mm	57-043	x	x	x	x	x	x
Hjul med riktningsspärr 100mm	56-355	x	x	x	x	x	x
Hjul med riktningsspärr 125mm	56-359	x	x	x	x	x	x
Hälband/ståplatta	58-328-1	x	x	x	x	x	
Underbensstöd	56-352	x	x		x	x	
Manuell broms, 2 hands, Std/Low/Space/XL	56-339-1-0	x	x		x		x
Manuell broms, 1 hands, Std/Low/Space/XL	56-339-1-1	x	x		x		x
Manuell broms, 2 hands, DB 2.0	56-339-2-0					x	
Manuell broms, 1 hands, DB 2,0	56-339-2-1					x	
Manuell broms, 2 hands, Rise & Go DB	56-339-4-0			x			
Manuell broms, 1 hands, Rise & Go DB	56-339-4-1			x			
Mjukorg inkl. fäste	56-389	x	x			x	
Handkontroll PLUS inkl. hållare, Std/Low/Space	58-411-X1	x	x		x		
Handkontroll PLUS inkl. hållare, DB/Rise & Go DB	58-411-X2			x		x	
Sidostöd	56-337	x	x	x	x	x	x
Sidostöd, PU	56-337-PU	x	x	x	x	x	x
Ståplatta kort, STD	56-333-STD	x	x				
Ståplatta kort, STD	56-333/SW-STD	x	x				
Ståplatta kort, DB	56-333-DB			x		x	
Ståplatta kort, DB	56-333/SW-DB			x		x	
Ståplatta kort, SPACE	56-333-SPACE				x		
Ståplatta kort, SPACE	56-333/SW-SPACE				x		
Ståplatta lång, STD	56-383-STD	x	x				
Ståplatta lång, STD	56-383/SW-STD	x	x				
Ståplatta lång, DB	56-383-DB			x		x	
Ståplatta lång, DB	56-383/SW-DB			x		x	
Ståplatta lång, SPACE	56-383-SPACE				x		
Ståplatta lång, SPACE	56-333/SW-SPACE				x		
Tubhållare inkl. fäste	56-336	x	x	x	x	x	x
Gåträningssele STD	56-388	x	x	x	x	x	
Gåträningskit Multi, Rise & Go (DB)	56-388-KIT			x			
Uppresningssele MULTI med fästband (S, M, L, XL), Rise & Go (DB)	56-384-MULTI-S/M/L/XL			x			

Tekniska specifikationer

Bure Double 2.0

Art. Nr.	Produkt	Benbredd yttermått	Maxbrukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/Innermått
56-303L	Bure Double 2.0 EL, 125mm hjul	64-95cm	150kg	87cm	90-130cm	33-50cm
56-303L/75	Bure Double 2.0 EL, 75mm hjul	64-95cm	150kg	87cm	85-125cm	33-50cm

Bure Space

Art. Nr.	Produkt	Benbredd yttermått	Maxbrukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/Innermått
56-304L	Bure Space EL, 125mm hjul	78cm	150kg	79cm	90-130cm	33-50cm
56-304L/75	Bure Space EL, 75mm hjul	78cm	150kg	79cm	85-125cm	33-50cm
56-307	Bure Space Gas, 125mm hjul	78cm	150kg	79cm	90-130cm	33-50cm
56-307/75	Bure Space Gas, 75mm hjul	78cm	150kg	79cm	85-125cm	33-50cm

Bure Standard/S

Art. Nr.	Produkt	Benbredd yttermått	Maxbrukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/Innermått
56-312L	Bure Standard EL, 125mm hjul	78cm	150kg	80cm	91-131cm	33-50cm
56-312L/75	Bure Standard EL, 75mm hjul	78cm	150kg	80cm	86-126cm	33-50cm
56-311	Bure Standard Gas Bure, 125mm hjul	78cm	150kg	80cm	91-131cm	33-50cm
56-311/75	Bure Standard Gas Bure, 75mm hjul	78cm	150kg	80cm	86-126cm	33-50cm
56-310	Standard Manuell, 125mm hjul	78cm	150kg	80cm	91-131cm	33-50cm
56-310/75	Standard Manuell, 75mm hjul	78cm	150kg	80cm	86-126cm	29-37cm
56-302L	Bure S EL, 125mm hjul	66cm	150kg	79cm	90-131cm	29-37cm
56-302L/75	Bure S EL, 75mm hjul	66cm	150kg	79cm	86-126cm	29-37cm
56-301	Bure S Gas, 125mm hjul	66cm	150kg	79cm	90-131cm	29-37cm
56-301/75	Bure S Gas, 75mm hjul	66cm	150kg	79cm	86-126cm	29-37cm
56-300	Bure S Manuell, 125mm hjul	66cm	150kg	79cm	90-131cm	29-37cm
56-300/75	Bure S Manuell, 75mm hjul	66cm	150kg	79cm	86-126cm	29-37cm

Bure Low

Art. Nr.	Produkt	Benbredd yttermått	Maxbrukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/Innermått
56-321L/75	Bure Low EL, 75mm hjul	78cm	150kg	80cm	72-95cm	33-50cm
56-321L-S/75	Bure Low S EL, 75mm hjul	66cm	150kg	79cm	72-95cm	29-37cm
56-322/75	Bure Low Gas, 75mm hjul	78cm	150kg	80cm	72-95cm	33-50cm
56-322-S/75	Bure Low S Gas, 75mm hjul	66cm	150kg	79cm	72-95cm	29-37cm

Bure XL

Art. Nr.	Produkt	Benbredd yttermått	Maxbrukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/Innermått
56-315	Bure XL EL, 125mm hjul	88cm	240kg	78cm	91-131cm	44-62cm
56-315/75	Bure XL EL, 75mm hjul	88cm	240kg	78cm	86-126cm	44-62cm


Bure Rise & Go

Art. Nr.	Produkt	Benbredd yttermått	Maxbrukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/Innermått
56-309L	Bure R&G DB EL, 125mm hjul	91-131cm	150kg	101cm	95-130cm	31-66cm
56-309L/75	Bure R&G DB EL, 75mm hjul	66-126cm	150kg	101cm	90-135cm	31-66cm

DHG har ett unikt koncept för enkla förflyttningar, marknadens bredaste och mest kompletta sortiment av smarta, lättanvända, funktionella och säkra hjälpmedel för alla typer av förflyttningsbehov.

Filosofin bakom vårt koncept fokuserar på att förebygga och minska antalet belastningsskador samtidigt som man ökar brukarnas upplevelse av oberoende och värdighet.

Genom en unik kombination av utbildning, träning och ett komplett sortiment av effektiva förflyttningshjälpmedel erbjuder DHG förbättringar av både arbetsmiljön och vårdkvaliteten och skapar samtidigt möjligheter till betydande kostnadsbesparingar.

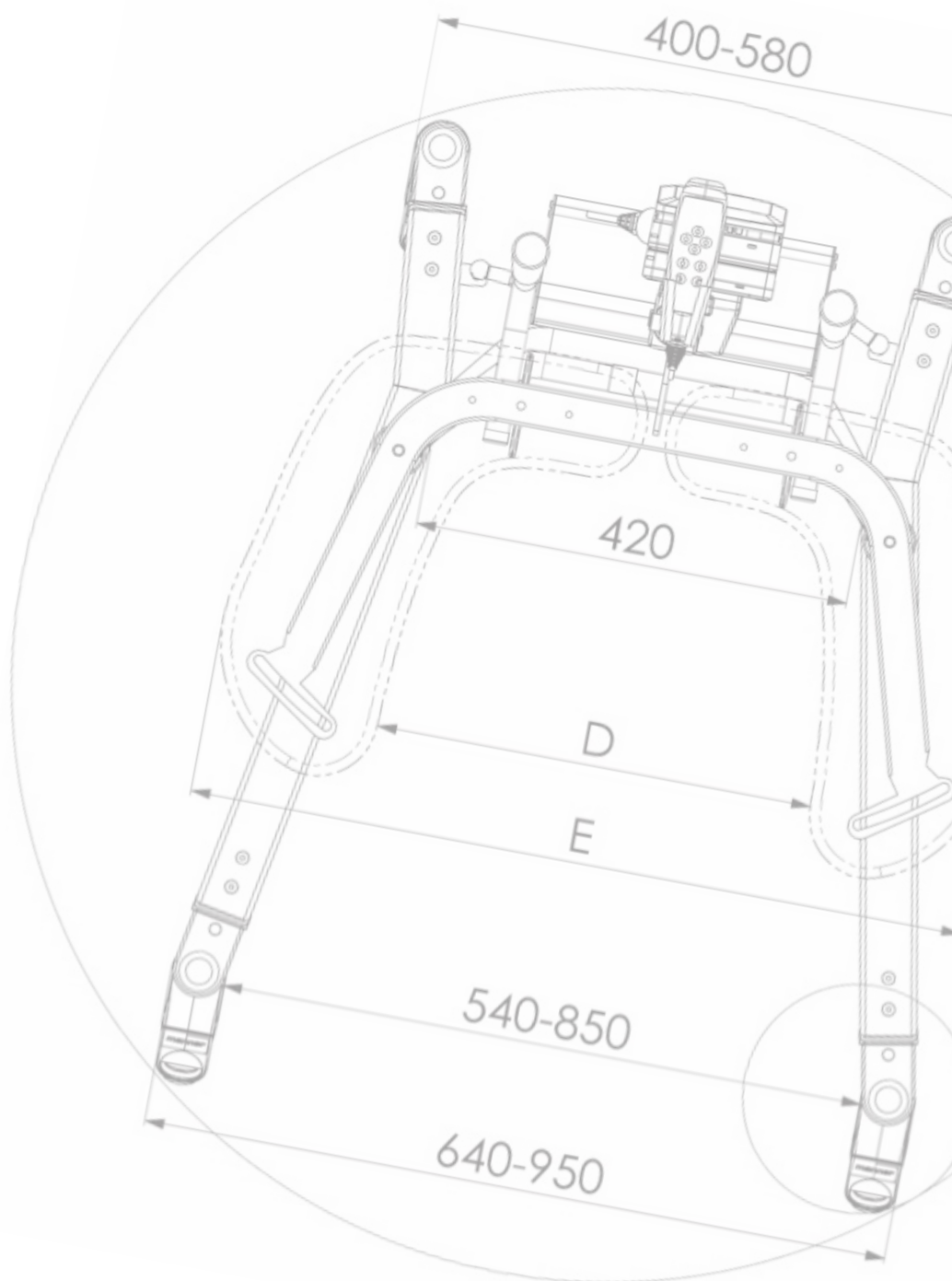

Moving Health Forward

Torshamnsgatan 35A
164 45 Kista
Tel: +46 557 62 200
info.se@directhealthcaregroup.com
www.dhg-healthcare.com.com