

Gebruiksaanwijzing – Nederlands

ReadySlide is gemaakt van ULF (Ultra Low Friction), het unieke glijdende materiaal van Direct Healthcare Group. Door de wrijving onder de gebruiker te verminderen, kunnen veilige en gemakkelijke verplaatsingen worden uitgevoerd met zeer weinig inspanning en zonder te hoeven tillen. Het is comfortabel voor de gebruiker en het spaart de rug en schouders van de verzorger.

ReadySlide is verkrijgbaar in verschillende maten. De grotere glijzeilen worden gebruikt voor verplaatsingen tussen bed en brancard of voor draaien in bed. De kleinere glijzeilen kunnen worden gebruikt voor draaien in bed, voor het herpositioneren hoger in bed of voor verplaatsingen tussen bed en rolstoel/toilet. De grootste maat is verkrijgbaar met en zonder handgrepen aan de zijkanten.




Functionele inspectie

Visuele inspectie

Controleer regelmatig de staat en werking van het hulpmiddel. Inspecteer het product altijd na het wassen. Controleer of de naden en het materiaal vrij zijn van schade. Controleer of de stof niet versleten of verkleurd is. Bij tekenen van slijtage moet het product worden weggegooid.

Mechanische belasting

Test de wrijving van het materiaal door het tegen het onderliggende oppervlak te drukken en heen en weer te rollen (1). Let op of het nog steeds even gemakkelijk glijdt als voorheen. Vergelijk indien mogelijk met een nieuw product. Trek aan de handvatten om de naden en sterkte te controleren (2).

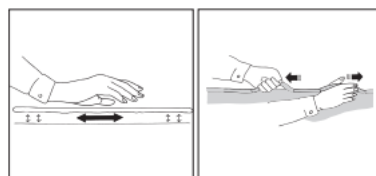

Lees altijd de handleiding

Lees altijd de handleidingen van alle hulpmiddelen die tijdens een transfer worden gebruikt.

Bewaar de handleiding op een plek die toegankelijk is voor gebruikers van het product. Laat de patiënt niet alleen tijdens een transfer/verplaatsing.

OPMERKING

Vergeet niet het product na gebruik te verwijderen, aangezien het een zeer laag-frictie oppervlak heeft.

OPMERKING! Vergrendel altijd de wielen van het bed, brancard en rolstoel.



Plaatsing/verwijdering

Om ReadySlide onder de patiënt te plaatsen, kantel de patiënt in de tegenovergestelde richting. Gebruik het laken om de patiënt te kantelen. Schuif ReadySlide zo ver mogelijk onder de patiënt (1). Om te verwijderen, trek aan het onderste uiteinde van ReadySlide (2).



Draaien

Plaats ReadySlide en draai de patiënt vervolgens door hem/haar op één zij te rollen of door aan het laken te trekken. De patiënt glijdt gemakkelijk over ReadySlide. Verwijder ReadySlide.



Van bed naar brancard

Plaats de ReadySlide, schuif het brancard naast het bed. Vergeet niet de wielen te vergrendelen. Duw of trek de patiënt naar het brancard. Verwijder de ReadySlide.



Hoger in bed

Plaats ReadySlide onder de schouders van de patiënt. Vraag de patiënt om de knieën te buigen, het zitvlak op te tillen en omhoog te duwen. Werkt ook goed met hulp van een verzorger. Verwijder ReadySlide.



Overplaatsing bed/rolstoel/toilet

Vergrendel de wielen van de rolstoel en plaats ReadySlide onder de stoel van de patiënt, zodat het zowel op het bed als op de rolstoel ligt. Vraag de patiënt de armleuningen vast te houden en, met gebruik van zijn of haar eigen gewicht, over te schuiven naar de rolstoel. Hef de voeten van de grond met behulp van een voetenbankje om wrijving onder de dijen te verminderen. Deze transfer kan ook door de zorgverlener worden uitgevoerd met behulp van een zorgband voor extra veiligheid. Verwijder ReadySlide na het voltooien van de transfer.



Voor transfers tussen rolstoel en toilet, plaats ReadySlide zoals hierboven beschreven. Door zijn of haar gewicht te verplaatsen, schuift de patiënt over naar het toilet/rolstoel. Gebruik een zorgband als de patiënt de hulp van een zorgverlener nodig heeft. Een voetenbankje maakt de transfer ook gemakkelijker. Verwijder ReadySlide na het voltooien van de transfer.



Materiaal

Polyamide

Zorg voor het product

Lees het productetiket. Als desinfectie nodig is, moet 70% ethanol, 45% isopropanol of iets vergelijkbaars worden gebruikt.



Gebruik geen wasverzachter. Om de levensduur van het product te verlengen, vermijd drogen in de droger.









Neem contact op met uw lokale distributeur als u vragen heeft over het product en het gebruik ervan.

Zie www.directhealthcaregroup.com voor een volledige lijst van distributeurs. Zorg er altijd voor dat u de juiste versie van de handleiding heeft. De meest recente edities van handleidingen zijn beschikbaar voor downloaden op onze website, www.directhealthcaregroup.com.

Maat

Art. No	Maat cm/inch
11210	195 x 70 /76,7 x 27,5
11215	195 x 70 /76,7 x 27,5
11230	70 x 110 /27,5 x 43,3
11235	110 x 90 /43,3 x 35,4
11236	110 x 110 /43,3 x 43,3
11240	60 x 50 /23,6 x 19,7
11241	130 x 90 /51,2 x 35,4
11250	70 x 70 /27,5 x 27,5

Symbolen

	Dit product voldoet aan de eisen van de Verordening medische hulpmiddelen 2017/745		Visuele inspectie
	Medische hulpmiddel		Lees de handleiding
	Voorzichtig		Productcode
	Wettelijke fabrikant Direct Healthcare Group Sweden AB		Batchcode

Hoe een ernstig incident te melden

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden in verband met het apparaat, moet worden gemeld aan de fabrikant en de MHRA of een andere bevoegde autoriteit van het land waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

VK

info@directhealthcaregroup.com T: +44 (0) 800 043 0881 F: +44 (0) 845 459 9832

Overige:

info.export@directhealthcaregroup.com