



Glijlakens voor elke situatie

Inleiding

Glijlakensystemen

Glijlakensystemen zijn systemen die onder de zorgvrager blijven liggen en waar de zorgvrager op blijft slapen. Dit principe maakt dat glijlakensystemen grote voordelen kunnen bieden bij o.a. het draaien en positioneren in bed. Daarnaast zijn glijlakensystemen inzetbaar voor zorgvragers met verschillende activiteitsniveaus.

De voordelen van glijlakens op een rijtje:

- Vergroten zelfredzaamheid van de zorgvrager, doordat deze langer zelfstandig kan draaien in bed.
- Verlagen werkdruk zorggever omdat de zorgvrager langer zelfstandig kan blijven.
- Verlagen fysieke belasting indien een zorggever de zorgvrager dient te draaien of positioneren in bed.
- Tijdsbesparing zorggever omdat er niet gezocht hoeft te worden naar een hulpmiddel, het ligt namelijk al in bed onder de zorgvrager. Ook wordt er tijd bespaart omdat het glijmateriaal niet aangebracht en weggehaald hoeft te worden.
- Hoger comfort zorgvrager omdat het glijmateriaal niet aanbracht en weggehaald hoeft te worden doordat het al onder de zorgvrager aanwezig is.
- Voorkomt decubitus door minder wrijvingskrachten op de huid. Daarnaast is het makkelijker geworden om eenvoudig wisselglijgging toe te passen door de zorgvrager zelf of door de zorggever.

Handicare heeft een breed assortiment aan glijlakens voor diverse doelgroepen en gebruikersdoelen. Bent u op zoek naar een glijlakensysteem, maar weet u niet welke u moet kiezen? Graag maken wij het u makkelijker door in deze brochure de doelgroepen en gebruikersdoelen van de verschillende systemen op een rijtje te zetten.

Incontinentiematerialen

Ook onze incontinentiematerialen die in combinatie met onze glijlakensystemen gebruikt kunnen worden zijn opgenomen in deze brochure.



INHOUDSOPGAVE

OVERZICHTSTABEL	4
LAKENOVERZICHT	6
WENDYLETT	8
EASYROLL	12
URNSHEET MET MATRASCOVER	16
DECUBITUS INFO	19
TOPSHEET MET MATRASCOVER	20
INCOMATERIAAL	22

Voor elke situatie en elke zorgvrager

Met Handicare glijlakens is er altijd een passende oplossing voor handen. Afhankelijk van de mogelijkheden van de gebruiker kiest u het gewenste glijlaken.

In dit overzicht is het activiteitsniveau van de zorgvrager uitgedrukt in kleuren. Deze variëren van groen tot rood waarbij groen staat voor de meest actieve zorgvrager en rood voor de meest passieve of zware zorgvrager. Deze kleuren komen terug bij de productinformatie in deze brochure.




Actieve zorgvrager
Vergroten zelfredzaamheid

- Zorgvrager heeft te weinig kracht om zelfstandig te draaien.






WendyLett onder/ of hooslaken

- Met een glad satijnen oppervlak onder de zorgvrager kan hij/zij weer zelfstandig draaien.
- De katoenen randen zorgen ervoor dat de zorgvrager veilig op de rand van het bed kan zitten.


Optioneel

- te gebruiken met losse incosheets

Actieve zorgvrager
Heeft hulp nodig bij draaien in bed

- Zorgvrager heeft te weinig kracht om zelfstandig te draaien.
- Zorgvrager heeft voldoende kracht om met een beetje hulp te kunnen draaien.



WendyLett onder/ of hooslaken met 2Way steeklaken

- Met behulp van het 2Way-steeklaken op het WendyLett hoef/ of onderlaken kan de zorgvrager gedraaid worden.
- Zorgvrager glijdt niet onderuit, doordat het laken slechts in de richting van de pijlen glijdt.

Optioneel

- te gebruiken met losse incosheets




Passieve of zwaardere zorgvrager
Kan nog wel op de rand van het bed zitten

- Zorgvrager is te zwaar of geheel passief tijdens draaien en positioneren in bed.
- Zit voor transfer nog wel op de rand van het bed.
- Naast verplaatsen van de zorgvrager, is ook het omrollen van de zorgvrager een zware taak om uit te voeren. Maak in dit geval gebruik van de handvatten om te koppelen aan de tillift.




EasyRoll ProMove System

- Gebruik een steeklaken met glad materiaal aan de onderzijde dat in alle richtingen makkelijk glijdt.
- Het onderlaken is voorzien van een barrière, waardoor het steeklaken niet over de rand van het matras kan glijden en de zorgvrager veilig op de rand van het bed kan zitten.
- Voorzien van handvaten, koppelbaar aan tillift

Optioneel:

- voorzien van incomateriaal 

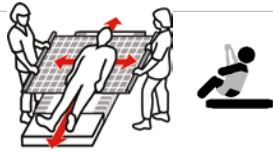

Passieve of zwaardere zorgvrager Kan niet zelf meer op de rand van het bed zitten



- Zorgvrager is te zwaar of geheel passief tijdens draaien en positioneren in bed.
- Zorgvrager zit NIET op de rand van het bed gedurende de transfers in en uit bed.
- Naast verplaatsen van de zorgvrager, kan ook het omrollen van de zorgvrager een zware taak zijn om uit te voeren. Maak in dit geval gebruik van de optionele handvatten om te koppelen aan de tillift.



WendyLett onder/ of hoeslaken met 4Way steeklaken

- Gebruik een steeklaken met glad satijn aan de onderzijde bovenop een WendyLett onder- of hoeslaken, waardoor de zorgvrager zowel zijdelinks als naar boven en onderen in bed verplaatst kan worden.

Optioneel:

- Voorzien van handvaten, koppelbaar aan tillift 
- voorzien van incomateriaal 



Passieve of zwaardere zorgvrager Makkelijker glijden en meer comfort


- Als de omstandigheden (gewicht / activiteitsniveau zorgvrager, zacht matras etc.) vraagt om een nog gladdere oplossing dan het WendyLett-systeem kan bieden
- Ook geschikt in situaties waar meer comfort en zachtere materialen nodig zijn, bijvoorbeeld in de palliatieve fase
- Naast verplaatsen van de zorgvrager, kan ook het omrollen van de zorgvrager een zware taak zijn om uit te voeren. Maak in dit geval gebruik van de optionele handvatten om te koppelen aan de tillift.



Matrascover i.c.m. TurnSheet

- De combinatie van een Matrascover en TurnSheet is gladder dan de combinatie tussen satijnen lakens, waardoor in zwaardere situaties dit een goede oplossing kan bieden.
- Door 1 of meerdere panelen van het Matrascover weg te klappen, kan voorkomen worden dat de zorgvrager onderuit glijdt.

Optioneel:

- Voorzien van handvaten, koppelbaar aan tillift 



Passieve of zwaardere zorgvrager Rolt terug tijdens verzorging van hygiëne


- Zorgvrager is passief en/of zwaar en daardoor moeilijk te verplaatsen en draaien in bed.
- Zorgvrager is moeilijk op de zij te rollen, waardoor de het steeklaken gekoppeld moet kunnen worden aan een tillift.
- De zorgvrager rolt bij verzorging van de hygiëne terug op de rug en is zwaar om op zijn/haar zij te houden.
- Uitermate geschikt voor bedlegerige en Incontinentie zorgvragers en zorgvragers die nerveus of dementerend zijn



TopSheet (i.c.m. Matrascover)


- Het TopSheet kan eenvoudig aan een tillift gekoppeld worden, waardoor de er weinig fysieke kracht nodig is om een zware zorgvrager te draaien.
- Is de zorgvrager eenmaal gedraaid op de zij, kan het onderste deel van het TopSheet losgemaakt worden, zodat de billen vrijkomen en hygiëne verzorgd kan worden. Het bovenste gedeelte blijft vast aan de lift zitten en voorkomt dat de zorgvrager terug rolt.

Optioneel:


- Voorzien van handvaten, koppelbaar aan tillift 
- voorzien van incomateriaal 

Overzicht van de lakens


Kies de juiste glijzone van het laken. Deze is afhankelijk van de behoefte.

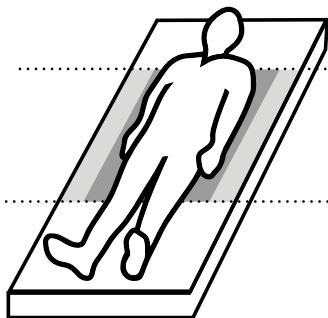

Glijzone Heup: Voor actievare of lichtere gebruikers die alleen glijfunctie ter hoogte van de heupen nodig hebben.

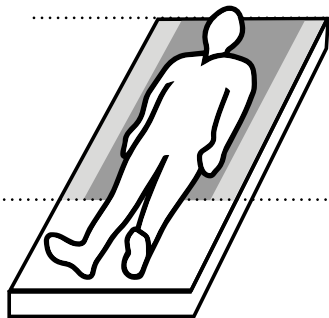


Glijzone Hoofd-Heup: Voor minder actieve of zwaardere gebruikers die glijfunctie nodig hebben vanaf heuphoogte.

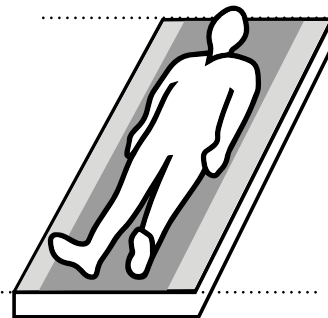

Glijzone Hoofd-Voeten: Voor passieve gebruikers die intensievere zorg nodig hebben waarbij glijfunctie onder het hele lichaam is gewenst.

Kies het juiste glijlaken afhankelijk van bedbreedte.

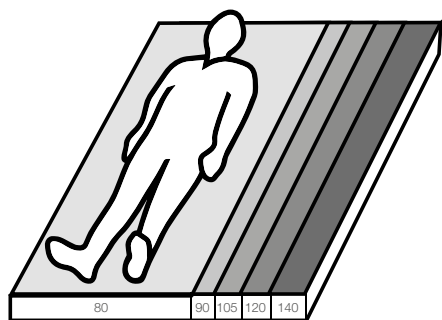

80 cm 31.5"	90 cm 35.4"	105 cm 41.3"	120 cm 47.2"	140 cm 55.1"
----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Bed breedte

De matrasafmetingen zijn belangrijk voor het optimaliseren van het glijoppervlak van het laken en het stimuleren van activiteit voor de gebruiker.

De glijoppervlakte van het glij-onder of hoeslaken mag niet breder zijn dan de breedte van het matras. Indien dat het geval is lopen gebruikers het risico om van het matras af te glijden.

Voor onze steeklakens en glij-steeklakens is er geen aanbevolen matrasbreedte.

Vind de juiste toepassing.



Incontinentie bescherming

Dit symbool geeft aan dat het betreffende laken een wasbaar incontinentielaken is die bovenop een normaal hoeslaken wordt geplaatst. Incontinentiebescherming is beschikbaar met- of zonder glijoppervlak aan de onderkant. Het materiaal is zeer absorberend en verdeelt vloeistoffen over een groter oppervlak.



Handvat

Sommige glij-steeklakens bevatten handvaten die gebruikt kunnen worden in combinatie met een tillift. Tevens zorgen deze voor gemakkelijkere positionering.



Elastisch


Hoeslakens met dit symbool hebben elastiek over de gehele lengte. Onderlakens hebben randen die worden ingestopt onder het matras.

Wasvoorschriften.


Hou rekening met de wasvoorschriften bij de keuze voor uw product.



Selecteer de juiste combinaties.

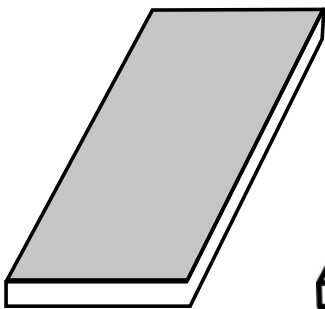


Hoeslaken met beschermlaag. Deze komt bovenop het matras.

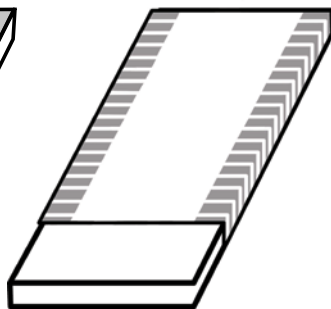

Glijlaken. Satijn in het midden en ruwer materiaal aan de zijken. De glijrichting is aangegeven in het patroon.



Glijlakens en steeklakens. Faciliteert draaien en reduceert warmte van het satijnen deel van het glijlaken. De glijrichting is aangegeven in het patroon.

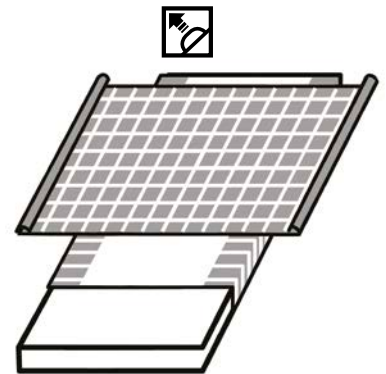

Glijlakens + glij-steeklakens. Beide lakens hebben glijoppervlakken op zowel boven- als onderzijde. De glijrichting is aangegeven in het patroon.


Hoe gebruik je de combinaties?



Voor patiënten die zelfstandig kunnen draaien voldoet een glijlaken dat het draaien vergemakkelijkt meestal al.



Een combinatie van een glijlaken en een steeklaken wordt meestal gebruikt bij een minder actieve gebruiker, of een gebruiker die meer zorg nodig heeft.

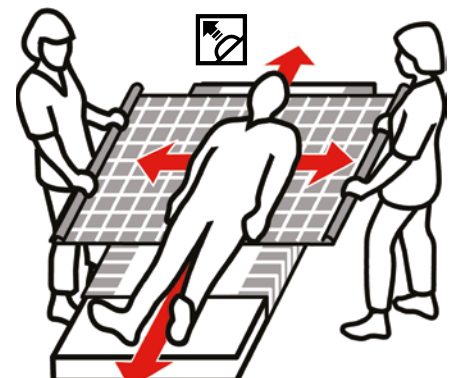

De combinatie van een glijlaken en een glij-steeklaken wordt gebruikt bij passieve/zware patiënten, of patiënten die meer zorg nodig hebben. Deze combinatie wordt vaak gebruikt i.c.m. een lift, bij intieme hygiëne en bij het vastmaken van een harnas.

Vind het juiste laken.

Voorbeeld uit productlijst:

Art. Nr.	Product naam	Past op matras (cm/inch)	Lengte (cm/inch)	Breedte (cm/inch)	Glij oppervlak (cm/inch)	Kleur	Functionaliteit	Overig
1661	WendyLett	120/47.2	120/47.2	120/47.2	95/37.4	Grijs/Wit Gestreept	Glijlaken	Possible info

Productnaam
 Productnummer
 Het laken is geschikt voor deze bedbreedte
 Dimensies (lengte + breedte)
 Zone/Glijoppervlak
 Productkleur
 Product functie
 Overige info
 Speciale eigenschappen
 Laken + Glijzone op het matras
 Herhaling van artikelnummer. Art. Nr. 1661

WendyLett

WendyLett wordt als een normaal onder- of hoedlaken in het bed gelegd, met de gladde baan in het midden. Het gladde satijn maakt het draaien en zijwaarts verplaatsen van de zorgvrager mogelijk met minimale inspanning. De speciaal geweven katoenen randen fungeren als anti-glijmateriaal aan de zijkant van het laken.

Voor zorgvragers die meer hulp nodig hebben, kan WendyLett gecombineerd worden met het WendyLett2Way steeklaken of het WendyLett4Way glij-steeklaken.

De wit/grijze strepen en ruitjespatronen geven aan in welke richting het laken kan glijden en dus hoe het laken gebruikt kan worden. Het ontwerp maakt de lakens tevens gemakkelijk te herkennen in de was.

De WendyLett lakens zijn gemaakt van polyester, katoen en satijn. De lakens zijn sterk, slijtvast en kunnen worden gewassen tot 90° C. In de droger kunnen ze op lage temperatuur worden gedroogd.

Onze WendyLett producten

- **Dun, hoge kwaliteit ademende stof**
- **Geschikt voor gebruikers die gevaar lopen op ontwikkelen van decubitus**
- **Duidelijk patroon toont glijrichting**



Het **WendyLett** glij-onderlaken is geschikt voor mensen die moeite hebben met **zelfstandig draaien in bed**, maar wel het grootste deel van de dag uit bed zijn. Het onderlaken is gemaakt van glad satijn in het midden en heeft een veilige anti-sliprand aan beide zijden van het matras. Door te kiezen voor een onderlaken dat niet helemaal doorloopt tot aan het voeteneind, hebben mensen meer grip bij het voeteneinde waardoor zij hier beter kunnen afzetten met de voeten. Dit type onderlaken wordt op zijn plaats gehouden door de randen van het laken goed in te stoppen onder het matras, vandaar dat de WendyLett onderlakens breed zijn uitgevoerd. Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.

Het **WendyLett** glij-hoeslaken is voorzien van een elastieke band en is geschikt voor mensen die moeite hebben met zelfstandig draaien in bed en een groter deel van de dag in bed liggen. Het is gemaakt van glad satijn in het midden en heeft een veilige anti-sliprand aan de zijkant van het matras. Het gladde satijn geeft nauwelijks wrijving waardoor er minder kans is op doorligplekken, ook op de hielen. Geschikt voor matrassen van maximaal 20 cm dik. Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.



Product overzicht WendyLett

Art. Nr.	Productnaam	Past op matras (cm/inch)	Lengte (cm/inch)	Breedte (cm/inch)	Glij oppervlak (cm/inch)	Kleur	Functionaliteit	Overig	Laken	Laken lengte	Glij zone
1629	WendyLett	80-90/31.5-35.4	100/39.4	200/78.7	60/23.6	Grijs/wit gestreept	Glijlaken		Art. Nr. 1629		
1634	WendyLett	80-90/31.5-35.4	140/55.1	200/78.7	60/23.6	Grijs/wit gestreept	Glijlaken		Art. Nr. 1634		
1641	WendyLett	90/36	200/78.7	90/36	70/27.6	Grijs/wit gestreept	Glijlaken		Art. Nr. 1641		
1639	WendyLett	105/41.3	200/78.7	200/78.7	70/27.6	Grijs/wit gestreept	Glijlaken		Art. Nr. 1639		
1651	WendyLett	105/41.3	200/78.7	105/41.3	80/31.5	Grijs/wit gestreept	Glijlaken		Art. Nr. 1651		
1667	WendyLett	120/47.2	100/39.4	220/86.6	100/39.4	Grijs/wit gestreept	Glijlaken		Art. Nr. 1667		
1668	WendyLett	120/47.2	140/55.1	220/86.6	100/39.4	Grijs/wit gestreept	Glijlaken		Art. Nr. 1668		
1669	WendyLett	120/47.2	200/78.7	220/86.6	100/39.4	Grijs/wit gestreept	Glijlaken		Art. Nr. 1669		
1661	WendyLett	120/47.2	200/78.7	120/47.2	95/37.4	Grijs/wit gestreept	Glijlaken		Art. Nr. 1661		
1671	WendyLett	140/55.1	200/78.7	140/55.1	110/43.3	Grijs/wit gestreept	Glijlaken		Art. Nr. 1671		
1681	WendyLett	-	200/78.7	365/143.7	70/27.6	Grijs/wit gestreept	Glijlaken		Art. Nr. 1681		

Materiaal: Polyester, katoen, satijn
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een droogtrommel om levensduur te optimaliseren.



CE Class 1 medical device



Dit opleglaken is gemaakt van speciaal geweven katoen. Het glijdt alleen in de richting van de strepen. U kunt het gebruiken om met het hoofdeinde omhoog in bed te zitten zonder naar beneden te schuiven en om gemakkelijker te draaien in bed, eventueel met hulp. Het WendyLett2way opleglaken dient gebruikt te worden bovenop het WendyLett glij-onderlaken of hoeslaken. Zorg ervoor dat u met uw schouder en/of uw heup op het steeklaken ligt. Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.



Product overzicht WendyLett2Way

Art. Nr.	Productnaam	Past op matras (cm/inch)	Lengte (cm/inch)	Breedte (cm/inch)	Glij oppervlak (cm/inch)	Kleur	Functionaliteit	Overig
1620	WendyLett2Way	-	90/35.4	180/70.9	-	Wit	Steeklaken	Art. Nr. 1620
1631	WendyLett2Way	-	100/39.4	200/78.7	-	Grijs/wit gestreept	Steeklaken	Art. Nr. 1631
1636	WendyLett2Way	-	140/55.1	200/78.7	-	Grijs/wit gestreept	Steeklaken	Art. Nr. 1636

Materiaal: Polyester, katoen, satijn
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een droogtrommel om levensduur te optimaliseren.



CE Class 1 medical device

WendyLean - glij-kussensloop



Deze kussensloop heeft een onderkant van glad satijn. Dit glijdt gemakkelijk over het WendyLett hoeslaken waardoor het hoofd en de schouders van de gebruiker mee omhoog schuiven als u uw hoofdeinde omhoog zet. Hierdoor wordt de gebruiker minder in elkaar gedrukt wat het comfort ten goede komt. Helpt tevens decubitus op de oorschelp voorkomen. Maximaal gebruikersgewicht is 200 kg.

WendyLean

Art. Nr.	Productnaam	Past op matras (cm/inch)	Lengte (cm/inch)	Breedte (cm/inch)	Glij oppervlak (cm/inch)	Kleur	Functionaliteit
1680	WendyLean	-	60/2.4	50/1.97	-	Grijs/wit gestreept	kussensloop



Materiaal: Polyester, katoen, satijn
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een droogtrommel om levensduur te optimaliseren.



CE Class 1 medical device



Dit opleglaken heeft een satijnen onderkant waardoor er nog minder wrijving tussen de lakens ontstaat en het positioneren en **draaien** van **zwaardere en passieve zorgvragers** nog makkelijker gaat. Daarnaast glijdt de WendyLett in alle richtingen, waardoor de zorgvrager **zowel verticaal als horizontaal gepositioneerd kan worden in bed**. De bovenkant is gemaakt van speciaal geweven katoen wat comfortabel aanvoelt. Het WendyLett4way opleglaken dient gebruikt te worden bovenop het WendyLett onderlaken of hoeslaken. WendyLett4Way is tevens verkrijgbaar in uitvoeringen voorzien van handels en/of met incontinentiemateriaal, waarmee de zorgvrager ook gedraaid en gepositioneerd kan worden met behulp van een tillift.




Product overzicht WendyLett4Way

Art. Nr.	Productnaam	Past op matras (cm/ inch)	Lengte (cm/ inch)	Breedte (cm/ inch)	Glij oppervlak (cm/ inch)	Kleur	Functionaliteit	Overig	Glijrichting
1657	WendyLett4Way	-	140/55.1	190/74.8	-	Grijs/Wit geblokt	Glij-steeklaken	2 x 7 handvat	Art. Nr. 1657
1637	WendyLett4Way	-	140/55.1	200/78.7	-	Grijs/Wit geblokt	Glij-steeklaken		Art. Nr. 1637
1647	WendyLett4Way	-	200/78.7	200/78.7	-	Grijs/Wit geblokt	Glij-steeklaken		Art. Nr. 1647
1648	WendyLett4Way, inco	-	75/29.5	200/78.7	-	Grijs/Wit geblokt	Glij-steeklaken	Extra stof op beide zijden	Art. Nr. 1648
1649	WendyLett4Way, inco	-	140/55.1	120/47.2	-	Grijs	Glij-steeklaken	2 x 7 handvat	Art. Nr. 1649
1652	WendyLett4Way	-	140/55.1	260/102.4	-	Grijs/Wit geblokt	Glij-steeklaken	Breder matras	Art. Nr. 1652

Materiaal: Polyester, katoen, satijn
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een droogtrommel om levensduur te optimaliseren.



CE Class 1 medical device

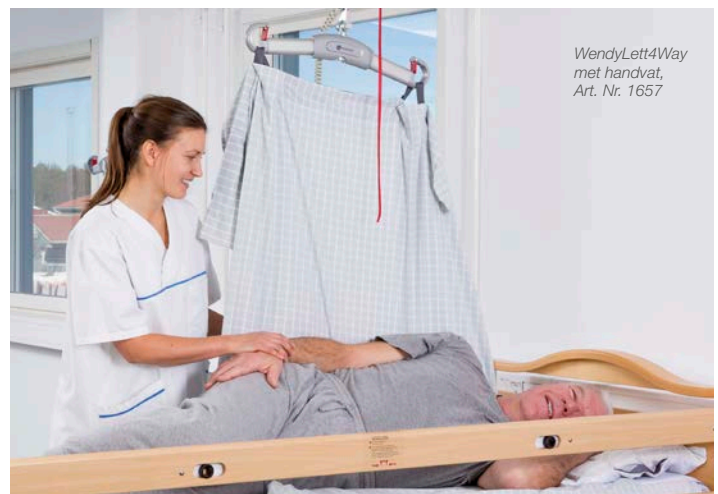

WendyLett4Way met handvat, Art. Nr. 1657

EasyRoll


Door slim gebruikt te maken van materiaaleigenschappen hebben de EasyRoll producten enkele unieke eigenschappen. Dit heeft voornamelijk betrekking op de anti-slip stroken aan de randen van de matrashoezen. Deze zijn stroever dan bij het WendyLett, waardoor zelfs een gebruiker op een combinatie van een EasyRoll onderlaken met een EasyRoll glij-steeklaken veilig op de rand van het bed kan zitten, zonder uit bed te glijden.





EasyRoll Anti-frictie elastisch glijlaken


Bij het EasyRoll anti-frictie glijlaken zijn de ruwe oppervlakken aan de zijkanten van het laken versterkt met siliconen om te voorkomen dat de gebruiker uit het bed glijdt. Het glijlaken wordt door middel van elastiek bevestigd rondom het matras. Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit en/of hevige pijn omdat het een goede ondersteuning biedt bij het draaien als de patiënt direct op het laken ligt. Als alternatief kan EasyRoll gebruikt worden i.c.m. met een Steeklaken of een Glij-steeklaken als hulp voor professionals in de gezondheidszorg bij het draaien of herpositionering van zorgvragers in bed.

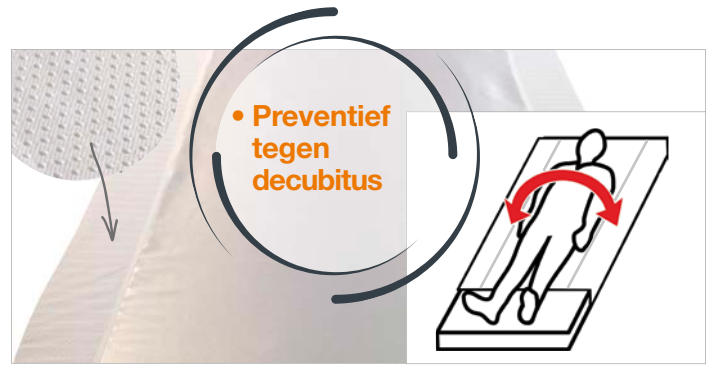

Product overzicht EasyRoll Glijlaken Anti-frictie

Art. Nr.	Productnaam	Past op matras (cm/inch)	Lengte (cm/inch)	Breedte (cm/inch)	Glij oppervlak (cm/inch)	Kleur	Functionaliteit	Overig
519031RAH	EasyRoll Anti-frictie	90/35.4	200/78.7	90/35.4	70/27.6	Wit	Glijlaken	Silicone remoppervlak Art. Nr. 4106

Materiaal: Zij secties: katoen/polyester. Glij oppervlak: duchesse (polyester)
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een droogtrommel om levensduur te optimaliseren.

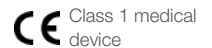

EasyRoll Kussensloop



EasyRoll kussensloop


EasyRoll kussensloop (4303) met glijoppervlak heeft een lage wrijving aan de zijkant die de mobiliteit in nek en schouders verhoogt. Ook zorgt deze voor lagere wrijving op de achterkant van het hoofd en oren. De EasyRoll kussensloop (4304) heeft aan de binnenzijde een beschermlaag om te beschermen tegen vuil en vocht. Ook werkt het als een barrière voor mijt. De hoes is versterkt doordat de kussensloop wordt afgesloten met een ritssluiting. Deze kussensloop heeft geen glijdende functie.



Product overzicht EasyRoll Kussensloop

Art. Nr.	Productnaam	Past op matras (cm/inch)	Lengte (cm/inch)	Breedte (cm/inch)	Glij oppervlak (cm/inch)	Kleur	Functionaliteit	Overig
4303	EasyRoll Kussensloop	-	50/19.7	60/23.6	-	Wit	Kussensloop	Lage-frictie glij oppervlak Art. Nr. 4303
4304	EasyRoll Kussensloop	-	50/19.7	60/23.6	-	Wit	Kussensloop	Beschermlaag Art. Nr. 4304

Materiaal: 4303: Glij oppervlak: Duchesse (100% Polyester). Rear: Katoen/polyester. **4304:** Beschermlaag: Polyurethaan. Oppervlak: Katoen.
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Wassen voor gebruik. Drogen op max. 70°C.

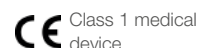



EasyRoll ProMove Systeem

Het doel van EasyRoll 4Way is om het te gebruiken voor zware patiënten die moeilijk te bewegen zijn of voor patiënten die vaak moeten worden gedraaid of veel in bed bewegen en regelmatig worden gecorrigeerd.

EasyRoll 4Way heeft unieke eigenschappen:

- *Maakt het verplaatsen van zware gebruikers eenvoudig in alle richtingen.*
- *Veilig voor uw patiënt met unieke afremzone.*
- *Beste ergonomie met gemakkelijk hanteerbare handvaten.*

EasyRoll 4Way bestaat uit EasyRoll glijonderlaken en een EasyRoll 4Way glij-steeklaken. Omdat beide delen zijn voorzien van glijmateriaal is het systeem zeer glad en kan de zorgvrager eenvoudig in alle richtingen in bed verplaatst worden. Het EasyRoll glijonderlaken en EasyRoll4Way glij-steeklaken mogen niet los van elkaar gebruikt worden. Het onderlaken is voorzien van blauwe remzones die het EasyRoll glij-steeklaken remmen aan de rand van het bed. Hierdoor kan de zorgvrager nog veilig op de rand van het bed zitten op het EasyRoll ProMove systeem, zonder van bed te glijden.

Het EasyRoll glij-steeklaken is voorzien van handvaten waardoor de zorgvrager eenvoudig is te verplaatsen binnen de grenzen van het bed. Ook is het steeklaken voorzien van insteekflappen, waarmee het glijlaken vastgelegd kan worden.



Product overzicht EasyRoll ProMove Systeem pakket

Art. Nr.	Productnaam	Past op matras (cm/inch)	Lengte (cm/inch)	Breedte (cm/inch)	Glij oppervlak (cm/inch)	Kleur	Functionaliteit	Overig
4111								Laken Laken Lengte Glij zone
4111T	EasyRoll 4way Glij-steeklaken	90/35.4	140/55.1	210/82.7	75/29.5	Wit/Blauw	Steeklaken	2 x 9 Handvat
4111B	EasyRoll 4way Glijlaken	90/35.4	140/55.1	200/78.7	60/23.6	Wit/Blauw	Glijlaken	
4111L								
4111LT	EasyRoll 4way Glij-steeklaken	90/35.4	200/78.7	210/82.7	75/29.5	Wit/Blauw	Steeklaken	2 x 9 Handvat
4111LB	EasyRoll 4way Glijlaken	90/35.4	140/55.1	215/84.6	75/29.5	Wit/Blauw	Glijlaken	

Materiaal: Bed oppervlak/zijsecties: 50% katoen, 50% polyester. Glij oppervlaks: duchesse (polyester)
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een droogtrommel om levensduur te optimaliseren.





EasyRoll Inco 4Way pakket

Het EasyRoll Inco 4Way pakket bestaat uit een speciaal hoeslaken en het EasyRoll Inco 4way steeklaken.

Het hoeslaken (4111B) heeft blauw en wit glijmateriaal en mag alleen in combinatie met een glij- steeklaken gebruikt worden. Het witte middenstuk is het actieve glijoppervlak. Het blauwe materiaal fungeert als rem, waardoor de client veilig op de rand van het bed kan plaatsnemen, zonder uit bed te glijden. Het hoeslaken mag alleen samen met het bovenop liggende glij steeklaken worden gebruikt, NIET als een los glij- hoeslaken.



Het EasyRoll Inco glij- steeklaken (10992 / 10992-5) is voorzien van een absorberende incontinentie laag met een beschermende laag die voorkomt dat het overige beddengoed nat wordt. De onderkant van het product is voorzien van glijmateriaal die makkelijke herpositionering van de patiënt in 4 richtingen mogelijk maakt. De handvaten zorgen ervoor dat het steeklaken makkelijk beet te pakken is. Door de zijsecties in te stoppen onder het matras is het mogelijk om het glijlaken vast te leggen.



• Ergonomisch handvat die de gebruiker niet stoort

Product overzicht EasyRoll 4Way pakket

Art. Nr.	Productnaam	Past op matras (cm/inch)	Lengte (cm/inch)	Breedte (cm/inch)	Glij oppervlak (cm/inch)	Kleur	Functionaliteit	Overig
10990								
10992	EasyRoll Inco 4way Glijlaken	-	120/47.2	200/78.7	-	Wit/Red	Glij-steeklaken	Art. Nr. 10992
4111B	EasyRoll 4way Glijlaken	90/35.4	140/55.1	200/78.7	60/23.6	Wit/Blauw	Glijlaken	Art. Nr. 4111B
10990-5								
10992-5	EasyRoll Inco 4way Glijlaken	-	140/55.1	200/78.7	-	Wit/Red	Glij-steeklaken	Art. Nr. 10992-5
4111B	EasyRoll 4way Glijlaken	90/35.4	140/55.1	200/78.7	60/23.6	Wit/Blauw	Glijlaken	Art. Nr. 4111B

*) 2 x 4 Handvat **) 2 x 5 Handvat

Materiaal: Bed oppervlak/zijsecties: 50% katoen, 50% polyester. Glij oppervlak: duchesse (polyester)
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een droogtrommel om levensduur te optimaliseren.



TurnSheet met MattressCover

De combinatie van de matrashoes 'MattressCover' met het rode steeklaken 'TurnSheet' is speciaal ontwikkeld voor de zwaardere zorgvrager die geholpen moet worden bij het draaien of positioneren in bed óf de zorgvrager die meer comfort nodig heeft. Het hoogwaardige ULF materiaal is gladder dan satijn, waardoor het verplaatsen in bed nog makkelijker gaat. De anti-slip vlakken op de MattressCover zijn stroever dan katoen, waardoor de zorgvrager beter in een bepaalde positie gepositioneerd kan worden.





TurnSheet is gemaakt van microfiber met een dunne vulling van polyester en ULF (Ultra Low Friction oftewel Extra Lage Weerstand), Handicare's eigen geavanceerde glijmateriaal. Deze glij-trek mat is speciaal bedoeld voor mensen die extra zorg nodig hebben en hulp nodig hebben bij draaien in bed. Hij wordt veel gebruikt voor mensen met een extreem gevoelige huid, erg zware mensen en in hospices. De mat voelt zo zacht aan als een slaapzak en helpt decubitus voorkomen. Gebruik TurnSheet op een Matress cover.



2060

TurnSheet (65 x 130) dekt de heupen en is een hulpmiddel voor iedereen die wil verplaatsen en draaien in bed of op de rand van het bed wil zitten. Belastbaar tot 200 kg



1592

TurnSheet 210x150 cm dekt het hoofd, schouders en de heupen, maar niet de voeten, daarmee biedt het de zorgvrager de mogelijkheid om met de voeten nog grip te krijgen en zo het verplaatsen te vergemakkelijken. Belastbaar tot 300 kg.



1589

TurnSheet, 200x240 cm is een extra brede uitvoering voor zware zorgvragers. Belastbaar tot 300 kg



1588

TurnSheet, 200x150 cm met riemen. Belastbaar tot 300 kg



1597

TurnSheet, 200x160 cm, uit twee delen. Het onderste deel is gemakkelijk te vervangen en te verschonen. Tevens is zorgvrager met behulp van een tillift te draaien. Door het onderste deel los te maken heeft de verzorgende de handen vrij om de persoonlijke hygiëne te verzorgen. Belastbaar tot 300 kg



Product overzicht TurnSheet

Art. Nr.	Productnaam	Past op matras (cm/inch)	Lengte (cm/inch)	Breedte (cm/inch)	Glij oppervlak (cm/inch)	Kleur	Functionaliteit	Overig
2060	TurnSheet 65x130 cm	-	65/25.6	130/51.2	-	Rood/grijs	Glij-trek mat	bedbreedte 90 cm
1592	TurnSheet 210x150 cm	-	210/82.6	150/59	-	Rood/grijs	Glij-trek mat	bedbreedte 90 cm
1589	TurnSheet 200x240 cm	-	200/78,7	240/94.5	-	Rood/grijs	Glij-trek mat	bedbreedte 105-120 cm
1588	TurnSheet 200x150 cm	-	200/78,7	150/59	-	Rood/grijs	Glij-trek mat	met riemen, bedbreedte 90 cm
1597	TurnSheet 200x160 cm	-	200/78,7	160/63	-	Rood/grijs	Glij-trek mat	2-delig met rits, bedbreedte 90 cm

Materiaal: Polyester microfiber, ULF


Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een droogtrommel om levensduur te optimaliseren.



CE Class 1 medical device

MattressCover t.b.v. TurnSheet

TurnSheet ligt bovenop een MattressCover met een zeer glad ULF (Ultra low Friction) materiaal in het midden en anti-slip vlakken aan de zijkanten. Hiermee wordt het risico dat de zorgvrager uit bed glijdt geminimaliseerd. De matrasbeschermer bevat twee of drie schuifpanelen die verwijderd/opgevouwen kunnen worden om zo een oppervlak met verhoogde weerstand te onthullen. De schuifpanelen bieden verbeterde positionering van de zorgvrager in bed. Door bijvoorbeeld het schuifpaneel onder de heupen te verwijderen/op te vouwen wordt voorkomen dat de zorgvrager wegglijdt wanneer hij/zij rechtop probeert te zitten in bed.

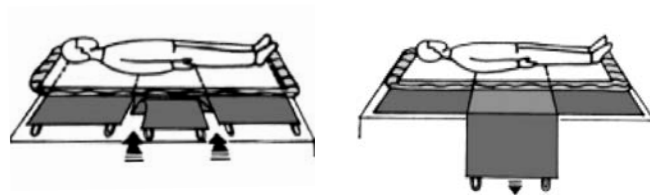

Product overzicht MattressCover

Art. Nr.	Productnaam	Lengte (cm/inch)	Bedbreedte (cm/inch)	Glijvlak breedte	Kleur	Geschikt voor Turnsheet	ULF
2081	Matrashoes	55/21,65	90/35,4	60/23,6	Grijs	2060, 2080	
1583	Matrashoes	140/55,1	90/35,4	40/15,7	Grijs	1592, 1580	
1593	Matrashoes	200/78,7	90/35,4	40/15,7	Grijs	1592, 1597, 1510, 1515, 1511 (TopSheet)	
1594	Matrashoes	200/78,7	105/41,3	65/25,6	Grijs	1592, 1589, 1510, 1515 (TopSheet)	
1595	Matrashoes	200/78,7	120/47,2	95/37,4	Grijs	1592, 1589	
1587	Matrashoes	200/78,7	90/35,4	55/21,5	Grijs	1588	

Materiaal: Polyester microfiber, ULF

Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een droogtrommel om levensduur te optimaliseren.



CE Class 1 medical device

Oorzaak


De belangrijkste oorzaak van decubitus is dat door te weinig beweging de bloedsomloop minder functioneert. Hierdoor worden voedingsstoffen voor de huid minder goed aangevoerd. Vervolgens beschadigt de huid door druk of schuiven. Decubitus kan ook optreden door schuiven als u onderuit zakt in uw bed of stoel, of als u over het matras schuift om uit bed te komen. Decubitus kan ook ontstaan door de constante druk van een prothese, spalk of gips. Zelfs kruimels of plooiën in bed kunnen de huid beschadigen, net als sieraden die u draagt.

Waar op het lichaam?

Decubitus (doorligwonden) kunnen over het hele lichaam ontstaan. Vooral op plekken waar het weefsel tussen huid en botten erg dun is. Iemand die veel en langdurig op zijn rug ligt heeft kans op decubitus op hielen, ellebogen en stuit. Bij mensen die langdurig zitten komt het veel voor op het zitvlak.

Hoe herkent u het?

Het eerste wat u ziet is een rode plek. Druk er voorzichtig op om te controleren of het beginnende decubitus is. Als de huid niet naar wit verkleurt is het een (beginnende) doorligwond. Als de huid wit verkleurt dan gaat het niet om een beginnende doorligwond. Decubitus is verraderlijk omdat het soms onder de huid ontstaat, daardoor ziet u de wonden niet direct.

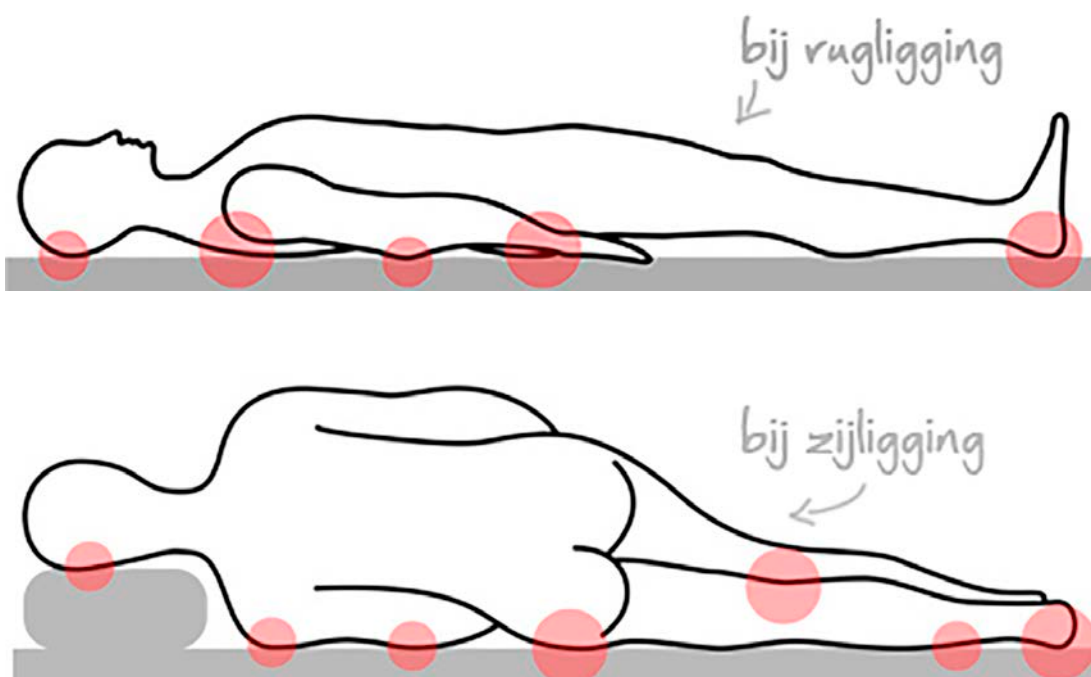

TopSheet met MatrasCover

Het TopSheet maakt het draaien van bedlegerige, passievere, zwaardere zorgvragers makkelijker. Doordat het laken gekoppeld kan worden aan een tillift hoeft de zorggever niet meer te trekken of te duwen. Het systeem is uitermate geschikt voor bedlegerige en incontinentie zorgvragers die u vaak moet draaien, of iemand die zwaarder is dan gemiddeld en die u in een zijdelingse positie helpt met persoonlijke verzorging of wondverzorging. Ook nerveuze of demente mensen in de palliatieve zorg kunnen goed geholpen worden met het TopSheet.



Met TopSheet kunt u bedlegerige zorgvragers makkelijk draaien. U gebruikt dit hulpmiddel in combinatie met een plafondlift of een verrijdbare tillift, waardoor u niet zwaar hoeft te tillen. TopSheet is speciaal gemaakt om doorliggen (decubitus) te voorkomen en is specifiek geschikt voor mensen die incontinent zijn. TopSheet is een gecombineerd draaihulpmiddel en incontinentie bescherming. Het bestaat uit twee delen waarbij het onderste deel zeer gemakkelijk te vervangen is.



1510

TopSheet, 200x160 cm. Met ULF (Ultra Low Friction) materiaal aan onderzijde, kan direct op dekmatrix, Matrashes 1593/1594 of op WendyLett geplaatst worden. Belastbaar tot 300 kg



1515

TopSheet, 155x140 cm. Met ULF (Ultra Low Friction) materiaal aan onderzijde, kan direct op dekmatrix, Matrashes 1593/1594 of op WendyLett geplaatst worden. Belastbaar tot 250 kg



1520

TopSheet, 144x140 cm. Zonder ULF. (Ultra Low Friction) Kan op WendyLett4Way of TurnSheet incl MatrasCover. Belastbaar tot 250 kg

Product overzicht TopSheet

Art. Nr.	Productnaam	Lengte (cm/inch)	Breedte (cm/inch)	Kleur	Overig
1510	TopSheet, 200x160 cm	200/78,7	160/63	Grijs	Kan op dekmatrix, Matrashes 1593/1594 of op WendyLett gebruikt worden  
1515	TopSheet, 155x140 cm	155/61	140/55,1	Grijs	Kan op dekmatrix, Matrashes 1593/1594 of op WendyLett gebruikt worden  
1520	TopSheet, 144x140 cm	144/56,7	140/55,1	Grijs	Kan op WendyLett4Way of TurnSheet incl MatrasCover gebruikt worden 

Accessoires t.b.v. TopSheet

1509	Onderste gedeelte voor TopSheet 1510
1514	Onderste gedeelte voor TopSheet 1515
1519	Onderste gedeelte voor TopSheet 1520

Materiaal: Polyester microfiber, ULF
Wasvoorschriften: Gebruik geen wasverzachter. Niet drogen in een droogtrommel om levensduur te optimaliseren.



CE Class 1 medical device

Incomateriaal

Al ons incontinentiemateriaal is zeer absorberend en neemt lichaamsvocht op. Het oppervlak voelt daardoor altijd droog aan, waardoor ook doorliggen (decubitus) wordt voorkomen. Ons incontinentie materiaal is eenvoudig te combineren met onze glijlakensystemen, maar kan ook los gebruikt worden.



EasyRoll Onderpad

EasyRoll Onderpad (uitwasbaar hoelaken) wordt gebruikt als absorberende bescherming in het bed voor incontinentie gebruikers. De bescherming absorbeert ca. 1-2 liter m2 en heeft een gelamineerde beschermingslaag die voorkomt dat vloeistof doorsijpelt naar ander beddengoed. De hoelaken is sterk en zeer geschikt voor gebruik bij het draaien/herpositioneren van patiënten in bed. Houd bij het verplaatsen/positioneren van gebruikers het absorptiedeel vast, de zijsecties zijn niet geschikt om aan te trekken en opnieuw te positioneren. Bij gebruik i.c.m. een glijlaken is dit een uitstekend hulpmiddel voor incontinentie en herpositionering. Dankzij het hoge absorptievermogen van het hoelaken ervaart de gebruiker een beter gevoel van droogte, aangezien het product zelden de maximale absorptie bereikt.



Product overzicht EasyRoll Onderpad

Art. Nr.	Productnaam	Past op matras (cm/inch)	Lengte (cm/inch)	Breedte (cm/inch)	Glij oppervlak (cm/inch)	Kleur	Functionaliteit	Overig	Beschermingslaag
80011B	EasyRoll Onderpad	80-90/31.5-35.4	80/31.5	180/70.9	-	Wit	Hoelaken met instopstroken	3-pack	Art. Nr. 80011B
80011P	EasyRoll Onderpad	80-90/31.5-35.4	80/31.5	180/70.9	-	Wit	Hoelaken met instopstroken	3-pack	Art. Nr. 80011P
80018	EasyRoll Onderpad	80-120/31.5-47.2	90/35.4	150/59.1	-	Wit	Hoelaken	geen side secties	Art. Nr. 80018
80011PS	EasyRoll Onderpad	90/35.4	70/27.6	190/74.8	-	Wit	Hoelaken		Art. Nr. 80011PS
80019	Majvi Onderpad	90/35.4	120/47.2	180/70.9	-	Wit	Hoelaken met instopstroken	3-pack	Art. Nr. 80019

Materiaal: 80011B: Katoen. 80011P/PL/PS: Polyester bedoppervlak. Polyurethaan vloeistofbarrière.

80019: Katoen/polyester bedoppervlak. Polyurethaan vloeistofbarrière.


Wasvoorschriften: Mag in de droogtrommel op max 70°C. Niet stomen. Gebruik geen bleekmiddel. Gebruik geen wasverzachter.



EasyRoll Matress Protector

EasyRoll Matress Protector beschermt uw matras tegen vocht in het geval van b.v. incontinentie, of van mijten, of fungeren 'slechts' als algemene bescherming voor uw matras.

Het hoelaken heeft aan de onderkant een beschermende laag om te voorkomen dat vocht doorsijpelt, ook werkt dit als een mijtbarrière.

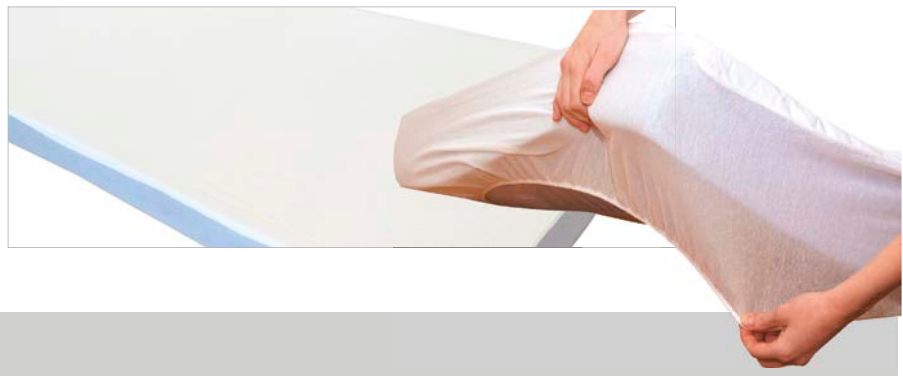

Product overzicht Hoelaken

Art. Nr.	Productnaam	Past op matras (cm/inch)	Lengte (cm/inch)	Breedte (cm/inch)	Glij oppervlak (cm/inch)	Kleur	Functionaliteit	Overig
90.200J01	EasyRoll Matress Protector	90/35.4	200/78.7	90/35.4	-	Wit	Hoelaken	Art. Nr. 90.200J01
105.200J01	EasyRoll Matress Protector	105/41.3	200/78.7	105/41.3	-	Wit	Hoelaken	Art. Nr. 105.200J01
120.200J01	EasyRoll Matress Protector	120/47.2	200/78.7	120/47.2	-	Wit	Hoelaken	Art. Nr. 120.200J01

Materiaal: Katoen bedoppervlak. Polyurethaan vloeistofbarrière.

Wasvoorschriften: Mag in de droogtrommel op max 70°C. Niet stomen. Gebruik geen bleekmiddel. Gebruik geen wasverzachter.



Making everyday life easier

30 jaar in dienst van de eenvoud

Handicare's unieke en eenvoudige transferconcept –voorheen System RoMedic™ – is het meest uitgebreide en complete assortiment van slimme, gemakkelijk te gebruiken en veilige transferhulpmiddelen op de markt. Handicare is er voor alle soorten transfers van zorgvragers en voldoet aan alle eisen om een zorgvrager veilig te transfereren.

De filosofie achter het transferassortiment is gericht op het voorkomen en verminderen van beroeps gerelateerde problemen. Hierdoor worden zorgvragers in staat gesteld om een grotere mate van onafhankelijkheid en zelfredzaamheid te ervaren. Door een unieke combinatie van scholing, training en een compleet assortiment van efficiënte transferhulpmiddelen, biedt Handicare een aanmerkelijke verbetering van zowel werkomstandigheden als zorgkwaliteit. Daarnaast levert het assortiment een beduidende kostenbesparing op.

Ontwikkeld en geproduceerd door Handicare

Al meer dan 30 jaar biedt Handicare eenvoudige oplossingen aan met fantastische resultaten en daardoor een gemakkelijker leven voor zowel zorgvragers als personeel in de zorgsector. Van 1984 tot 2010 onder de naam RoMedic™ en vanaf 1 januari 2011 onder de naam van Handicare.

Handicare biedt oplossingen en ondersteuning om de zelfstandigheid van ouderen en mensen met een beperking te verhogen, evenals het makkelijker maken voor diegenen die voor hen zorgen. Handicare Group is een van de leidende Healthcare bedrijven in de wereld met eigen productie- en verkoopkantoren in Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Canada en de Verenigde Staten. Handicare's producten worden gedistribueerd door partners in meer dan 40 landen in de wereld. Ons brede assortiment met hoogkwalitatieve producten omvat badkameroplossingen, transfer- en tilhulpmiddelen, trapliften en autoaanpassingen.



handicare

Handicare Bathroom Safety B.V.

Weteringweg 9,
2641 KM Pijnacker,
Tel: +31 (0)15 369 54 40
Fax: +31 (0)15 369 71 64
www.handicare.com/nl
info.LS@handicare.com