

EasySlide, disposable

SystemRoMedic™



**Tunn, smidig
och mycket enkel att
använda**

**Perforering ger enkelt
rätt format**

**Allt-i-ett-lösning för
maximal hygien och
säkerhet**

EasySlide på rulle – en ny, otroligt mångsidig glidmatta för korttidsbruk

EasySlide, disposable är en ny, otroligt mångsidig glidmatta som underlättar många vanliga och tunga förflyttningar, både för brukaren och för medhjälparen. Den praktiska och hygieniska förpackningen innehåller en rulle med upp till 60 st EasySlide för korttidsbruk. Det betyder många enkla förflyttningar med maximal hygien och säkerhet.





Enkla förflyttningar på rulle

EasySlide, disposable är en tunn, smidig och mycket lättanvänd glidmatta som används för att underlätta vid vändning och positionering högre upp i säng, vid liggande och sittande överflyttning samt vid positionering i sittande. EasySlide, disposable är ett otroligt mångsidigt hjälpmedel som också kan användas för att lyfta brukarens ben i och ur sängen, för att underlätta av- och påklädning samt för enkel applicering av lyftsele.

En patientbunden glidmatta för korttidsbruk ger maximal hygien och säkerhet

EasySlide, disposable är perfekt för användning på sjukhus och i alla andra situationer och sammanhang som ställer extra höga krav på hygien. EasySlide, disposable är tillverkad av ett starkt, miljövänligt plastmaterial med avancerade glidegenskaper. Den kan användas som ett engångshjälpmedel, men den kan också vara patientbunden och för korttidsbruk. Istället för att tvättas, kasseras glidmattan efter användning, när den blir smutsig eller då brukaren inte behöver den längre. Detta motverkar spridningen av multiresistenta och andra typer av smittsamma bakterier, samtidigt som man slipper såväl krångel med avspritning som växande tvätthögar och problem och kostnader för specialtvätt.

Avancerade glidegenskaper minskar friktionen och underlättar förflyttningar

EasySlide, disposable är en tubformad glidmatta, inte en plastpåse. Utsidan har ingen utpräglad glidfunktion; glidmattan är enkel att placera, men brukaren ska inte behöva halka runt på ett okontrollerat sätt. Insidan av glidmattan har däremot lägre friktion, vilket ger avancerade glidegenskaper som gör det möjligt

för medhjälparen att, med mycket lite kraft och helt utan onödiga lyft, göra enkla och säkra förflyttningar på i stort sett vilket underlag som helst. Det är lätt och bekvämt för brukaren och det skonar medhjälparens rygg och axlar.

Glidmatta på rulle - perforering ger rätt format, varje gång

EasySlide, disposable erbjuder glid och enkla förflyttningar på rulle. Rullarna levereras i två-pack och i varsin praktisk och hygienisk plastförpackning som kan hängas direkt på väggen eller ställas på ett bord eller en hylla. Varje rulle innehåller totalt 60 bitar glidmatta i formatet 50 x 70 cm. En perforering med 50 cm mellanrum gör det enkelt att vid varje enskilt tillfälle anpassa formatet efter behovet i den aktuella situationen. Det är bara att dra ut och riva av önskad storlek. Resten av rullen ligger kvar, hel och ren och skyddad från slitage och smuts, i den behändiga förpackningen.

Mångsidig och mycket enkel att använda

EasySlide, disposable har många användningsområden och är mycket enkel att använda. Användarmanualen är tryckt direkt på varje glidmatta och finns därför alltid nära till hands.

För vändning och positionering i säng, för liggande och sittande överflyttning samt för sittande positionering och applicering av lyftsele



Välj själv formatet efter behov och situation

Det minsta formatet, 50 x 70 cm, passar utmärkt för tunga, relativt aktiva brukare och för positionering och lägesändring av en höft eller skuldra i säng eller på röntgen- och operationsbord. Formatet är också perfekt för sittande överflyttning, till exempel från säng till rullstol, duschstol eller toalett, samt för positionering längre bak i stol.

Med formatet 100 x 70 cm kan man minska friktionen mot både skuldra och höft för att göra enkla och smidiga vändningar och liggande överflyttningar av tyngre och mer passiva brukare, till exempel mellan säng och röntgen- eller operationsbord, duschvagnar, bårar eller liknande. Man kan också använda två stycken 50 cm bitar för att uppnå samma effekt.

Med ett ytterligare större format, som 150 x 70 cm eller 200 x 70 cm, kan man minska friktionen mot alla speciellt känsliga punkter; höft, skuldra, huvud och fötter, vid vändning av ännu tyngre och helt passiva brukare. Man kan också förflytta brukaren genom att dra hela madrassen från en säng till exempelvis ett röntgenbord.

EasySlide, disposable är ett hjälpmedel som gör det lättare för mer aktiva brukare att röra sig på egen hand. Det handlar förstås om ökad livskvalitet, men aktivering av brukare i säng ger också förbättrad cirkulation och mikrorörelser som verkar trycksårshämmande.

Glidmattan är tillverkad av ett material som inte löses upp i vatten och är därför en perfekt lösning även för förflyttningar i dusch- och toalettsituationer.

EasySlide[®], disposable



Glidmatta på rulle; rullarna levereras i 2-pack med upp till 60 tunna, smidiga och lättanvända glidmattor på varje rulle. Rullarna ligger i varsin praktisk och hygienisk förpackning som kan hängas upp på väggen för säker och lättillgänglig förvaring.

EasySlide, disposable kan även levereras tillsammans med en praktisk vägg- och bordshållare i stål.

Art. nr.	Produkt	Material	Beskrivning
2040	EasySlide, disposable	Polyeten (PE) plast	50 cm x 70 cm, 2 x 60 st
2045	EasySlide, disposable	Polyeten (PE) plast	50 cm x 70 cm, 2 x 60 st, inklusive praktisk vägg- och bordshållare i stål



Miljövänligt material


EasySlide, disposable är tillverkad av miljövänlig polyeten (PE) plast; ett slitstarkt och tåligt material som vid förbränning endast avger koldioxid och vatten. Förbrukade glidmattor kan också återvinnas som mjuk plast. Förpackningen kan återvinnas som hård plast.

EasySlide, disposable är en allt-i-ett-lösning;

- Alltid till hands
- Alltid ny, ren och fräsch
- Slitstark och tålig, med avancerade glidegenskaper
- Många olika användningsområden
- Ger stora möjligheter till aktivering av brukaren
- Eliminerar tunga och onödiga lyft vilket skonar medhjälparens rygg och axlar



Perorerad i 50 cm bitar; lätt att dra ut och riva av rätt längd.

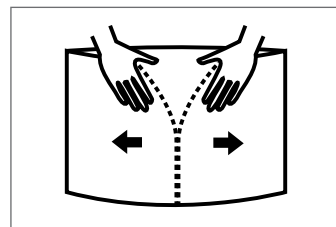

Tubformad. Kan även användas öppen; öppnas med ett enkelt handgrepp.

Fler versioner av EasySlide

EasySlide finns i flera olika versioner och storlekar för olika förflyttningssituationer och brukarbehov. De klassiska versionerna av EasySlide är tillverkade av mikrofiber (polyester i 2010, 2011, 2015) med vaddering av polyester och ULF (Ultra Low Friction), vårt eget unika glidmaterial. De flesta storlekar av dessa versioner kan dessutom förses med ett utbytbart skyddsfordral som är tillverkat av polyester och som är enkelt att rengöra. Engångsskyddsfordral av plast ger ännu bättre hygien och mindre tvätt.

Läs mer om de övriga versionerna av EasySlide på vår hemsida: www.handicare.se



handicare

Handicare AB
Veddestavägen 15,
Box 640, 175 27 Järfälla
Tel: 08-557 62 200
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.se
info@handicare.se

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

Överflyttning, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

Stöd, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.