


Quick guide HC-2



Når VENDLET HC-2 brukes som sengehest

1. Sengoverflaten må være vannrett.
2. Fjern sengehestene av plast og heng dem på mellomstangen.
3. Løs ut den røde stoppknappen.
4. Trykk på den grønne timerknappen. Timer lyset er grønt og VENDLET HC-2 kan brukes i 90 sekunder.
5. Pasienten vendes ved å benytte håndbetjeningen:

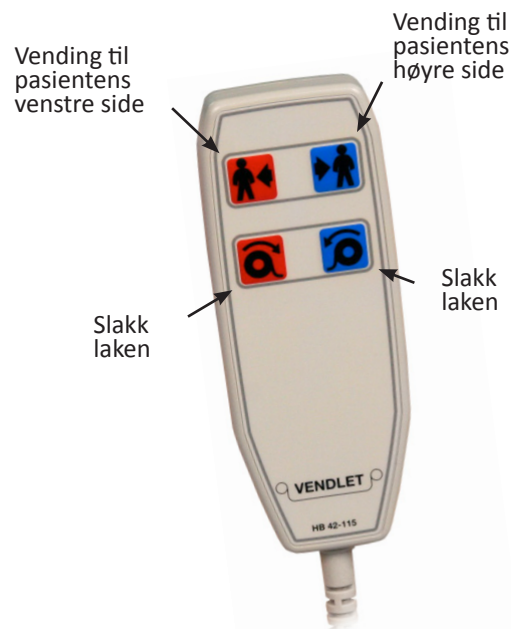

6. Motorrullene kan senkes ved pleie av pasienten i seng. Fjern først sikkerhetslåsene og senk deretter motorrullene.
7. Dersom motorrullene er blitt senket i forbindelse med pleie av pasienten, skal disse heves etter bruk. Sett i sikkerhetslåsene.
8. Monter sengehestene av plast – 2 på hver side. Se veiledning for sengehest.
9. Trykk på den røde stoppknappen.

Under forflytningen holdes fokus på pasienten.

Distributør:

Handicare AS
Telefon 03250
www.handicare.no

VENDLET skal monteres og brukes som beskrevet i manualen.




Quick guide HC-2



Når VENDLET HC-2 **IKKE** brukes som sengehest

1. Sengoverflaten må være vannrett.
2. Hev motorrullene på begge sider.
3. Løs ut den røde stoppknappen.
4. Trykk på den grønne timerknappen. Timer lyset er grønt og VENDLET HC-2 kan brukes i 90 sekunder.
5. Pasienten vendes ved å benytte håndbetjeningen:

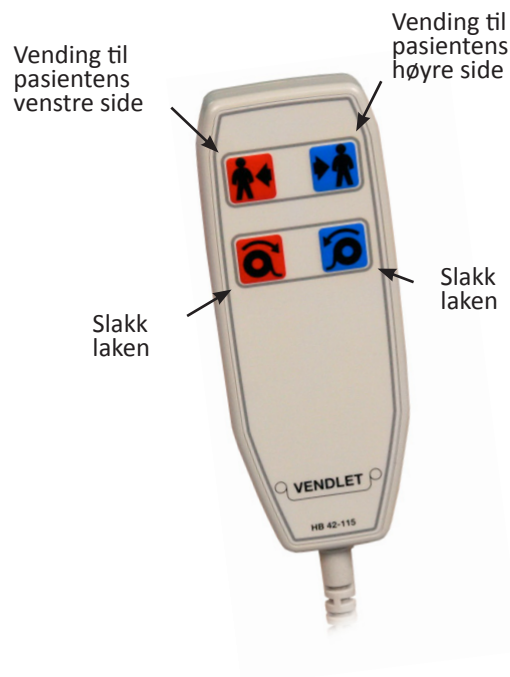

6. Etter vendingen senkes motorrullene på begge sider.
7. Trykk på den røde stoppknappen.

Under forflytningen holdes fokus på pasienten.

VENDLET skal monteres og brukes som beskrevet i manualen.

Distributør:

Handicare AS
Telefon 03250
www.handicare.no